

HARTMANN



HARTMANN Sortimentskatalog

Arztpraxis und
medizinischer Fachhandel

HARTMANN Sortimentskatalog

Arztpraxis und
medizinischer Fachhandel

Stand August 2016

HARTMANN: Gesundheit ist unser Antrieb – seit 1818.



Die Geschichte unserer Gründer.

Die HARTMANN GRUPPE hat ihren Ursprung im Jahr 1818. In diesem Jahr erwarb unser Unternehmensgründer, der Industriepionier Ludwig von Hartmann, die Spinnerei Meebold.

Später legte sein Sohn, Paul Hartmann sen., den Grundstein für die Firma Paul Hartmann, indem er mit den Bereichen Bleiche, Färberei und Appreturanstalt eine Verbandstofffabrik schuf, die die Wundbehandlung grundlegend revolutionierte.

Doch unsere beiden Gründerväter waren weit mehr als Industriepioniere. Denn es waren ihre Leidenschaft, ihr Antrieb, ihr Optimismus und ihr Engagement, die Gesundheitsfürsorge zu verbessern, die bis heute den Geist von HARTMANN prägen.

Es ist genau dieser Geist, der uns antreibt, unermüdlich Innovationen zu entwickeln und so die Gesundheitsfürsorge in den Bereichen Wundmanagement, Desinfektion, Risikoprävention im OP, Inkontinenzmanagement und persönliche Gesundheitsvorsorge immer weiter zu verbessern.



1766-1852
Ludwig von Hartmann



1812-1884
Paul Hartmann Sr.



1827-1912
Sir Joseph Lister



1812-1883
Prof. Victor von Bruns

Ludwig von Hartmann wurde im Jahre 1766 in Stuttgart geboren. 1791 wurde er Direktor der Heidenheimer Textilfabrik Meebold, Schüle & Co. Unter seiner Führung erwarb das Unternehmen zusätzlich eine Bleiche. 1812 eröffnete das Unternehmen eine mechanische Baumwollspinnerei und somit die erste Verbandstofffabrik Deutschlands.

Paul Hartmann Sr. war ein Rebell mit einer Vision. Er ignorierte den Wunsch des Vaters, wonach die Geschäftsbereiche nicht getrennt werden sollten. Stattdessen nutzte er sein Wissen und seine Erfahrung, um sein eigenes Unternehmen zu gründen: die Paul Hartmann Bleiche, Färbereigeschäft und Appreturanstalt. Mit zwei engagierten medizinischen Partnern, **Sir Joseph Lister** und **Victor von Bruns**, baute er eine Verbandstofffabrik auf, die das Wundmanagement für alle Zeiten verändern sollte.



Das erste Firmenlogo

Als erstes Firmenlogo wählte Paul Hartmann eine Überarbeitung des Rotkreuz-Symbols, welches so angepasst wurde, dass es den Äskulapstab enthielt. Dieses Logo wurde 1883 als Schutzmarke registriert.



Unsere Vision? Das Gesundheitswesen verbessern. Weltweit.

Wir glauben daran, dass unsere drei zentralen Werte die Gesundheit zu unserem Antrieb werden lassen:

Leidenschaft, Partnerschaft und Professionalität.

Unsere Leidenschaft? Den Menschen helfen.

Es ist unser Ziel, die Ideen und Vision unseres Gründers Paul Hartmann stetig weiter zu entwickeln. Auf dieser Basis entwickeln wir Ideen und schaffen immer wieder innovative Lösungen. Dabei steht die Leidenschaft für die Gesundheit der Menschen für uns und unsere Partner an erster Stelle. Und dafür ist uns kein Weg zu weit, kein Ziel zu hoch.

Wie wir sind? Offen, anspruchsvoll und dynamisch.

Partnerschaft – unser Know-how macht uns zum vertrauenswürdigen Partner.

Nur wer seine Zielgruppe genau kennt, versteht auch ihre Bedürfnisse. Wir sehen uns deshalb als offener, hilfsbereiter und beständiger Partner in allen Bereichen der Gesundheitsvorsorge. Mit unseren Erkenntnissen und unserem Fachwissen halten wir effektive und wirtschaftliche Lösungen bereit, welche die Gesundheit der Menschen positiv beeinflussen.

Unser Leitprinzip? Persönlich, zuverlässig und beständig.

Professionalität – wie wir Menschen helfen? Aktiv und unmittelbar.

Wir denken und handeln in pragmatischer, vorausschauender und ganzheitlicher Weise. Unsere Ideen und Lösungen passen wir kontinuierlich den Herausforderungen und Anforderungen von morgen an. So unterstützt HARTMANN stets die erfolgreiche Umsetzung von Ideen und Lösungen, die die Qualität des täglichen Lebens nachhaltig verbessern.

Wie wir arbeiten? Strukturiert, ergebnisorientiert und geradlinig.

Wundmanagement

Hydroaktive Wundauflagen	
HydroClean® plus	14
HydroTac®	15
Hydrocoll®	16
Sorbalgon®	17
Hydrosorb®	18
Hydrosorb® Gel	19

Spezial-Wundauflagen	
PermaFoam®	20
Syspur-derm®	21

Wundkontaktschicht	
Atrauman® Silicone	22
Atrauman® Ag	23
Atrauman®	23
Hydrotüll®	24
Grassolind®	25
Branolind®	26

Saugkompressen	
Zetuvit® Plus	27
Zetuvit®	28

Post-OP-Verbände	
Cosmopor® Advance	29
Cosmopor® Antibacterial	30
Cosmopor® Steril	31
Cosmopor® Strip	32
DermaPlast® Wundpflaster	33
Cosmopor® Waterproof	34
Hydrofilm® Plus	35
Hydrofilm®	36

Mull / Vlies	
ES-Kompressen	37
Medicomp®	38
Medicomp® drain	39
Peha® Schlitzkompressen	39
Eycopad®	40
Fil-Zellin®	41
HARTMANN Verbandmull ZZ	41
Mullro®	42

Klebende Fixierung	
Omnifix® elastic	43
Hydrofilm® roll	44
Hydrofilm® I.V.	45
Cosmopor® I.V.	46
Omnistrip®	47
Omni Spulenpflaster	48
Omni tape®	49

Nicht klebende Fixierung	
Peha-haft® latexfrei	50
Peha-haft® Color latexfrei	51
Peha-crepp®	52
Peha®-Mullbinden	53
Peha-last®	54
Peha®-Lastotel®	55
Stülpa®	56
Stülpa®-fix	57
Lastogrip®	58
Coverflex®	59
Verba®	60

Tupfer	
Pur-Zellin®	61
Soft-Zellin®	61
Pagasling®	62
Pagalong®	63
Telaprep®	64

Tamponaden	
HARTMANN Tamponadebinden	65
Tampograss®	65
Samu-med®	66
Celluron®	67

Watte	
HARTMANN Verbandwatte	68
HARTMANN Watte	68

Zellstoff	
Pehazell®	69

Kompressionsbinden	
PütterPro 2	70
Pütter-Verband®	71
PütterFlex	72
Pütter-haft	73
Lastodur®	74

Universalbinden	
Idealast®-haft	75
Idealast®-haft Color	76
HARTMANN Idealbinden	77
Idealast®	78
Idealflex®	79

Zinkleimbinden	
Varolast®	80
Varolast® Plus	81

Polsterbinden	
Rolta® soft	82

Zubehör	
HARTMANN Verbandklammern	83

Erste Hilfe und Diagnostik

Selbstmedikation	
DermaPlast® MEDICAL	90

Wundpflaster	
DermaPlast® Wundpflaster Hydro	92
DermaPlast® Wundpflaster	94
DermaPlast® ProtectSpray®	95

Erste-Hilfe-Sets	
DermaPlast® Erste-Hilfe-Sets	96

Selbsttests	
Veroval® Gluten-intoleranz	97
Veroval® Allergie-Erkennung	98
Veroval® Harnwegsentzündung	99
Veroval® Eisenmangel	100
Veroval® Schwangerschaft	101
Veroval® Zeugungsfähigkeit	102
Veroval® Cholesterin	103
Veroval® Magen-Vorsorge	104
Veroval® Darm-Vorsorge	105

Blutdruckmessgeräte	
Tensoval® duo control	106
Tensoval® duo control Zubehör	107
Tensoval® comfort	108
Tensoval® comfort Zubehör	109
Tensoval® Netzadapter	110
Tensoval® comfort classic	111
Tensoval® mobil	112
Tensoval® mobil classic	112

Fieberthermometer	
Thermoval® baby	113
Thermoval® duo scan	114
Thermoval® kids flex	115
Thermoval® kids	115
Thermoval® rapid	116
Thermoval® standard	117

Inkontinenzmanagement Patientenpflege

Inkontinenzeinlagen	
MoliMed® Premium	122
MoliMed® Comfort	123
MoliMed® SPORTIVE	124
MoliMed® Thin	125
MoliMed® for men	126
MoliNea® plus D Saugkissen	127
MoliNea® pads	127

Inkontinenzvorlagen	
MoliForm® Premium soft	128
MoliForm® Comfort	129
MoliForm® Premium soft for men	130

Fixierhöschen	
MoliPants®	131

Inkontinenz-Slips	
MoliCare Premium Elastic	132
MoliCare Premium Slip	134
MoliCare Slip	136
MoliCare Slip maxi	137

Inkontinenz Pull Ups	
MoliMed® Premium pants active	138
MoliMed® Premium pants for men	139
MoliCare Mobile®	140

Inkontinenzunterlagen	
MoliNea® Flocken-Krankenunterlagen	141
MoliNea® Lagen-Krankenunterlagen	142
Molinea® textile	143

Patienten- und Personalhygiene	
Vala®Clean	144
Vala®Fit	145
Vala®Comfort	146
Vala®Protect	147
Peha-fresh	148
SicSac®	148

Untersuchungshandschuhe	
Peha-soft® powderfree	149
Peha-soft® nitrile guard powderfree	150
Peha-soft® nitrile sterile powderfree	151
Peha-soft® nitrile fino powderfree	152
Peha-soft® nitrile white powderfree	153
Peha-soft® nitrile powderfree	154
Peha-soft® syntex powderfree	155
Peha-soft® vinyl powderfree	156
Peha-fol®	157
Peha-tex®	158

Pflegesets	
MediSet® PEG/SBK	159
Peha® Katheter-Sets	160
Peha® Fadenzieh-Set	161

Zubehör Behandlungspflege	
Pagavit®	162
HARTMANN Holzmundspatel	162
Wattestäbchen	163
Peha® Abwurfbeutel	164
Peha® Fadenmesser	165

Medizinische Hautpflege	
Menalind® professional clean	166
Menalind® professional care	168
Menalind® professional protect	170

OP-Bedarf

OP-Abdeckungen	
Foliodrape® Protect Abdecktücher	176
Foliodrape® Protect Lochtücher	177

OP-Bekleidung	
Foliodress® S	178
Foliodress® Cap Comfort Universal	179
Foliodress® Mask Comfort	180
Foliodress® Eye Protect	181

OP-Handschuhe	
Peha®-micron latex	182
Peha®-profile latex	183
Peha-taft® latex	184
Peha®-underglove latex	185
Peha®-isoprene latexfree	186
Peha®-neon latexfree	187
Peha®-underglove latexfree	188

Desinfektion und Hygiene

Hände	
Sterillium®	194
Sterillium® classic pure	195
Sterillium® med	196
Sterillium® Virugard	197
Sterillium® Tissue	198
Baktolan® protect	199
Baktolan® protect® pure	200
Baktolan® lotion	201
Baktolan® lotion pure	202
Baktolan® balm	203
Baktolan® balm pure	204
Baktolin® sensitive	205
Baktolin® pure	206

Haut	
Cutasept® F	207
Cutasept® G	208
Stellisept® med	209
Stellisept® med foam	210
Stellisept® med gloves	211
Cutasept® feet	212
Baktolan® vital	213

Fläche	
Bacillo® AF	214
Bacillo® 30 Foam	215
Bacillo® Tissues	216
Bacillo® Wipes	217
Bacillo® AF Tissues	218
Bacillo® 30 Tissues	219
Mikrobac® Tissues	220
Kohrsolin® FF Tissues	221
Kohrsolin® extra Tissues	222
Dismozon® plus	223
Mikrobac® forte	224
Kohrsolin® FF	225
Kohrsolin® extra	226
BODE X-Wipes	227
BODE X-Wipes Safety Pack	228
Dismofix® G	229

Instrumente	
Bodedex® forte	230
Bodedex® zyme	231
Bomix® plus	232
Korsolex® plus	233
Korsolex® med AF	234
Korsolex® extra	235
Korsolex® basic	236
Korsolex® FF	237
Korsolex® Endo-Cleaner	238
Korsolex® Endo-Disinfectant	239

Geräte und Zubehör	
BODE Eurospender 2000	240
BODE Eurospender 3000	241
BODE Eurospender Vario	242
BODE Eurospender 1 plus	243
BODE X-Wipes Wandhalter	244
Dosier- und Applikationshilfen	245
Desinfektionswannen	246
BODE Dip Slides Combi	247

Was wäre, wenn weniger Verbandmittel für eine schnellere Wundheilung sorgen würden?

Bei HARTMANN fühlen wir uns verpflichtet, das Wissen, das wir in den vergangenen über 190 Jahren erworben haben, für Innovationen und bessere Ergebnisse in den Bereichen Wundmanagement, Wundheilung und Kompressionstherapie einzusetzen. Aus lediglich „abdeckenden und aufsaugenden“ Wundauflagen haben wir ein Therapiekonzept mit zwei wirksamen Präparaten entwickelt, das aktiv und ganzheitlich die Wundheilung von der Wundreinigung bis zum Wundverschluss fördert. Dabei war es unser Anspruch, Wundbehandlung für Beschäftigte im Gesundheitswesen, Gesundheitsökonomien und Patienten hoch wirksam und trotzdem einfach und wirtschaftlich zu gestalten.



HydroTherapy – Das Therapiekonzept für die Wundbehandlung in der Arztpraxis.

Durch den Einsatz von nur zwei Präparaten HydroClean® plus und HydroTac® lässt sich mit der HydroTherapy eine Vielzahl von Wunden wirksam und einfach behandeln.

Die Therapie startet unter Anwendung von HydroClean® plus in der Reinigungsphase und wird ab Mitte der Granulation bis zur vollständigen Epithelisierung mit HydroTac® fortgesetzt.

Der patentierte Saug-Spül-Mechanismus von HydroClean® plus und die innovative AquaClear Technologie von HydroTac® sorgen für ein perfektes Zusammenspiel in der HydroTherapy.

HydroClean® plus
Schritt 1: **Wundreinigung**




HydroTac®
Schritt 2: **Wundheilung**



*Was wäre, wenn...
wir einen Großteil der
Wunden mit nur zwei
Präparaten behandeln
könnten?*



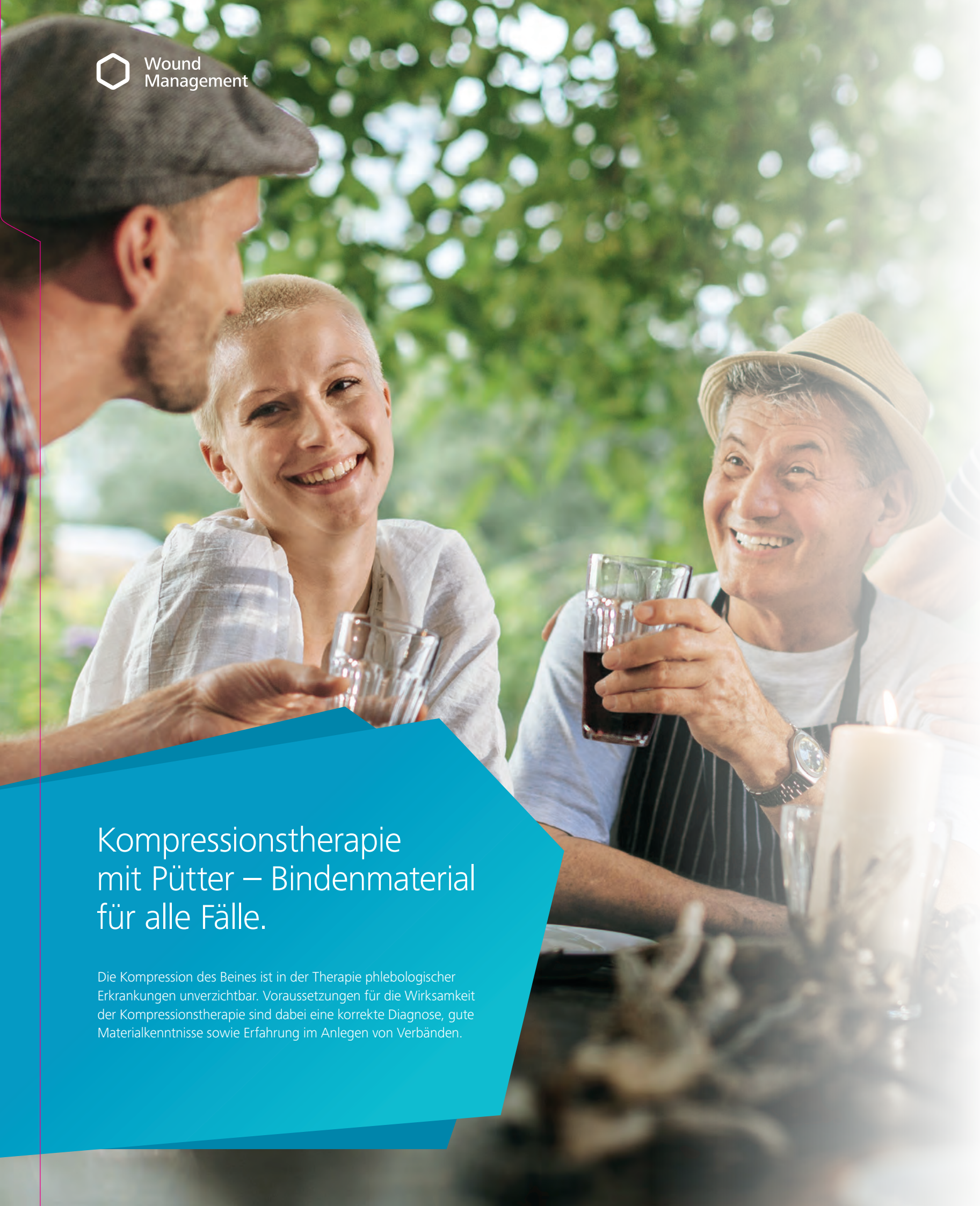

Kompressionstherapie mit Pütter – Bindenmaterial für alle Fälle.

Die Kompression des Beines ist in der Therapie phlebologischer Erkrankungen unverzichtbar. Voraussetzungen für die Wirksamkeit der Kompressionstherapie sind dabei eine korrekte Diagnose, gute Materialkenntnisse sowie Erfahrung im Anlegen von Verbänden.

Pütter für eine effektive Kompression – die gesamte Pütter-Familie.

Legen Sie Pütter für eine starke Kompression an.

Pütterbinden sind der etablierte Standard der Kompressionstherapie und stehen für eine sehr starke Kompression bei wirtschaftlichem Einsatz. Das kräftige Gewebe erreicht mit seiner Komvpression auch die tiefen, subfaszialen Venenbereiche und ist dank guter Hautverträglichkeit auch für Patienten mit sensibler Haut geeignet.



PütterFlex für mehr Bewegung.

PütterFlex ist die Binde, die sich anatomisch optimal an das Bein anpasst und für mehr Beweglichkeit im Fußgelenk sorgt. Das dünne, bi-elastische Material lässt sich nicht nur einfacher anlegen, sondern erleichtert auch das Tragen von Schuhen. PütterFlex steht für mehr Akzeptanz und mehr Mobilität bei gleichbleibend starker Kompression und Wirksamkeit.



PütterPro 2 – das effiziente und einfache 2-Komponenten-Kompressionssystem.

PütterPro 2 ist ein kurzzügiges 2-Komponenten-Kompressionssystem, das die Kompressionstherapie ganz einfach macht. PütterPro 2 besteht aus einer einseitig kohäsiven und kurzzügigen Polster- sowie einer beidseitig kohäsiven und langzügigen Kompressionsbinde, die jeweils ohne Schere von Hand abzureißen sind. In nur wenigen Schritten bilden beide Binden übereinander angelegt einen angenehmen und gut sitzenden Kompressionsverband, der bis zu 7 Tage hält.



HydroClean® plus



Das Wundkissen mit der Saug-Spül-Wirkung für wirksame Wundreinigung

Charakteristik

Superabsorbierendes, mit Ringerlösung aktiviertes Wundkissen, das bis zu 72 Stunden ein feuchtes Wundmilieu schafft, Nekrosen und Beläge löst, im Austausch Wundexsudat aufnimmt und so die Wundreinigung beschleunigt; das im SAP-Kern gebundene antiseptische PHMB wirkt antibakteriell und hemmt das Keimwachstum im Inneren des Wundkissens; der SAP-Kern reguliert die Metalloproteasen-Aktivität und fördert so die Heilung von chronischen Wunden mit stagnierendem Heilungsprozess, der Aufbau von Granulationsgewebe wird gefördert; die hydrophobe Hülle wirkt Verkleben entgegen; ohne Wundirritation zu entfernen; zum Austamponieren tiefer Wunden stehen die cavity-Aufmachungen zur Verfügung.

Anwendung

Zur interaktiven Nasstherapie insbesondere zur Wundreinigung und Unterstützung der Wundkonditionierung sowie zum Gewebeaufbau, z. B. bei chronischen Wunden unterschiedlichster Genese, wie diabetische Gangrän, Dekubitalulkus oder Ulcus cruris oder bei schlecht heilenden Wunden mit starker Exsudation, bei klinisch manifest infizierten Wunden; auch unter Kompression anwendbar; speziell zum Austampornieren tiefer Wunden sind die cavity-Aufmachungen indiziert.

HydroClean® plus

Für eine Nasstherapie bis zu 72 Stunden; aufgetragene Silikonstreifen minimieren zusätzlich das Verkleben mit der Wunde und eine farblich markierte Deckschicht verhindert ein vorzeitiges Austrocknen der Kompresse sowie ein Durchnässen des Verbandes.

HydroClean® plus cavity

Für eine Nasstherapie bis zu 72 Stunden; da die spezielle Konstruktion der Kompresse rundum den Austausch ermöglicht, eignet sie sich insbesondere zum Tamponieren tiefer Wunden.



Handelsformen	Artikel-Nr.	PZN	Packungs-inhalt	VE Pack.*
HydroClean® plus, steril, einzeln eingeseigelt	Ø 4 cm	609 590	00127522	10 Stück
	Ø 5,5 cm	609 591	00127539	10 Stück
	7,5x7,5 cm	609 593	00127545	10 Stück
	10x10 cm	609 594	00127551	10 Stück
HydroClean® plus cavity, steril, einzeln eingeseigelt	Ø 4 cm	609 550	00127568	10 Stück
	7,5x7,5 cm	609 553	00127574	10 Stück

* Versand-Einheiten in Packungen

HydroTherapy
In zwei Schritten.



HydroClean® plus
Von der Reinigungsphase.....bis zur Epithelisierung

HydroTac®

Der hydroaktive Schaumstoffverband, mit AquaClear Technologie für beschleunigte Wundheilung



Charakteristik

Schaumstoffverband mit wundseitig netzförmiger Hydrogel-Schicht und wasserdampfdurchlässiger, flüssigkeits- und keimdichter Polyurethan-Deckfolie; der saugfähige Schaumstoff nimmt überschüssiges Wundexsudat schnell auf, ohne die Wunde auszutrocknen; bei relativ trockenen Wunden gibt das Hydrogel Feuchtigkeit ab und unterstützt die Bildung und Aufrechterhaltung eines optimalen Wundmilieus. Die AquaClear Technologie reichert Wachstumsfaktoren an der Geloberfläche an und beschleunigt so den epithelialen Wundverschluss. Die Wundauflage ist weich und geschmeidig, verfügt über eine gute

Polsterwirkung und kann schmerzarm entfernt werden; in verschiedenen Ausführungen und Zuschnitten erhältlich.

Anwendung

Zur Wundbehandlung von gering bis mäßig exsudierenden Wunden ab Mitte der Granulationsphase bis hin zum kompletten Wundverschluss, z. B. bei Ulcus cruris, diabetischem Fußsyndrom und Dekubitus; zur Versorgung von Verbrennungen bis Grad 2a sowie zur Behandlung von Spalthautentnahmestellen nach vorausgegangener adäquater Blutstillung; auch unter Kompression anwendbar.

Handelsformen	Artikel-Nr.	PZN	Packungs-inhalt	VE Pack.*
HydroTac®, steril, einzeln eingeseigelt	Ø 6 cm	685 849	03451128	10 Stück
	10x10 cm	685 832	03451312	10 Stück
	10x20 cm	685 841	11584961	10 Stück
	20x20 cm	685 842	11584978	10 Stück
HydroTac® comfort, steril, einzeln eingeseigelt	8x8 cm (IM 3,5x3,5 cm)	685 810	03452636	10 Stück
	12,5x12,5 cm (IM 7,5x7,5 cm)	685 815	03452688	10 Stück
	15x20 cm (IM 9x14 cm)	685 821	11691786	10 Stück
	20x20 cm (IM 14x14 cm)	685 812	11584984	10 Stück
	HydroTac® sacral, steril, einzeln eingeseigelt	18x18 cm (IM 13x10,6 cm)	685 827	11691800
HydroTac® concave, steril, einzeln eingeseigelt	18x18,5 cm	685 825	11691823	10 Stück

IM = Innenmaß
* Versand-Einheiten in Packungen

HydroTac®

Der leichte Selbsthafteffekt erleichtert die Handhabung durch eine Vorfixierung auf der Haut, für eine dauerhafte Fixierung sollten geeignete Produkte verwendet werden, wie z. B. hypoallergene Fixierpflaster oder -binden.

HydroTac® comfort

Zur sicheren, keimdichten Fixierung ist HydroTac comfort mit einem umlaufenden, hypoallergenen Kleberand ausgestattet.

HydroTac® sacral

Der spezifische Zuschnitt eignet sich zur Behandlung im Sakralbereich, mit umlaufender, hypoallergener Klebefolie für sicheren Halt.

HydroTac® concave

Zur Behandlung an Ferse, Knie und Ellenbogen.



HydroTherapy
In zwei Schritten.

Hydrocoll®



Der schnell saugende Hydrokolloid-Verband für die feuchte Wundbehandlung

Charakteristik

Saugender, selbsthaftender Hydrokolloid-Verband mit semipermeabler, keimdichter Deckschicht; bewirkt durch Gelumwandlung der hydrokolloiden Verbandanteile ein feuchtes Wundmilieu, wobei das Gel so lange saugfähig ist, bis die Hydrokolloide gesättigt sind; fördert Granulation und Epithelisierung; ohne Wundirritation zu entfernen; in verschiedenen Ausführungen und Zuschnitten erhältlich.

Anwendung

Zur feuchten Wundbehandlung klinisch nicht infizierter, schwach bis mittelstark exsudierender Wunden, insbesondere bei Wunden mit schlechter Heilungstendenz und langwierigem Granulationsaufbau, z. B. bei Ulcus cruris oder Dekubitus; bei Verbrennungen 2. Grades; Hydrocoll sacral wird bei Dekubitalulzerationen im Sakralbereich, Hydrocoll concave an Ferse oder Ellenbogen eingesetzt.



Handelsformen	Artikel-Nr.	PZN	Packungs-inhalt	VE Pack.*
Hydrocoll® steril, einzeln eingeseigelt	5x5 cm	900 740	01690633	10 Stück
	7,5x7,5 cm	900 742	01690656	10 Stück
	10x10 cm	900 746	04419865	10 Stück
	15x15 cm	900 748	04419871	5 Stück
	20x20 cm	900 749	07547658	5 Stück
Hydrocoll® concave, steril, einzeln eingeseigelt	8x12 cm	900 756	01690745	10 Stück
Hydrocoll® sacral, steril, einzeln eingeseigelt	12x18 cm	900 755	07547664	5 Stück
Hydrocoll® thin, steril, einzeln eingeseigelt	7,5x7,5 cm	900 757	01690751	10 Stück
	10x10 cm	900 758	07547670	10 Stück
	15x15 cm	900 760	07547687	5 Stück

* Versand-Einheiten in Packungen

Hydrocoll®

In fünf verschiedenen Größen für einen bedarfsgerechten Einsatz.



Hydrocoll® concave

Zur Behandlung an Ferse und Ellenbogen; der spezielle Zuschnitt lässt sich mit wenigen Handgriffen in eine Tasche formen und kann so körpergerecht anmodelliert werden.



Hydrocoll® sacral

Der spezifische Zuschnitt wird zur Behandlung von Dekubitalulzerationen im Sakralbereich eingesetzt.



Hydrocoll® thin

Der dünnere Hydrokolloid-Verband mit geringerer Saugkapazität findet bevorzugt in der Epithelisierungsphase Anwendung.



Sorbalgon®

Die Calciumalginat-Kompresse mit ausgezeichneter Tamponierbarkeit

Charakteristik

Tamponierbare, wirkstofffreie Kompressen und Tamponadestreifen aus Calciumalginat-Fasern, die sich im Austausch mit den Natriumsalzen von Blut und Exsudat in ein hydrophiles, nicht verklebendes Gel umwandeln und die Wunde ausfüllen; dadurch ergeben sich ein enger Wundkontakt und ein für die Heilung günstiges Mikroklima; Keime werden während der Umwandlung in der Gelstruktur eingeschlossen.



Anwendung

Grundsätzlich zur Versorgung aller äußerlichen Wunden, insbesondere aber bei blutenden und exsudierenden Wunden, weil hier die Gelbildung wundheilungsfördernd zum Tragen kommt, so z. B. bei Ulcus cruris venosum, Dekubitus, Abszessen, Furunkeln, Verbrennungen sowie bei schwierig zu versorgenden Wunden in der Unfall- und Tumorchirurgie; für tiefe Wunden und Fistelgänge steht Sorbalgon T zur Verfügung.



Sorbalgon®

Kompressen in drei verschiedenen Größen für einen bedarfsgerechten und wirtschaftlichen Einsatz.



Sorbalgon® T


Tamponadestreifen, 30 cm lang, speziell für englumige Fistelgänge und Stichkanäle.



Handelsformen	Artikel-Nr.	PZN	Packungs-inhalt	VE Pack.*
Sorbalgon®, steril, einzeln eingeseigelt	5x5 cm	999 598	03318955	10 Stück
	10x10 cm	999 595	03318949	10 Stück
	10x20 cm	999 589	00884915	5 Stück
Sorbalgon® T, Tamponadestreifen, steril, einzeln eingeseigelt	1 g / 30 cm	999 590	00884909	3 Stück
	2 g / 30 cm	999 592	07355574	5 Stück

* Versand-Einheiten in Packungen

Hydrosorb®

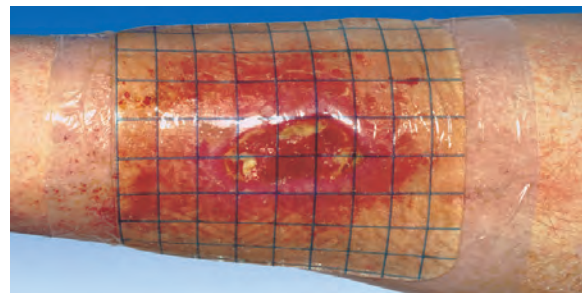

Der transparente, hydrozelluläre Gel-Verband für die feuchte Wundbehandlung

Charakteristik


Saugfähiger, hydrozellulärer Gel-Verband mit semi-permeabler, keimdichter Deckschicht; transparent; sorgt durch hohen Wasseranteil von ca. 60 % sofort für ein ausgewogen feuchtes Wundmilieu; fördert Granulation und Epithelisierung; hervorragende Biokompatibilität; gute Polsterwirkung; ohne Wundirritation zu entfernen; auch mit Fixierband erhältlich.

Anwendung

Zur feuchten Wundbehandlung, insbesondere zur Versorgung klinisch nicht infizierter Wunden in der Granulations- und Epithelisierungsphase, bei Ulcus cruris oder Dekubitus; zur Versorgung von Verbrennungen bis Grad 2a sowie zur Förderung der Reepithelisierung von Spalthautentnahmestellen nach vorausgegangener adäquater Blutstillung; durch die beschreibbare Abziehfolie lässt sich hervorragend die Wundgröße dokumentieren.

Hydrosorb®

Der Gel-Verband verfügt über einen gewissen Selbsthafteffekt, für eine dauerhafte Fixierung empfiehlt sich jedoch zusätzlich eine Befestigung mit hypoallergenen Fixierpflastern oder Fixierbinden.

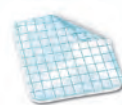

Hydrosorb® comfort

Zur sicheren, keimdichten Fixierung ist Hydrosorb comfort mit einem umlaufenden, hypoallergenen Kleberand ausgestattet.



Handelsformen	Artikel-Nr.	PZN	Packungs-inhalt	VE Pack.*	
Hydrosorb®, steril, einzeln eingeschiegelt	5x7,5 cm	900 853	04426629	5 Stück	6
	10x10 cm	900 854	04426635	5 Stück	6
	20x20 cm	900 855	04426641	3 Stück	5
Hydrosorb® comfort, steril, einzeln eingeschiegelt	4,5x6,5 cm (IM 2,5x3,8 cm)	900 702	00256509	5 Stück	12
	7,5x10 cm (IM 4x6,8 cm)	900 706	07721197	5 Stück	6
	12,5x12,5 cm (IM 8x8 cm)	900 723	07721205	5 Stück	6

IM = Innenmaß

* Versand-Einheiten in Packungen

Hydrosorb® Gel

Das klare, viskose Gel aus der Spritze für die feuchte Wundbehandlung

Charakteristik

Klares und viskoses Gel mit elektrololytischer Zusammensetzung, das sofort für ein ausgewogen feuchtes Wundmilieu sorgt; weicht trockenes, nekrotisches Gewebe auf und erleichtert das Ablösen, nimmt Beläge und Wundexsudat von gering exsudierenden Wunden auf; ohne Wundirritation mit steriler Spüllösung aus der Wunde zu entfernen; in Spritzen mit gegenläufiger Skala zur exakten Bestimmung und Dokumentation des Wundvolumens und der Menge des noch verfügbaren Gels; einzeln in Schutzhülle eingeschiegelt.



Anwendung

Zur feuchten Wundbehandlung bei oberflächlichen und tiefen Wunden mit geringer Exsudation, z. B. bei Ulzera, Dekubitalgeschwüren sowie Verbrennungen bis Grad 2b; unterstützt durch Aufweichung und Hydrierung von Nekrosen das endogene Débridement und die Beseitigung nekrotischen und avitalen Gewebes; das Gel 5 mm dick auf die Wunde aufbringen und mit geeignetem Sekundärverband abdecken.

Handelsformen	Artikel-Nr.	PZN	Packungs-inhalt	VE Pack.*	
Hydrosorb® Gel, steril, Spritzen	8 g	900 843	04084784	5 Spritzen	10
einzeln in Schutzhülle	15 g	900 844	03694836	10 Spritzen	10

* Versand-Einheiten in Packungen

PermaFoam®



PermaFoam®

In verschiedenen Größen für einen bedarfsgerechten Einsatz.



PermaFoam® comfort

Zur sicheren, keimdichten Fixierung ist PermaFoam comfort mit einem umlaufenden, hypoallergenen Kleberand ausgestattet.



PermaFoam® sacral

Der spezifische Zuschnitt eignet sich zur Behandlung im Sakralbereich; mit umlaufendem, hypoallergenen Kleberand für sicheren Halt.



PermaFoam® concave

Zur Behandlung an Ferse, Knie und Ellenbogen; der spezielle Zuschnitt mit umlaufendem, hypoallergenen Kleberand lässt sich problemlos anlegen und haftet sicher.



PermaFoam® cavity

Zur Behandlung von tiefen Wunden; das dünne, weiche Material mit spezieller Lochstruktur erlaubt vielfältige Faltungsmöglichkeiten zur individuellen Anpassung an die Wunde und gewährleistet einen guten Sekretabfluss.



PermaFoam® tracheostomy

Zur Versorgung von Eintrittsstellen wie Tracheostomiekannülen und Sondenapplikationen; mit Y-Schnitt.



Der hydrophile Schaumstoffverband mit besonderer Porenstruktur

Charakteristik

Schaumstoffverband mit wasserdampfdurchlässiger Polyurethan-Deckschicht; die hydrophile, grobporige Schaumstoffstruktur sorgt durch eine verstärkte Kapillarwirkung für einen schnellen Transport von Wundexsudat und gewährleistet ein ausgeglichenes feuchtes Wundmilieu, Keime und Zelltrümmer werden sicher eingeschlossen und bleiben auch unter Kompression gebunden; weich und geschmeidig, mit guter Polsterwirkung; in verschiedenen Ausführungen und Zuschnitten erhältlich.

Anwendung

Zur Behandlung klinisch nicht infizierter, stark bis mäßig exsudierender Wunden in der Reinigungs- und Granulationsphase; insbesondere bei chronischen Problemwunden wie z. B. Ulcus cruris oder Dekubitus; besonders geeignet zur Behandlung venöser Ulzera in Kombination mit einer Kompressionsbehandlung; zur Versorgung von Verbrennungen bis Grad 2a; für tiefere Wunden oder schwierig zu versorgende Problemzonen werden die jeweils spezifischen Zuschnitte eingesetzt.



Handelsformen	Artikel-Nr.	PZN	Packungs-inhalt	VE Pack.*	
PermaFoam®, steril, einzeln eingeseigelt	Ø 6 cm	409 427	03446216	10 Stück	6
	10x10 cm	409 401	04094328	10 Stück	6
	10x20 cm	409 403	04094357	5 Stück	6
	15x15 cm	409 405	04094334	5 Stück	6
	20x20 cm	409 406	04094363	3 Stück	6
PermaFoam® comfort, steril, einzeln eingeseigelt	8x8 cm (IM 3,5x3,5 cm)	409 428	03446222	10 Stück	6
	11x11 cm (IM 6x6 cm)	409 408	04094392	10 Stück	6
	10x20 cm (IM 5x14 cm)	409 410	04094423	5 Stück	6
	15x15 cm (IM 10x10 cm)	409 412	04094400	5 Stück	6
	20x20 cm (IM 14x14 cm)	409 413	04094446	3 Stück	6
PermaFoam® sacral, steril, einzeln eingeseigelt	18x18 cm (IM 11x9,5 cm)	409 422	03446038	3 Stück	6
	22x22 cm (IM 14,5x12,5 cm)	409 423	03446044	3 Stück	6
PermaFoam® concave, steril, einzeln eingeseigelt	16,5x18 cm (IM 10,5x12 cm)	409 424	03446050	3 Stück	6
PermaFoam® cavity, steril, einzeln eingeseigelt	10x10 cm	409 425	03446067	3 Stück	12
PermaFoam® tracheostomy, steril, einzeln eingeseigelt	8x8 cm	409 426	03446104	10 Stück	6

IM = Innenmaß

* Versand-Einheiten in Packungen

Syspur-derm®

Die Weichschaumkompressen zur Wundkonditionierung

Charakteristik

Therapeutisch wirksame Weichschaumkompressen aus zweischichtigem Polyurethan-Schaumstoff; die offenporige, auf der Wundfläche haftende Unterseite dient als Matrix für die Gewebsneubildung – durch Einsprossen der Zellen wird die Granulation angeregt und gefördert; die verdichtete, feinporige Deckschicht wirkt als Barriere gegen Sekundärinfektionen.



Anwendung


Zur Konditionierung von Wunden und Ulzerationen, insbesondere bei stagnierender Granulation; zur temporären Deckung großflächiger Hautdefekte und offener Frakturen; zur Vorbereitung von Hauttransplantationen.



Handelsformen	Artikel-Nr.	PZN	Packungs-inhalt	VE Pack.*	
Syspur-derm®, steril, einzeln eingeseigelt	7,5x10 cm	999 585	02177808	10 Stück	10
	10x20 cm	999 588	02177814	10 Stück	10

* Versand-Einheiten in Packungen

Atrauman® Silicone

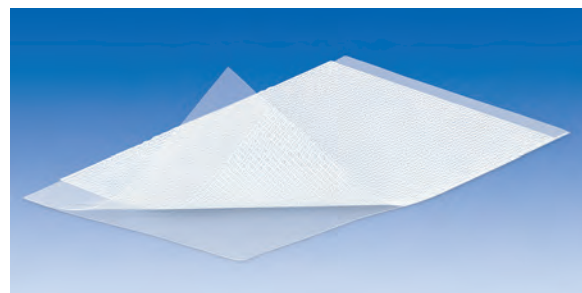

Das Silikon-Wunddistanzgitter für atraumatischen Verbandwechsel

Charakteristik

Wundkontaktschicht aus einem Polyethylenterephthalat (PET)-Netz als Trägermaterial, das mit Silikon gel (basierend auf Polydimethylsiloxan) beidseitig beschichtet ist; haftet sanft und sicher auf trockenen, nicht aber auf feuchten Oberflächen; sekretdurchlässig, besonders weich und gut drapierfähig, leicht zuschneidbar; kein Verkleben mit der Wunde.

Anwendung

Zur Behandlung von oberflächlichen akuten und chronischen, leicht bis mittelstark exsudierenden Wunden aller Art; als Schutzschicht auf nicht exsudierenden Wunden und auf Stellen mit empfindlicher Haut; insbesondere in Verbindung mit dem Vivano Unterdruckwundtherapie-system anwendbar.



Handelsformen	Artikel-Nr.	PZN	Packungs-inhalt	VE Pack.*
Atrauman® Silicone, steril, einzeln eingeseigelt	5x7 cm	499 568	11666067	10 Stück
	7,5x10 cm	499 562	11666096	10 Stück
	10x20 cm	499 564	11666104	10 Stück
	20x30 cm	499 565	10554308	5 Stück

* Versand-Einheiten in Packungen

Atrauman® Ag

Die silberhaltige Salbenkompressen mit antibakteriellen Eigenschaften

Charakteristik

Silberhaltige Salbenkompressen aus hydrophobem Gittertüll aus Polyamid, dessen Fasern mit elementarem Silber ummantelt sind, die im direkten Kontakt mikrobiologisch gegen gramnegative sowie -positive Bakterien wirken; imprägniert mit einer neutralen Salbenmasse ohne Zusätze von Vaseline oder anderen Paraffinen; sekretdurchlässig, besonders



weich und gut drapierfähig, kein Verkleben mit der Wunde; mindestens 7 Tage mikrobiologisch wirksam.

Die Salbenmasse enthält: Ester-Gemisch natürlicher, pflanzlicher Fettsäuren, gebunden als Di- und Triglyceride, Macroglol 2000.

Handelsformen	Artikel-Nr.	PZN	Packungs-inhalt	VE Pack.*
Atrauman® Ag, steril, einzeln eingeseigelt	5x5 cm	499 571	02813842	10 Stück
	10x10 cm	499 573	02813807	10 Stück
	10x20 cm	499 575	02813150	10 Stück

* Versand-Einheiten in Packungen



Anwendung

Zur Behandlung von oberflächlichen Wunden sowie zum ergänzenden Einsatz bei der Behandlung von keimbelasteten oder infizierten Wunden und zur Infektionsprophylaxe.

Atrauman®

Die Salbenkompressen mit dem hydrophoben Polyesterüll

Charakteristik

Wirkstofffreie Salbenkompressen aus hydrophobem, engmaschigem Polyesterüll mit glatter Oberflächenstruktur, imprägniert mit einer neutralen Salbenmasse, deren pflanzliche Fettsäuren aktiv den Lipidstoffwechsel unterstützen und damit den Heilungsprozess fördern; ohne Zusätze von Vaseline oder anderen Paraffinen;



sekretdurchlässig, besonders weich und gut drapierfähig, kein Verkleben mit der Wunde. Die Salbenmasse enthält: Ester-Gemisch natürlicher, pflanzlicher Fettsäuren, gebunden als Di- und Triglyceride.

Handelsformen	Artikel-Nr.	PZN	Packungs-inhalt	VE Pack.*
Atrauman®, steril, einzeln eingeseigelt	5x5 cm	499 510	04889826	10 Stück
	5x5 cm	499 550	04889832	50 Stück
	7,5x10 cm	499 513	03829302	10 Stück
	7,5x10 cm	499 553	04889849	50 Stück
	10x20 cm	499 536	03829331	30 Stück

* Versand-Einheiten in Packungen



Anwendung

Zur Behandlung von oberflächlichen akuten und chronischen Wunden aller Art; eignet sich insbesondere, um das Verkleben von Wundbett und Sekundärverband zu vermeiden als auch zum Geschmeidighalten von Wundrändern und der Umgebungshaut; besonders indiziert in der Dermatologie sowie bei haut- und medikamentenempfindlichen Patienten anwendbar.

Hydrotüll®



Die Salbenkomresse mit hydroaktiver Salbenmasse zur feuchten Wundbehandlung

Charakteristik

Hydroaktive Salbenkompressen aus hydrophobem, weitmaschigem Gittertüll aus Polyamid, imprägniert mit einer hydroaktiven Salbenmasse, die bei Aufnahme von Wundexsudat eine Wasser-in-Öl Emulsion bildet. Die darin befindlichen Hydrokolloidpartikel nehmen die Feuchtigkeit aus der Wunde auf, speichern diese und bilden zusammen mit der Emulsion ein triglyceridhaltiges Gel, das ein optimales feuchtes Wundmilieu schafft und erhält sowie gleichzeitig die Wundränder pflegt; sekretdurchlässig, besonders weich und gut drapierfähig, leicht zuschneidbar; kein Verkleben mit der Wunde.

Die Salbenmasse enthält:

Ester-Gemisch natürlicher, pflanzlicher Fettsäuren, gebunden als Di- und Triglyceride, Vaseline, Emulgatoren.

Anwendung

Zur Behandlung von oberflächlichen akuten und chronischen Wunden aller Art; insbesondere in der Granulations- und Epithelisierungsphase, wenn eine hydroaktive Behandlung erwünscht und die Wundränder einer besonderen Pflege bedürfen.



Handelsformen	Artikel-Nr.	PZN	Packungs-inhalt	VE Pack.*
Hydrotüll®, steril, einzeln eingeseigelt	5x5 cm	499 591	00810087	10 Stück
	10x12 cm	499 593	00813022	10 Stück
	15x20 cm	499 594	00813045	10 Stück

* Versand-Einheiten in Packungen

Grassolind®

Die Salbenkomresse mit dem weitmaschigen Baumwollgewebe

Charakteristik

Wirkstofffreie Salbenkompressen aus weitmaschigem, luft- und sekretdurchlässigem Baumwollgewebe, imprägniert mit einer neutralen Salbenmasse, die durch ihren reichhaltigen Auftrag auch bei starker Exsudation nicht ausgewaschen wird; leicht zuschneidbar.

Die Salbenmasse enthält: weißes Vaseline, Diglycerinester von Mono- und Dicarbonfettsäuren, synthetisches Wachs.



Anwendung

Zur allgemeinen Wundbehandlung, insbesondere zum Geschmeidighalten von Wundflächen und -rändern, z. B. für großflächige Schürf- oder Risswunden sowie Verbrennungen oder Verbrühungen, in der plastischen und kosmetischen Chirurgie, bei Nagelextraktionen,



Phimoseoperationen usw.; zum Abdecken der Entnahmestelle bei Hauttransplantationen und zum Fixieren der Spalthauttransplantate; ideal auch in der Dermatologie sowie für haut- und medikamentenempfindliche Patienten.

Handelsformen	Artikel-Nr.	PZN	Packungs-inhalt	VE Pack.*
Grassolind®, steril, einzeln eingeseigelt	5x5 cm	499 310	03245618	10 Stück
	5x5 cm	499 350	03245647	50 Stück
	7,5x10 cm	499 313	03245624	10 Stück
	7,5x10 cm	499 353	03245653	50 Stück
	10x10 cm	499 314	03245630	10 Stück
	10x10 cm	499 354	03245699	50 Stück
	10x20 cm	499 336	03245676	30 Stück

* Versand-Einheiten in Packungen

Branolind®



Die Salbenkomresse mit reinem Vaseline

Charakteristik

Wirkstofffreie Salbenkompressen aus weitmaschigem, luft- und sekretdurchlässigem Baumwollgewebe, imprägniert mit einer neutralen Salbenmasse, die durch ihren reichhaltigen Auftrag auch bei starker Exsudation nicht ausgewaschen wird; leicht zuschneidbar.

Die Salbenmasse enthält: weißes Vaseline.

Anwendung

Zur allgemeinen Wundbehandlung, insbesondere zum Geschmeidighalten von Wundflächen und -rändern, z. B. für großflächige Schürf- oder Risswunden sowie Verbrennungen oder Verbrühungen, in der plastischen und kosmetischen Chirurgie, bei Nagelextraktionen, Phimoseoperationen usw.; zum Abdecken der Entnahmestelle bei Hauttransplantationen und zum Fixieren der Spalthauttransplantate; ideal auch in der Dermatologie sowie für haut- und medikamentenempfindliche Patienten.



Handelsformen	Artikel-Nr.	PZN	Packungs-inhalt	VE Pack.*
Branolind®, steril, einzeln eingeschiegelt	7,5x10 cm	492 324	04074892	10 Stück
	7,5x10 cm	492 344	04074900	30 Stück
	10x20 cm	492 347	04074917	30 Stück

* Versand-Einheiten in Packungen

Zetuvit® Plus

Die Saugkomresse mit höchster Saugleistung für stark exsudierende Wunden

Charakteristik

Besonders saugfähige, wundfreundliche Saugkompressen mit einem speziellen Saugkörper aus weichen Zellstoff-Flocken und hoch speicherfähigem Superabsorber, umhüllt von einem flüssigkeitsverteilenden Vlies; wasserabweisendes, luftdurchlässiges Spezialvlies auf der wundabgewandten Seite als Kontaminationsschutz, das zur Vermeidung von Applikationsfehlern grün eingefärbt ist; Außen-Umhüllung aus seidenweichem, nicht verklebendem Zweischicht-Vlies, das durch seine Kapillarwirkung Sekrete rasch in den Saugkörper weiterleitet; weich und luftdurchlässig, leicht zu drapieren, mit hoher Polsterwirkung.



Anwendung

Zur Versorgung sehr stark exsudierender Wunden in allen medizinischen Bereichen; insbesondere z. B. bei chirurgischen Wunden, lymphatisch bedingten Wunden, Ulcus cruris, exulzierenden Tumoren; auch geeignet als Wundverband unter Kompressionsverbänden.

Handelsformen	Artikel-Nr.	PZN	Packungs-inhalt	VE Pack.*
Zetuvit® Plus, steril, einzeln eingeschiegelt	10x10 cm	413 710	02536259	10 Stück
	10x20 cm	413 711	02536265	10 Stück
	15x20 cm	413 712	11554730	10 Stück
	20x25 cm	413 713	02536644	10 Stück
	20x40 cm	413 714	02537170	5 Stück

* Versand-Einheiten in Packungen

Zetuvit®



Die hochsaugfähige Komresse mit der seidenweichen Vliesumhüllung

Charakteristik

Wundfreundliche Saugkompressen aus vier aufeinander abgestimmten Materialschichten: seidenweiche Umhüllung aus nicht verklebendem Zweischicht-Vlies, Saugkörper aus weichen Zellstofflocken, Tissuelage zur Sekretverteilung und feuchtigkeitsabweisende Lage aus Polypropylenvlies auf der Rückseite der Komresse als Kontaminationsschutz; eine Farbmarkierung kennzeichnet die Rückseite, um Applikationsfehler zu vermeiden.

Anwendung

Zur Versorgung mäßig bis stark sezernierender Wunden in allen medizinischen Bereichen; zum Abpolstern von Wunden.



Handelsformen	Artikel-Nr.	PZN	Packungs-inhalt	VE Pack.*	
Zetuvit®, steril, einzeln eingeseigelt	10x10 cm	413 708	02724334	25 Stück	9
	10x20 cm	413 709	02724340	25 Stück	9
	13,5x25 cm	413 705	02724357	10 Stück	10
	20x20 cm	413 703	02724363	15 Stück	7
	20x40 cm	413 704	03242689	5 Stück	12
Zetuvit®, unsteril	10x10 cm	413 801	01905507	30 Stück	12
	10x20 cm	413 802	01905513	30 Stück	12
	13,5x25 cm	413 805	01905536	30 Stück	6
	20x20 cm	413 803	01981661	30 Stück	8
	20x40 cm	413 804	03242695	30 Stück	4

* Versand-Einheiten in Packungen

Cosmopor® Advance

Der Wundverband mit der hohen Absorptions- und Speicherefähigkeit



Charakteristik

Selbstklebender Wundverband aus weichem Trägervlies und zentralem Wundkissen mit DryBarrier® Technologie; die Wundkontaktschicht aus einem feinmaschigen Polyethylen-Netz verhindert ein Verkleben mit der Wunde, eine Transferschicht leitet das Exsudat in die Absorptionsschicht und wird dort dauerhaft gespeichert, um Rücknässung zu vermeiden; sehr gute Saugkapazität und hoch speicherfähig, mit zusätzlichem Polstereffekt; hautfreundlich durch hypoallergenen, synthetischen Kleber.

Anwendung

Für die postoperative Wundversorgung, aber auch zur sterilen Versorgung von Bagatellverletzungen, z. B. im Rahmen der Ersten Hilfe; bei Patienten mit sensibler Haut.



Handelsformen	Artikel-Nr.	PZN	Packungs-inhalt	VE Pack.*	
Cosmopor® Advance, steril, einzeln eingeseigelt	7,2x5 cm (IM 4x2,5 cm)	901 018	03546490	10 Stück	20
	7,2x5 cm (IM 4x2,5 cm)	901 010	03546509	25 Stück	20
	10x6 cm (IM 6,5x2,5 cm)	901 011	03546515	25 Stück	24
	10x8 cm (IM 6,5x3,8 cm)	901 013	03546538	25 Stück	18
	15x8 cm (IM 11x3,8 cm)	901 014	03546544	25 Stück	12
	20x10 cm (IM 16x5,5 cm)	901 015	03546550	25 Stück	10
	25x10 cm (IM 20,5x5,5 cm)	901 016	03546478	10 Stück	8
	35x10 cm (IM 30,5x5,5 cm)	901 017	03546484	10 Stück	8

IM = Innenmaß

* Versand-Einheiten in Packungen

Cosmopor® Antibacterial



Der silberhaltige, hoch speicherfähige Wundverband mit antibakteriellen Eigenschaften

Charakteristik

Silberhaltiger, selbstklebender Wundverband aus weichem Trägervlies und zentralem Wundkissen mit DryBarrier® Technologie; durch eine zusätzliche, mit metallischem Silber beschichtete Polyethylen-Folie im Innern des Wundkissens werden dort durch die im feuchten Milieu freigesetzten Silber-Ionen gram-negative sowie -positive Bakterien wirksam bekämpft; die Wundkontaktschicht aus einem feinmaschigen Polyethylen-Netz verhindert ein Verkleben mit der Wunde, eine Transferschicht leitet das Exsudat in die Absorptionsschicht und wird dort dauerhaft gespeichert, um Rücknässung zu vermeiden; sehr gute Saugkapazität und hoch speicherfähig, mit zusätzlichem Polstereffekt; hautfreundlich durch hypoallergenen, synthetischen Kleber.

Anwendung

Für die postoperative Wundversorgung sowie zur Infektionsprophylaxe, aber auch zur sterilen Versorgung von Bagatellverletzungen, z. B. im Rahmen der Ersten Hilfe; bei Patienten mit sensibler Haut.

Handelsformen	Artikel-Nr.	PZN	Packungs-inhalt	VE Pack.*	
Cosmopor® Antibacterial, steril, einzeln eingeschiegelt	7,2x5 cm (IM 4x2,5 cm)	901 996	09693306	5 Stück	10
	7,2x5 cm (IM 4x2,5 cm)	901 000	03546308	25 Stück	20
	10x6 cm (IM 6,5x2,5 cm)	901 001	03546314	25 Stück	24
	15x6 cm (IM 11x2,5 cm)	901 002	03546320	25 Stück	18
	10x8 cm (IM 6,5x3,8 cm)	901 997	09693312	5 Stück	10
	10x8 cm (IM 6,5x3,8 cm)	901 003	03546337	25 Stück	18
	15x8 cm (IM 11x3,8 cm)	901 004	03546343	25 Stück	12
	20x10 cm (IM 16x5,5 cm)	901 005	03546366	25 Stück	10

IM = Innenmaß
* Versand-Einheiten in Packungen



Cosmopor® Steril

Der Wundverband mit dem Micro-Netz gegen Verkleben



Charakteristik

Selbstklebender Wundverband aus weichem Trägervlies und zentralem Wundkissen; die Wundkontaktschicht aus einem feinmaschigen Polyethylen-Netz verhindert ein Verkleben mit der Wunde; rasche Sekretableitung durch Drainageeffekt des Micro-Netzes; gute Saugkraft und Polsterwirkung; hautfreundlich durch hypoallergenen Polyacrylatkleber.

Anwendung

Für die postoperative Wundversorgung, aber auch zur sterilen Versorgung von Bagatellverletzungen, z. B. im Rahmen der Ersten Hilfe; bei Patienten mit besonders sensibler Haut.



Handelsformen	Artikel-Nr.	PZN	Packungs-inhalt	VE Pack.*	
Cosmopor® Steril, »Apothekenaufmachung« einzeln eingeschiegelt	7,2x5 cm (IM 4x2,5 cm)	900 700	10324761	5 Stück	10
	10x6 cm (IM 6,5x2,5 cm)	900 701	10324784	5 Stück	20
	10x8 cm (IM 6,5x3,8 cm)	900 707	10324809	5 Stück	10
	15x8 cm (IM 11x3,8 cm)	900 703	10324815	5 Stück	20
	20x10 cm (IM 16x5,5 cm)	900 709	10324821	5 Stück	20
Cosmopor® Steril, einzeln eingeschiegelt	7,2x5 cm (IM 4x2,5 cm)	900 833	04960553	10 Stück	20
	7,2x5 cm (IM 4x2,5 cm)	900 800	04302005	50 Stück	20
	10x6 cm (IM 6,5x2,5 cm)	900 802	04302011	25 Stück	27
	15x6 cm (IM 11x2,5 cm)	900 804	04302028	25 Stück	18
	10x8 cm (IM 6,5x3,8 cm)	900 806	04302034	25 Stück	22
	15x8 cm (IM 11x3,8 cm)	900 808	04302040	25 Stück	14
	20x8 cm (IM 16x3,8 cm)	900 810	04302057	25 Stück	12
	10x10 cm (IM 5,5x5,5 cm)	900 820	10102150	25 Stück	8
	20x10 cm (IM 16x5,5 cm)	900 812	04302063	25 Stück	12
	25x10 cm (IM 20,5x5,5 cm)	900 814	04302086	25 Stück	8
	35x10 cm (IM 30,5x5,5 cm)	900 816	04302092	25 Stück	8
	15x15 cm (IM 10x10 cm)	900 823	10102167	25 Stück	8

IM = Innenmaß
* Versand-Einheiten in Packungen

Cosmopor® Strip



Das Wundpflaster mit dem besonders offenenporigen Vliesstoff

Charakteristik

Hypoallergenes Wundpflaster aus weichem, elastischem und besonders luftdurchlässigem Vliesstoff, mit synthetischem Kautschuk-Kleber als Streifenauftrag; die Abdeckung des weichen, hochsaugfähigen Wundkissens mit einer microperforierten Lage aus Polyethylen verhindert ein Verkleben mit der Wunde.

Anwendung

Zur Versorgung kleinerer Verletzungen, insbesondere an Gelenken und konischen Körperteilen; bei Patienten mit sensibler Haut bzw. an besonders empfindlichen Körperpartien. Bei der Applikation auf trockene und saubere Haut achten.



Handelsformen	Artikel-Nr.	PZN	Packungs-inhalt	VE Pack.*	
Cosmopor® Strip, 10 Abschnitte zu 10 cm	4 cm	900 960	02784448	1 m	78
	6 cm	900 961	02784454	1 m	78
	8 cm	900 962	02784483	1 m	78
Cosmopor® Strip, Rollen in Spenderkartons	4 cm	900 963	02784508	5 m	32
	6 cm	900 964	02784520	5 m	24
	8 cm	900 965	02784537	5 m	16

* Versand-Einheiten in Packungen

DermaPlast® Wundpflaster

Zur optimalen Versorgung kleinerer Verletzungen

Charakteristik

Hypoallergene Wundpflaster in verschiedenen Qualitäten zur Versorgung von Bagatelverletzungen; mit gut saugender Wundauflage, die nicht mit der Wunde verklebt; mit hautfreundlichem Kleber, gut haftend und atmungsaktiv; hautfarben.

Anwendung

Zur Versorgung kleinerer Verletzungen bei empfindlicher Haut bzw. besonders sensibler Körperpartien. Bei der Applikation auf trockene und saubere Haut achten.



DermaPlast® classic

Aus textilem Gewebe, wasserabweisend imprägniert; bei empfindlicher Haut.



DermaPlast® sensitive

Aus weichem, querelastischem Vliesstoff, mit hoher Luft- und Wasserdampfdurchlässigkeit; insbesondere zur Versorgung an konischen Körperteilen oder besonders empfindlichen Körperpartien bei sehr sensibler Haut.



DermaPlast® sensitive injection

Injektionspflaster aus weichem, hochelastischem Vliesstoff, mit hoher Luft- und Wasserdampfdurchlässigkeit; zur Versorgung der Einstichstelle nach Injektionen bei Patienten mit besonders sensibler Haut.



DermaPlast® textile elastic

Aus querelastischem, textilem Gewebe, wasserabweisend imprägniert; insbesondere zur Versorgung an Gelenken und konischen Körperteilen bei empfindlicher Haut.



DermaPlast® universal

Pflasterstrips aus dehnbarer Polyethylen-Folie, wasserdicht und schmutzabweisend; bei empfindlicher Haut.

Handelsformen	Artikel-Nr.	PZN	Packungs-inhalt	VE Pack.*	
DermaPlast® classic, in Spenderkartons, 5 m gerollt	4 cm	535 051	03645861	5 m	32
	6 cm	535 061	03645878	5 m	32
	8 cm	535 071	03645884	5 m	24
DermaPlast® textile elastic, in Spenderkartons, 5 m gerollt	4 cm	535 251	03645890	5 m	32
	6 cm	535 261	03645909	5 m	32
	8 cm	535 271	03645915	5 m	24
DermaPlast® sensitive, in Spenderkartons, 5 m gerollt	4 cm	535 351	03645921	5 m	32
	6 cm	535 361	03645938	5 m	32
	8 cm	535 371	03645944	5 m	24
DermaPlast® sensitive injection, Injektionspflaster	4x1,6 cm	535 381	03645950	250 Stück	60
DermaPlast® sensitive, Pflasterstrips	∅ 22 mm	535 382	03732703	200 Strips	36
DermaPlast® universal, Pflasterstrips	19x72 mm	535 151	03732689	100 Strips	36
	25x72 mm	535 152	03732695	100 Strips	36

* Versand-Einheiten in Packungen

Cosmopor® Waterproof



Der sterile, wasserdichte Wundverband zur Behandlung von kleinen Wunden

Charakteristik

Selbsthaftender, transparenter Wundverband aus wasserdichter und keimdichter Polyurethan-Folie und zentralem Wundkissen; die Wundkontaktschicht aus einem feinmaschigen, hydrophoben Polyethylen-Netz verhindert ein Verkleben mit der Wunde; rasche Sekretablenkung durch Drainageeffekt des Micro-Netzes; hautfreundlich und atmungsaktiv; mit hypoallergenem Kleber.

Anwendung

Für die postoperative Wundversorgung, aber auch zur sterilen Versorgung von Bagatelverletzungen, z. B. im Rahmen der Ersten Hilfe.



Handelsformen	Artikel-Nr.	PZN	Packungs-inhalt	VE Pack.*	
Cosmopor® Waterproof, steril, einzeln eingesiegelt	7,2x5 cm (IM 4x2,5 cm)	901 991	10317689	5 Stück	10
	10x8 cm (IM 6,5x3,8 cm)	901 992	10317672	5 Stück	10

IM = Innenmaß

* Versand-Einheiten in Packungen

Hydrofilm® Plus

Der Transparentverband mit dem Wundkissen



Charakteristik

Selbsthaftender, transparenter Wundverband mit gut saugender Wundaufgabe, die nicht mit der Wunde verklebt; mit keim- und wasserdichter, semipermeabler Polyurethan-Folie, deren Transparenz eine Beobachtung der Wundumgebung sowie die Sekretaufnahme des Wundkissens ermöglicht; mit hypoallergenem Kleber, ohne Wundirritation zu entfernen.

Anwendung

Für die postoperative Wundversorgung leicht sezernierender Wunden, als Schutz vor Sekundärinfektionen, aber auch zur sterilen Versorgung von Bagatelverletzungen.

Handelsformen	Artikel-Nr.	PZN	Packungs-inhalt	VE Pack.*	
Hydrofilm® Plus, steril, einzeln eingesiegelt	5x7,2 cm (IM 2,5x4 cm)	685 770	04605705	5 Stück	20
	5x7,2 cm (IM 2,5x4 cm)	685 771	04605711	50 Stück	10
	9x10 cm (IM 4x6 cm)	685 772	04609005	5 Stück	20
	9x10 cm (IM 4x6 cm)	685 773	04609063	50 Stück	10
	9x15 cm (IM 4x11 cm)	685 774	04609092	5 Stück	20
	9x15 cm (IM 4x11 cm)	685 775	04609117	25 Stück	10
	10x12 cm (IM 5x8 cm)	685 776	04609293	25 Stück	10
	10x20 cm (IM 5x16 cm)	685 777	04609407	5 Stück	10
	10x20 cm (IM 5x16 cm)	685 778	04610310	25 Stück	10
	10x25 cm (IM 5x20 cm)	685 779	04609413	25 Stück	10
	10x30 cm (IM 5x25 cm)	685 780	04610445	25 Stück	10

IM = Innenmaß

* Versand-Einheiten in Packungen

Hydrofilm®



Der Transparentverband für sicheren Wundschutz

Charakteristik

Selbsthaftender Transparentverband aus keim- und wasserdichter, semipermeabler Polyurethan-Folie; mit hypoallergenem Kleber, ohne Wundirritation zu entfernen.

Anwendung

Als Schutz vor Sekundärinfektionen und vor mechanischen Irritationen bei trockenen, primär heilenden Wunden, bei fast abgeheilten Epithelwunden sowie bei Katheter- und Kanülenfixierungen; ideal zur Abdeckung von gelbildenden Calciumalginat-Kompressen, wie z. B. Sorbalgon.



Handelsformen	Artikel-Nr.	PZN	Packungs-inhalt	VE Pack.*	
Hydrofilm®, steril, einzeln eingeseigelt	6x7 cm	685 755	04601274	10 Stück	20
	6x7 cm	685 756	04601280	100 Stück	10
	10x12,5 cm	685 757	04601297	10 Stück	20
	10x12,5 cm	685 758	04601311	100 Stück	10
	10x15 cm	685 759	04601328	10 Stück	10
	10x15 cm	685 760	04601765	50 Stück	10
	15x20 cm	685 761	04602457	10 Stück	10
	15x20 cm	685 762	04602693	50 Stück	10
	10x25 cm	685 763	04602776	25 Stück	10
	12x25 cm	685 764	04602782	25 Stück	10
20x30 cm	685 765	06326323	10 Stück	10	

* Versand-Einheiten in Packungen

ES-Kompressen

Die klassischen Mullkompressen mit den eingeschlagenen Schnittkanten



Charakteristik

Aus Verbandmull EN 14079, 17fädig, mit eingeschlagenen Schnittkanten (= ES); auch mehrfach aufgeklappt in größeren Formaten verwendbar, ohne dass störende Randfäden auftreten; gute Saugfähigkeit, luftdurchlässig, weich und geschmeidig; erhältlich in verschiedenen Lagen, steril und unsteril.

Anwendung

Zur allgemeinen Wundversorgung, insbesondere zur Erstversorgung von verschmutzten, infizierten und stark sezernierenden Wunden; als Tupfer und als Kompressen bei kleineren operativen Eingriffen.

Handelsformen	Artikel-Nr.	PZN	Packungs-inhalt	VE Pack.*	
ES-Kompressen, steril, in Folienbeuteln, eingeseigelt zu 2 Stück, 8fach	5x5 cm	401 621	01407100	5x2 Stück	360
	7,5x7,5 cm	401 623	01407117	5x2 Stück	240
	10x10 cm	401 625	01407123	5x2 Stück	160
	10x20 cm	401 645	01407146	5x2 Stück	100
ES-Kompressen, steril, in Falt-schachteln, eingeseigelt zu 2 Stück, 8fach	5x5 cm	401 721	01407057	25x2 Stück	60
	7,5x7,5 cm	401 723	01407063	25x2 Stück	36
	10x10 cm	401 725	01407086	25x2 Stück	24
	10x20 cm	401 745	01407092	25x2 Stück	15
ES-Kompressen, steril, in Falt-schachteln, eingeseigelt zu 5 Stück, 12fach	5x5 cm	475 500	06453760	20x5 Stück	10
	7,5x7,5 cm	475 503	06453932	20x5 Stück	10
	10x10 cm	475 506	06454110	20x5 Stück	10
	10x20 cm	475 509	06454239	20x5 Stück	10
ES-Kompressen, steril, in Falt-schachteln, eingeseigelt zu 10 Stück, 12fach	5x5 cm	475 501	06453783	10x10 Stück	10
	7,5x7,5 cm	475 504	06453984	10x10 Stück	10
	10x10 cm	475 507	06454127	10x10 Stück	10
ES-Kompressen, steril, in Falt-schachteln, eingeseigelt zu 20 Stück, 12fach	5x5 cm	475 502	06453872	5x20 Stück	10
	7,5x7,5 cm	475 505	06454096	5x20 Stück	10
	10x10 cm	475 508	06454133	5x20 Stück	10
ES-Kompressen, unsteril, in sterilisierbaren Papierbeuteln, 8fach	5x5 cm	401 821	01447157	100 Stück	35
	7,5x7,5 cm	401 823	01447192	100 Stück	10
	10x10 cm	401 825	01447223	100 Stück	10
ES-Kompressen, unsteril, in sterilisierbaren Papierbeuteln, 12fach	5x5 cm	401 831	01447163	100 Stück	30
	7,5x7,5 cm	401 833	01447200	100 Stück	10
	10x10 cm	401 835	01447246	100 Stück	10
	10x12,5 cm	401 836	01808974	100 Stück	10
ES-Kompressen, unsteril, in sterilisierbaren Papierbeuteln, 16fach	5x5 cm	401 841	01447186	100 Stück	30
	7,5x7,5 cm	401 843	01447217	100 Stück	10
	10x10 cm	401 845	01447252	100 Stück	10
	10x12,5 cm	401 846	01808980	100 Stück	10

* Versand-Einheiten in Packungen

Medicomp®



Die Vliesstoffkompressen mit der Mullstruktur

Charakteristik

Vliesstoffkompressen in Mullstruktur aus 70 % Zellwolle und 30 % Polyesterfasern; frei von Bindemitteln und optischen Aufhellern; sehr saugfähig, weich und luftdurchlässig; erhältlich in verschiedenen Lagen, steril und unsteril.

Anwendung

Zur allgemeinen Wundversorgung; als Tupfer und als Kompressen bei kleineren operativen Eingriffen.

Medicomp®

4fach gelegt, steril und unsteril erhältlich.

Medicomp® extra

6fach gelegt, extra saugstark, steril und unsteril erhältlich.



Handelsformen	Artikel-Nr.	PZN	Packungs-inhalt	VE Pack.*	
Medicomp®, steril, eingeseigelt zu 2 Stück, 4fach	5x5 cm	421 721	04783789	25x2 Stück	24
	7,5x7,5 cm	421 723	04783795	25x2 Stück	12
	10x10 cm	421 725	04783803	25x2 Stück	8
	10x20 cm	421 727	04783826	25x2 Stück	8
Medicomp®, unsteril, 4fach	5x5 cm	421 821	04783832	100 Stück	24
	7,5x7,5 cm	421 823	04783849	100 Stück	12
	10x10 cm	421 825	04783855	100 Stück	12
	10x20 cm	421 827	04783861	100 Stück	6
Medicomp® extra, steril, eingeseigelt zu 2 Stück, 6fach	5x5 cm	421 731	04783878	25x2 Stück	24
	10x10 cm	421 735	04783890	25x2 Stück	8
	10x20 cm	421 737	04783909	25x2 Stück	6
Medicomp® extra, unsteril, 6fach	5x5 cm	421 831	04783915	100 Stück	24
	7,5x7,5 cm	421 833	04783921	100 Stück	12
	10x10 cm	421 835	04783938	100 Stück	12
	10x20 cm	421 837	04783944	100 Stück	6

* Versand-Einheiten in Packungen

Medicomp® drain

Die Vliesstoffkomresse mit dem Y-Schnitt

Charakteristik

Schlitzkompressen aus Vliesstoff in Mullstruktur aus 70 % Zellwolle und 30 % Polyesterfasern; 6fach gelegt, mit Y-Schnitt; frei von Bindemitteln und optischen Aufhellern; sehr saugfähig, weich und luftdurchlässig.



Anwendung

Speziell zur Wundversorgung bei Drainagen, Tracheotomien und Extensionen sowie als Schutz bei Kanülen- und Sondenapplikationen.



Handelsformen	Artikel-Nr.	PZN	Packungs-inhalt	VE Pack.*	
Medicomp® drain, steril, eingeseigelt zu 2 Stück	7,5x7,5 cm	421 533	04783950	25x2 Stück	12
	10x10 cm	421 535	04783967	25x2 Stück	8

* Versand-Einheiten in Packungen

Peha® Schlitzkompressen

Die Kompressen aus Verbandmull mit dem Y-Schnitt.

Charakteristik

Aus Verbandmull EN 14079, 17fädig, 12fach, mit Y-Schnitt; gute Saugfähigkeit, luftdurchlässig, weich und geschmeidig.



Anwendung

Zur Wundversorgung bei Drainagen, Tracheotomien und Extensionen.



Handelsformen	Artikel-Nr.	PZN	Packungs-inhalt	VE Pack.*	
Peha® Schlitzkompressen, steril, eingeseigelt zu 2 Stück	7,5x7,5 cm	401 503	02725032	25x2 Stück	10
	10x10 cm	401 505	02343744	20x2 Stück	18

* Versand-Einheiten in Packungen

Eycopad®



Die Augenkomresse mit der guten Polsterwirkung

Charakteristik

Augenkompressen aus Watte mit Mullumhüllung aus reiner Baumwolle; besonders weich und saugfähig; verfügen über eine lang anhaltende, gute Polsterwirkung.

Anwendung

Für Augenverbände; zur Versorgung nässender oder trockener Wunden, zur Abdeckung bzw. als polsternder Schutz.



Handelsformen	Artikel-Nr.	PZN	Packungs-inhalt	VE Pack.*	
Eycopad®, steril, einzeln eingeseigelt	56x70 mm	415 540	02733304	25 Stück	12
	70x85 mm	417 540	02733310	25 Stück	12
Eycopad®, unsteril	56x70 mm	415 620	02733327	5 Stück	105
	56x70 mm	415 650	02733356	50 Stück	15
	70x85 mm	417 620	02733333	5 Stück	60
	70x85 mm	417 650	02733362	50 Stück	15

* Versand-Einheiten in Packungen

Fil-Zellin®

Die wundfreundliche Universalkomresse für den besonders wirtschaftlichen Einsatz



Charakteristik

Universalkompressen mit wundfreundlicher Vliesstoff-Auflage und Saugkörper aus mehreren Lagen hochgebleichten Verbandzellstoffs; durch tiefliegende Steppnähte miteinander verbunden,

kann deshalb in beliebige Formate geschnitten werden, ohne dass die Materialschichten ihren Zusammenhalt verlieren.



Anwendung

Universell einzusetzen für die wundfreundliche Versorgung trockener und sezernierender Wunden sowie als Trägermaterial für Salben- und Feuchtverbände.

Handelsformen	Artikel-Nr.	PZN	Packungs-inhalt	VE Pack.*	
Fil-Zellin®, Rollen zu 10 m	10 cm	456 112	00383544	10 m	24
	15 cm	456 113	00383550	10 m	16
	30 cm	456 114	00383567	10 m	8

* Versand-Einheiten in Packungen

HARTMANN Verbandmull ZZ

Der bewährte Verbandmull zum Selbstanfertigen von Verbandstücken




Charakteristik

Verbandmull EN 14079, 20fädig; erhältlich in Zickzack-Lagen auf 10 cm Breite gelegt und als Meterware in Stücken zu 40 m.

Anwendung

Zum Anfertigen individueller Verbandstücke; als universelle Wundauflage, z. B. bei der Erstversorgung.

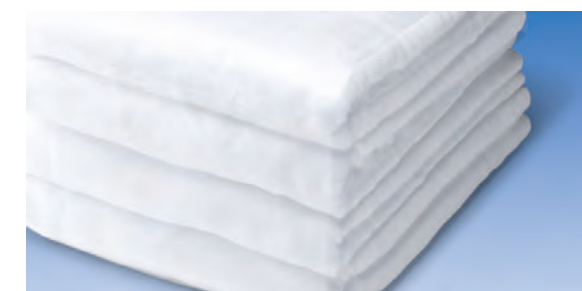

Handelsformen	Artikel-Nr.	PZN	Packungs-inhalt	VE Pack.*
HARTMANN Verbandmull, in Zickzack-Lagen, 8fach auf 10 cm Breite gelegt	206 402	01083703	1 m	50
	206 403	01083726	2 m	30
	206 405	01083732	5 m	15
	206 406	01083749	10 m	8
	206 407	01902302	40 m	4
HARTMANN Verbandmull, Stücke zu 40 m, auf 1 m gelegt	206 017	06618801	200 m	5

* Versand-Einheiten in Packungen

Mullro®



Der klassische Verbandmull in praktischer Rollenform

Charakteristik

Gerollter Verbandmull EN 14079, 20fädig, 80 cm breit, 8fach auf 10 cm Breite gelegt.

Anwendung

Als universelle Wundauflage, z. B. bei der Erstversorgung.



Handelsformen	Artikel-Nr.	PZN	Packungs-inhalt	VE Pack.*
Mullro®, in Entnahmekartons	209 403	02700902	2 m	30
	209 405	02700919	5 m	12
	209 406	02700925	10 m	12
Mullro®, Großpackung	209 409	02708186	2x20 m	4

* Versand-Einheiten in Packungen

Omnifix® elastic

Das hautfreundliche Fixiervlies für eine komfortable, vollflächige Verbandfixierung



Charakteristik

Hypoallergenes Fixiervlies aus weißem Vliesstoff mit synthetischem Kleber; besonders weich und anschmiegsam; in Querrichtung dehnbar; extrem luft- und wasserdampfdurchlässig; keine Mazeration, sicher haftend; strahlensterilisierbar, strahlenindifferent.

Anwendung


Zur vollflächigen Verbandabdeckung und Verbandfixierung in allen medizinischen Bereichen; ideal für Verbandfixierungen an Gelenken, runden und konischen Körperteilen; zur Befestigung von Messinstrumenten, Sonden, Kathetern usw.; bei Patienten mit empfindlicher Haut.



Handelsformen	Artikel-Nr.	PZN	Packungs-inhalt	VE Pack.*	
Omnifix® elastic, 2 m lang, in Faltschachteln	10 cm	900 601	04377374	1 Rolle	24
Omnifix® elastic, 10 m lang, in Faltschachteln	2,5 cm	900 606	01316515	2 Rollen	60
	5 cm	900 602	00255579	1 Rolle	60
	10 cm	900 603	00255585	1 Rolle	32
	15 cm	900 604	00255616	1 Rolle	20
	20 cm	900 605	00255622	1 Rolle	16
	30 cm	900 607	01316509	1 Rolle	10

* Versand-Einheiten in Packungen

Hydrofilm® roll

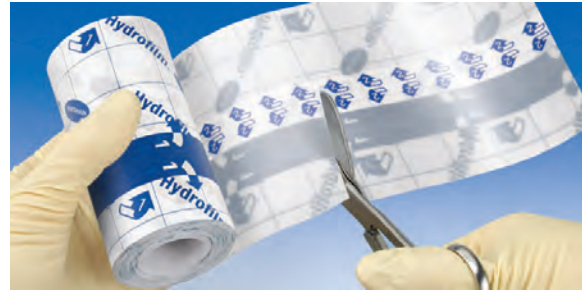

Der wasserdichte Folienverband zur transparenten Fixierung von Wundauflagen

Charakteristik

Wasserdichter Folienverband aus transparenter, atmungsaktiver Polyurethan-Folie, mit hypoallergenem Polyacrylat-Kleber; durch die Applikationsfolie einfach abzurollen und exakt zuzuschneiden; keine Mazeration, sicher haftend, schmerzlos und ohne Rückstände zu entfernen.

Anwendung

Zur vollflächigen, wasserdichten Verbandabdeckung und Verbandfixierung in allen medizinischen Bereichen, insbesondere wenn eine Beobachtung der Sekretaufnahme des Wundkisses erwünscht ist oder zur wasserdichten Verbandabdeckung z. B. beim Duschen; ideal für Verbandfixierungen an Gelenken, runden und konischen Körperteilen; zur Befestigung von Messinstrumenten, Sonden, Kathetern usw.; bei Patienten mit empfindlicher Haut.



Handelsformen	Artikel-Nr.	PZN	Packungs-inhalt	VE Pack.*	
Hydrofilm® roll, 2 m lang, in Faltschachteln	685 791	03536356	1 Rolle	24	
Hydrofilm® roll, 10 m lang, in Faltschachteln	5 cm	685 790	03535925	1 Rolle	24
	10 cm	685 792	03536563	1 Rolle	32
	15 cm	685 793	03537522	1 Rolle	20

* Versand-Einheiten in Packungen

Hydrofilm® I.V.

Sichere Kanülenfixierung und optimale Kontrolle der Punktionsstelle



Charakteristik

Selbsthaftender, transparenter Kanülenfixierverband aus keim- und wasserdichter, semipermeabler Polyurethan-Folie, deren Transparenz eine Kontrolle der Einstichstelle jederzeit ohne Verbandwechsel ermöglicht; schützt die Einstichstelle vor Wasser, Schmutz und Bakterien; hautfreundlich durch hypoallergenen Kleber; auch erhältlich in einer mit Vlies verstärkten Variante.

Anwendung

Zur sterilen Versorgung der Einstichstelle und gleichzeitiger Fixierung der Venenverweilkanüle, mit der Möglichkeit einer visuellen Kontrolle ohne Verbandwechsel.



Hydrofilm® I.V. control

Selbsthaftender Kanülenfixierverband mit transparentem, großzügigem Sichtfenster aus keim- und wasserdichter, semipermeabler Polyurethan-Folie und stabilisierendem Vliesrahmen. Besonders sichere Fixierung durch starke Klebekraft und hohe Stabilität durch die Vliesverstärkung.



Hydrofilm® I.V.

Selbsthaftender, transparenter Kanülenfixierverband aus keim- und wasserdichter, semipermeabler Polyurethan-Folie.



Handelsformen	Artikel-Nr.	PZN	Packungs-inhalt	VE Pack.*
Hydrofilm® I.V. control, steril, einzeln eingeseigelt	685 741	03545964	50 Stück	12
Hydrofilm® I.V., steril, einzeln eingeseigelt	685 740	03546001	50 Stück	12

* Versand-Einheiten in Packungen

Cosmopor® I.V.



Der zuverlässige Kanülenfixierverband mit hohem Patientenkomfort

Charakteristik

Selbstklebender Kanülenfixierverband aus weichem Trägervlies mit spezialbeschichtetem, nicht verklebendem Wundkissen; zusätzliches, separates Polsterkissen als Schutz gegen Druckstellen durch die Venenverweilkanüle; hautfreundlich durch hypoallergenen, synthetischen Kautschuk-Kleber.

Anwendung

Zur sterilen Wundversorgung der Einstichstelle und gleichzeitiger Fixierung der Venenverweilkanüle.



Handelsformen	Artikel-Nr.	PZN	Packungs-inhalt	VE Pack.*
Cosmopor® I.V., steril, 8x6 cm einzeln eingeseigelt	900 805	01798968	50 Stück	8

* Versand-Einheiten in Packungen

Omnistrip®

Der Wundnahtstreifen aus Vliesstoff mit ausgezeichneter Haftkraft

Charakteristik

Hypoallergene Wundnahtstreifen aus hautfarbenem Vliesstoff mit Polyacrylat-Kleber, mit abgerundeten Ecken, extrem luft- und wasserdampfdurchlässig, keine Mazeration, sicher haftend, schmerzlos und ohne Rückstände zu entfernen, strahlenindifferent; temperatur- und alterungsbeständig.



Anwendung

Zum atraumatischen Verschluss kleiner Wunden und chirurgischer Inzisionen bei primär heilenden Wunden; auch zur Zugentlastung der Wundränder und Stabilisierung frischer Narben. Bei der Applikation auf trockene und saubere Haut achten.



Handelsformen	Artikel-Nr.	PZN	Packungs-inhalt	VE Pack.*
Omnistrip®, steril, eingeseigelt zu 5 Stück	540 681	00761638	250 Stück	6
Omnistrip®, steril, eingeseigelt zu 6 Stück	540 682	00761644	300 Stück	6
Omnistrip®, steril, eingeseigelt zu 3 Stück	540 683	00761650	150 Stück	6
Omnistrip®, steril, eingeseigelt zu 10 Stück	540 684	00761667	500 Stück	6
Omnistrip®, steril, eingeseigelt zu 6 Stück	540 685	00761673	300 Stück	6
Omnistrip®, steril, eingeseigelt zu 4 Stück	540 686	00761696	200 Stück	6

* Versand-Einheiten in Packungen

Omni Spulenpflaster



Omniplast®

Aus hautfarbenem textilem Gewebe mit synthetischem Kleber als Streifenantrag; besonders zugfest und strapazierfähig, wasserabstoßend imprägniert, mit Zickzack-Rand.



Omnisilk®

Aus weißer Kunstseide mit synthetischem Kleber als Streifenantrag; wasserabstoßend imprägniert, sehr luftdurchlässig, mit Zickzack-Rand.



Omniopor®

Aus weißem Vliesstoff mit synthetischem Kleber als Streifenantrag; wasserabstoßend imprägniert, durch die extrem hohe Luft- und Wasserdampfdurchlässigkeit keine Mazeration der Haut; besonders hautfreundlich.



OmniFilm®

Aus poröser, transparenter Folie mit Polyacrylat-Kleber; schmutzabweisend; in Längs- und Querrichtung leicht reißbar; insbesondere geeignet zur transparenten Befestigung von Kanülen oder Schläuchen, um eine Kontrolle des Flüssigkeitsstandes zu ermöglichen.



Für jede Indikation das richtige Pflaster

Charakteristik

Hypoallergene Fixierpflaster aus verschiedenen Trägermaterialien; luft- und wasserdampfdurchlässig, sicher haftend, leicht reißbar, problemlos und ohne Rückstände zu entfernen, strahlenindifferent, temperatur- und alterungsbeständig.

Anwendung

Für Verbandfixierungen aller Art, zur Befestigung von Sonden, Kanülen, Kathetern oder Messinstrumenten bei Patienten mit empfindlicher Haut. Bei der Applikation auf trockene und saubere Haut achten.



Handelsformen	Artikel-Nr.	PZN	Packungs-inhalt	VE Pack.*	
Omniplast®, auf Kunststoffspulen, 5 m lang	1,25 cm	900 440	11163308	1 Spule	300
		900 449	12380746	24 Spulen	18
	2,5 cm	900 441	11163314	1 Spule	240
		900 450	12380752	12 Spulen	12
	5 cm	900 451	12380769	6 Spulen	16
Omniplast®, auf Kunststoffspulen, 9,2 m lang	1,25 cm	900 573	11163389	1 Spule	100
		900 452	12380775	24 Spulen	12
	2,5 cm	900 574	11163395	1 Spule	80
		900 453	12380781	12 Spulen	16
	5 cm	900 575	11163403	1 Spule	40
Omniplast®, auf Kunststoffspulen, 9,2 m lang		900 454	12380798	6 Spulen	12
	1,25 cm	900 430	11163538	1 Spule	300
	2,5 cm	900 431	11163544	1 Spule	240
	5 cm	900 432	11163550	1 Spule	120
	1,25 cm	900 418	11163509	1 Spule	300
Omniplast®, auf Kunststoffspulen, 9,2 m lang	2,5 cm	900 419	11163515	1 Spule	240
	5 cm	900 420	11163521	1 Spule	120
Omniplast®, auf Kunststoffspulen, 5 m lang	1,25 cm	900 436	11163455	1 Spule	300
		900 542	12380806	24 Spulen	20
	2,5 cm	900 437	11163461	1 Spule	240
		900 543	12380812	12 Spulen	20
	5 cm	900 544	12380829	6 Spulen	20
Omniplast®, auf Kunststoffspulen, 9,2 m lang	1,25 cm	900 424	11163426	1 Spule	300
	2,5 cm	900 425	11163432	1 Spule	240
	5 cm	900 426	11163449	1 Spule	120
Omniplast®, auf Kunststoffspulen, 5 m lang	1,25 cm	900 433	11163248	1 Spule	300
	2,5 cm	900 434	11163254	1 Spule	240
	5 cm	900 435	11163260	1 Spule	120
Omniplast®, auf Kunststoffspulen, 9,2 m lang	1,25 cm	900 620	12380700	24 Spulen	18
	2,5 cm	900 630	12380717	12 Spulen	12
	5 cm	900 680	12380723	6 Spulen	16

* Versand-Einheiten in Packungen

Omnitape®

Das starke Tape für professionelle Verbände

Charakteristik

Stark klebendes Pflasterband aus 100 % Zellwollgewebe mit Zinkoxid-Kautschuk-Kleber; außerordentlich zugfest und unelastisch für eine präzise und dauerhaft sichere Fixierung von Gelenken und Bändern; starke Haftung auch auf textilen Unterzügen und Kompressionsbinden; durch gezackte Kanten mühelos von Hand abreißbar; ebenso gut reißfähig in Längsrichtung; weiß.



Anwendung

Für Funktionelle Verbände, z. B. zur Gelenkstabilisierung, insbesondere bei Bänderschädigungen; zur Stützung und Entlastung verletzter Muskeln; zur konservativen Behandlung von Luxationen usw.; zur Prophylaxe und zum Aufbautraining in der Sportmedizin.

Handelsformen	Artikel-Nr.	PZN	Packungs-inhalt	VE Pack.*	
Omnitape®, einzeln in Faltschachteln, 10 m lang, auf Kunststoffspulen	2 cm	500 058	04318182	1 Spule	96
	3,75 cm	500 059	04318199	1 Spule	96
	5 cm	500 060	04318207	1 Spule	48

* Versand-Einheiten in Packungen

Peha-haft® latexfrei



Die kohäsive, elastische Fixierbinde mit dem zweifachen Hafteffekt

Charakteristik

Kohäsive, elastische Fixierbinden mit zweifachem Hafteffekt durch gekreppte Gewebestruktur und mikropunktueller Imprägnierung mit einem latexfreien Synthetik-Polymer; Dehnbarkeit ca. 85 %; geringer Materialverbrauch durch starke Eigenhaftung, bereits wenige Touren ergeben eine sichere, dauerhafte Fixierung; dabei kein Verkleben mit Haut, Haaren oder Kleidung; luftdurchlässig, hautfreundlich und geruchsneutral, da latex-, acrylat- und chlorfrei.

43 % Viskose
37 % Baumwolle
20 % Polyamid

Anwendung

Für Fixierverbände aller Art, besonders an Gelenken sowie an runden und konischen Körperteilen; zum Fixieren von Polstermaterial, Kanülen usw.

Handelsformen	Artikel-Nr.	PZN	Packungs-inhalt	VE Pack.*
Peha-haft® latexfrei, Binden, gedehnt 4 m lang, lose in Kartons	932 452	03544893	8 Binden	12
Peha-haft® latexfrei, Binden, gedehnt 4 m lang, einzeln in Faltschachteln	4 cm	932 441	03544433	1 Binde
	6 cm	932 442	03544462	1 Binde
	8 cm	932 443	03544479	1 Binde
	10 cm	932 444	03544485	1 Binde
	12 cm	932 445	03544491	1 Binde
Peha-haft® latexfrei, Rollen, gedehnt 20 m lang, einzeln in Faltschachteln	4 cm	932 446	03544203	1 Rolle
	6 cm	932 447	03544226	1 Rolle
	8 cm	932 448	03544232	1 Rolle
	10 cm	932 449	03544338	1 Rolle
	12 cm	932 450	03544373	1 Rolle
Peha-haft® latexfrei, Rollen, gedehnt 20 m lang, lose in Kartons	6 cm	932 437	03544858	6 Rollen
	8 cm	932 438	03544864	6 Rollen
	10 cm	932 439	03544887	6 Rollen



* Versand-Einheiten in Packungen

Peha-haft® Color latexfrei

Die kohäsive, elastische Fixierbinde in zwei attraktiven Farben

Charakteristik

Kohäsive, elastische Fixierbinden mit zweifachem Hafteffekt durch gekreppte Gewebestruktur und Imprägnierung mit einem latexfreien Synthetik-Polymer; Dehnbarkeit ca. 100 %; geringer Materialverbrauch durch starke Eigenhaftung, bereits wenige Touren ergeben eine sichere, dauerhafte Fixierung; dabei kein Verkleben mit Haut, Haaren oder Kleidung; luftdurchlässig, hautfreundlich und geruchsneutral, da latex-, acrylat- und chlorfrei; in zwei Farben erhältlich.

40 % Baumwolle
31 % Viskose
29 % Polyamid



Anwendung

Für Fixierverbände aller Art, besonders an Gelenken sowie an runden und konischen Körperteilen; zum Fixieren von Polstermaterial, Kanülen usw.; als attraktiver Schutz von Verbänden.



Handelsformen	Artikel-Nr.	PZN	Packungs-inhalt	VE Pack.*
Peha-haft® Color latexfrei, blau, gedehnt 4 m lang, einzeln in Faltschachteln	4 cm	932 500	11124892	1 Binde
	6 cm	932 501	11124923	1 Binde
	8 cm	932 502	11124946	1 Binde
Peha-haft® Color latexfrei, blau, gedehnt 20 m lang, einzeln in Faltschachteln	6 cm	932 473	08886523	1 Rolle
	8 cm	932 474	08886546	1 Rolle
	10 cm	932 475	08886552	1 Rolle
Peha-haft® Color latexfrei, rot, gedehnt 20 m lang, einzeln in Faltschachteln	6 cm	932 460	08886492	1 Rolle
	8 cm	932 461	08886500	1 Rolle
	10 cm	932 462	08886517	1 Rolle

* Versand-Einheiten in Packungen

Peha-crepp®



Die superelastische Fixierbinde mit hohem Naturfaseranteil

Charakteristik

Superelastische Fixierbinden mit hohem Anteil an Naturfasern; gekräuselte Webstruktur; Dehnbarkeit ca. 160 %; ohne Umschlag Touren schnell und einfach anzulegen; zuverlässiger und rutschfester Sitz; durch die offene Gewebestruktur besonders leicht und luftdurchlässig; sterilisierbar (Dampf A 134 °C).

- 41 % Baumwolle
- 29 % Viskose
- 30 % Polyamid

Anwendung

Für Fixierverbände aller Art, besonders an Gelenken sowie an konischen und runden Körperteilen; sehr gut geeignet für Patienten mit empfindlicher Haut.



Handelsformen	Artikel-Nr.	PZN	Packungs-inhalt	VE Pack.*	
Peha-crepp®, gedehnt 4 m lang, einzeln verpackt	4 cm	303 210	03664545	1 Binde	160
	6 cm	303 211	03664551	1 Binde	200
	8 cm	303 212	03664568	1 Binde	200
	10 cm	303 213	03664574	1 Binde	120
	12 cm	303 214	03664580	1 Binde	80
	Peha-crepp®, gedehnt 4 m lang, lose in Kartons	4 cm	303 310	03664597	20 Binden
6 cm		303 311	03664605	20 Binden	10
8 cm		303 312	03664611	20 Binden	10
10 cm		303 313	03664628	20 Binden	6
12 cm		303 314	03664634	20 Binden	4
Peha-crepp®, gedehnt 4 m lang, compact verpackt	6 cm	303 351	03993556	100 Binden	8
	8 cm	303 352	03993562	100 Binden	6
	10 cm	303 353	03993579	100 Binden	6

* Versand-Einheiten in Packungen

Peha®-Mullbinden

Die traditionelle und universelle Fixierbinde



Charakteristik

Mullbinden aus unelastischem Bindengewebe, mit gewebten Kanten, 4 m lang.

- 60 % Viskose
- 40 % Baumwolle

Anwendung

Für Fixierverbände aller Art, z. B. von Wundauflagen oder Polstermaterial; auch geeignet als Trägergewebe für Zinkleimverbände sowie als Notverbände im Rahmen der Ersten Hilfe.

Handelsformen	Artikel-Nr.	PZN	Packungs-inhalt	VE Pack.*	
Peha®-Mullbinden, 4 m lang, einzeln verpackt	4 cm	304 040	10069180	1 Binde	640
	6 cm	304 041	10069197	1 Binde	360
	8 cm	304 042	10069205	1 Binde	320
	10 cm	304 043	10069211	1 Binde	200
	12 cm	304 044	10069228	1 Binde	240
	Peha®-Mullbinden, 4 m lang, lose in Kartons	4 cm	304 050	10069234	20 Binden
6 cm		304 051	10069240	20 Binden	18
8 cm		304 052	10069257	20 Binden	16
10 cm		304 053	10069263	20 Binden	10
12 cm		304 054	10069286	20 Binden	12
15 cm		304 055	10069292	20 Binden	10

* Versand-Einheiten in Packungen

Peha-last®



Die elastische Fixierbinde aus reiner, weicher Baumwolle

Charakteristik

Elastische Mullbinden aus reiner Baumwolle; durch stark überdrehte Kettfäden ca. 65 % dehnbar; ohne Umschlag Touren schnell und einfach anzulegen; zuverlässiger und rutschfester Sitz; sterilisierbar (Dampf A 134 °C).

Anwendung

Für Fixierverbände aller Art, besonders an Gelenken sowie an konischen und runden Körperteilen; sterilisiert auch als direkte Wundaufgabe, z. B. in der Handchirurgie.



Handelsformen	Artikel-Nr.	PZN	Packungs-inhalt	VE Pack.*	
Peha-last®, gedehnt 4 m lang, einzeln verpackt	4 cm	931 521	02060207	1 Binde	160
	6 cm	931 523	00781196	1 Binde	200
	8 cm	931 524	00781204	1 Binde	200
	10 cm	931 525	00781210	1 Binde	120
Peha-last®, gedehnt 4 m lang, lose in Kartons	4 cm	931 548	02060213	20 Binden	8
	6 cm	931 543	01902779	20 Binden	13
	8 cm	931 544	01902785	20 Binden	10
	10 cm	931 545	01902791	20 Binden	8
	12 cm	931 546	01902816	20 Binden	7

* Versand-Einheiten in Packungen

Peha®-Lastotel®

Die hochelastische Fixierbinde aus strapazierfähigem Spezialgewebe



Charakteristik

Hochelastische Fixierbinden, Kettfäden aus gekräuseltem Polyamid und Schussfäden aus hautfreundlichen hydrophilen Fasern; Dehnbarkeit ca. 140 %; ohne Umschlag Touren schnell und einfach anzulegen; zuverlässiger und rutschfester Sitz; sterilisierbar (Dampf A 134 °C).

Anwendung

Für Fixierverbände aller Art, besonders an Gelenken sowie an konischen und runden Körperteilen; durch das strapazierfähige Gewebe sehr gut geeignet zum Umwickeln von Schien.

58 % Polyamid
42 % Viskose

Handelsformen	Artikel-Nr.	PZN	Packungs-inhalt	VE Pack.*	
Peha®-Lastotel®, gedehnt 4 m lang, einzeln verpackt	4 cm	310 100	10069300	1 Binde	160
	6 cm	310 101	10069317	1 Binde	200
	8 cm	310 102	10069323	1 Binde	200
	10 cm	310 103	10069346	1 Binde	120
	12 cm	310 104	10069352	1 Binde	80
Peha®-Lastotel®, gedehnt 4 m lang, lose in Kartons	4 cm	310 110	10069369	20 Binden	8
	6 cm	310 111	10069375	20 Binden	10
	8 cm	310 112	10069464	20 Binden	10
	10 cm	310 113	10069470	20 Binden	6
	12 cm	310 114	10069487	20 Binden	4
Peha®-Lastotel®, gedehnt 4 m lang, compact verpackt	6 cm	310 121	10074086	100 Binden	8
	8 cm	310 122	10074241	100 Binden	6
	10 cm	310 123	10074258	100 Binden	5

* Versand-Einheiten in Packungen

Stülpa®



Größentabelle

- Gr. 0 = Kinderfinger- und Zehenverbände
- Gr. 1 = Fingerverbände
- Gr. 2 = Arm-, Kinderfuß- und Kinderbeinverbände
- Gr. 3 = Hand-, Fuß- und Beinverbände, Kinderkopf- und Achselhöhlenverbände
- Gr. 4 = Kopf-, Bein- und Achselhöhlenverbände, Gesichtsmasken
- Gr. 5 = Kinderrumpf-, Kopf-, Oberschenkel- und Achselhöhlenverbände, Streckverbände
- Gr. 6 = Kinderrumpf- und Oberschenkelverbände
- Gr. 7 = Desault-, Rumpf- und übergroße Oberschenkelverbände
- Gr. 8 = Desault- und Rumpfverbände

Stülpa® Fertigverbände

Für die am häufigsten vorkommenden Verbände steht Stülpa gebrauchsfertig abgemessen, abgebunden und gerollt zur Verfügung.

Stülpa® Rollen

In neun verschiedenen Schlauchbreiten auf Rollen zu 15 m bzw. 6 m für einen bedarfsgerechten Einsatz.

Der nahtlos gestrickte Schlauchverband für den universellen Einsatz

Charakteristik

Nahtlos gestrickter Schlauchverband mit hoher Querdehnbarkeit, ohne Hilfsmittel einfach anzulegen; kann an jeder beliebigen Stelle durchtrennt werden, ohne dass Laufmaschen entstehen; faltenloser Sitz; durch geschlossene Oberfläche auch bei mechanischer Beanspruchung kein Lockern, sodass Wunden oder empfindliche Hautpartien zuverlässig geschützt werden; saugfähig, luftdurchlässig und sterilisierbar (Dampf A 134°C); auf Rollen sowie als Fertigverband erhältlich.

70 % Viskose
30 % Baumwolle

Anwendung

Für Fixierverbände aller Art; für ruhigstellende Verbände (Desault-Verbände) und Extensionsverbände; als Unter- und Überzug bei Zinkleim- oder Gipsverbänden sowie als Hautschutz unter Kompressionsverbänden; in gepolsterter Form als Rucksackverband; zum Überziehen von Schienen und Wattlepolstern.



Handelsformen	Artikel-Nr.	PZN	Packungsinhalt	VE Pack.*	
Stülpa®-Fertigverbände, einzeln verpackt	Gr. 1	427 211	00982919	1 Stück	240
	Gr. 3	427 213	00982983	1 Stück	240
	Gr. 4	427 214	00983043	1 Stück	240
Stülpa®-Fertigverbände, lose in Kartons	Gr. 1	427 261	00982925	50 Stück	12
	Gr. 3	427 253	00983014	10 Stück	33
	Gr. 4	427 254	00983072	10 Stück	24
Stülpa®-Rollen, 15 m lang	Gr. 0 R, 1,5 cm breit	427 110	00982894	1 Rolle	20
	Gr. 1 R, 2,5 cm breit	427 111	00982948	1 Rolle	24
	Gr. 2 R, 6 cm breit	427 112	00982960	1 Rolle	32
	Gr. 3 R, 8 cm breit	427 113	00983037	1 Rolle	28
	Gr. 4 R, 10 cm breit	427 114	00983095	1 Rolle	14
	Gr. 5 R, 12 cm breit	427 115	00983103	1 Rolle	12
Stülpa®-Rollen, 6 m lang	Gr. 6 R, 15 cm breit	427 146	01310412	1 Rolle	10
	Gr. 7 R, 21 cm breit	427 147	00983126	1 Rolle	16
	Gr. 8 R, 24 cm breit	427 148	00983132	1 Rolle	10

* Versand-Einheiten in Packungen

Stülpa®-fix

Der hochelastische Netzschlauchverband mit dem hohen Baumwollanteil



Charakteristik

Hochelastischer Netzschlauchverband mit hohem Baumwollanteil; ohne komplizierte Verbandstechniken schnell und einfach anzulegen; sichere und dauerhafte Fixierung; lässt sich an jeder beliebigen Stelle durchtrennen, ohne weiter einzureißen oder auszufransen; sterilisierbar (Dampf A 134°C).

68 % Baumwolle
24 % Polyamid
8 % Elasthan

Anwendung

Für Fixierverbände aller Art und Größe; zum Fixieren von Polstermaterial an druckgefährdeten Körperstellen.



Größentabelle

Erwachsene

- Größe 1 Finger
- Größe 2 Mehrere Finger
- Größe 3 Hände und Arme
- Größe 4 Beine und Füße
- Größe 5 Kopf
- Größe 6 Torso
- Größe 7 Großer Torso

Kinder

- Größe 1 Finger und Hände
- Größe 2 Hände, Arme, Beine und Füße
- Größe 3 Kopf
- Größe 4 Torso

Handelsformen	Artikel-Nr.	PZN	Packungsinhalt	VE Pack.*	
Stülpa®-fix, gedehnt 25 m lang	Gr. 1	932 541	02175399	1 Rolle	16
	Gr. 2	932 542	02175407	1 Rolle	10
	Gr. 3	932 543	02175413	1 Rolle	8
	Gr. 4	932 544	02175436	1 Rolle	5
	Gr. 5	932 545	02175442	1 Rolle	4
	Gr. 6	932 546	03404850	1 Rolle	3
	Gr. 7	932 547	01609708	1 Rolle	3

* Versand-Einheiten in Packungen

Lastogrip®



Größentabelle

- Gr. A = Kinderhand- und Kinderarmverbände
- Gr. B = kleine Hand-, Arm- und Fußverbände
- Gr. C = mittelgroße Hand-, Arm-, Fuß- und Unterschenkelverbände
- Gr. D = große Hand-, Arm-, Fuß- und Unterschenkelverbände
- Gr. E = Beinverbände, große Arm- und kleine Oberschenkelverbände
- Gr. F = Bein- und Oberschenkelverbände
- Gr. G = große Oberschenkelverbände
- Gr. J = kleine Rumpfverbände
- Gr. K = mittelgroße Rumpfverbände
- Gr. L = große Rumpfverbände
- Gr. M = sehr große Rumpfverbände



Die dauerelastische Schlauchbandage zum Stützen und Fixieren

Charakteristik

Dauerelastische Schlauchbandage mit gleichmäßiger, mittelkräftiger Kompression, ohne Hilfsmittel schnell und einfach anzulegen; faltenloser, straffer Sitz; kann beliebig oft entfernt und wieder angelegt werden; hautfreundlich durch hohen Baumwollanteil; waschbar bis 60°C, sterilisierbar (Dampf A 134°C); weiß und hautfarben.

- 82 % Baumwolle
- 10 % Elastodien
- 8 % Polyamid

Anwendung

Für stärker komprimierende Fixierverbände, z. B. in der Thorax- und Abdominalchirurgie, für Verbände nach Mamma-OP, bei großflächigen Schürfwunden zur Verhinderung von Wundrandödemen bzw. zur Wundentlastung; als Stütz- und Entlastungsverband bei Schädigungen des Haltungs- und Bewegungsapparates; als stützender Wärmeverband bei Arthrosen usw.

Handelsformen	Artikel-Nr.	PZN	Packungs-inhalt	VE Pack.*	
Lastogrip®, Rollen zu 10 m, weiß	Gr. A, 4,2 cm breit	932 170	03765594	1 Rolle	11
	Gr. B, 6,25 cm breit	932 171	03765602	1 Rolle	8
	Gr. C, 6,75 cm breit	932 172	03765619	1 Rolle	7
	Gr. D, 7,5 cm breit	932 173	03765625	1 Rolle	7
	Gr. E, 8,75 cm breit	932 174	03765631	1 Rolle	6
	Gr. F, 10 cm breit	932 175	03765648	1 Rolle	5
	Gr. G, 12 cm breit	932 176	03765654	1 Rolle	4
	Gr. J, 17,5 cm breit	932 177	03765660	1 Rolle	3
	Gr. K, 21,5 cm breit	932 178	03765677	1 Rolle	4
	Gr. L, 32,5 cm breit	932 179	03765683	1 Rolle	3
	Gr. M, 37,5 cm breit	932 180	03765708	1 Rolle	2
Lastogrip®, Rollen zu 10 m, hautfarben	Gr. B, 6,25 cm breit	932 191	03765720	1 Rolle	8
	Gr. C, 6,75 cm breit	932 192	03765737	1 Rolle	7
	Gr. D, 7,5 cm breit	932 193	03765743	1 Rolle	7
	Gr. E, 8,75 cm breit	932 194	03765766	1 Rolle	6
	Gr. F, 10 cm breit	932 195	03765772	1 Rolle	5
Gr. G, 12 cm breit	932 196	03765789	1 Rolle	4	

* Versand-Einheiten in Packungen

Coverflex®

Der ideale Schlauchverband zur Fett-Feucht-Therapie

Charakteristik

Dauerelastischer, hautfreundlicher Schlauchverband aus dichtem, seidenartigem Material, mit eingearbeiteten Elastanfäden für einen sicheren Sitz, ohne Hilfsmittel schnell und einfach anzulegen; kein Durchsickern von Salben, was Wäsche und Kleidung schützt; eingewebter Farbstreifen als Größenkennzeichnung.

- 91 % Viskose
- 5 % Polyamid
- 4 % Elastan



Anwendung

Als Feuchtverband bei der Fett-Feucht-Therapie in der akuten Phase des atopischen Ekzems, als Trockenverband in der chronischen Phase zur Abdeckung von Salben und Cremes auf empfindlicher, ekzematöser Haut; als Unter- oder Überzug bei Zinkleim- und Gipsverbänden; zur sicheren Fixierung von Wundauflagen.



Größentabelle

- Gr. 1 Farbcode rot; für Umfang 8-15 cm bei Kinderarm, -fuß
- Gr. 2 Farbcode grün; für Umfang 10-25 cm bei Kinderbein, Arm
- Gr. 3 Farbcode blau; für Umfang 20-45 cm bei Kinderkopf, Arm, Unterschenkel
- Gr. 4 Farbcode gelb; für Umfang 35-65 cm bei Kinderkopf, -rumpf, Kopf, Bein
- Gr. 5 Farbcode beige; für Umfang 50-120 cm bei Rumpf

Handelsformen	Artikel-Nr.	PZN	Packungs-inhalt	VE Pack.*	
Coverflex®, Rollen zu 10 m	Gr. 1, 3,5 cm breit	932 570	02417075	1 Rolle	36
	Gr. 2, 5 cm breit	932 571	02417218	1 Rolle	24
	Gr. 3, 7,5 cm breit	932 572	02417224	1 Rolle	18
	Gr. 4, 10,75 cm breit	932 573	02417253	1 Rolle	18
	Gr. 5, 17,5 cm breit	932 574	02417276	1 Rolle	12

* Versand-Einheiten in Packungen

Verba®



Der postoperative Stützverband mit flächenhafter Druckverteilung

Charakteristik

Postoperativer Stützverband, 25 cm breit, mit Klettverschluss; Längselastizität und Querstabilität gewährleisten eine gleichmäßige, flächenhafte Druckverteilung, die Atmung wird nicht behindert; sicherer Sitz ohne Wulst- und Faltenbildung; einfaches Anlegen und durch Klettverschluss leichtes Auswechseln der Wundauflagen; Farbstreifen als Größenkennzeichnung; hautverträglich, luftdurchlässig und kochfest.

Anwendung

Zur postoperativen Versorgung nach Thorax- und Abdomenoperationen, zur Entlastung der Wunden, zur Verhinderung von Narbenbrüchen und zur Frühmobilisation des Patienten.



Handelsformen	Artikel-Nr.	PZN	Hilfsmittelnummer	Packungs-inhalt	VE Pack.*
Verba®, 65-75 cm Körperumfang Gr. 1	932 531	01981690	05.11.01.0034	1 Stück	15
Verba®, 75-85 cm Körperumfang Gr. 2	932 532	01981709	05.11.01.0034	1 Stück	15
Verba®, 85-95 cm Körperumfang Gr. 3	932 533	01981715	05.11.01.0034	1 Stück	15
Verba®, 95-105 cm Körperumfang Gr. 4	932 534	01981721	05.11.01.0034	1 Stück	15
Verba®, 105-115 cm Körperumfang Gr. 5	932 535	01981738	05.11.01.0034	1 Stück	15

* Versand-Einheiten in Packungen

Pur-Zellin®

Der gebrauchsfertige Zellstofftupfer von der Rolle

Charakteristik

Zellstofftupfer von der Rolle, gebrauchsfertig vorgestanzt; aus hochgebleichtem Verbandzellstoff nach den Anforderungen des Deutschen Arzneibuches; steril und unsteril erhältlich; für eine praktische und hygienische Entnahme steht die Pur-Zellin-Box zur Verfügung.



Anwendung

Zur Hautreinigung vor Injektionen und Infusionen, als Saugpolster bei kleinen Verletzungen, zur lokalen Desinfektion vor kleineren chirurgischen Eingriffen sowie für viele Arbeiten im Labor.



Pur-Zellin®-Box

Entnahmebehälter für Pur-Zellin-Rollen; schützt die Rollen vor Verschmutzung und sichert eine einfache und schnelle Entnahme.

Pur-Zellin®

500 Tupfer zu 4x5 cm gebrauchsfertig vorgestanzt auf der Rolle, steril und unsteril erhältlich.



Handelsformen	Artikel-Nr.	PZN	Packungs-inhalt	VE Pack.*
Pur-Zellin®, steril, Rolle zu 500 Stück	143 253	03548112	1 Rolle	16
Pur-Zellin®, unsteril, Rolle zu 500 Stück	143 213	03548129	1 Rolle	16
Pur-Zellin®-Box leer	996 857	01479306	1 Stück	1

* Versand-Einheiten in Packungen

Soft-Zellin®

Der besonders weiche Alkoholtupfer zur Hautreinigung

Charakteristik

Alkoholtupfer aus weichem, besonders flexiblem Vliesstoff, gebrauchsfertig getränkt mit 0,4 ml Isopropyl-Alkohol (70 % V/V); ca. 60x30 mm, gefaltet auf 30x30 mm, einzeln in praktischer Siegelverpackung.



Anwendung

Zur Hautreinigung vor subkutanen Injektionen und kapillarer Blutentnahme.



Handelsformen	Artikel-Nr.	PZN	Packungs-inhalt	VE Pack.*
Soft-Zellin®, einzeln eingeseigelt	999 979	06453501	100 Stück	20

* Versand-Einheiten in Packungen

Pagasling®



Der saugstarke Schlinggazetupfer aus reinem Verbandmull

Charakteristik

Schlinggazetupfer aus Verbandmull EN 14079, 20fädig; der aus nur einem Mullstück gefertigte Tupfer ist so verschlungen, dass die Schnittkanten sicher im Inneren liegen; mit hohem Absorptionsvermögen.

Anwendung

Zur Blutstillung und Wundreinigung sowie zur großflächigen Hautdesinfektion.



Handelsformen		Artikel-Nr.	PZN	Packungs-inhalt	VE Pack.*
Pagasling®, steril	Gr. 3, pflaumengroß	481 274	11113397	20x4 Stück	8
	Gr. 3, pflaumengroß	481 284	11113405	20x5 Stück	8
	Gr. 3, pflaumengroß	481 414	11113411	18x20 Stück	3
	Gr. 4, eigroß	481 409	11113428	18x10 Stück	3
	Gr. 5, extragroß	481 400	11113434	18x10 Stück	3
Pagasling®, unsteril	Gr. 1, haselnussgroß	481 292	03509282	1000 Stück	6
	Gr. 2, walnussgroß	481 293	03509299	1000 Stück	6
	Gr. 3, pflaumengroß	481 294	03509307	2x500 Stück	1
	Gr. 4, eigroß	481 299	03509313	4x250 Stück	1
	Gr. 5, extragroß	400 131	03509336	4x250 Stück	1
	Gr. 6, faustgroß	481 295	03509342	4x125 Stück	1

* Versand-Einheiten in Packungen

Pagalong®

Der saugstarke Spitztupfer aus reinem Verbandmull

Charakteristik

Spitztupfer aus Verbandmull EN 14079, 20fädig; konisch geformt, aus nur einem Stück Verbandmull gefertigt; gute Saugfähigkeit; unsteril, in zwei Größen erhältlich.



Anwendung

Bei Eingriffen im HNO-Bereich; zur Tamponade, Blutstillung oder zum Aufsaugen von Sekreten.



Handelsformen		Artikel-Nr.	PZN	Packungs-inhalt	VE Pack.*
Pagalong®, unsteril	Gr. 1, klein	400 259	01902414	500 Stück	6
	Gr. 3, groß	400 260	01902420	500 Stück	6

* Versand-Einheiten in Packungen

Telaprep®



Der fest gedrehte Präpariertupfer mit eingewebtem Röntgenkontrastfaden

Charakteristik

Präpariertupfer aus Verbandmull EN 14079, 24fädig, mit eingewebtem Telatrast® Röntgenkontrastfaden; fest gedreht aus nur einem Mullstück; unsteril in sterilisierbaren Papierbeuteln.

Anwendung

Zum Freipräparieren.



Handelsformen		Artikel-Nr.	PZN	Packungs-inhalt	VE Pack.*
Telaprep®, unsteril	Gr. 1, klein	489 290	02724446	1000 Stück	6
	Gr. 2, mittel	489 291	02724423	1000 Stück	6
	Gr. 3, groß	489 293	02724417	1000 Stück	6

* Versand-Einheiten in Packungen

HARTMANN Tamponadebinden

Die Tamponade aus reiner Baumwolle



Charakteristik

Aus reiner Baumwolle, mit gewebten Kanten; in verschiedenen Breiten zu 5 m Länge, steril in Dosen sowie unsteril erhältlich.

Anwendung

Zum Tamponieren natürlicher Körperhöhlen.

Handelsformen		Artikel-Nr.	PZN	Packungs-inhalt	VE Pack.*
HARTMANN Tamponadebinden, steril, 5 m lang, einzeln in Dosen	1 cm	370 800	01002981	1 Binde	36
	2 cm	370 801	01002998	1 Binde	36
HARTMANN Tamponadebinden, unsteril, 5 m lang	1 cm	370 610	01902472	10 Binden	50
	2 cm	370 611	01902489	10 Binden	25

* Versand-Einheiten in Packungen

Tampograss®

Die Salbentamponade für gewebeschonendes Tamponieren



Charakteristik

Salbentamponaden aus einer mit indifferenten Salbenmasse imprägnierten Tamponadebinde; weich und geschmeidig; weitgehend minimiertes Verklebungsrisiko, lassen sich deshalb ohne Irritation der Wundflächen entfernen.

Anwendung

Zur Tamponade nach Gefäßverödungen in der Nase, bei starkem Nasenbluten, nach Verletzungen der Nase, nach Nasenseptum-

korrekturen, nach in der Abheilungsphase befindlichen akuten und chronischen eitrigen Mittelohrentzündungen, bei Nebenhöhlenentzündungen.

Handelsformen		Artikel-Nr.	PZN	Packungs-inhalt	VE Pack.*
Tampograss®, steril, einzeln in Dosen, 5 m lang	2 cm	230 760	03567724	1 Dose	28
	4 cm	230 765	03567730	1 Dose	24

* Versand-Einheiten in Packungen

Samu-med®



Der hochsaugfähige Wattetampon mit der sicheren Netzumhüllung

Charakteristik

Wattetampons aus hochwertiger Verbandwatte mit weicher Netzschlauchumhüllung und schnurförmiger Verlängerung des Netzschlauches; schnelles Absorptionsvermögen und zuverlässige Speicherkapazität; lassen sich durch die zugkräftige Netzschlauchverlängerung leicht und sicher aus der tamponierten Körperhöhle wieder entfernen.

Anwendung

Zur Tamponade bei Eingriffen im gynäkologischen Bereich.



Handelsformen		Artikel-Nr.	PZN	Packungs-inhalt	VE Pack.*
Samu-med®, steril	2 g, 30 mm Ø	444 102	01124158	10 Stück	16
Samu-med®, unsteril	1 g, 20 mm Ø	440 241	01902147	100 Stück	5
	2 g, 30 mm Ø	440 242	01902153	100 Stück	6
	4 g, 38 mm Ø	440 244	01902176	100 Stück	1
	6 g, 45 mm Ø	440 246	01902182	100 Stück	1

* Versand-Einheiten in Packungen

Celluron®

Das unentbehrliche Saugmaterial für die zahnärztliche Praxis



Charakteristik

Zahnwatterollen aus reiner Baumwollwatte und hochgebleichtem Verbandzellstoff; beide Materialien sind in dünnen Lagen eingerollt, die äußere Schicht ist mit einem indifferenten Kleber verfestigt; besonders saugstark; 38–40 mm lang.

Anwendung

Als Saugmaterial in der zahnärztlichen Praxis, um das örtliche Behandlungsfeld trocken zu halten.



Handelsformen		Artikel-Nr.	PZN	Packungs-inhalt	VE Pack.*
Celluron®, 8 mm Ø	Gr. 1	430 181	01142765	300 g	10
Celluron®, 10 mm Ø	Gr. 2	430 182	01142771	300 g	10
	Gr. 2	430 222	01490779	1500 g	10
Celluron®, 12 mm Ø	Gr. 3	430 183	01142788	300 g	10
	Gr. 3	430 223	01490785	1500 g	10
Celluron®, 14 mm Ø	Gr. 4	430 184	01142794	300 g	10

* Versand-Einheiten in Packungen

HARTMANN Verbandwatte



Die Rollenwatte für Medizin und Hygiene

Charakteristik

Watte aus 50 % Baumwolle und 50 % Viskose; gutes Saugvermögen und hohe Speicherkapazität; Pressrollen, 40 cm breit, mit Papierzwischenlage; in Folienbeuteln.

Anwendung

Als Saug- und Polstermaterial in Medizin und Hygiene.



Handelsformen	Artikel-Nr.	PZN	Packungs-inhalt	VE Pack.*	
HARTMANN Verbandwatte	40 cm breit	110 406	01085027	1000 g	6

* Versand-Einheiten in Packungen

HARTMANN Watte



Die klassische Watte in Zickzack-Lagen

Charakteristik

Watte aus 100 % Baumwolle, durchgehend zickzack gelegt ohne Perforation; im praktischen, wieder-verschließbaren Kordelzugbeutel.

Anwendung

Für viele Anwendungszwecke im häuslichen Bereich; als Saug- und Polstermaterial in Medizin und Hygiene.



Handelsformen	Artikel-Nr.	PZN	Packungs-inhalt	VE Pack.*	
HARTMANN Watte	50 g	110 122	01084915	50 g	20
	100 g	110 123	01084921	100 g	12
	200 g	110 128	03478529	200 g	12
	400 g	110 129	03478535	400 g	18

* Versand-Einheiten in Packungen

Pehazell®

Der Verbandzellstoff mit dem hohen Absorptionsvermögen



Charakteristik

Verbandzellstoff und Zellstoff mit hohem Absorptionsvermögen; erhältlich in verschiedenen Formaten, auf Rollen sowie in Lagen.

Anwendung

Verbandzellstoff hochgebleicht als Saug- und Polstermaterial in der Krankenpflege. Zellstoff ungebleicht für Polster- und Reinigungszwecke in der Krankenpflege.

Handelsformen	Artikel-Nr.	PZN	Packungs-inhalt	VE Pack.*	
Pehazell®, Verbandzellstoff hochgebleicht, Rollen	10 cm	914 443	01085688	100 g	20
	36 cm	272 715	01332767	500 g	10
	36 cm	272 714	01332750	1000 g	6
Pehazell®, Verbandzellstoff hochgebleicht, Lagen	28,5x37 cm	914 166	01085990	1000 g	6
	37x57 cm	273 015	01143747	5 kg	1
	37x57 cm	273 005	01902199	3x5 kg	1
Pehazell®, Zellstoff ungebleicht, Lagen	37x57 cm	914 023	01332773	3x5 kg	1

* Versand-Einheiten in Packungen

PütterPro 2



Polsterbinde, weiß:

Polyester und Elastan, Dehnbarkeit ca. 80 %, gedehnt 6,5 m lang.

Kompressionsbinde, hautfarben:

Polypropylen und Elastan, Dehnbarkeit ca. 150 %, gedehnt 8,2 m lang.



Das effiziente 2-Komponenten-Kompressionssystem für mehrtägige Tragedauer

Charakteristik

Kompressionssystem bestehend aus einer einseitig kohäsiv beschichteten Polsterbinde und einer beidseitig kohäsiv beschichteten Kompressionsbinde, die im Zusammenspiel einen sicheren und rutschfesten, dünnen und trageangenehmen Verband ergeben; sehr hoher Arbeitsdruck mit niedrigem Ruhedruck, auch in Ruhelage zu tragen; beide Binden sind latexfrei, atmungsaktiv und hautfreundlich sowie von Hand abreißbar.

Anwendung

Zur Behandlung der chronisch venösen Insuffizienz mit und ohne Ulcus cruris venosum sowie chronischer Ödeme und einen ABPI von 0,8-1,3; mit bis zu 7 Tagen Tragedauer.



Handelsformen	Artikel-Nr.	PZN	Packungs-inhalt	VE Pack.*
PütterPro 2, Doppelpackung mit Polster- und Kompressionsbinde	931 685	11482930	2 Binden	12
PütterPro 2, Großpackung mit 6 Polster- und 6 Kompressionsbinden	931 686	11661704	12 Binden	3

* Versand-Einheiten in Packungen

Pütter-Verband®*

Die besonders kräftige Kurzzugbinde für die gegenläufige Verband-technik

Charakteristik

Besonders kräftige, textilelastische Kurzzugbinden, Dehnbarkeit ca. 90 %; hoher Arbeitsdruck mit niedrigem Ruhedruck; auch bei Dauerverbänden anhaltende Kompressionswirkung; atmungsaktiv und gut hautverträglich; kochfest und sterilisierbar (Dampf A 134 °C); mit dauerhaft aufgedruckter Waschanleitung am Bindenende; hautfarben.

100 % Baumwolle
* eWZ Medice



Anwendung

Für sehr starke Kompression; nach Varizenverödungen, bei allen akuten und chronischen venösen Stauungsödemen, Ulcera cruris und Thrombophlebitis.



Pütterbinde®*

Einzelbinden in verschiedenen Breiten für einen individuellen, bedarfsgerechten Einsatz.



Pütter-Verband®*

Indikationsbezogene Doppelpackung mit zwei Pütterbinden für die klassische gegenläufige Verbandtechnik bei der Kompressionstherapie venöser Beinleiden; erhältlich mit zwei 10 cm breiten Binden sowie einer 8 cm und 10 cm breiten Binde.



Handelsformen	Artikel-Nr.	PZN	Packungs-inhalt	VE Pack.*
Pütter-Verband®, Doppelpackung, mit Verbandklammern, gedehnt 5 m lang, in Faltschachteln	10 cm	931 801	00844815	2 Binden
	8/10 cm	931 796	03535701	2 Binden
Pütterbinde®, mit Verbandklammern, gedehnt 5 m lang, einzeln in Faltschachteln	6 cm	931 807	01525532	1 Binde
	8 cm	931 808	03469200	1 Binde
	10 cm	931 802	03469217	1 Binde
	12 cm	931 812	03469223	1 Binde
Pütterbinde®, mit Verbandklammern, gedehnt 5 m lang, lose in Kartons	6 cm	931 806	00805554	10 Binden
	8 cm	931 814	04940941	10 Binden
	10 cm	931 803	04940958	10 Binden
	12 cm	931 816	04940964	10 Binden

* Versand-Einheiten in Packungen

PütterFlex



Die besonders dünne, bi-elastische Kurzzugbinde für sehr starke Kompression bei mehr Beweglichkeit

Charakteristik

Besonders dünne, bi-elastische Kurzzugbinden, Längsdehnbarkeit ca. 90 % mit zusätzlicher Querelastizität; hoher Arbeitsdruck mit niedrigem Ruhedruck; auch bei Dauerverbänden anhaltende Kompressionswirkung; atmungsaktiv und gut hautverträglich, durch die Querelastizität besonders einfach anzulegen und bequem zu tragen; kochfest und sterilisierbar (Dampf A 134 °C); mit dauerhaft aufgedruckter Waschanleitung am Bindenende; hautfarben.

100 % Baumwolle

Anwendung

Für sehr starke Kompression; nach Varizenverödungen, bei allen akuten und chronischen venösen Stauungsödemen, Ulcera cruris und Thrombophlebitis.



Handelsformen	Artikel-Nr.	PZN	Packungs-inhalt	VE Pack.*	
PütterFlex, mit Verbandklammern, gedehnt 5 m lang, einzeln in Faltschachteln	8 cm	931 828	03541251	1 Binde	40
	10 cm	931 829	03541268	1 Binde	40
PütterFlex, mit Verbandklammern, gedehnt 5 m lang, lose in Kartons	8 cm	931 832	03542380	10 Binden	8
	10 cm	931 833	03542397	10 Binden	8
PütterFlex Duo, Doppelpackung, mit Verbandklammern, gedehnt 5 m lang, in Faltschachteln	10 cm	931 826	03541239	2 Binden	30
	8/10 cm	931 825	06187011	2 Binden	30

* Versand-Einheiten in Packungen

Pütter-haft

Die kohäsive Kurzzugbinde mit sicherer Haftkraft

Charakteristik

Kohäsive, textilelastische Kurzzugbinden, Dehnbarkeit ca. 60 %; beidseitiger Hafteffekt für rutschfesten Sitz; sehr hoher Arbeitsdruck mit niedrigem Ruhedruck, auch in Ruhelage zu tragen; atmungsaktiv; sterilisierbar (Dampf A 134 °C); hautfarben.

100 % Baumwolle, mit latexfreier Beschichtung



Anwendung

Für starke Kompression; bei chronischen venösen Stauungsödemen, abgeheilten Ulcera cruris, Thrombophlebitis, zur Nachbehandlung von Venenerkrankungen und bei Phleboarthrosis des Knies; als Stütz- und Entlastungsverband bei Schädigungen des Haltungs- und Bewegungsapparates sowie als Sportbandage.

Handelsformen	Artikel-Nr.	PZN	Packungs-inhalt	VE Pack.*	
Pütter-haft, gedehnt 5 m lang, einzeln in Faltschachteln	6 cm	931 840	10109318	1 Binde	60
	8 cm	931 841	10109324	1 Binde	40
	10 cm	931 842	10109330	1 Binde	40
	12 cm	931 843	10109347	1 Binde	30
Pütter-haft, gedehnt 7 m lang, einzeln in Faltschachteln	20 cm	931 845	10109353	1 Binde	12

* Versand-Einheiten in Packungen

Lastodur®

**Lastodur® straff/strong**

Für starke Kompression, Dehnbarkeit ca. 180 %.



85 % Baumwolle, 8 % Elasthan, 7 % Polyamid

Lastodur® weich/soft

Für leichtere Kompression, Dehnbarkeit ca. 170 %.



82 % Baumwolle, 13 % Polyamid, 5 % Elasthan



Die dauerelastische Langzugbinde für haltbare Verbände

Charakteristik

Dauerelastische Langzugbinden mit gut dosierbarer Kompression für anschmiegsame, haltbare Verbände; wie alle Langzugbinden in Ruhelage abzunehmen; atmungsaktiv und hautverträglich, alterungsbeständig, waschbar bis 60°C, sterilisierbar (Dampf A 134°C); hautfarben, mit Verbandklammern; in zwei Ausführungen für unterschiedliche Kompression erhältlich.

Anwendung

Als Stütz- und Entlastungsverband bei Schädigungen des Haltungs- und Bewegungsapparates sowie als Sportbandage.

Handelsformen	Artikel-Nr.	PZN	Packungsinhalt	VE Pack.*
Lastodur® straff/strong, gedehnt 7 m lang, einzeln in Faltschachteln	6 cm	931 663	00614245	1 Binde 60
	8 cm	931 664	00614251	1 Binde 60
	10 cm	931 665	00614268	1 Binde 60
	12 cm	931 666	00614274	1 Binde 30
	20 cm	931 668	01332649	1 Binde 20
Lastodur® straff/strong, gedehnt 7 m lang, lose in Kartons	6 cm	931 631	01852538	10 Binden 20
	8 cm	931 632	01852509	10 Binden 18
	10 cm	931 633	01852515	10 Binden 12
	12 cm	931 634	01852521	10 Binden 10
Lastodur® straff/strong, gedehnt 14 m lang, einzeln in Faltschachteln	10 cm	931 629	02459346	1 Binde 20
Lastodur® weich/soft, gedehnt 7 m lang, einzeln in Faltschachteln	6 cm	931 653	00614280	1 Binde 60
	8 cm	931 654	00614297	1 Binde 60
	10 cm	931 655	00614305	1 Binde 60
	12 cm	931 656	00614311	1 Binde 30
Lastodur® weich/soft, gedehnt 7 m lang, lose in Kartons	6 cm	931 635	01852604	10 Binden 16
	8 cm	931 636	01852662	10 Binden 8
	10 cm	931 637	01852685	10 Binden 12
	12 cm	931 638	01852716	10 Binden 8

* Versand-Einheiten in Packungen

Idealast®-haft

Die kohäsive, dauerelastische Idealbinde mit sicherer Haftkraft

Charakteristik

Kohäsive, dauerelastische Idealbinden mit kurzem Zug, Dehnbarkeit ca. 90 %; beidseitiger Hafteffekt für rutschfesten Sitz; hoher Arbeitsdruck mit niedrigem Ruhedruck, auch in Ruhelage zu tragen; atmungsaktiv; sterilisierbar (Dampf A 134°C).

93 % Baumwolle
5 % Polyamid
2 % Elasthan
mit latexfreier Beschichtung

**Anwendung**

Universell einsetzbar; für mittelkräftige Verbände; zur Prophylaxe und Nachbehandlung von Venenerkrankungen; als Stütz- und Entlastungsverband bei Schädigungen des Haltungs- und Bewegungsapparates sowie als Sportbandage; als komprimierender Wundverband und zum Anwickeln von Schienen.



Handelsformen	Artikel-Nr.	PZN	Packungsinhalt	VE Pack.*
Idealast®-haft, gedehnt 4 m lang, einzeln in Faltschachteln	6 cm	931 110	03517413	1 Binde 40
	8 cm	931 111	03517436	1 Binde 40
	10 cm	931 112	03517442	1 Binde 40
	12 cm	931 113	03517459	1 Binde 40
Idealast®-haft, gedehnt 10 m lang, einzeln in Faltschachteln	6 cm	931 114	03517465	1 Binde 20
	8 cm	931 115	03517471	1 Binde 20
	10 cm	931 116	03517488	1 Binde 20
	12 cm	931 117	03517494	1 Binde 20

* Versand-Einheiten in Packungen

Idealast®-haft Color



Die kohäsive, dauerelastische Idealbinde, die das Leben bunter macht

Charakteristik

Kohäsive, dauerelastische Idealbinden mit kurzem Zug, Dehnbarkeit ca. 90 %; beidseitiger Hafteffekt für rutschfesten Sitz; auch in Ruhelage zu tragen; atmungsaktiv; in zwei Farben.

93 % Baumwolle
5 % Polyamid
2 % Elasthan
mit latexfreier Beschichtung

Anwendung

Universell einsetzbar; für mittelkräftige Verbände; als Stütz- und Entlastungsverband bei Schädigungen des Haltungs- und Bewegungsapparates sowie als Sportbandage; als komprimierender Wundverband und zum Anwickeln von Schienen sowie als attraktiver Schutz von Verbänden aller Art.



Handelsformen	Artikel-Nr.	PZN	Packungs-inhalt	VE Pack.*
Idealast®-haft Color, blau, gedehnt 4 m lang, einzeln in Faltschachteln	4 cm	931 090	10109376	1 Binde 70
	6 cm	931 091	10109382	1 Binde 48
	8 cm	931 092	10109399	1 Binde 27
	10 cm	931 093	10109407	1 Binde 30
Idealast®-haft Color, rot, gedehnt 4 m lang, einzeln in Faltschachteln	4 cm	931 095	10109413	1 Binde 70
	6 cm	931 096	10109436	1 Binde 48
	8 cm	931 097	10109442	1 Binde 27
	10 cm	931 098	10109459	1 Binde 30
Idealast®-haft Color, sortiert zu 5x blau, 5x rot; gedehnt 4 m lang, lose in Kartons	4 cm	931 100	10109465	10 Binden 15
	6 cm	931 101	10109494	10 Binden 12
	8 cm	931 102	10109471	10 Binden 9
	10 cm	931 103	10109488	10 Binden 6

* Versand-Einheiten in Packungen

HARTMANN Idealbinden

Die textilelastische Idealbinde für den universellen Einsatz

Charakteristik

Klassische, textilelastische Idealbinden mit kurzem Zug, nach E DIN 61632-IB-S, schlingkantig, Dehnbarkeit ca. 90 %; hoher Arbeitsdruck mit niedrigem Ruhedruck, auch in Ruhelage zu tragen; kochfest und sterilisierbar (Dampf A 134 °C); die Elastizität der Binden, die beim Tragen nachlässt, kann durch Waschen zurückgewonnen werden.

100 % Baumwolle



Anwendung

Universell einsetzbar; für feste Verbände mit guter Druck- und Massagewirkung; zur Prophylaxe und Nachbehandlung von Venenerkrankungen; als Stütz- und Entlastungsverband bei Schädigungen des Haltungs- und Bewegungsapparates sowie als Sportbandage; als komprimierender Wundverband und zum Anwickeln von Schienen.



Handelsformen	Artikel-Nr.	PZN	Packungs-inhalt	VE Pack.*
HARTMANN Idealbinden, mit Verbandklammern, gedehnt 5 m lang, einzeln verpackt	6 cm	931 755	00516086	1 Binde 200
	8 cm	931 756	00516092	1 Binde 250
	10 cm	931 757	00516100	1 Binde 200
	12 cm	931 758	00516117	1 Binde 100
	15 cm	931 759	00516123	1 Binde 50
	20 cm	931 760	00516146	1 Binde 35
	30 cm	931 761	00516169	1 Binde 12
HARTMANN Idealbinden, ohne Verbandklammern, gedehnt 5 m lang, lose in Kartons	4 cm	931 859	00234531	10 Binden 16
	6 cm	931 860	01574329	10 Binden 20
	8 cm	931 861	01574387	10 Binden 25
	10 cm	931 862	01574393	10 Binden 20
	12 cm	931 754	01574418	10 Binden 10
	15 cm	931 863	00234560	10 Binden 8
	20 cm	931 865	00234614	10 Binden 6
	30 cm	931 866	00234643	10 Binden 4

* Versand-Einheiten in Packungen

Idealast®



Die dauerelastische Idealbinde, die nicht ausleiern

Charakteristik

Dauerelastische Idealbinden mit kurzem Zug, Dehnbarkeit ca. 80 %; kein Ausleiern der Binden beim Tragen; hoher Arbeitsdruck mit niedrigem Ruhedruck, auch in Ruhelage zu tragen; waschbar bis 60 °C, sterilisierbar (Dampf A 134 °C); besonders wirtschaftlich durch lange Lebensdauer der Binden.

69 % Baumwolle
31 % Polyamid

Anwendung

Universell einsetzbar; für mittelkräftige Verbände; zur Prophylaxe und Nachbehandlung von Venenerkrankungen; als Stütz- und Entlastungsverband bei Schädigungen des Haltungs- und Bewegungsapparates sowie als Sportbandage; als komprimierender Wundverband und zum Anwickeln von Schienen.



Handelsformen	Artikel-Nr.	PZN	Packungs-inhalt	VE Pack.*
Idealast®, mit Verbandklammern, gedehnt 5 m lang, einzeln verpackt	6 cm	931 143	02152352	1 Binde 200
	8 cm	931 144	02152369	1 Binde 250
	10 cm	931 145	02152375	1 Binde 200
	12 cm	931 146	02152381	1 Binde 100
	15 cm	931 147	02152398	1 Binde 45
	20 cm	931 148	02152406	1 Binde 30
Idealast®, ohne Verbandklammern, gedehnt 5 m lang, lose in Kartons	6 cm	931 133	02720968	10 Binden 4
	8 cm	931 134	02720974	10 Binden 4
	10 cm	931 135	02720980	10 Binden 4

* Versand-Einheiten in Packungen

Idealflex®

Die leichte Universalbinde mit guter Dauerelastizität



Charakteristik

Dauerelastische Universalbinden, Dehnbarkeit ca. 80 %; leiern beim Tragen nicht aus und ist strapazierfähig; waschbar bis 60 °C, sterilisierbar (Dampf A 134 °C).

45 % Polyester
42 % Baumwolle
13 % Viskose

Anwendung

Universell einsetzbar; für alle Verbände, bei denen eine leichte Kompressionswirkung erwünscht ist; insbesondere für komprimierende Wundverbände.



Handelsformen	Artikel-Nr.	PZN	Packungs-inhalt	VE Pack.*
Idealflex®, gedehnt 5 m lang, einzeln verpackt, 10 Stück in Faltschachtel	6 cm	931 290	07142683	1 Binde 80
	8 cm	931 291	07142708	1 Binde 60
	10 cm	931 292	07142714	1 Binde 50
	12 cm	931 293	07142720	1 Binde 40
	15 cm	931 294	07142737	1 Binde 30
	20 cm	931 295	07142743	1 Binde 20
Idealflex®, gedehnt 5 m lang, lose in Kartons	6 cm	931 283	03854263	10 Binden 8
	8 cm	931 284	03854286	10 Binden 6
	10 cm	931 285	03854292	10 Binden 5
	12 cm	931 286	03854300	10 Binden 4
	15 cm	931 287	03854317	10 Binden 3
	20 cm	931 288	03854323	10 Binden 2

* Versand-Einheiten in Packungen

Varolast®



Die in Längs- und Querrichtung dehnbare Zinkleimbinde

Charakteristik

Gebrauchsfertige Zinkleimbinden, in Längs- und Querrichtung dehnbare; die zweidimensionale Verformbarkeit des Bindengewebes ermöglicht eine exakte Bindenführung ohne Einschneiden und Abschneiden auch an schwierigen anatomischen Übergängen, dadurch Verbesserung des kontinuierlichen Druckabfalls von distal nach proximal; gut hautverträglich und schnell trocknend.

Anwendung

Zur schnellen Entstauung und zur Beseitigung hartnäckiger Ödeme; als komprimierender Dauerverband bei Phlebitiden der tiefen und oberflächlichen Venen, bei postthrombotischen Zuständen, bei Ulcera cruris in nicht nässendem Stadium; als Stützverband in der Allgemein-Orthopädie und in der orthopädischen Nachsorge.



Handelsformen	Artikel-Nr.	PZN	Packungs-inhalt	VE Pack.*
Varolast®, gedehnte Längen zu 5 m, 7 m, 10 m, einzeln in Faltschachteln	10 cm x 5 m	931 574	02388385	1 Binde 16
	10 cm x 7 m	931 573	02391453	1 Binde 20
	10 cm x 10 m	931 575	02388379	1 Binde 20
Varolast®, gedehnte Längen zu 5 m, 7 m, 10 m, einzeln verpackt	10 cm x 5 m	931 576	04569961	16 Binden 1
	10 cm x 7 m	931 577	04569978	20 Binden 1
	10 cm x 10 m	931 578	04569984	20 Binden 1

* Versand-Einheiten in Packungen

Varolast® Plus

Die extra feuchte Zinkleimbinde

Charakteristik

Extra feuchte, gebrauchsfertige Zinkleimbinden mit sämig weichem, gleichmäßig hohem Zinkleimauftrag; in Längsrichtung dehnbare, dadurch ohne Einschneiden und Abschneiden problemlos zu applizieren; gut hautverträglich.



Anwendung

Zur schnellen Entstauung und zur Beseitigung hartnäckiger Ödeme; als komprimierender Dauerverband bei Phlebitiden der tiefen und oberflächlichen Venen, bei postthrombotischen Zuständen, bei Ulcera cruris in nicht nässendem Stadium; als Stützverband in der Allgemein-Orthopädie und in der orthopädischen Nachsorge.



Handelsformen	Artikel-Nr.	PZN	Packungs-inhalt	VE Pack.*
Varolast® Plus, gedehnte Längen zu 5 m, 7 m, 10 m, einzeln in Faltschachteln	8 cm x 5 m	931 582	02667234	1 Binde 16
	10 cm x 7 m	931 583	02667257	1 Binde 20
	10 cm x 10 m	931 585	02667286	1 Binde 20
Varolast® Plus, gedehnte Längen zu 5 m, 7 m, 10 m, einzeln verpackt	8 cm x 5 m	931 589	02667240	16 Binden 1
	10 cm x 7 m	931 587	02667263	20 Binden 1
	10 cm x 10 m	931 588	02667292	20 Binden 1

* Versand-Einheiten in Packungen

Rolta® soft



Die Synthetik-Wattebinde für perfektes Polstern

Charakteristik

Synthetik-Wattebinden aus nicht saugenden, gekräuselten Polyesterfasern; weich und hautfreundlich, luft- und sekretdurchlässig, temperaturausgleichend; faltenfreier Sitz durch rutschsichere Eigenhaftung, einfach anzulegen, von Hand abreißbar; sterilisierbar (Dampf A 121 °C), strahlenindifferent.

Anwendung

Als Polstermaterial unter Gips-, Stütz- und Kompressionsverbänden; zum Polstern von Schienen sowie als Einziehmaterial für Schlauchverbände; besonders für Patienten mit sehr empfindlicher Haut geeignet.



Handelsformen	Artikel-Nr.	PZN	Packungs-inhalt	VE Pack.*	
Rolta® soft, einzeln banderoliert, 3 m lang	6 cm	932 043	04456518	6 Binden	8
	6 cm	932 048	02757486	50 Binden	1
	10 cm	932 045	04456524	6 Binden	6
	10 cm	932 049	02757457	30 Binden	1
	15 cm	932 047	04456530	4 Binden	6
	15 cm	932 050	02757440	20 Binden	1
	25 cm	932 051	02757434	10 Binden	1

* Versand-Einheiten in Packungen

HARTMANN Verbandklammern

Die praktische Fixierung von Bindenenden

Charakteristik

Mit elastischem, latexfreiem Gummiband, das fest mit den stabilen und biegesicheren Metallhäkchen vernietet ist; in zwei Farben erhältlich.

Anwendung

Zur Fixierung der Binde während der Lagerung. Nicht zur Verwendung am Patienten.




Handelsformen	Artikel-Nr.	PZN	Packungs-inhalt	VE Pack.*	
HARTMANN Verbandklammern	weiß	939 620	01083614	50 Stück	60
	hautfarben	939 621	01083560	50 Stück	60


* Versand-Einheiten in Packungen

Professionelle Überwachung der Vitalwerte für zu Hause.

Bei HARTMANN wissen wir: Im Stress des Alltags schieben viele ihre Gesundheitsprobleme auf die lange Bank. Damit riskiert man, dass Symptome übersehen oder nicht ernst genug genommen werden.

Aus diesem Grund bieten wir für den Gebrauch zu Hause professionelle Diagnosegeräte sowie Produkte zur Selbstmedikation an und geben den Menschen so die einfache Möglichkeit, ihre Gesundheitswerte jederzeit zu überprüfen und zu kontrollieren. Weiterhin ermöglichen wir durch ein breites Sortiment an professionellen Wundversorgungsprodukten eine effektive Selbstversorgung anspruchsvoller und kleinerer Wunden nach modernstem medizinischem Stand.

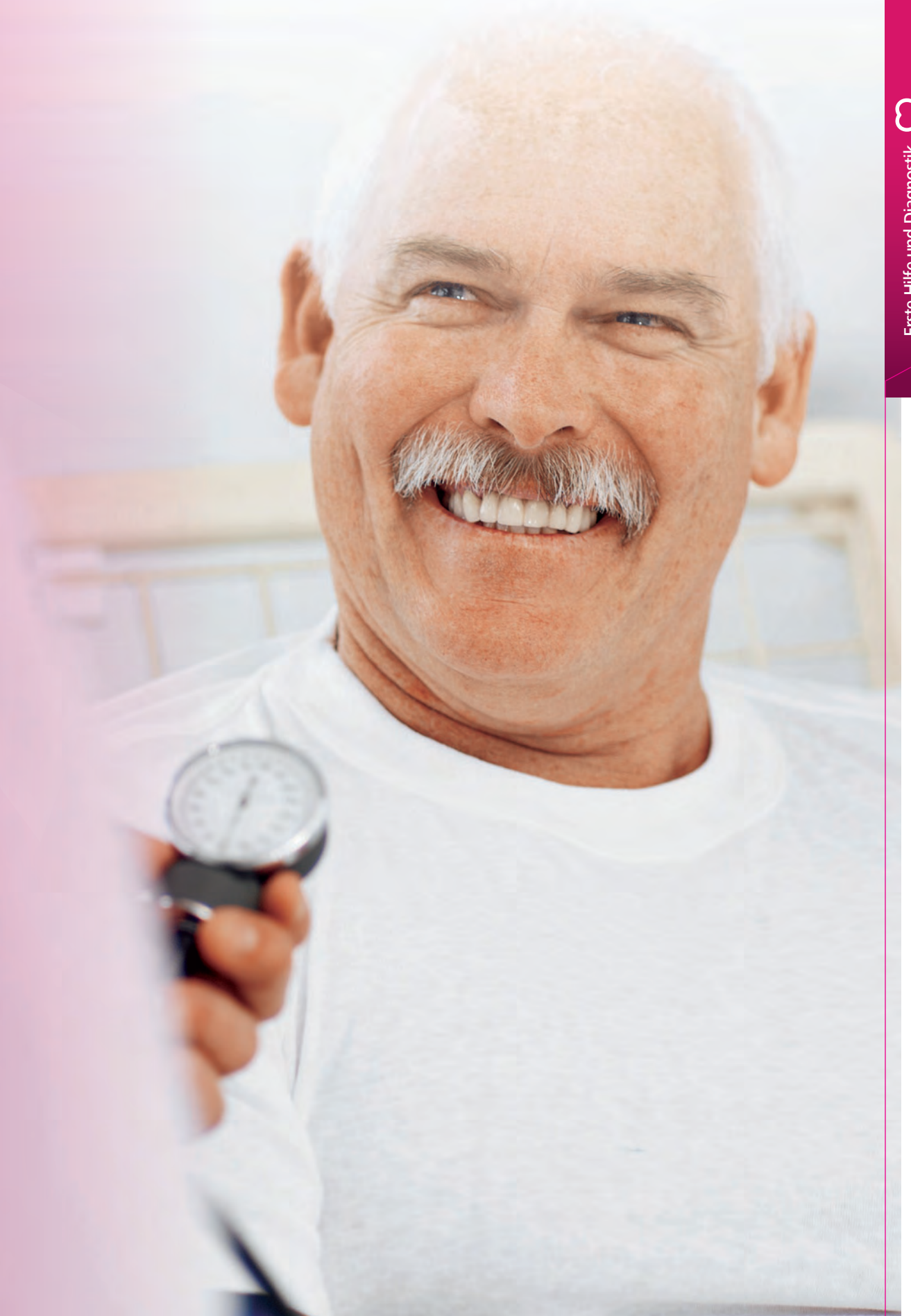

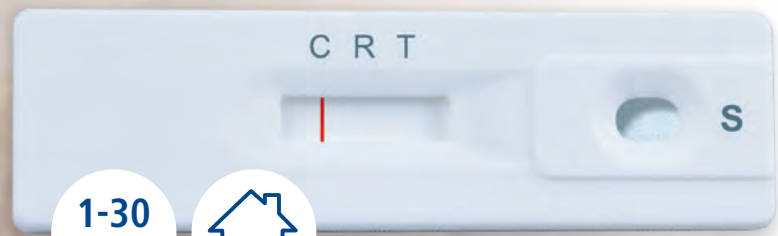

1-30
min 

Veroval® SELBST-TEST

Jetzt Neu:
9 medizinische Selbst-Tests – schnell und zuverlässig für zu Hause.

Immer mehr Menschen übernehmen Verantwortung für die eigene Gesundheit. Statt Gesundheitsfragen lange vor sich her zu schieben, wünschen sich viele – vor allem berufstätige – Menschen bereits vor einem Arztbesuch schnelle und verlässliche Antworten.

Das neue Produkt-Konzept:
Zuverlässige Selbst-Tests für zu Hause

Mit den neuen Veroval® Selbst-Tests bringt HARTMANN jetzt ein breites Sortiment in die Apotheke. Alle Tests basieren auf modernen und bewährten Testmethoden und liefern minutenschnell zuverlässige und exakte Ergebnisse.

Ausgewählt und für gut befunden von ca. 6.000 Testpersonen:
Das Veroval® Selbst-Test Konzept mit den 9 beliebtesten Tests.*

Wissen statt warten.
Schnell und zuverlässig.

- Veroval® Selbst-Tests basieren auf modernen diagnostischen Testverfahren.
- Leistungsbewertungsstudien bestätigen die Zuverlässigkeit und Genauigkeit aller Tests.
- Leicht verständliche Gebrauchsanweisungen erleichtern die korrekte Nutzung.



* QUELLE: Bonsai Marktforschungsinstitut 2015/16, belegt

*Mit Dermaplast® MEDICAL
schließt HARTMANN
die Lücke im Bereich der
effektiven Selbstversorgung
anspruchsvoller Wunden.*

Neu von HARTMANN:

Dermaplast® MEDICAL

Professionelle Wundversorgung für zu Hause.

Dermaplast® MEDICAL bietet ein breites Sortiment ursprünglich für den professionellen Bereich entwickelter Produkte.

Als einer der weltweit führenden Hersteller professioneller Wundversorgungsprodukte für Klinik und Arztpraxis garantiert HARTMANN die Versorgung nahezu jeder Wunde auf dem modernsten medizinischen Stand.

Jetzt neu: Das innovative Indikations-Leitsystem von Dermaplast® MEDICAL

Umfangreiche Marktforschung hat bestätigt*: Indikative Produktbezeichnungen geben dem Verbraucher bestmögliche Sicherheit bei der Produktwahl.

Leicht blutende Wunden

Infektionsgefährdete Wunden

Schnitt- und Platzwunden

Schürfwunden

Brandwunden

Desinfektion / Reinigung /
Zubehör

* QUELLE: Bonsai Marktforschungsinstitut 2015, belegt

Dermaplast® MEDICAL



Das professionelle Wundversorgungs-Programm für zu Hause

Charakteristik

Professionelle Wundversorgungsprodukte für unterschiedlichste Wundarten sowie diverses Fixiermaterial wie Binden, Vlies- oder Folienverbände; eine sterile Wundreinigungslösung und puderfreie Einmalhandschuhe ergänzen das Programm.



Anwendung

Zur gezielten Selbstversorgung von z. B. Brandwunden, Schnitt- und Platzwunden oder infektionsgefährdeten Wunden. Zu einer optimalen Wundversorgung gehört auch die Hände-Desinfektion. Dafür steht das wirksame Hände-Desinfektionsmittel Sterillium® zur Verfügung (Siehe Seite 194).



Handelsformen	Artikel-Nr.	PZN	Packungs-inhalt	VE Pack.*	
Dermaplast® MEDICAL Leicht blutende Wunden, Wundpflaster, steril, einzeln eingeseigelt	7,2x5 cm	531 002	11613361	5 Stück	20
	10x8 cm	531 003	11613378	5 Stück	10
	15x9 cm	531 004	11613384	5 Stück	10
Dermaplast® MEDICAL Leicht blutende Wunden, Wasserdichtes Wundpflaster, steril, einzeln eingeseigelt	7,2x5 cm	531 006	11662052	5 Stück	30
	10x9 cm	531 007	11662069	5 Stück	22
Dermaplast® MEDICAL Infektionsgefährdete Wunden, Antibakterielle Wundauflage, steril, einzeln eingeseigelt	5x5 cm	531 005	11662081	3 Stück	12
Dermaplast® MEDICAL Schnitt- und Platzwunden, Wundnahtstreifen, steril, eingeseigelt zu 6 Stück	6x38 mm	531 111	11662098	2x6 Stück	10
Dermaplast® MEDICAL Schürfwunden, Wundpflaster mit Lipokolloidlage, steril, einzeln eingeseigelt	6x7 cm	531 008	11726705	3 Stück	12
	10x10 cm	531 009	11726711	3 Stück	12
Dermaplast® MEDICAL Brandwunden, Hydrogel-Pflaster, steril, einzeln eingeseigelt	4,5x6,5 cm	531 112	11692610	3 Stück	12
	7,5x10 cm	531 113	11692627	3 Stück	12
Dermaplast® MEDICAL Sterile Mullkompressen, steril, eingeseigelt zu 2 Stück	7,5x7,5 cm	531 001	11605189	5x2 Stück	12
Dermaplast® MEDICAL Wasserdichter Fixierverband	10 cmx2 m	531 014	11613409	1 Stück	24
Dermaplast® MEDICAL Elastischer Fixierverband	10 cmx2 m	531 011	11613390	1 Stück	24
Dermaplast® MEDICAL Selbsthaftende Fixierbinde	6 cmx4 m	531 013	11606556	1 Stück	20
Dermaplast® MEDICAL Einmal-Handschuhe	Small	942 226	11527331	10 Stück	20
	Medium	942 227	11527348	10 Stück	20
	Large	942 228	11527354	10 Stück	20
Dermaplast® MEDICAL Wundreinigungslösung, steril	5 ml	531 015	11684131	30 Stück	12

* Versand-Einheiten in Packungen

Dermaplast® MEDICAL

Dermaplast® MEDICAL Leicht blutende Wunden

Steriles Wundpflaster aus atmungsaktivem Vliesstoff mit saugstarkem, zentralem Wundkissen.



Dermaplast® MEDICAL Leicht blutende Wunden wasserdicht

Steriles Wundpflaster aus keim- und wasserdichter, semipermeabler Folie mit zentralem Wundkissen; schützt vor Wasser und Schmutz, ermöglicht Baden oder Duschen.



Dermaplast® MEDICAL Infektionsgefährdete Wunden

Antibakterielle silberhaltige Salbenkomresse, steril; kein Verkleben mit der Wunde, sekretdurchlässig, weich und geschmeidig, auf Wundgröße zuschneidbar.



Dermaplast® MEDICAL Schnitt- und Platzwunden

Selbstklebende Wundnahtstreifen aus hautfarbenem Vliesstoff, steril; sicher haftend, schmerzlos und ohne Rückstände zu entfernen.




Dermaplast® MEDICAL Schürfwunden

Steriles wasserdichtes Wundpflaster mit saugfähigem, zentralem Wundkissen, das mit einer weichen Lipokolloidlage beschichtet ist. Hydrokolloidpartikel wandeln sich in Verbindung mit Wundsekret in ein Gel um und bewirken ein feuchtes Wundmilieu.



Dermaplast® MEDICAL Brandwunden

Kühlendes Hydrogel-Pflaster, lindert Schmerzen und beschleunigt den Heilungsprozess; steril, wasserdicht und atmungsaktiv, hautfreundlich durch hypoallergenen Kleber; kann mehrere Tage auf der Wunde verbleiben.

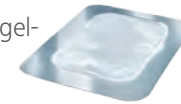

Dermaplast® MEDICAL Sterile Mullkompressen

Saugfähige Mullkompressen mit eingeschlagenen Schnittkanten, luftdurchlässig, weich und geschmeidig; als Tupfer und Komresse insbesondere zur Erstversorgung von verschmutzten, infizierten Wunden geeignet.



Dermaplast® MEDICAL Wasserdichter Fixierverband

Selbstklebender atmungsaktiver Folienverband von der Rolle, schützt vor Schmutz und Keimen; zur vollflächigen, transparenten Fixierung von Wundauflagen; zum Baden und Duschen geeignet.



Dermaplast® MEDICAL Elastischer Fixierverband

Selbstklebender atmungsaktiver Vliesverband von der Rolle zur vollflächigen Fixierung von Wundauflagen; luft- und wasserdampfdurchlässig, besonders weich und anschmiegsam; auch für bewegliche Körperstellen geeignet.



Dermaplast® MEDICAL Selbsthaftende Fixierbinde

Elastische Binde zur Fixierung von Wundauflagen, latexfrei; kein Verkleben mit Haut, Haaren oder Kleidung, hautfreundlich und luftdurchlässig; durch Eigenhaftung keine zusätzliche Fixierung notwendig; auch für leichte Stützverbände geeignet; gedehnt 4 m lang.



Dermaplast® MEDICAL Einmal-Handschuhe

Puder- und latexfreie Einmal-Untersuchungshandschuhe aus Nitril, elastisch und reißfest, rechts und links zu tragen.



Dermaplast® MEDICAL Wundreinigungslösung

Sterile physiologische Kochsalzlösung zum vorsichtigen Säubern von Wunden; in gebrauchsfertigen und bedarfsgerechten Ampullen zu 5 ml.



DermaPlast® Wundpflaster Hydro



Die Wundpflaster, die für ein feuchtes Wundmilieu sorgen

Charakteristik

Hydrogel- und Hydrokolloid-Pflaster für ein feuchtes Wundmilieu; Wundsekret und Keime werden absorbiert, kein Verkleben mit der Wunde, wasserdicht, atmungsaktiv und hautfreundlich; ohne Wundirritation zu entfernen.

Anwendung

Zur feuchten Wundbehandlung; Hydrogel-Pflaster sind besonders geeignet bei kleinen oberflächlichen Verbrennungen und Verbrühungen. Hydrokolloid-Pflaster sind ideal bei Schürfwunden und kleineren Schnittwunden, bei Blasen und auch für Fieberbläschen an Lippen oder Nase, ebenso lassen sich Hühneraugen sehr gut behandeln. Für einen optimalen Behandlungserfolg werden hydrokolloide Pflaster so lange auf der Haut belassen, bis sie sich von selbst lösen.

Handelsformen	Artikel-Nr.	PZN	Packungs-inhalt	VE Pack.*
DermaPlast® Brandwundenpflaster, Hydrogel-Pflaster, steril, einzeln eingesiegelt	536 241	10106314	3 Stück	144
DermaPlast® Kleine Blasen, Hydrokolloid-Pflaster, in Plastikbox	536 231	10994071	6 Stück	50
DermaPlast® Blasen an der Ferse, Hydrokolloid-Pflaster, in Plastikbox	536 211	10994088	6 Stück	50
DermaPlast® Große Blasen XL, Hydrokolloid-Pflaster, in Plastikbox	536 221	10106343	6 Stück	50
DermaPlast® Hühneraugenpflaster, Hydrokolloid-Pflaster, in Plastikbox	536 251	10994094	7 Stück	50
DermaPlast® Zuschneidbares Hydrokolloid-Pflaster, in Plastikbox incl. Schere	536 261	10106366	3 Stück	50
DermaPlast® Strips für kleine Wunden, Hydrokolloid-Pflasterstrips, in Plastikbox	536 271	10106372	7 Stück	50
DermaPlast® Fieberblasen-Pflaster, Hydrokolloid-Pflaster, in Plastikbox incl. Spiegel u. Pinzette	536 281	10106389	16 Stück	50

* Versand-Einheiten in Packungen



DermaPlast® Wundpflaster Hydro

DermaPlast® Brandwundenpflaster

Hydrogel-Pflaster, das sofort für ein ausgewogen feuchtes Wundmilieu sorgt; kühlend und dadurch schmerzlindernd, mit guter Polsterwirkung; die Transparenz ermöglicht eine gute Wundkontrolle; sicherer Sitz durch umlaufende, hypoallergene Fixierfolie.



DermaPlast® Zuschneidbares Hydrokolloid-Pflaster

Hydrokolloid-Pflaster, das austretende Blasenflüssigkeit aufnimmt und dabei eine polsternde Gelschicht bildet; wirkt druckentlastend und schmerzlindernd; das 6,5x9 cm große Hydrokolloid-Pflaster ist mit der beiliegenden Schere auf die gewünschte Größe und Form leicht zuschneidbar; in praktischer, handlicher Plastikbox inkl. kleiner Schere.



DermaPlast® Fieberblasenpflaster

Hydrokolloid-Pflaster, das sich durch seine ergonomische Form den Lippen anpasst und die Bläschen nahezu unsichtbar abdeckt; lindert Juckreiz und Spannungsschmerz, beugt Verkrustungen vor und reduziert die Ansteckungsgefahr; in praktischer, handlicher Plastikbox inkl. Spiegel und Pinzette.



DermaPlast® Blasenpflaster

Hydrokolloid-Pflaster mit verstärktem Hydrokolloid-Kissen, das austretende Blasenflüssigkeit aufnimmt und dabei eine polsternde Gelschicht bildet; wirkt druckentlastend und schmerzlindernd; die abgeflachten hydrokolloiden Ränder lassen sich leicht anmodellieren und schonen die Haut; in verschiedenen Größen für unterschiedlich große Blasen erhältlich.



DermaPlast® Strips für kleine Wunden

Pflasterstrips mit Hydrokolloid-Kissen und transparenter, atmungsaktiver und wasserdichter Fixierfolie; in drei verschiedenen Zuschnitten, wobei sich das Pflaster insbesondere als Fingerverband eignet.



DermaPlast® Hühneraugenpflaster

Hydrokolloid-Pflaster mit verstärktem 10 mm rundem Hydrokolloid-Kissen, das die verhornte Haut aufweicht und so die Entfernung des Hühnerauges erleichtert; wirkt druckentlastend und schmerzlindernd; die abgeflachten hydrokolloiden Ränder lassen sich leicht anmodellieren und schonen die Haut.



DermaPlast® Wundpflaster



Zur optimalen Versorgung kleinerer Verletzungen

Charakteristik

Hypoallergene Wundpflaster in verschiedenen Qualitäten; mit gut saugender Wundaufgabe, die nicht mit der Wunde verklebt; mit hautfreundlichem Kleber, gut haftend und atmungsaktiv.

Anwendung

Zur sanften und schnellen Versorgung kleinerer Verletzungen bei empfindlicher Haut. Bei der Applikation auf trockene und saubere Haut achten.

DermaPlast® Classic

Aus strapazierfähigem Textilgewebe, wasserabweisend imprägniert.

DermaPlast® Elastic

Aus querelastischem Textilgewebe, wasserabweisend imprägniert, flexibel und anschmiegsam; auch als Fingerpflaster in speziellen Zuschnitten für Fingerkuppen und Gelenke erhältlich.

DermaPlast® Water-resistant

Aus dehnbare Polyethylen-Folie, wasserdicht und schmutzabweisend.

DermaPlast® Sensitive

Aus weichem, anschmiegsamem Vliesstoff; für besonders empfindliche Haut geeignet.

DermaPlast® Protect

Aus polsterndem Polyethylen-Schaum mit Microperforation; auch für druckempfindliche Körperstellen geeignet.

DermaPlast® Aqua

Aus transparenter Polyurethan-Folie, atmungsaktiv und dennoch wasserdicht.

DermaPlast® Kids

Kinderpflaster mit fröhlichen Tiermotiven, aus strapazierfähiger Polyethylen-Folie, wasser- und schmutzabweisend.

DermaPlast® Kids Antibacterial

Knie- und Ellbogenpflaster für Kinder; aus einem wasserdichten Film mit einer Silber enthaltenden Wundaufgabe, die antibakterielle Eigenschaften besitzt.

DermaPlast® Comfort

Aus elastischem und flexiblem Material, wasserfest, schmutzabweisend und luftdurchlässig.



Handelsformen	Artikel-Nr.	PZN	Packungs-inhalt	VE Pack.*
DermaPlast® Classic 6x10 cm	535 001	10106142	10 Stück	200
DermaPlast® Elastic 6x10 cm	535 241	10106159	10 Stück	200
DermaPlast® Elastic 8x10 cm	535 211	10106165	10 Stück	200
DermaPlast® Elastic, Pflasterstrips sortiert, 2 Größen	535 231	10106171	20 Stück	200
DermaPlast® Elastic, Fingerpflaster sortiert, 4 Größen	535 281	10106188	16 Stück	200
DermaPlast® Water resistant, Pflasterstrips sortiert, 2 Größen	535 121	10106219	20 Stück	200
DermaPlast® Water resistant, Pflasterstrips sortiert, 5 Größen	535 131	10106225	40 Stück	200
DermaPlast® Sensitive 6x10 cm	535 301	10106194	10 Stück	200
DermaPlast® Sensitive, Pflasterstrips 19x72 mm	535 321	10106202	20 Stück	200
DermaPlast® Protect 6x10 cm	535 401	10106231	10 Stück	160
DermaPlast® Protect, Pflasterstrips 19x72 mm	535 421	10106248	20 Stück	200
DermaPlast® Aqua, Pflasterstrips sortiert, 3 Größen	535 501	10106254	20 Stück	200
DermaPlast® Kids, Pflasterstrips sortiert, 2 Größen	535 621	10825256	20 Stück	200
DermaPlast® Kids Antibacterial, Knie und Ellbogen 7,6x7,6 cm	535 611	10106277	8 Stück	160
DermaPlast® Comfort, Pflasterstrips sortiert, 2 Größen	535 811	10106283	20 Stück	200

* Versand-Einheiten in Packungen

DermaPlast® ProtectSpray⁺

Das transparente Sprühpflaster mit dem Plus eines UV-Schutzes



Charakteristik

Sprühpflaster für eine hauchdünne, transparente Wundabdeckung, alkoholfrei; schützt die Wunde vor Schmutz, Bakterien und Wasser und bietet zusätzlich einen Basisschutz vor UVA und UVB Strahlung; schnell trocknend und geruchsarm, hautfreundlich und atmungsaktiv, löst sich von selbst ab; für ca. 70 Anwendungen.

Anwendung

Zur schnellen und bequemen Abdeckung von trockenen, oberflächlichen Schürf-, Kratz- und Schnittwunden. Bei der Applikation auf trockene und saubere Haut achten.



Handelsformen	Artikel-Nr.	PZN	Packungs-inhalt	VE Pack.*
DermaPlast® ProtectSpray ⁺ , Pumpspray 21,5 ml	811 420	03546277	1 Stück	20

* Versand-Einheiten in Packungen

DermaPlast® Erste-Hilfe-Sets



Die handlichen Begleiter bei allen Freizeitaktivitäten

Charakteristik

Erste-Hilfe-Taschen mit unterschiedlichem Sortiment an Erste-Hilfe-Material für Sport und Freizeit oder auf Reisen; aus strapazierfähigem Nylongewebe; durch Gürteltaschen mit Klettverschluss überall leicht zu befestigen; Vordertasche mit Reißverschluss; einzeln in Folie eingeschweißt.

DermaPlast® Erste-Hilfe-Set

Inhalt:

- 1 Schere
- 1 Verbandpäckchen, 80x100 mm
- 1 Fixierpflaster, 2,5 cm x 1 m
- 1 Fixierbinde, 6 cm x 4 m
- 1 Fixierbinde, 8 cm x 4 m
- 8 Wundpflaster, 10x6 cm
- 12 Pflasterstrips, 19x72 mm
- 2 Kompressen, 7,5x7,5 cm
- 1 Reinigungstuch
- 4 Erste-Hilfe-Handschuhe



DermaPlast® Medical Erste-Hilfe-Set travel

Inhalt:

- 1 Schere
- 1 Pinzette
- 1 Fixierpflaster, 1,25 cm x 5 m
- 1 Verbandpäckchen, 80x100 mm
- 1 Fixierbinde, 6 cm x 4 m
- 1 Fixierbinde, 8 cm x 4 m
- 8 Wundpflaster, 10x6 cm
- 8 Pflasterstrips in 2 Größen
- 2 Wundkompressen, 7,5x7,5 cm
- 1 Gelkompressen, 5x7,5 cm
- 2 Reinigungstücher
- 4 Erste-Hilfe-Handschuhe
- 1 Rettungsdecke



Handelsformen		Artikel-Nr.	PZN	Packungs-inhalt	VE Pack.*
DermaPlast® Erste-Hilfe-Set	klein	535 951	03797884	1 Stück	10
DermaPlast® Medical Erste-Hilfe-Set travel	groß	535 961	03797878	1 Stück	6

* Versand-Einheiten in Packungen

Veroval® Gluten-Intoleranz

Schnelltest zum Nachweis von Zöliakie

Charakteristik

Der Gluten-Intoleranz Schnelltest beruht auf dem Nachweis von Transglutaminase-Antikörpern (IgA Antikörper), die auf eine Gluten-Intoleranz hinweisen. Er bietet die Genauigkeit und Sicherheit der modernen Diagnostik für die Nutzung zu Hause. Testmedium: Blut, Testergebnis nach 10 Minuten mit einer Genauigkeit von 98 %.



Inhalt:

- 1 Testkassette im Folienbeutel
- 1 Pipette
- 1 Gefäß mit Probenverdünnungspuffer
- 2 Automatik-Stechhilfen (1 Ersatz) mit steriler Lanzette zur Abnahme der Blutprobe
- 1 Glas-Kapillarröhrchen im Schutzgefäß
- 1 Alkoholtupfer
- 1 Pflaster
- 1 Gebrauchsanweisung



Anwendung

Zur Abklärung unklarer Magen-Darmbeschwerden wie Blähbauch oder Durchfall. Als Hinweis, ob die Symptome durch eine Unverträglichkeit gegenüber Gluten verursacht werden. Die detaillierte Gebrauchsanweisung ist korrekt durchzuführen, um das Testergebnis nicht zu verfälschen.

Handelsformen	Artikel-Nr.	PZN	Packungs-inhalt	VE Pack.*
Veroval® Gluten-Intoleranz	924 202	11648247	1 Stück	63

* Versand-Einheiten in Packungen



Durch Leistungsbewertungsstudien belegte Genauigkeit von 98 %

Veroval® Allergie-Erkennung



Schnelltest zum Nachweis von Katzenhaar-, Gräserpollen- und Staubmilbenallergie

Charakteristik

Mit dem Schnelltest Allergie-Erkennung kann ein erhöhter Allergie-Antikörper-Spiegel vom Typ Immunglobulin E (IgE) gegen Katzenhaar, Hausstaubmilben und Gräserpollen gemessen werden. Er bietet die Genauigkeit und Sicherheit der modernen Diagnostik für die Nutzung zu Hause.
Testmedium: Blut, Testergebnis nach 30 Minuten mit einer Genauigkeit von mehr als 94 %.

Inhalt:

- 1 Testkassette mit einem Trockenmittel im Folienbeutel
- 1 Gefäß mit Reagenzlösung
- 1 Automatik-Stechhilfe mit steriler Lanzette zur Abnahme der Blutprobe
- 1 Pipette
- 1 Alkoholtupfer
- 1 Pflaster
- 1 Gebrauchsanweisung

Anwendung

Zur Abklärung allergietypischer Beschwerden wie Niesen, verstopfter Nase oder gereizter Augen. Als Hinweis, ob die Symptome durch ein erhöhtes Allergierisiko gegen Katzenhaar, Gräserpollen oder Hausstaubmilben entstehen. Die detaillierte Gebrauchsanweisung ist korrekt durchzuführen, um das Testergebnis nicht zu verfälschen.



Handelsformen	Artikel-Nr.	PZN	Packungs-inhalt	VE Pack.*
Veroval® Allergie-Erkennung	924 222	11648276	1 Stück	42

* Versand-Einheiten in Packungen



Durch Leistungsbewertungsstudien belegte Genauigkeit von mehr als 94 %



Veroval® Harnwegsentzündung

Schnelltest zum Nachweis von weißen Blutkörperchen, Nitrit und Protein

Charakteristik

Der Schnelltest Harnwegsentzündung beruht auf dem Nachweis von weißen Blutkörperchen, Nitrit und Eiweiß im Harn. Er bietet die Genauigkeit und Sicherheit der modernen Diagnostik für die Nutzung zu Hause.

Testmedium: Urin, Testergebnis nach 1 Minute mit einer Zuverlässigkeit von mehr als 97 %.



Inhalt:

- 2 Folienverpackungen mit je 1 Teststreifen und 1 Trockenmittel
- 1 Gebrauchsanweisung



Anwendung

Zur Abklärung unklarer Blasenbeschwerden wie z. B. leichtem Brennen beim Wasserlassen oder Bauchschmerzen. Als Hinweis, ob die Symptome durch eine Harnwegsinfektion verursacht werden. Die detaillierte Gebrauchsanweisung ist korrekt durchzuführen, um das Testergebnis nicht zu verfälschen.

Handelsformen	Artikel-Nr.	PZN	Packungs-inhalt	VE Pack.*
Veroval® Harnwegsentzündung	924 122	11648224	2 Stück	63

* Versand-Einheiten in Packungen



Durch Leistungsbewertungsstudien belegte Zuverlässigkeit von mehr als 97 %



Veroval® Eisenmangel



Schnelltest zum Nachweis einer niedrigen Eisenkonzentration

Charakteristik

Der Eisenmangel Schnelltest beruht auf dem immunologischen Nachweis des Proteins Ferritin im Blut, welches Eisen in den Zellen speichert. Er bietet die Genauigkeit und Sicherheit der modernen Diagnostik für die Nutzung zu Hause.
Testmedium: Blut, Testergebnis nach 10 Minuten mit einer Genauigkeit von mehr als 95 %.

Inhalt:

- 1 Testkassette im Folienbeutel
- 1 Pipette
- 1 Gefäß mit Probenverdünnungspuffer
- 2 Automatik-Stechhilfen (1 Ersatz) mit steriler Lanzette zur Abnahme der Blutprobe
- 1 Glas-Kapillarröhrchen im Schutzgefäß
- 1 Alkoholtupfer
- 1 Pflaster
- 1 Gebrauchsanweisung

Anwendung

Zur Abklärung typischer Anzeichen für zu wenig Eisen wie z. B. häufige Müdigkeit, Blässe oder Kopfschmerzen. Als Hinweis, ob die Symptome durch einen Eisenmangel verursacht sein können. Die detaillierte Gebrauchsanweisung ist korrekt durchzuführen, um das Testergebnis nicht zu verfälschen.



Handelsformen	Artikel-Nr.	PZN	Packungs-inhalt	VE Pack.*
Veroval® Eisenmangel	924 102	11648218	1 Stück	63

* Versand-Einheiten in Packungen

10 min 
Genauigkeit > 95 %



Durch Leistungsbewertungsstudien belegte Genauigkeit von mehr als 95 %



Veroval® Schwangerschaft

Frühtest mit Wochenbestimmung

Charakteristik

Der Frühtest Schwangerschaft mit Wochenbestimmung beruht auf dem immunologischen Nachweis des Schwangerschaftshormons hCG (humanes Choriongonadotropin) ab dem 10. Tag nach der Befruchtung. Er bietet die Genauigkeit und Sicherheit der modernen Diagnostik für die Nutzung zu Hause.
Testmedium: Urin, Testergebnis nach 5 Minuten mit einer Zuverlässigkeit von mehr als 99 %.



Inhalt:

- 1 Folienverpackung mit Teststab und Trockenmittel
- 1 Gebrauchsanweisung



Anwendung

Bereits ab dem 10. Tag nach der Befruchtung, also noch vor Ausbleiben der Periode, kann eine Schwangerschaft sowie die Schwangerschaftswoche festgestellt werden. Die detaillierte Gebrauchsanweisung ist korrekt durchzuführen, um das Testergebnis nicht zu verfälschen.

Handelsformen	Artikel-Nr.	PZN	Packungs-inhalt	VE Pack.*
Veroval® Schwangerschaft	924 322	11648282	1 Stück	63

* Versand-Einheiten in Packungen

5 min 
Zuverlässigkeit > 99 %



Durch eine Leistungsbewertungsstudie belegte Zuverlässigkeit von mehr als 99 %



Veroval® Zeugungsfähigkeit



Schnelltest zum Nachweis der Spermienkonzentration in der Samenflüssigkeit

Charakteristik

Der Schnelltest Zeugungsfähigkeit ermittelt, ob die Spermienanzahl im Normalbereich liegt, die laut WHO bei mindestens 20 Millionen/ml liegt. Er bietet die Genauigkeit und Sicherheit der modernen Diagnostik für die Nutzung zu Hause.
Testmedium: Samenflüssigkeit, Testergebnis nach 7 Minuten mit einer Genauigkeit von mehr als 95 %.

Inhalt:

- 1 Testkassette im Folienbeutel
- 1 Flasche mit Probenverdünnungspuffer
- 1 Spritze zum Aufziehen der Samenflüssigkeit
- 1 Becher zum Sammeln der Samenflüssigkeit
- 1 Gebrauchsanweisung

Anwendung

Zur Abklärung, ob eine unterdurchschnittliche Spermienanzahl in der Samenflüssigkeit der Grund dafür sein könnte, dass es nicht zu einer Zeugung kommt. Die detaillierte Gebrauchsanweisung ist korrekt durchzuführen, um das Testergebnis nicht zu verfälschen.



Handelsformen	Artikel-Nr.	PZN	Packungs-inhalt	VE Pack.*
Veroval® Zeugungsfähigkeit	924 362	11648299	1 Stück	42

* Versand-Einheiten in Packungen



Genauigkeit > 95 %



Durch Leistungsbewertungsstudien belegte Genauigkeit von mehr als 95 %



Veroval® Cholesterin

Schnelltest zur Bestimmung des Cholesterinwertes

Charakteristik

Der Cholesterin Schnelltest beruht auf der Messung des Gesamtcholesterins im Blut. Er bietet die Genauigkeit und Sicherheit der modernen Diagnostik für die Nutzung zu Hause.
Testmedium: Blut, Testergebnis nach 3 Minuten mit einer Genauigkeit von mehr als 96 %.



Inhalt:

- 1 Folienverpackung mit Testscheibe und Trockenmittel
- 2 Automatik-Stechhilfen (1 Ersatz) mit steriler Lanzette zur Abnahme der Blutprobe
- 1 Pflaster
- 1 Gebrauchsanweisung

Anwendung

Zur schnellen Bestimmung des Cholesterinspiegels. Die detaillierte Gebrauchsanweisung ist korrekt durchzuführen, um das Testergebnis nicht zu verfälschen.

Handelsformen	Artikel-Nr.	PZN	Packungs-inhalt	VE Pack.*
Veroval® Cholesterin	924 042	11648201	1 Stück	63


* Versand-Einheiten in Packungen



Genauigkeit > 96 %



Durch eine Leistungsbewertungsstudie belegte Genauigkeit von mehr als 96 %

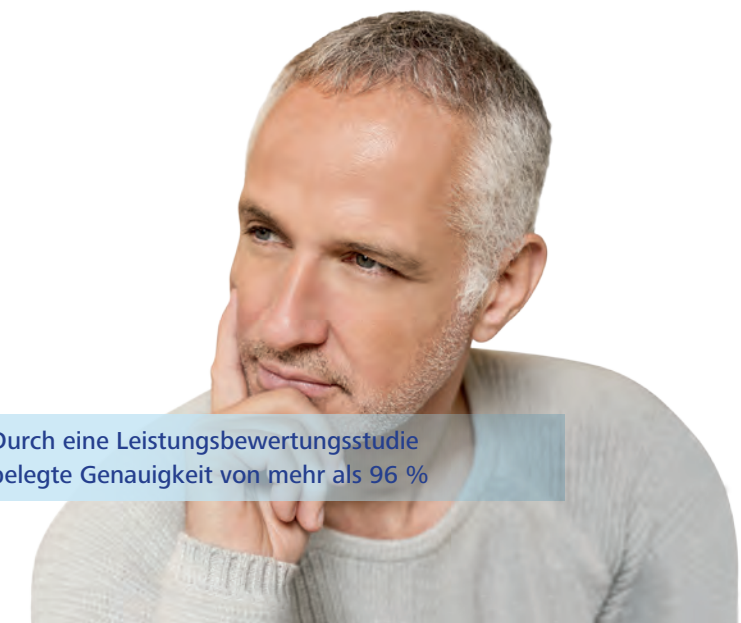

Veroval® Magen-Vorsorge



Schnelltest zum Nachweis des Bakteriums Helicobacter Pylori

Charakteristik

Der Magen-Vorsorge Schnelltest beruht auf dem immunologischen Nachweis von Antikörpern gegen das Helicobacter Pylori Bakterium im Blut. Er bietet die Genauigkeit und Sicherheit der modernen Diagnostik für die Nutzung zu Hause.
Testmedium: Blut, Testergebnis nach 10 Minuten mit einer Genauigkeit von mehr als 96 %.

Inhalt:

- 1 Testkassette im Folienbeutel
- 1 Pipette
- 1 Gefäß mit Probenverdünnungspuffer
- 2 Automatik-Stechhilfen (1 Ersatz) mit steriler Lanzette zur Abnahme der Blutprobe
- 1 Glas-Kapillarröhrchen im Schutzgefäß
- 1 Alkoholtupfer
- 1 Pflaster
- 1 Gebrauchsanweisung

Anwendung

Zur Abklärung unklarer Beschwerden wie Magenschmerzen und Übelkeit, ob die Ursache im Vorhandensein des Bakteriums Helicobacter Pylori liegen kann, um ggf. ärztlichen Rat einzuholen. Die detaillierte Gebrauchsanweisung ist korrekt durchzuführen, um das Testergebnis nicht zu verfälschen.



Handelsformen	Artikel-Nr.	PZN	Packungs-inhalt	VE Pack.*
Veroval® Magen-Vorsorge	924 002	11648170	1 Stück	63

* Versand-Einheiten in Packungen

10 min 
Genauigkeit > 96 %



Durch Leistungsbewertungsstudien belegte Genauigkeit von mehr als 96 %



Veroval® Darm-Vorsorge

Schnelltest zum Nachweis von verborgenem Blut im Stuhl

Charakteristik

Der Darm-Vorsorge Schnelltest beruht auf dem Nachweis von humanem Hämoglobin (Hb) ab einem Grenzwert von 40 ng/ml. Er bietet die Genauigkeit und Sicherheit der modernen Diagnostik für die Nutzung zu Hause.
Testmedium: Stuhl, Testergebnis nach 5 Minuten mit einer Genauigkeit von mehr als 98 %.



Inhalt:

- 1 Testkassette im Folienbeutel
- 1 Röhrchen mit Probenverdünnungspuffer und integriertem Probe-Entnahmestick
- 1 Stuhlauffanghilfe für die Entnahme der Stuhlprobe
- 2 Einweghandschuhe
- 1 Gebrauchsanweisung

Anwendung

Zur Früherkennung von nicht sichtbarem Blut im Stuhl, um ggf. ärztlichen Rat einzuholen. Die detaillierte Gebrauchsanweisung ist korrekt durchzuführen, um das Testergebnis nicht zu verfälschen.

Handelsformen	Artikel-Nr.	PZN	Packungs-inhalt	VE Pack.*
Veroval® Darm-Vorsorge	924 022	11648193	1 Stück	63

* Versand-Einheiten in Packungen

5 min 
Genauigkeit > 98 %



Durch Leistungsbewertungsstudien belegte Genauigkeit von mehr als 98 %



Tensoval® duo control



Das Premium-Blutdruckmessgerät mit einzigartiger Duo Sensor Technology, Erkennung von unregelmäßigen Herzschlägen und innovativer Manschette

Charakteristik

Vollautomatisches Oberarm-Blutdruckmessgerät mit Duo Sensor Technology, einer Kombination aus oszillometrischem und Korotkoff-Messverfahren mit besonders hoher Präzision sowie der Comfort Air Technology, einer speziellen Aufpumptechnologie mit individuellem Aufpumpdruck; extra große Digitalanzeige; Speicherfunktion für 2x60 Messwerte und Mittelwert inkl. Datum und Uhrzeit für zwei Benutzer, plus Gastmodus; die Speicherfunktion unterscheidet zudem Morgen- und Abendmesswerte; mit visueller Anzeige bei unregelmäßigem Herzschlag; automatische Abschaltung; Anschlussbuchse für Netzadapter; Anschlussmöglichkeit für Computer; austauschbare langlebige Batterien; innovative Manschette, die korrektes Anlegen unterstützt. Aufbewahrungsetui aus weichem Neopren-Material.

Anwendung

Zur Blutdruckmessung am Oberarm, insbesondere bei Personen mit Bluthochdruck und diversen Arten von Herzrhythmusstörungen; die Auswahl der richtigen Manschettengröße, abhängig vom Oberarmumfang, muss erfolgen, um ein korrektes Messergebnis zu gewährleisten.



Handelsformen	Artikel-Nr.	PZN	Hilfsmittelnummer	Packungs-inhalt	VE Pack.*
Tensoval® duo control, mit Zugbügelmanschette 22-32 cm	900 221	09243098	21.28.01.2098	1 Stück	4
Tensoval® duo control Large, mit Zugbügelmanschette 32-42 cm	900 231	09243106	21.28.01.2097	1 Stück	4

* Versand-Einheiten in Packungen

Tensoval® duo control Zubehör

Zubehör für das Blutdruckmessgerät Tensoval® duo control

Charakteristik

Für das Oberarm-Messgerät Tensoval duo control sind Ersatzmanschetten mit Comfort Air Technology als Zubehör erhältlich. So ist auch bei mehreren Benutzern mit unterschiedlichen Oberarmumfängen eine korrekte Blutdruckkontrolle sichergestellt. Um die richtige Manschettengröße zu ermitteln, wird an der stärksten Stelle des Oberarms der Umfang gemessen. Zwei Manschettentypen werden angeboten.

Als weiteres Zubehör steht mit Tensoval cardio control online eine USB-gestützte Web-Applikation für eine effiziente Blutdruckkontrolle zur Verfügung.



Tensoval® duo control Schalenmanschette

Besonders leicht anzulegen, da die vorgeformte und flexible Manschette einfach nur um den Oberarm gestülpt wird. Sie wird in einer Größe angeboten.



Tensoval® duo control Zugbügelmanschette

Weiche Flachmanschette, die durch ihren speziellen Zuschnitt für intuitiv richtiges Anlegen mittels des Zugbügels sorgt. Sie steht in drei Größen zur Verfügung.

Tensoval® cardio control online

USB-gestützte Web-Applikation für effiziente Blutdruckkontrolle; ermöglicht den Transfer persönlicher Blutdruckmesswerte vom Tensoval duo control Blutdruckmessgerät auf das Tensoval Online-Portal; bietet eine einfache Bedienung für Funktionen wie Blutdruckkontrolle, -Analyse und Ausdrucken der Messwerte; einfache Datenübertragung über USB; für alle üblichen Betriebssysteme; einfache und sichere Datenübertragung.



Handelsformen	Artikel-Nr.	PZN	Packungs-inhalt	VE Pack.*
Tensoval® duo control 22-32 cm Schalenmanschette	900 244	09299696	1 Stück	10
Tensoval® duo control Small 17-22 cm Zugbügelmanschette	900 241	09299650	1 Stück	10
Tensoval® duo control Medium 22-32 cm Zugbügelmanschette	900 242	09299667	1 Stück	10
Tensoval® duo control Large 32-42 cm Zugbügelmanschette	900 243	09299673	1 Stück	10
Tensoval® cardio control online, USB-Kit	900 291	10256255	1 Stück	4

* Versand-Einheiten in Packungen

Tensoval® comfort



Das Blutdruckmessgerät für die sichere Messung am Oberarm

Charakteristik

Vollautomatisches Oberarm-Blutdruckmessgerät mit oszillometrischem Messverfahren; Erkennung von unregelmäßigem Herzschlag; extra große Digitalanzeige; Speicherfunktion für 2x60 Messwerte und Mittelwert inkl. Datum und Uhrzeit für zwei Benutzer; Abschaltautomatik; Anschlussbuchse für Netzgerät; mit auswechselbaren Langzeit-Batterien; in zwei Ausführungen mit unterschiedlichen Manschetten-Größen; Aufbewahrungsetui aus weichem Neopren-Material.

Anwendung

Zur Blutdruckmessung am Oberarm; die Auswahl der richtigen Manschettengröße, abhängig vom Oberarmumfang, muss erfolgen, um ein korrektes Messergebnis zu gewährleisten.



Handelsformen	Artikel-Nr.	PZN	Hilfsmittelnummer	Packungs-inhalt	VE Pack.*
Tensoval® comfort, mit Zugbügelmanschette 22-32 cm	900 171	00453084	21.28.01.2016	1 Stück	4
Tensoval® comfort Large, mit Zugbügelmanschette 32-42 cm	900 181	00453204	21.28.01.2017	1 Stück	4

* Versand-Einheiten in Packungen

Tensoval® comfort Zubehör

Zubehör für das Blutdruckmessgerät Tensoval® comfort

Charakteristik

Für das Oberarm-Messgerät Tensoval comfort sind Ersatzmanschetten als Zubehör erhältlich. So ist auch bei mehreren Benutzern mit unterschiedlichen Oberarmumfängen eine korrekte Blutdruckkontrolle sichergestellt. Zwei Manschetten-Typen werden angeboten.

Anwendung

An der stärksten Stelle des Oberarms den Umfang messen, um die richtige Manschettengröße zu ermitteln, damit ein korrektes Messergebnis gewährleistet ist.



Tensoval® comfort Schalenmanschette

Besonders leicht anzulegen, da die vorgeformte und flexible Manschette einfach nur um den Oberarm gestülpt wird. Sie wird in einer Größe angeboten.



Tensoval® comfort Zugbügelmanschette

Weiche Flachmanschette, die mittels des Zugbügels angelegt wird. Sie steht in zwei Größen zur Verfügung.

Handelsformen	Artikel-Nr.	PZN	Packungs-inhalt	VE Pack.*
Tensoval® comfort 22-32 cm Schalenmanschette	900 166	01475165	1 Stück	42
Tensoval® comfort 22-32 cm Zugbügelmanschette	900 154	01215151	1 Stück	42
Tensoval® comfort 32-42 cm Zugbügelmanschette Large	900 155	01215168	1 Stück	30

* Versand-Einheiten in Packungen

Tensoval® Netzadapter



Netzadapter für Tensoval® comfort und Tensoval® duo control

Charakteristik

Dieser Netzadapter kann mit Tensoval duo control und Tensoval comfort verwendet werden und stellt eine Alternative zur Batterienutzung dar.

Anwendung

Mit der Anschlussbuchse im Blutdruckmessgerät verbinden und an die Steckdose anschließen.

Handelsformen	Artikel-Nr.	PZN	Packungs-inhalt	VE Pack.*
Tensoval® Netzadapter	900 152	01215145	1 Stück	60

* Versand-Einheiten in Packungen

Tensoval® comfort classic

Das Blutdruckmessgerät mit Universalmanschette für die sichere Messung am Oberarm

Charakteristik

Vollautomatisches Oberarm-Blutdruckmessgerät mit oszillometrischem Messverfahren; extra große Digitalanzeige; Speicherfunktion für 60 Messwerte und Mittelwert inkl. Datum und Uhrzeit; Abschaltautomatik; mit auswechselbaren Langzeit-Batterien; mit Universalmanschette; inkl. Transporttasche.



Anwendung

Zur Blutdruckmessung am Oberarm für einen Oberarmumfang von 22 bis 42 cm, was der gängigen Manschettengröße medium bis large entspricht; außerhalb dieses Bereiches können korrekte Messergebnisse nicht gewährleistet werden.

Handelsformen	Artikel-Nr.	PZN	Hilfsmittelnummer	Packungs-inhalt	VE Pack.*
Tensoval® comfort classic, mit Zugbügelmanschette 22-42 cm	900 251	10740086	21.28.01.2119	1 Stück	8

* Versand-Einheiten in Packungen

Tensoval® mobil



Das Handgelenk-Blutdruckmessgerät mit komfortabler Aufpumptechnologie

Charakteristik

Vollautomatisches Handgelenk-Blutdruckmessgerät mit oszillometrischem Messverfahren und innovativer Comfort Air Technology, einer speziellen Aufpump-technologie mit individuellem Aufpumpdruck; vorgeformte Handgelenk-Manschette; extra große Digitalanzeige; Speicherfunktion für 2x60 Messwerte und Mittelwert inkl. Datum und Uhrzeit für zwei Benutzer, plus Gastmodus; Abschaltautomatik; mit auswechselbaren Langzeit-Batterien; Aufbewahrungsbox aus robustem Hartplastik.

Anwendung

Zur Blutdruckmessung am Handgelenk mit einem Umfang von 12,5 bis 22,5 cm, außerhalb dieses Bereiches können korrekte Messergebnisse nicht gewährleistet werden.



Handelsformen	Artikel-Nr.	PZN	Hilfsmittelnummer	Packungs-inhalt	VE Pack.*
Tensoval® mobil	900 101	01452359	21.28.01.3037	1 Stück	6

* Versand-Einheiten in Packungen

Tensoval® mobil classic



Das Handgelenk-Blutdruckmessgerät

Charakteristik

Vollautomatisches Handgelenk-Blutdruckmessgerät mit oszillometrischem Messverfahren; vorgeformte Handgelenkmanschette; große Digitalanzeige; Speicherfunktion für 2x30 Messwerte und Mittelwert inkl. Datum und Uhrzeit für zwei Benutzer; Abschalt-automatik; mit auswechselbaren Langzeit-Batterien; mit Aufbewahrungsbox aus robustem Hartplastik.

Anwendung

Zur Blutdruckmessung am Handgelenk, mit einem Umfang von 12,5 bis 21,5 cm, außerhalb dieses Bereiches können korrekte Messergebnisse nicht gewährleistet werden.



Handelsformen	Artikel-Nr.	PZN	Packungs-inhalt	VE Pack.*
Tensoval® mobil classic	900 119	03297093	1 Stück	20

* Versand-Einheiten in Packungen

Thermoval® baby

Das Infrarot-Thermometer für berührungslose und lautlose Temperaturmessung

Charakteristik

Elektronisches, auf Infrarot-Technologie basierendes Thermometer zur berührungslosen Temperaturmessung an der Stirn, an Objekten sowie der Umgebungstemperatur in 3 Sekunden; geräuschlose Messung, ohne akustische Signale; extra große beleuchtete Digitalanzeige mit optischem Fieberalarm bei Stirnmessung; Messwert-Speicherung; Abschaltautomatik; bruchfestes Gehäuse; mit auswechselbaren Langzeit-Batterien; in praktischer stabiler Aufbewahrungsbox.



Anwendung

Zum berührungslosen Fiebermessen an der Stirn, zur Messung der Objekttemperatur von z. B. Babynahrung, Milchflaschen oder Badewasser sowie der Umgebungstemperatur.

Handelsformen	Artikel-Nr.	PZN	Packungs-inhalt	VE Pack.*
Thermoval® baby, mit Aufbewahrungsbox	925 091	11352529	1 Stück	16

* Versand-Einheiten in Packungen

Thermoval® duo scan



Das digitale Infrarot-Fieberthermometer mit zwei Messmethoden für Ohr- und Stirnmessung

Charakteristik

Elektronisches, auf Infrarot-Technologie basierendes Fieberthermometer mit zwei Messmethoden und extrem kurzer Messzeit: im Ohr 1 Sekunde oder mit Aufsatz an der Stirn 3 Sekunden; extra große beleuchtete Digitalanzeige; akustisches Signal bei Start und Beendigung der Messung; Messwert-Speicherung; Abschaltautomatik; wasserdichte und desinfektionsfähige Messspitze und bruchfestes Gehäuse; mit austauschbaren Langzeit-Batterien; in praktischer stabiler Aufbewahrungsbox, inkl. sechs Soft-Zellin Alkoholtupfer zum Reinigen der Messspitze.

Anwendung

Zur Ohr- und Stirnmessung der Körpertemperatur; für die ganze Familie, insbesondere zur Anwendung bei Kindern geeignet.



Handelsformen	Artikel-Nr.	PZN	Packungs-inhalt	VE Pack.*
Thermoval duo scan, mit Aufbewahrungsbox	925 081	08804927	1 Stück	4

* Versand-Einheiten in Packungen

Thermoval® kids flex

Das digitale Fieberthermometer mit extrem kurzer Messzeit und flexibler Mess-Spitze



Charakteristik

Elektronisches Fieberthermometer mit weicher, flexibler Mess-Spitze, besonders kurzer Messzeit von ca. 10 Sekunden und extra großer Digitalanzeige; akustisches Signal bei Betriebsbereitschaft und Beendigung der Messung;

Messwert-Speicherung; Abschalt-automatik; wasserdichtes und bruchfestes Gehäuse; desinfektionsfähig; mit austauschbarer Langzeit-Batterie.



Anwendung

Zur oralen, axillaren und rektalen Messung der Körpertemperatur.

Handelsformen	Artikel-Nr.	PZN	Packungs-inhalt	VE Pack.*
Thermoval® kids flex, in Plastikhülse, einzeln in Faltschachteln	925 051	10323170	1 Stück	48

* Versand-Einheiten in Packungen

Thermoval® kids

Das digitale Fieberthermometer mit extrem kurzer Messzeit in kinderfreundlichem Design



Charakteristik

Elektronisches Fieberthermometer mit besonders kurzer Messzeit von ca. 10 Sekunden und extra großer Digitalanzeige; akustisches Signal bei Betriebsbereitschaft und Beendigung der Messung; Messwert-Speicherung; Abschalt-

automatik; wasserdichtes und bruchfestes Gehäuse; desinfektionsfähig; mit austauschbarer Langzeit-Batterie.



Anwendung

Zur oralen, axillaren und rektalen Messung der Körpertemperatur.

Handelsformen	Artikel-Nr.	PZN	Packungs-inhalt	VE Pack.*
Thermoval® kids, in Plastikhülse, einzeln in Faltschachteln	925 041	10323158	1 Stück	48

* Versand-Einheiten in Packungen

Thermoval® rapid



Das digitale Fieberthermometer mit extrem kurzer Messzeit

Charakteristik

Elektronisches Fieberthermometer mit besonders kurzer Messzeit von ca. 10 Sekunden und extra großer Digitalanzeige; akustisches Signal bei Betriebsbereitschaft und Beendigung der Messung; Messwert-Speicherung; Abschaltautomatik; wasserdichtes und bruchfestes Gehäuse; desinfektionsfähig; mit auswechselbarer Langzeit-Batterie.

Anwendung

Zur oralen, axillaren und rektalen Messung der Körpertemperatur.



Handelsformen	Artikel-Nr.	PZN	Packungs-inhalt	VE Pack. *
Thermoval® rapid, in Plastikhülse, einzeln in Faltschachteln	925 031	10323164	1 Stück	48

* Versand-Einheiten in Packungen

Thermoval® standard

Das digitale Fieberthermometer für sicheres Fiebermessen

Charakteristik

Elektronisches Fieberthermometer mit gut ablesbarer, klarer Digitalanzeige; Messzeit ca. 60–90 Sekunden; akustisches Signal bei Betriebsbereitschaft und Beendigung der Messung; Messwert-Speicherung; Abschaltautomatik; mit auswechselbarer Langzeit-Batterie.



Anwendung

Zur oralen, axillaren und rektalen Messung der Körpertemperatur.




Handelsformen	Artikel-Nr.	PZN	Packungs-inhalt	VE Pack. *
Thermoval® standard, in Plastikhülse, einzeln in Faltschachteln	925 021	10713758	1 Stück	48

* Versand-Einheiten in Packungen

Sicherheit und Selbstvertrauen trotz Inkontinenz.

Bei HARTMANN achten wir sowohl auf die psychischen als auch auf die physischen Auswirkungen von Harninkontinenz.

Wir bei HARTMANN wissen, dass das Problem über die rein körperlichen Symptome hinausgeht. Daher steht neben dem Schutz vor unwillkürlichem Urinverlust auch Diskretion, Unterstützung und Beratung im Sinne des Expertenstandards zur Förderung der Harnkontinenz in der Pflege im Vordergrund.

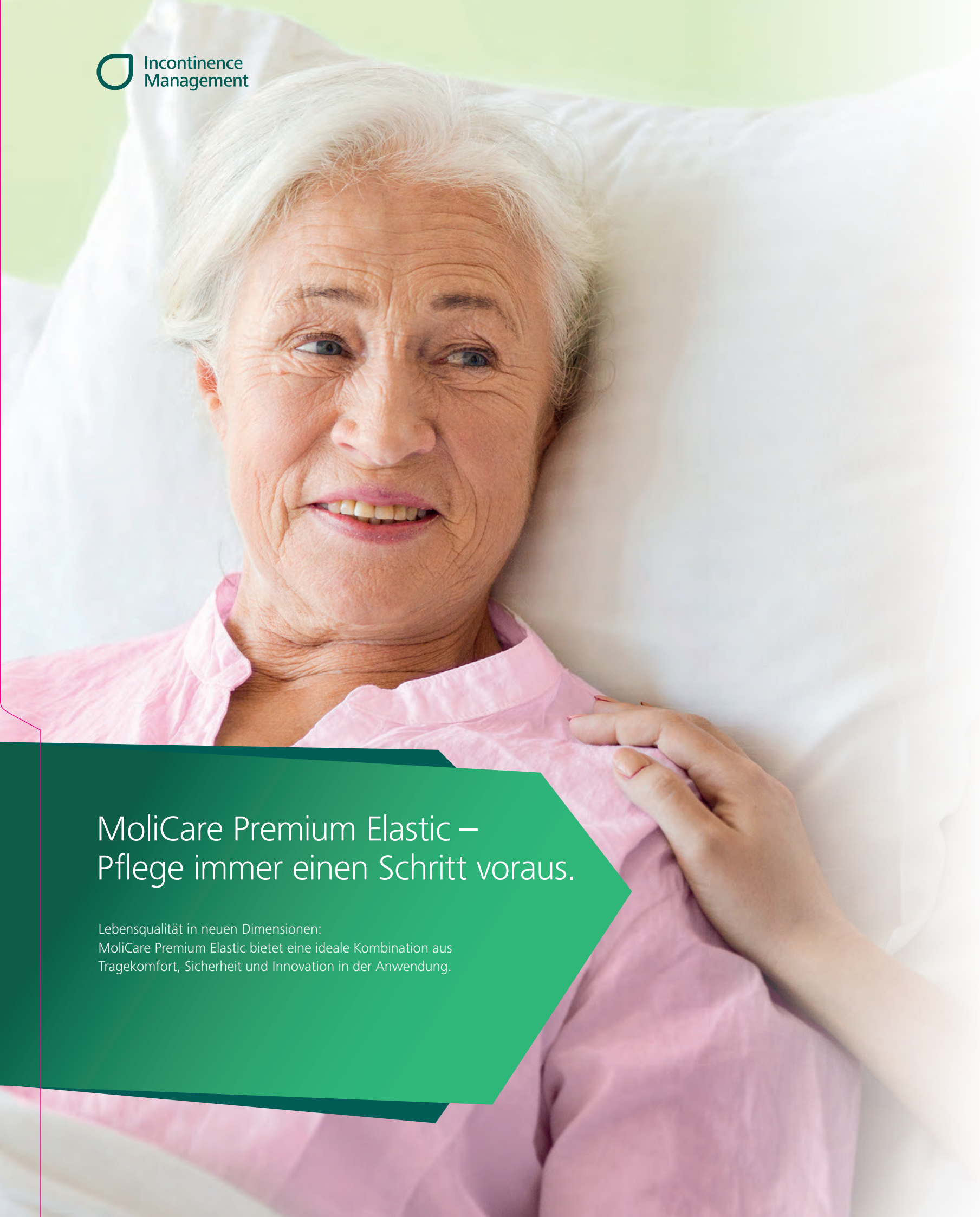

MoliCare Premium Elastic – Tragekomfort für Betroffene und Entlastung für Pflegende.

Jeder Betroffene benötigt eine einfühlsame Beratung und individuelle Produkt-Versorgung, damit Inkontinenz beherrschbar bleibt. Gelingt es, das für die individuellen Bedürfnisse „passende“ Produkt zu finden, profitieren alle davon.

Wie auch der Inkontinenzslip MoliCare Premium Slip verfügt auch MoliCare Premium Elastic über den umfassenden aktiven Hautschutz durch den 3-lagigen Saugkörper, die ph-hautneutrale Verteilerauflage mit antibakteriellen Eigenschaften und die hypoallergenen Materialien. Für Diskretion und Geruchsvermeidung sorgt der Geruchsneutralisator.

Innovativ aber sind die dehnbaren Seitenteile, die sowohl für den inkontinenten Menschen als auch für die Pflegenden eine Reihe unschlagbarer Vorteile bringen: MoliCare Premium Elastic passt sich jeder Körperform und jeder Bewegung perfekt an. Dies sichert den Betroffenen hohen Tragekomfort, Tag für Tag.

Die Vorteile für Pflegekräfte sind einfach kraft- und zeitsparend.

Zwei statt der üblichen vier Klettkebeverschlüsse ermöglichen ein schnelleres Anlegen, das ohne spezielles Training gelingt. Und besonders wichtig: Die Pflegenden verbringen 15% weniger Zeit beim Anlegen in gebückter Haltung, die Belastung des Hand-Arm-Systems sinkt um bis zu 25%*.

Bei der hohen Anzahl von Patienten mit Inkontinenz sind dies Arbeiterleichterungen, die die physischen Belastungen von Pflegenden spürbar reduzieren.

- 20 % Zeitersparnis bei der Anwendung
- Nur drei Schritte beim Anlegen
- Ergonomische Vorteile für das Pflegepersonal

Dehnbare Seitenteile, die sich jeder Körperform und Bewegung anpassen, sorgen für hohen Tragekomfort und ein einfacheres und schnelleres Anlegen.

MoliCare Premium Elastic – Pflege immer einen Schritt voraus.

Lebensqualität in neuen Dimensionen:
MoliCare Premium Elastic bietet eine ideale Kombination aus
Tragekomfort, Sicherheit und Innovation in der Anwendung.

*Quelle: Studie von die-ergonomie-experten zu zwei Molicare-Varianten. Dijon 2015

MoliMed® Premium



Die anatomisch geformte Einlage mit textilartiger Außenseite

Charakteristik

Einlagen mit antibakterieller, pH-hautneutraler Verteilerschicht und geruchsbindendem Ultra-Saugkern; vollflächige Vliesabdeckung, weiße, textilartige und flüssigkeitsundurchlässige Außenseite, die aufgrund von Mikroporen atmungsaktiv ist; anatomische Passform mit weichen Schaumstoffbündchen im Schrittbereich bei mini, midi und maxi; bieten perfekten Schutz und zuverlässigen Tragekomfort, schützen vor Rücknässung; diskret zu tragen, mit breitem Klebestreifen einfach in der Unterwäsche zu fixieren; hypoallergen, dermatologisch getestet.

Anwendung

Bei leichter bis mittlerer Blasenschwäche; geeignet auch als Schutz nach vaginalen Eingriffen oder als komfortable, auslauf-sichere Einlage nach Entbindungen.



Handelsformen	Artikel-Nr.	PZN	Hilfsmittelnummer	Packungs-inhalt	VE Pack.*	
MoliMed® Premium	ultra micro, 18x8 cm	168 131	02833856	28 Stück	8	
			03542658	8x28 Stück	1	
MoliMed® Premium, einzeln verpackt	micro light, 22x10 cm	168 132	03914574	14 Stück	12	
			03542664	12x14 Stück	1	
MoliMed® Premium, einzeln verpackt	micro, 27x10 cm	168 624	00424504	15.25.01.5082	14 Stück	24
			03541400	15.25.01.5082	24x14 Stück	1
MoliMed® Premium, einzeln verpackt	mini, 26x11 cm	168 634	09069507	15.25.01.5284	14 Stück	18
			03541417	15.25.01.5284	18x14 Stück	1
MoliMed® Premium	midi, 33x13 cm	168 644	09069513	15.25.01.5282	14 Stück	12
			03541423	15.25.01.5282	12x14 Stück	1
MoliMed® Premium	maxi, 43x16 cm	168 654	09069536	15.25.01.5283	14 Stück	12
			03541446	15.25.01.5283	12x14 Stück	1

* Versand-Einheiten in Packungen

MoliMed® Comfort

Die anatomisch geformte Einlage bei leichter bis mittlerer Blasenschwäche



Charakteristik

Einlagen mit antibakterieller, pH-hautneutraler Verteilerschicht und geruchsbindendem Ultra-Saugkern; vollflächige Vlies-abdeckung, weiße, flüssigkeits-undurchlässige Folien-Außenseite, anatomische Passform mit weichen Schaumstoffbündchen im Schrittbereich; bieten perfekten Schutz und zuverlässigen Tragekomfort, schützen vor Rücknässung; diskret zu tragen, mit breitem Klebestreifen einfach in der Unterwäsche zu fixieren; hypoallergen, dermatologisch getestet.

Anwendung

Bei leichter bis mittlerer Blasenschwäche; geeignet auch als Schutz nach vaginalen Eingriffen oder als komfortable, auslauf-sichere Einlage nach Entbindungen.

Handelsformen	Artikel-Nr.	PZN	Hilfsmittelnummer	Packungs-inhalt	VE Pack.*	
MoliMed® Comfort	mini, 26x11 cm	168 100	03546604	15.25.01.5306	28 Stück	12
			03542807	15.25.01.5306	12x28 Stück	1
MoliMed® Comfort	midi, 33x13 cm	168 101	03546627	15.25.01.5286	28 Stück	6
			03542813	15.25.01.5286	6x28 Stück	1
MoliMed® Comfort	maxi, 43x16 cm	168 102	03546633	15.25.01.5285	28 Stück	6
			03542836	15.25.01.5285	6x28 Stück	1

* Versand-Einheiten in Packungen

MoliMed® SPORTIVE



Die Einlage mit Klebeflügeln für einen sicheren Sitz, besonders in aktiven Lebenssituationen

Charakteristik

Einlagen mit Klebeflügeln, antibakterieller, pH-hautneutraler Verteilerschicht und geruchsbindendem Ultra-Saugkern; vollflächige Vliesabdeckung, weiße, textilartige und flüssigkeitsundurchlässige Außenseite, die aufgrund von Mikroporen atmungsaktiv ist; anatomische Passform mit vier Klebeflügeln für sicheren Sitz; bieten perfekten Schutz und zuverlässigen Tragekomfort, schützen vor Rücknässung; diskret zu tragen, mit Klebestreifen und den -flügeln einfach und sicher in der Unterwäsche zu fixieren; dermatologisch getestet; einzeln verpackt.

Anwendung

Bei leichter Blasenschwäche, insbesondere geeignet für sportlich aktive Personen.



Handelsformen	Artikel-Nr.	PZN	Packungs-inhalt	VE Pack.*
MoliMed® SPORTIVE, 28x9 cm plus Flügel einzeln verpackt	168 137	03546573	14 Stück	12
		03545243	12x14 Stück	1

* Versand-Einheiten in Packungen

MoliMed® Thin

Die besonders dünne und unauffällige Einlage für diskreten Schutz bei leichter Blasenschwäche



Charakteristik

Extrem dünne Einlagen mit antibakterieller, pH-hautneutraler Verteilerschicht und geruchsbindendem Ultra-Saugkern; vollflächige Vliesabdeckung, weiße, textilartige und flüssigkeitsundurchlässige Außenseite, die aufgrund von Mikroporen atmungsaktiv ist, anatomische Passform; bieten perfekten Schutz und zuverlässigen Tragekomfort, schützen vor Rücknässung; besonders diskret zu tragen, mit Klebestreifen einfach in der Unterwäsche zu fixieren; dermatologisch getestet; einzeln verpackt.

Anwendung

Bei leichter Blasenschwäche als komfortabler, sicherer und diskreter Schutz für vorwiegend aktive und mobile Personen.

Handelsformen	Artikel-Nr.	PZN	Packungs-inhalt	VE Pack.*
MoliMed® Thin, 28x10 cm einzeln verpackt	168 136	03546567	14 Stück	12
		03545237	12x14 Stück	1

* Versand-Einheiten in Packungen

MoliMed® for men



Die diskreten, anatomisch geformten Inkontinenzeinlagen für Männer

Charakteristik

Einlagen für Männer; mit antibakterieller, pH-hautneutraler Verteilerschicht und geruchsbindendem Ultra-Saugkern; vollflächige Vliesabdeckung, weiche, textilarartige und flüssigkeitsundurchlässige Außenseite, die aufgrund der Mikroporen atmungsaktiv ist; spezieller Zuschnitt für die männliche Anatomie für sicheren Schutz und zuverlässigen Tragekomfort, schützen vor Rücknässung; besonders diskret zu tragen, mit breitem Klebestreifen einfach in der Unterwäsche zu fixieren; in zwei verschiedenen Ausführungen.

Anwendung

Für Männer mit leichter Blasenschwäche, z. B. infolge von Prostata-Operationen, als komfortabler, sicherer und diskreter Schutz für vorwiegend aktive und mobile Personen.

MoliMed® for men active

Körpergerechte Taschenform, die den Penis aufnimmt; ideal bei leichter Blasenschwäche für eine besonders diskrete Versorgung.



MoliMed® for men protect

Körpergerechte V-förmige Passform mit einem Innenbündchen-System, das den gesamten Urogenitalbereich umschließt und einen zuverlässigen Rundumschutz auch bei etwas stärkerer Blasenschwäche gewährleistet; der spezielle Saugkörper schließt auch größere Mengen Flüssigkeit schnell und sicher ein.



Handelsformen	Artikel-Nr.	PZN	Hilfsmittelnummer	Packungs-inhalt	VE Pack.*	
MoliMed® for men active	14,7x11,5 cm	168 600	02347340	15.25.01.5349	14 Stück	12
MoliMed® for men protect	34x18 cm	168 705	01998360	15.25.01.5170	14 Stück	12

* Versand-Einheiten in Packungen

MoliNea® plus D Saugkissen

Das universelle Saugkissen für die Inkontinentenpflege, auch für Katheträger



Charakteristik

Rechteckige Saugeinlagen aus weichen Zellstoff-Flocken, mit vollflächiger Vliesabdeckung und undurchlässiger, rutschfester Außenfolie; nehmen Nässe schnell und vollständig auf; schützen Wäsche und Kleidung zuverlässig vor Verschmutzung; mit elastischen MoliPants Fixierhöschen einfach anzulegen.

Anwendung

Bei leichter Inkontinenz sowie bei leichtem Schmierstuhl und für Katheträger; für bettlägerige und mobile Personen geeignet.

Handelsformen	Artikel-Nr.	PZN	Hilfsmittelnummer	Packungs-inhalt	VE Pack.*	
MoliNea® plus D Saugkissen	20x40 cm	160 890	2017743	15.25.01.3001	50 Stück	6
	20x60 cm	160 892	2017766	15.25.01.4000	50 Stück	4

* Versand-Einheiten in Packungen

MoliNea® pads

Die saugstarke Einlage in langer Streifenform



Charakteristik

Rechteckige Saugeinlagen aus hochsaugfähigen Zellstoff-Flocken und hautfreundlicher, seidenweicher Vliesumhüllung; besonders saugstark, weich und anschmiegsam; sichere Abdeckung des Genitalbereichs durch die lange Streifenform; mit elastischen MoliPants Fixierhöschen einfach anzulegen.

Anwendung

Bei leichter Inkontinenz sowie zur sicheren Abdeckung des gesamten Genital- und Analbereichs; insbesondere für bettlägerige Personen.

Handelsformen	Artikel-Nr.	PZN	Packungs-inhalt	VE Pack.*	
MoliNea® pads	15x60 cm	160 860	0495728	28 Stück	4

* Versand-Einheiten in Packungen

MoliForm® Premium soft



Die anatomisch geformte Inkontinenzvorlage mit der textilähnlichen Außenseite

Charakteristik

Inkontinenzvorlagen mit textilartiger Außenseite, antibakterieller, pH-hautneutraler Verteilerauflage, geruchsbindendem Ultra-Saugkern und Nässeindikator zur Anzeige des optimalen Wechselzeitpunkts; vollflächige Vliesabdeckung und nässeabweisende Innenbündchen, anatomische Passform mit elastischem Beinabschluss; hohe Saugkraft und Speicherleistung, zuverlässiger Auslaufschutz, schützen vor Rücknässung und sind besonders hautfreundlich; hypoallergen, dermatologisch getestet; diskret weiß mit Farbkennzeichnung der Saugstärke; mit elastischen MoliPants Fixierhöschen einfach anzulegen.

Anwendung

Bei jedem Grad der Inkontinenz, für bettlägerige und mobile Personen geeignet.

MoliForm® Premium soft light

Für leichte Inkontinenz, in einem kleineren Zuschnitt; Farbkennzeichnung: Gelb



MoliForm® Premium soft normal

Für leichte Inkontinenz; Farbkennzeichnung: Gelb



MoliForm® Premium soft plus

Für mittlere Inkontinenz; Farbkennzeichnung: Grün



MoliForm® Premium soft extra

Für schwere Inkontinenz; Farbkennzeichnung: Blau



MoliForm® Premium soft super

Für schwerste Inkontinenz; Farbkennzeichnung: Violett



Handelsformen	Artikel-Nr.	PZN	Hilfsmittelnummer	Packungs-inhalt	VE Pack.*
MoliForm® Premium soft light	168 119	06551296	15.25.01.0087	30 Stück	4
		06551304	15.25.01.0087	4x30 Stück	1
MoliForm® Premium soft normal	168 019	06551310	15.25.01.0089	30 Stück	4
		06551327	15.25.01.0089	4x30 Stück	1
MoliForm® Premium soft plus	168 219	06551333	15.25.01.1138	30 Stück	4
		06551356	15.25.01.1138	4x30 Stück	1
MoliForm® Premium soft extra	168 319	06453004	15.25.01.2176	30 Stück	4
		06453033	15.25.01.2176	4x30 Stück	1
MoliForm® Premium soft super	168 919	06453056	15.25.01.2177	30 Stück	4
		06453062	15.25.01.2177	4x30 Stück	1

* Versand-Einheiten in Packungen

MoliForm® Comfort

Die anatomisch geformte Inkontinenzvorlage

Charakteristik

Inkontinenzvorlagen mit antibakterieller, pH-hautneutraler Verteilerauflage, geruchsbindendem Ultra-Saugkern und Nässeindikator zur Anzeige des optimalen Wechselzeitpunkts; vollflächige Vliesabdeckung, undurchlässige, weiche Außenfolie, anatomische Passform mit elastischem Beinabschluss; hohe Saugkraft und Speicherleistung, zuverlässiger Auslaufschutz, schützen vor Rücknässung; diskret weiß mit Farbkennzeichnung der Saugstärke; mit elastischen MoliPants Fixierhöschen einfach anzulegen.



Anwendung

Bei jedem Grad der Inkontinenz, für bettlägerige und mobile Personen geeignet.

MoliForm® Comfort normal

Für leichte Inkontinenz; Farbkennzeichnung: Gelb



MoliForm® Comfort plus

Für mittlere Inkontinenz; Farbkennzeichnung: Grün



MoliForm® Comfort extra

Für schwere Inkontinenz; Farbkennzeichnung: Blau



MoliForm® Comfort super

Für schwerste Inkontinenz; Farbkennzeichnung: Violett



Handelsformen	Artikel-Nr.	PZN	Hilfsmittelnummer	Packungs-inhalt	VE Pack.*
MoliForm® Comfort normal	168 175	6551439	15.25.01.0090	30 Stück	4
		6551445	15.25.01.0090	4x30 Stück	1
MoliForm® Comfort plus	168 275	6551451	15.25.01.1137	30 Stück	4
		6551468	15.25.01.1137	4x30 Stück	1
MoliForm® Comfort extra	168 375	6551474	15.25.01.2174	30 Stück	4
		6551480	15.25.01.2174	4x30 Stück	1
MoliForm® Comfort super	168 575	6551497	15.25.01.2173	30 Stück	4
		6551505	15.25.01.2173	4x30 Stück	1

* Versand-Einheiten in Packungen

MoliForm® Premium soft for men



Die anatomisch geformte Inkontinenzvorlage für Männer, mit textilähnlicher Außenseite

Charakteristik

Inkontinenzvorlagen für Männer; speziell auf die männliche Anatomie zugeschnittenes großes Saugkissen, mit antibakterieller, pH-hautneutraler Verteilerauflage und geruchsbindendem Ultra-Saugkern; vollflächige Vliesabdeckung, nässeabweisende Innenbündchen und textilartige, flüssigkeitsundurchlässige, diskrete weiße Außenseite mit Nässeindikator zur Anzeige des optimalen Wechselzeitpunkts, anatomische Passform mit elastischem Beinabschluss; bieten perfekten Schutz durch hohe Saugkraft und Speicherleistung, zuverlässigen Auslaufschutz und schützen vor Rücknässung; mit elastischen MoliPants Fixierhöschen einfach anzulegen.

Anwendung

Für Männer mit mittlerer bis schwerer Harn- und/oder Stuhlinkontinenz; sowohl für bettlägerige als auch für mobile, aktive Personen geeignet; die einfache Handhabung ermöglicht auch bewegungseingeschränkten Männern eine problemlose Anwendung.



Handelsformen	Artikel-Nr.	PZN	Hilfsmittelnummer	Packungs-inhalt	VE Pack.*	
MoliForm® Premium soft for men	69x31 cm	168 819	6551416	15.25.01.2178	28 Stück	4
			6551422	15.25.01.2178	4x28 Stück	1

* Versand-Einheiten in Packungen

MoliPants®

Die hochelastischen und sicheren Fixierhöschen für Inkontinenzeinlagen und -vorlagen

Charakteristik

Elastische Fixierhöschen; leicht, weich und luftdurchlässig, mit dauerelastischen Querfäden für guten Sitz; passen sich den Körperformen ausgezeichnet an, ohne einzuengen; dauerhafte Größenkennzeichnung durch Farbstreifen; waschbar bis 60 °C; in verschiedenen Qualitäten erhältlich.

Anwendung

Zur sicheren und hygienischen Fixierung von Inkontinenzeinlagen und -vorlagen aller Art, für bettlägerige und mobile Personen gleichermaßen gut geeignet.



MoliPants® soft

Unterwäscheähnliches Fixierhöschen aus besonders dichtem, engmaschigem und weichem Material; ohne Seitennähte, mit verlängertem Beinansatz und weichem, breitem Hüftbündchen; mit dauerhafter Farbkennzeichnung der Größe und Pflegeanleitung im Innenbund; trocknergeeignet.

Größentabelle

Für einen Hüft-/Bauchumfang:
 45– 80 cm Gr. S
 60–100 cm Gr. M
 80–120 cm Gr. L
 100–160 cm Gr. XL
 140–180 cm Gr. XXL
 160–200 cm Gr. XXXL



MoliPants® Comfort

NetzHöschen aus dichtem, strapazierfähigem Material.

Größentabelle

Für einen Hüft-/Bauchumfang:
 40– 80 cm Gr. S
 60–100 cm Gr. M
 80–120 cm Gr. L
 100–160 cm Gr. XL

MoliPants®

NetzHöschen aus weitmaschigem Material.

Größentabelle

Für einen Hüft-/Bauchumfang:
 50–120 cm Gr. L
 100–160 cm Gr. XL

Handelsformen	Artikel-Nr.	PZN	Hilfsmittelnummer	Packungs-inhalt	VE Pack.*	
MoliPants® soft	S (gelb)	947 795	04962658	15.25.02.0085	5 Stück	60
	M (blau)	947 796	04962664	15.25.02.0085	5 Stück	40
	L (braun)	947 797	04962670	15.25.02.1092	5 Stück	40
	XL (grün)	947 798	04962687	15.25.02.1092	5 Stück	40
	XXL (grau)	947 799	04962693	15.25.02.1092	5 Stück	40
	XXXL (orange)	947 815	10547455	15.25.02.1116	5 Stück	40
MoliPants® Comfort	S (gelb)	947 759	00200710	15.25.02.0050	5 Stück	10
	M (blau)	947 760	00200727	15.25.02.0050	5 Stück	10
	L (braun)	947 761	00200839	15.25.02.1049	5 Stück	10
	XL (grün)	947 762	00200845	15.25.02.1049	5 Stück	10
MoliPants®	L (braun)	947 720	03126983	15.25.02.0004	3 Stück	10
		947 721	03127008	15.25.02.0004	50 Stück	6
	XL (grün)	947 725	03109312	15.25.02.1002	3 Stück	10
		947 726	03109329	15.25.02.1002	50 Stück	6

* Versand-Einheiten in Packungen

MoliCare Premium Elastic



Der anwenderfreundliche Inkontinenzslip mit dehnbaren, elastischen Seitenteilen

Charakteristik

Moderner Inkontinenz-Slip mit 3-lagigem, anatomisch geformtem und geruchsbindendem Saugkern, mit antibakterieller, pH-hautneutraler quick-dry Verteiler- auflage, flüssigkeitsabweisenden, weichen Innen- bündchen, elastischem Beinabschluss, textilem Backsheet, Nässeindikator, atmungsaktiven Vliesseiten- teilen im Hüftbereich und zwei breiten wiederver- schließbaren Klett-Klebeverschlüssen. Durch einen speziell entwickelten Saugkörper bietet MoliCare Premium Elastic bestmöglichen Rundumschutz, eine hohe Saugkraft und Speicherleistung. MoliCare Premium Elastic ist dermatologisch getestet, schützt vor Rücknässung, unterstützt die Gesunderhaltung der Haut und bietet angenehmen Tragekomfort. Die dehnbaren Seitenteile und breiten Klett-Klebe- verschlüsse machen die MoliCare Premium Elastic äußerst anwenderfreundlich.

Anwendung

MoliCare Premium Elastic eignet sich besonders für Fälle der mittleren bis schwersten Harn- und/oder Stuhlinkontinenz sowie für hochgradig pflegebedürftige und unruhige Personen, wie auch für eine sichere Nachtversorgung. MoliCare Premium Elastic verleiht auch mobilen Personen größtmögliche Sicherheit. Die einfache Handhabung spart Zeit und ist besonders ergonomisch.

Größentabelle

Für einen Hüft-/Bauchumfang:

- 60– 90 cm Gr. S
- 90– 120 cm Gr. M
- 120– 150 cm Gr. L
- 150– 175 cm Gr. XL

MoliCare Premium Elastic extra plus

Bei mittlerer Harn- und/oder Stuhlinkontinenz; verleiht aber auch mobilen Personen mit leichteren Inkontinenzformen größtmögliche Sicherheit.



MoliCare Premium Elastic super plus

Bei schwerer Harn- und/oder Stuhlinkontinenz sowie als sichere Nachtversorgung bei leichteren Inkontinenzformen.






MoliCare Premium Elastic maxi

Bei schwerster Harn- und/oder Stuhlinkontinenz sowie bei hochgradig pflegebedürftigen und unruhigen Personen; besonders geeignet für schwallartige Miktionen.



MoliCare Premium Elastic

Handelsformen	Artikel-Nr.	PZN	Packungs- inhalt	VE Pack.*
MoliCare® Premium Elastic extra plus 	S	11376530	30 Stück	3
		11376542	3x30 Stück	1
	M	11376553	30 Stück	3
		11376582	3x30 Stück	1
	L	11376599	30 Stück	3
		11376607	3x30 Stück	1
XL	11376636	14 Stück	4	
	11376642	4x14 Stück	1	
MoliCare® Premium Elastic super plus 	S	11376731	30 Stück	3
		11376748	3x30 Stück	1
	M	11376754	26 Stück	3
		11376760	3x26 Stück	1
	L	11376777	24 Stück	3
		11376783	3x24 Stück	1
XL	11376808	14 Stück	4	
	11376814	4x14 Stück	1	
MoliCare® Premium Elastic maxi 	S	11376820	30 Stück	3
		11376837	3x30 Stück	1
	M	11376843	26 Stück	3
		11376872	3x26 Stück	1
	L	11376889	24 Stück	3
		11376895	3x24 Stück	1
XL	11376926	14 Stück	4	
	11376932	4x14 Stück	1	

* Versand-Einheiten in Packungen



MoliCare Premium Slip



Der hautfreundliche Inkontinenzslip mit textilartiger Außenseite

Charakteristik

Moderner Inkontinenz-Slip mit 3-lagigem, anatomisch geformtem und geruchsbindendem Saugkern, mit antibakterieller, pH-hautneutraler quick-dry Verteiler- auflage, flüssigkeitsabweisenden, weichen und geschwungenen Innenbündchen, elastischem Beinabschluss, textilem Backsheet, Nässeindikator, atmungsaktiver Vliesabdeckung im Hüftbereich und wiederverschließbaren Klett-Klebeverschlüssen. Durch einen speziell entwickelten Saugkörper bietet MoliCare Premium Slip bestmöglichen Rundum- Schutz, eine sehr hohe Saugkraft und Speicherleistung. MoliCare Premium Slip ist dermatologisch getestet, schützt vor Rücknässung, unterstützt die Gesund- erhaltung der Haut und bietet angenehmen Trage- komfort.

Anwendung

Die Tröpfchen-Kennzeichnung der Saugstärke und die Größenvielfalt ermöglichen eine individuelle Auswahl für Fälle der mittleren bis schwersten Harn- und/oder Stuhlinkontinenz sowie für hochgradig pflegebedürftige und unruhige Personen; für eine gesunde Haut, trotz Inkontinenz.

MoliCare Premium Slip extra plus

Bei mittlerer Harn- und/oder Stuhlinkontinenz; verleiht aber auch mobilen Personen mit leichteren Inkontinenzformen größtmögliche Sicherheit.



MoliCare Premium Slip super plus

Bei schwerer Harn- und/oder Stuhlinkontinenz sowie als sichere Nachtversorgung bei leichteren Inkontinenzformen.



MoliCare Premium Slip

MoliCare Premium Slip maxi

Bei schwerster Harn- und/oder Stuhlinkontinenz sowie bei hoch- gradig pflege- bedürftigen und unruhigen Personen; besonders geeignet für schwallartige Miktionen.



MoliCare Premium Slip maxi plus





Bei schwerster Harn- und/oder Stuhlinkontinenz sowie bei hoch- gradig pflege- bedürftigen und unruhigen Personen; besonders geeignet für schwallartige Miktionen; gewährleistet eine sichere Nachtversorgung.



Größentabelle

Für einen Hüft-/Bauchumfang:

- 40 – 60 cm Gr. XS
- 60 – 90 cm Gr. S
- 90 – 120 cm Gr. M
- 120 – 150 cm Gr. L
- 150 – 175 cm Gr. XL

Handelsformen		Artikel-Nr.	PZN	Hilfsmittelnummer	Packungs- inhalt	VE Pack.*	
MoliCare Premium Slip extra plus 	XS	169 248	11345860	15.25.31.0001	30 Stück	4	
			11345877	15.25.31.0001	4x30 Stück	1	
	S	169 448	11345883	15.25.31.1002	30 Stück	3	
			11345908	15.25.31.1002	3x30 Stück	1	
	M	169 648	11345914	15.25.31.5004	30 Stück	3	
			11345920	15.25.31.5004	3x30 Stück	1	
	L	169 848	11345937	15.25.31.8006	30 Stück	3	
			11345943	15.25.31.8006	3x30 Stück	1	
	XL	169 948	11345966	15.25.31.8007	14 Stück	4	
			11345972	15.25.31.8007	4x14 Stück	1	
MoliCare Premium Slip super plus 	S	169 450	11346055	15.25.31.4002	30 Stück	3	
			11346061	15.25.31.4002	3x30 Stück	1	
	M	169 650	11346078	15.25.31.8005	30 Stück	3	
			11346084	15.25.31.8005	3x30 Stück	1	
	L	169 850	11346090	15.25.31.8008	30 Stück	3	
			11346109	15.25.31.8008	3x30 Stück	1	
	XL	169 950	11346115	15.25.31.8009	14 Stück	4	
			11346121	15.25.31.8009	4x14 Stück	1	
	MoliCare Premium Slip maxi 	S	169 185	11346138	15.25.31.5005	14 Stück	4
				11346144	15.25.31.5005	4x14 Stück	1
M		169 285	11346150	15.25.31.8010	14 Stück	4	
			11346167	15.25.31.8010	4x14 Stück	1	
L		169 385	11346196	15.25.31.8011	14 Stück	4	
			11346204	15.25.31.8011	4x14 Stück	1	
XL		169 485	11367100	15.25.31.8012	14 Stück	4	
			11367117	15.25.31.8012	4x14 Stück	1	
MoliCare Premium Slip maxi plus 		S	169 457	11346233	<i>im Vergabestatus</i>	14 Stück	4
				11346256	<i>im Vergabestatus</i>	4x14 Stück	1
	M	169 657	11346262	15.25.31.8013	14 Stück	4	
			11346279	15.25.31.8013	4x14 Stück	1	
	L	169 857	11346285	15.25.31.8014	14 Stück	4	
			11346291	15.25.31.8014	4x14 Stück	1	
	XL	169 957	11346316	15.25.31.8015	14 Stück	4	
			11346322	15.25.31.8015	4x14 Stück	1	

* Versand-Einheiten in Packungen

MoliCare Slip



MoliCare Slip extra

Bei mittlerer Harn- und/oder Stuhlinkontinenz; verleiht aber auch mobilen Personen mit leichteren Inkontinenzformen größtmögliche Sicherheit.



MoliCare Slip super

Bei schwerer Harn- und/oder Stuhlinkontinenz sowie als sichere Nachtversorgung bei leichteren Inkontinenzformen.



Der Inkontinenzslip mit atmungsaktivem Vlies im Hüftbereich

Charakteristik

Moderner Inkontinenz-Slip mit 3-lagigem, anatomisch geformtem und geruchsbindendem Saugkern, quick-dry Verteilerauflage, flüssigkeitsabweisenden, weichen und geschwungenen Innenbündchen, elastischem Beinabschluss, textilem Backsheet, Nässeindikator, atmungsaktiver Vliesabdeckung im Hüftbereich und wiederverschließbaren Klett-Klebeverschlüssen. Durch einen speziell entwickelten Saugkörper bietet MoliCare Slip bestmöglichen Rundum-Schutz, eine hohe Saugkraft und Speicherleistung. MoliCare Slip ist dermatologisch getestet, schützt vor Rücknässung und schont die empfindliche Haut.

Anwendung

MoliCare Slip eignet sich besonders für Fälle der mittleren bis schweren Harn- und/oder Stuhlinkontinenz, verleiht aber auch mobilen Personen mit leichteren Inkontinenzformen größtmögliche Sicherheit.

Größentabelle

Für einen Hüft-/Bauchumfang:
 40– 60 cm Gr. XS
 60– 90 cm Gr. S
 90– 120 cm Gr. M
 120– 150 cm Gr. L
 150– 175 cm Gr. XL

Handelsformen	Artikel-Nr.	PZN	Hilfsmittelnummer	Packungs-inhalt	VE Pack.*	
MoliCare Slip extra 	XS	165 130	11351553	30 Stück	4	
			11351576	4x30 Stück	1	
	S	165 131	11351582	15.25.31.1001	30 Stück	3
			11351599	15.25.31.1001	3x30 Stück	1
	M	165 132	11351607	15.25.31.5001	30 Stück	3
			11351613	15.25.31.5001	3x30 Stück	1
	L	165 133	11351636	15.25.31.5002	30 Stück	3
			11351642	15.25.31.5002	3x30 Stück	1
	XL	165 134	11351659	15.25.31.8001	14 Stück	4
			11351671	15.25.31.8001	4x14 Stück	1
MoliCare Slip super 	S	165 331	11351814	15.25.31.2001	30 Stück	3
			11351820	15.25.31.2001	3x30 Stück	1
	M	165 332	11351837	15.25.31.5003	30 Stück	3
			11351843	15.25.31.5003	3x30 Stück	1
	L	165 333	11351866	15.25.31.8002	30 Stück	3
			11351872	15.25.31.8002	3x30 Stück	1

* Versand-Einheiten in Packungen

MoliCare Slip maxi

Der Inkontinenzslip mit blauer elastischer Außenfolie

Charakteristik

MoliCare Slip maxi ist ein moderner Inkontinenz-Slip mit 3-lagigem, anatomisch geformtem und geruchsbindendem Saugkern, quick-dry Verteilerauflage, flüssigkeitsabweisenden, weichen Innenbündchen, elastischem Beinabschluss, Wäscheschutzfolie, Nässeindikator und Wäscheschutzfolie im Hüftbereich; die Klebeverschlüsse können zweimal verwendet werden. Durch einen speziell entwickelten Saugkörper bietet MoliCare Slip maxi bestmöglichen Rundum-Schutz, eine sehr hohe Saugkraft und Speicherleistung. MoliCare Slip maxi ist dermatologisch getestet, schützt vor Rücknässung und schont die empfindliche Haut.



Anwendung

Aufgrund ihrer sehr hohen Saugkraft eignet sich MoliCare Slip maxi besonders für Fälle der schweren und schwersten Harn- und/oder Stuhlinkontinenz sowie für hochgradig pflegebedürftige Personen, wie auch für eine sichere Nachtversorgung. MoliCare Slip maxi verleiht auch mobilen Personen größtmögliche Sicherheit.



Größentabelle

Für einen Hüft-/Bauchumfang:
 60– 90 cm Gr. S
 90– 120 cm Gr. M
 120– 150 cm Gr. L

Handelsformen	Artikel-Nr.	PZN	Hilfsmittelnummer	Packungs-inhalt	VE Pack.*	
MoliCare Slip maxi 	S	165 531	11351961	15.25.31.4001	14 Stück	4
			11351978	15.25.31.4001	4x14 Stück	1
	M	165 532	11351984	15.25.31.8003	14 Stück	4
			11351990	15.25.31.8003	4x14 Stück	1
	L	165 533	11352009	15.25.31.8004	14 Stück	4
			11352015	15.25.31.8004	4x14 Stück	1

* Versand-Einheiten in Packungen

MoliMed® Premium pants active



Der diskrete Slip für leichte Blasen-schwäche

Charakteristik

Leichte, unauffällige Slips, die wie herkömmliche Unterwäsche an- und auszuziehen sind; mit anti-bakterieller, pH-hautneutraler Verteilerschicht und geruchsbindendem Ultra-Saugkern; nässeabweisende Innenbündchen, anatomische Passform mit elastischem Beinabschluss und flüssigkeitsundurchlässige, textile Außenseite; bieten perfekten Schutz und zuverlässigen Tragekomfort, schützen vor Rück-nässung; besonders weich und luftdurchlässig für ein angenehmes Hautklima, dermatologisch getestet.

Anwendung

Bei leichter Blasen-schwäche, insbesondere für aktive Personen; als sichere Alternative zu Inkontinenz-einlagen und -vorlagen, um Verrutschen vollkommen auszuschließen.

Größentabelle

Für einen Hüft-/Bauchumfang:

- 75–100 cm Gr. M
- 100–125 cm Gr. L



Handelsformen		Artikel-Nr.	PZN	Hilfsmittelnummer	Packungs-inhalt	VE Pack.*
MoliMed® Premium pants active	M	168 661	00074872	15.25.01.5179	12 Stück	4
	L	168 662	00075452	15.25.01.5185	10 Stück	4

* Versand-Einheiten in Packungen

MoliMed® Premium pants for men

Der Slip für Männer, so komfortabel wie normale Unterwäsche



Charakteristik

Leichte, unauffällige Slips für Männer; wie herkömmliche Unter-wäsche an- und auszuziehen; mit großem Saugkissen, antibakterieller, pH-hautneutraler Verteilerschicht, geruchsbindendem Ultra-Saugkern und Nässeindikator zur Anzeige des optimalen Wechselzeitpunkts; mit nässeabweisenden Innenbünd-chen, elastischem Beinabschluss und textilartiger, flüssigkeits-undurchlässiger Außenseite; bieten perfekten Schutz und zuverlässigen Tragekomfort, schützen vor Rück-nässung; besonders weich und luft-durchlässig für ein angenehmes Hautklima, dermatologisch getestet.

Anwendung

Für Männer mit leichter Blasen-schwäche als komfortabler und sicherer Schutz, auch bei sport-lichen Aktivitäten.

Größentabelle

Für einen Hüft-/Bauchumfang:

- 80–120 cm Gr. M
- 100–150 cm Gr. L

Handelsformen		Artikel-Nr.	PZN	Hilfsmittelnummer	Packungs-inhalt	VE Pack.*
MoliMed® Premium pants for men	M	915 612	08746609	15.25.01.5350	14 Stück	4
			08746638	15.25.01.5350	4x14 Stück	1
	L	915 613	08746779	15.25.01.5351	14 Stück	4
			08746785	15.25.01.5351	4x14 Stück	1

* Versand-Einheiten in Packungen

MoliCare Mobile®



Der Inkontinenzslip mit dem textilen Tragekomfort

Charakteristik

Inkontinenzslips, die wie herkömmliche Unterwäsche an- und auszuziehen sind; mit antibakterieller, pH-hautneutraler Verteilerschicht, geruchsbindendem Ultra-Saugkern und Nässeindikator zur Anzeige des optimalen Wechselzeitpunkts; nässeabweisende Innenbündchen, anatomische Passform mit elastischem Beinabschluss und flüssigkeitsundurchlässige, textilartige Außenseite; bieten perfekten Schutz und zuverlässigen Tragekomfort, schützen vor Rücknässung; besonders weich und atmungsaktiv für ein angenehmes Hautklima, dermatologisch getestet.

Anwendung

Bei Harn- und/oder Stuhlinkontinenz für mobile Personen; durch einfache Handhabung besonders geeignet für den Einsatz beim Toilettentraining; bietet aber auch durch den rundum sicheren Sitz bei der Versorgung unruhiger oder dementer Personen größtmögliche Sicherheit.

Größentabelle

Für einen Hüft-/Bauchumfang:
 45– 70 cm Gr. XS
 60– 90 cm Gr. S
 80– 120 cm Gr. M
 100– 150 cm Gr. L
 130– 170 cm Gr. XL



MoliCare Mobile® light

Mit dünnerem und schmalere Saugkörper für eine diskrete Versorgung bei mittlerer Harn- oder Stuhlinkontinenz.



MoliCare Mobile®

Bei schwerer Harn- oder Stuhlinkontinenz.



MoliCare Mobile® super

Die hohe Speicherkapazität gewährleistet eine sichere Nachtversorgung und eignet sich bei schwerster Harn- oder Stuhlinkontinenz.



Handelsformen		Artikel-Nr.	PZN	Hilfsmittelnummer	Packungs-inhalt	VE Pack.*
MoliCare Mobile® light	S	915 861	00648669	15.25.03.0097	14 Stück	4
	M	915 852	00648675	15.25.01.5314	14 Stück	4
	L	915 853	00648681	15.25.01.5315	14 Stück	4
	XL	915 854	08519411	15.25.01.5358	14 Stück	4
MoliCare Mobile®	XS	915 840	00648445	15.25.03.0157	14 Stück	4
	S	915 831	00648451	15.25.03.0159	14 Stück	4
	M	915 832	00648468	15.25.03.1318	14 Stück	4
	L	915 833	00648646	15.25.03.2372	14 Stück	4
MoliCare Mobile® super	XL	915 834	00648652	15.25.03.2377	14 Stück	4
	S	915 871	00648698	15.25.03.0160	14 Stück	4
	M	915 872	00648706	15.25.03.1319	14 Stück	4
	L	915 873	00648712	15.25.03.2373	14 Stück	4
	XL	915 874	08519428	15.25.03.2506	14 Stück	4

* Versand-Einheiten in Packungen

MoliNea® Krankenunterlagen

Die saugstarken Krankenunterlagen mit den weichen Zellstoff-Flocken

Charakteristik

Krankenunterlagen mit Saugkörper aus weichen Zellstoff-Flocken; vollflächige Abdeckung mit textilem Trockenvlies; undurchlässige Außenfolie; schrankfertig vorgefaltet; in verschiedenen Qualitäten für einen wirtschaftlichen, bedarfsgerechten Einsatz.

Anwendung

Als direkte Inkontinenzunterlage oder als zusätzlicher Bettschutz bei Verwendung körpernaher Produkte.



MoliNea® normal

Mittelschwere Qualität in einer leichteren Ausführung.



MoliNea® super

Schwere Qualität.



MoliNea® plus

Mittelschwere Qualität.



MoliNea® plus D

Schwere Qualität, besonders saugstark.



Handelsformen		Artikel-Nr.	PZN	Hilfsmittelnummer	Packungs-inhalt	VE Pack.*
MoliNea® normal, grün, leichte Qualität	40x60 cm	161 220	01846495	19.40.05.3081	30 Stück	6
	60x60 cm	161 320	01846503	19.40.05.4076	30 Stück	4
	60x90 cm	161 520	01846590	19.40.05.5106	30 Stück	4
	60x90 cm	161 820	07067987	19.40.05.5106	25 Stück	4
MoliNea® plus, grün, mittlere Qualität	40x60 cm	161 100	01710904	19.40.05.3082	150 Stück	1
	60x60 cm	161 300	03959163	19.40.05.4075	100 Stück	1
	60x90 cm	161 600	01710927	19.40.05.5102	100 Stück	1
MoliNea® super, blau, schwere Qualität	40x60 cm	163 100	01846029	19.40.05.3080	100 Stück	1
	60x60 cm	163 300	01846058	19.40.05.4077	100 Stück	1
	60x90 cm	161 194	01846294	19.40.05.5105	25 Stück	4
MoliNea® plus D, blau, extra schwere Qualität	60x90 cm	163 600	01710979	19.40.05.5103	50 Stück	1

* Versand-Einheiten in Packungen

MoliNea® Krankenunterlagen



Die bewährten Krankenunterlagen aus Zellstoff-Lagen für einen wirtschaftlichen Einsatz

Charakteristik

Krankenunterlagen mit Saugkörper aus Zellstoff-Lagen; vollflächige Abdeckung mit textilem Trockenvlies auch über die Folienränder; undurchlässige Außenfolie; in verschiedenen Qualitäten für einen wirtschaftlichen, bedarfsgerechten Einsatz.

Anwendung

Als direkte Inkontinenzunterlage oder als zusätzlicher Bettschutz bei Verwendung körpernaher Produkte.

MoliNea® E

Extra leichte Qualität, 6 Lagen.



MoliNea® L

Leichte Qualität, 8 Lagen.

MoliNea® S

Mittelschwere Qualität, 12 Lagen.



MoliNea® N

Schwere Qualität, 20 Lagen.

Handelsformen	Artikel-Nr.	PZN	Hilfsmittelnummer	Packungs-inhalt	VE Pack.*	
MoliNea® E, 6 Lagen, gelb, extra leichte Qualität	40x60 cm	159 930	00366787	300 Stück	1	
	60x60 cm	159 936	00366793	100 Stück	1	
MoliNea® L, 8 Lagen, gelb, leichte Qualität	40x60 cm	159 940	00366824	250 Stück	1	
	60x60 cm	159 926	00366801	100 Stück	1	
	60x90 cm	159 933	00366818	100 Stück	1	
MoliNea® S, 12 Lagen, grün, mittelschwere Qualität	40x60 cm	159 971	00366847	19.40.05.3063	100 Stück	1
	60x60 cm	159 916	00366830	19.40.05.4058	100 Stück	1
	60x90 cm	159 973	00366853	19.40.05.5069	50 Stück	1
MoliNea® N, 20 Lagen, blau, schwere Qualität	40x60 cm	155 871	00366876	19.40.05.3064	10 Stück	10
	40x60 cm	155 901	00366899	19.40.05.3064	100 Stück	1
	60x90 cm	155 873	00366882	19.40.05.5070	5 Stück	8
	60x90 cm	155 903	00366907	19.40.05.5070	50 Stück	1

* Versand-Einheiten in Packungen

Molinea® textile

Die hochwertige wiederverwendbare Krankenunterlage

Charakteristik

Wiederverwendbare, waschbare Bettschutzeinlagen; Saugschicht aus weichem Vlies mit extrem hohem Absorptionsvermögen; die weiche, hautfreundliche Oberfläche leitet Nässe vollständig in das Saugvlies und wird dort zuverlässig gebunden; innen liegende, wasserdichte Beschichtung; rutschfest durch aufgeraute Rückseite; formstabil durch rundum fest genähte Ränder; waschbar und trocknergeeignet; sehr hohe Nutzungsdauer; in verschiedenen Aufmachungen für einen wirtschaftlichen, bedarfsgerechten Einsatz.



Anwendung

Als zusätzlicher Bettschutz bei Verwendung körpernaher Produkte.



MoliNea® textile

Sehr hohe Nutzungsdauer, auch mit Untersteckstreifen erhältlich; mit hellgrüner Liegefläche.



MoliNea® textile classic

In einer leichteren Ausführung; mit weißer Liegefläche.



Handelsformen	Artikel-Nr.	PZN	Hilfsmittelnummer	Packungs-inhalt	VE Pack.*	
MoliNea® textile	75x85 cm	155 801	02147954	19.40.05.1025	10 Stück	3
	85x90 cm	155 802	02152955	19.40.05.2045	10 Stück	3
	85x90 cm	155 807	03543310	19.40.05.2045	1 Stück	25
MoliNea® textile, mit 2x50 cm Untersteck-Streifen	75x85 cm	155 805	02152961	19.40.05.1026	10 Stück	3
MoliNea® textile Classic	75x85 cm	155 804	04222559	19.40.05.1027	1 Stück	25

* Versand-Einheiten in Packungen

Vala®Clean



Die Alternative zu textilen Waschhandschuhen

Charakteristik

Einmal-Waschhandschuhe und -Tücher in verschiedenen Ausführungen und Qualitäten; weich und saugfähig, auch in nassem Zustand formstabil und abriebfest.

Anwendung

Zur Einmalverwendung in allen Pflegebereichen.

Vala®Clean basic

Einmal-Waschhandschuhe aus strapazierfähigem, weichem Vliesstoff.

Vala®Clean soft

Einmal-Waschhandschuhe aus hochflauschigem, reißfestem Vliesstoff; besonders weich und saugfähig, nach Ökotex Standard 100, Klasse 1 zertifiziert und dermatologisch getestet.

Vala®Clean film

Einmal-Waschhandschuhe mit weich geprägter Oberseite aus Spezial-Tissue und plastifizierter Innenseite; besonders geeignet bei der Pflege inkontinenter Patienten.



Handelsformen	Artikel-Nr.	PZN	Packungs-inhalt	VE Pack.*	
Vala®Clean basic, Einmal-Waschhandschuhe	992 245	03127623	50 Stück	40	
Vala®Clean soft, Einmal-Waschhandschuhe	992 269	06865037	15 Stück	32	
	992 242	03326328	50 Stück	20	
Vala®Clean film, Einmal-Waschhandschuhe	992 243	03127646	50 Stück	28	
Vala®Clean extra, Einmal-Tücher	30x33 cm	992 234	03757229	50 Stück	12
Vala®Clean eco, Einmal-Tücher	35x40 cm	992 341	03128002	30 Stück	20
Vala®Clean roll, Einmal-Handtücher, Rollen zu 175 Stück	22x30 cm	992 251	03127882	1 Rolle	18
Vala®Clean box, Entnahmebehälter für Einmal-Handtücher	leer	996 858	03542894	1 Stück	1

* Versand-Einheiten in Packungen

Vala®Clean extra

Einmal-Tücher aus reißfestem, geprägtem Spezial-Tissue; 30x33 cm.



Vala®Clean eco

Einmal-Tücher aus saugfähigem, recyceltem Tissue; besonders zur Reinigung bei Inkontinenz geeignet; 35x40 cm.



Vala®Clean roll

Einmal-Handtücher aus hochsaugfähigem Spezialtissue, in praktischer Rollenform, einzeln perforiert und leicht abzureißen; Rollen zu 175 Stück; 22x30 cm; für eine praktische Entnahme steht die ValaClean box zur Verfügung.



Vala®Clean box

Entnahmebehälter für Einmal-Handtücher in Rollenform, für Faltpapiere bis ca. 250 Blatt oder auch Zick-Zack-Lagen; aus weißem, stabilem Kunststoff mit transparenter Füllstandskontrolle; zur Wandmontage.



Vala®Fit

Die Einmal-Lätzchen und -Servietten für zuverlässigen Wäscheschutz



Charakteristik

Einmal-Schutzlätzchen und -Servietten aus gut saugendem Tissue; die Lätzchen verfügen außerdem über eine undurchlässige Folie und funktionelle Auffangtasche für Flüssigkeiten oder Speisereste sowie einen runden Halsausschnitt und sind bequem, weich und geschmeidig.

Anwendung

Als Wäscheschutz bei der Essenaufnahme, z. B. auf Kinderstationen, in der Intensiv- und Altenpflege, aber auch als Wäscheschutz in HNO-Abteilungen, Zahn- und Nervenkliniken.

Vala®Fit band

Einmal-Schutzlätzchen mit verstärkten Bändern zum Zusammenbinden im Nacken; in zwei Ausführungen erhältlich: 2-lagig aus Tissue mit Folienunterseite und 3-lagig aus beidseitigem Tissue mit Folienzwischen-schicht, wodurch das Lätzchen zusätzlich als Serviette zur nachträglichen Reinigung von Mund und Händen verwendbar ist.



Vala®Fit tape

Einmal-Schutzlätzchen mit selbsthaftender Klebleiste zur einfachen und schnellen Befestigung an der Kleidung, leicht und rückstandslos wieder ablösbar; 2-lagig aus Tissue mit Folienunterseite, 38x65 cm.



Vala®Fit eco

Einmal-Servietten aus saugfähigem, recyceltem Tissue; 3-lagig, 36x36 cm.



Handelsformen	Artikel-Nr.	PZN	Packungs-inhalt	VE Pack.*	
Vala®Fit band Schutzlätzchen	2-lagig, 38x50 cm	992 272	00850626	150 Stück	6
	3-lagig, 38x70 cm	992 252	03128367	100 Stück	6
Vala®Fit tape Schutzlätzchen	2-lagig, 38x65 cm	992 253	03128433	100 Stück	6
Vala®Fit eco Servietten	3-lagig, 36x36 cm	992 340	03128539	50 Stück	20

* Versand-Einheiten in Packungen

Vala®Comfort



Die komfortablen Einmal-Produkte für einen professionellen Einsatz

Charakteristik

ValaComfort umfasst Produkte wie Einziehdecken und -kissen, Schürzen sowie Tücher für die unterschiedlichsten Anwendungszwecke für einen zeitsparenden und wirtschaftlichen Einsatz.

Anwendung

Zur Einmalverwendung in allen Pflegebereichen.

Vala®Comfort blanket

Einziehdecken aus bauschelastischem Polyestervlies; strapazierfähig, sehr leicht, flauschig und anschmiegsam; feuchtigkeits- und luftdurchlässig, mit temperaturausgleichender Wirkung; 135x195 cm.



Vala®Comfort pillow

Kopf- und Stützkissen aus bauschelastischem Polyestervlies mit einem Überzug aus weichem, textilem Vliesstoff; sehr formstabil, mit guter Stützkraft, auch zum Hochlagern von Körperteilen geeignet; 40x50 cm.



Vala®Comfort net

Mehrzwecktücher aus netzartigem, textilem Vliesstoff, besonders weich und saugfähig, auch in nassem Zustand reiß- und abriebfest, 35x38 cm; besonders geeignet als Reinigungs- und Poliertuch.



Vala®Comfort multi

Mehrzwecktücher aus strapazierfähigem, bedrucktem Vliesstoff, gut saugfähig und reißfest, 34x38 cm, lila-weiß; besonders geeignet als Wischtuch bei Reinigungsarbeiten.



Vala®Comfort apron

Einwegschrürzen aus undurchlässiger Polyethylenfolie mit integriertem Halsausschnitt; mit Bändern im Rücken zu verschließen; 75 cm breit, für eine wirtschaftliche Anwendung zum Schutz vor Schmutz und Nässe.



Handelsformen	Artikel-Nr.	PZN	Packungs-inhalt	VE Pack.*
Vala®Comfort blanket, Einziehdecke	992 332	03154519	1 Stück	12
Vala®Comfort pillow, Kopf- und Stützkissen	992 333	03154554	4 Stück	5
Vala®Comfort net, Mehrzwecktücher	992 330	03154614	100 Stück	12
Vala®Comfort multi, Mehrzwecktücher	992 335	03154608	50 Stück	24
Vala®Comfort apron, 140 cm lang Einmal-Schrürzen	992 337	09042069	100 Stück	10

* Versand-Einheiten in Packungen



Vala®Protect

Die Einmal-Schutzlaken zur Reduzierung des Kontaminationsrisikos

Charakteristik

Einmal-Schutzlaken und -unterlagen aus gut saugendem Tissue mit undurchlässiger Folienunterseite; strapazierfähig, weich und geschmeidig.

Anwendung

Zum Abdecken von Matratzen, Liegen, Tragen usw. zur Reduzierung des Kontaminationsrisikos bzw. als Schutzunterlage auf Arbeitstischen, bei der Blutentnahme usw.



Vala®Protect basic

Einmal-Schutzlaken für eine bedarfsgerechte Abdeckung von z. B. Liegen oder Tragen sowie kleine Schutzunterlagen, z. B. als Kopfunterlage oder auch als Serviette bei Mundspülungen.



Vala®Protect special

Fadenverstärkte Einmal-Schutzlaken aus besonders saugfähigem Tissue, außerordentlich reißfest und strapazierfähig, mit Flüssigkeitssperre an den Längskanten, um seitliches Auslaufen zu verhindern; für eine sichere Abdeckung bei erhöhten Anforderungen.



Vala®Protect special eco

Fadenverstärkte Einmal-Schutzlaken aus 100 % Recycling-Tissue, besonders saugfähig, außerordentlich reißfest und strapazierfähig, mit Flüssigkeitssperre an den Längskanten, um seitliches Auslaufen zu verhindern; für eine sichere Abdeckung bei erhöhten Anforderungen.



Handelsformen	Artikel-Nr.	PZN	Packungs-inhalt	VE Pack.*
Vala®Protect basic, Einmal-Schutzunterlagen	992 226	03128019	250 Stück	8
Vala®Protect basic, Einmal-Schutzlaken	80x140 cm	992 227	100 Stück	1
	80x175 cm	992 228	100 Stück	1
	80x175 cm	992 221	25 Stück	4
	80x210 cm	992 229	100 Stück	1
Vala®Protect special, Einmal-Schutzlaken, fadenverstärkt	80x175 cm	992 238	100 Stück	1
	80x210 cm	992 239	100 Stück	1
Vala®Protect special eco, Einmal-Schutzlaken aus recyceltem Tissue, fadenverstärkt	80x175 cm	992 258	100 Stück	1
	80x210 cm	992 259	100 Stück	1

* Versand-Einheiten in Packungen

Peha-fresh



Das Raumspray mit Langzeitwirkung

Charakteristik

Hochwirksames Raumspray mit leichter, frischer Parfümierung und Langzeitwirkung; durch den Wirbelsprühkopf ist eine feine Verteilung des Sprühnebels gewährleistet; mit umweltfreundlichem Treibgas.

Anwendung

Zur nachhaltigen Verbesserung der Raumluft auf Stationen, in Aufenthalts- und Warteräumen, in Toiletten, aber auch im häuslichen Pflegebereich.



Handelsformen	Artikel-Nr.	PZN	Packungs-inhalt	VE Pack.*
Peha-fresh 400 ml	995 705	02101515	1 Dose	12

* Versand-Einheiten in Packungen

SicSac®



Der perfekte Auffangbeutel bei Übelkeit

Charakteristik

Spuckbeutel aus reißfestem Polyethylen; 11 cm großer Abschlussring als Mundstück, mit Kerben zum Einhängen des Beutels für einen sicheren Verschluss; Aufnahmekapazität ca. 1 Liter; zur Entnahme steht ein praktischer Spender zur Verfügung.

Anwendung

Als sicherer und hygienischer Auffangbeutel bei Übelkeit zum Einsatz in vielen Pflegebereichen, in der Arztpraxis, im Krankenhaus sowie in Alten- und Pflegeheimen, aber auch im häuslichen Pflegedienst oder bei Krankentransporten.



SicSac® Spender

Entnahmebehälter für SicSac Spuckbeutel, aus weiß lackiertem Metall, zur Wandmontage; im platzsparenden Format 13x47 cm.



Handelsformen	Artikel-Nr.	PZN	Packungs-inhalt	VE Pack.*
SicSac®, Spuckbeutel Ø 11 cm	999 586	00805560	50 Stück	6
SicSac® Spender leer, 13x47 cm	999 587	01260878	1 Stück	6

* Versand-Einheiten in Packungen

Peha-soft® powderfree

Der puderfreie Untersuchungshandschuh aus Latex

Charakteristik

Einmal-Untersuchungshandschuhe aus weichem Latex, puderfrei; durch Polymer-Innenbeschichtung leicht anzuziehen; texturierter Fingerbereich für optimale Griffigkeit; hochelastisch und reißfest; hervorragende Passform und ausgezeichnetes Tastempfinden; links und rechts zu tragen.



Anwendung

Als strapazierfähiger medizinischer Handschuh zum einmaligen Gebrauch in allen Bereichen, in denen das Personal in besonderem Maße durch Kontamination gefährdet ist und hohes Tastempfinden und guter Sitz erforderlich sind.



Ideal für Träger, die auf Handschuhpuder überempfindlich reagieren. Medizinprodukt nach EN 455.

Zugelassen für den Kontakt mit Lebensmitteln.



Handelsformen	Artikel-Nr.	PZN	Hilfsmittelnummer	Packungs-inhalt	VE Pack.*	
Peha-soft® powderfree, unsteril, in Spenderkartons	X-Small	942 159	03676057	19.99.01.0900	100 Stück	10
	Small	942 160	07126879	19.99.01.0011	100 Stück	10
	Medium	942 161	07126885	19.99.01.0011	100 Stück	10
	Large	942 162	07126891	19.99.01.0011	100 Stück	10
	X-Large	942 163	03676063	19.99.01.0011	100 Stück	10

* Versand-Einheiten in Packungen

Peha-soft® nitrile guard powderfree



Der latexfreie Untersuchungs- und Schutzhandschuh aus synthetischem Nitrilkautschuk mit der langen Stulpe

Charakteristik

Latexfreie Einmal-Untersuchungs- und Schutzhandschuhe aus weichem, blau gefärbtem Nitrilkautschuk, puderfrei; mit extra langer Stulpe für optimalen Schutz; durch chlorierte Innenbeschichtung leicht anzuziehen; texturierter Fingerbereich für optimale Griffbarkeit; hochelastisch und besonders reißfest; hervorragende Passform und ausgezeichnetes Tastempfinden; links und rechts zu tragen.

Anwendung

Als strapazierfähiger medizinischer Handschuh zum einmaligen Gebrauch in allen Bereichen, in denen das Personal durch Kontamination gefährdet ist. Insbesondere geeignet für Personen, die auf Handschuhpuder überempfindlich reagieren oder mit Allergien gegen Latexproteine (Typ-I-Allergie). Medizinprodukt nach EN 455 und Persönliche Schutzausrüstung nach EN 374, Kat. III, für den Einsatz im Labor und beim Umgang mit Chemikalien und Desinfektionsmitteln.

Zugelassen für den Kontakt mit Lebensmitteln.



**PSA Kat. III
EN 374**



Handelsformen		Artikel-Nr.	PZN	Packungs-inhalt	VE Pack.*
Peha-soft® nitrile guard powderfree, unsteril, in Spenderkartons	X-Small	942 200	03539159	100 Stück	10
	Small	942 201	03539171	100 Stück	10
	Medium	942 202	03539188	100 Stück	10
	Large	942 203	03539194	100 Stück	10
	X-Large	942 204	03539202	100 Stück	10

* Versand-Einheiten in Packungen

Peha-soft® nitrile sterile powderfree

Der sterile, latexfreie Untersuchungs- und Schutzhandschuh aus synthetischem Nitrilkautschuk



Charakteristik

Latexfreie, sterile Einmal-Untersuchungs- und Schutzhandschuhe aus weichem, blau gefärbtem Nitrilkautschuk, puderfrei; durch chlorierte Innenbeschichtung leicht anzuziehen; texturierter Fingerbereich für optimale Griffbarkeit; hochelastisch und besonders reißfest; hervorragende Passform und ausgezeichnetes Tastempfinden; paarweise verpackt.

Anwendung

Die Sterilisation wird insbesondere beim Verbandwechsel, bei Katheterisierungen, Intubationen usw. eingesetzt. Als strapazierfähiger medizinischer Handschuh zum einmaligen Gebrauch in allen Bereichen, in denen das Personal durch Kontamination gefährdet ist. Insbesondere geeignet für Personen, die auf Handschuhpuder überemp-



findlich reagieren oder mit Allergien gegen Latexproteine (Typ-I-Allergie). Medizinprodukt nach EN 455 und Persönliche Schutzausrüstung nach EN 374, Kat. III, für den Einsatz im Labor und beim Umgang mit Chemikalien und Desinfektionsmitteln.

**PSA Kat. III
EN 374**

Handelsformen		Artikel-Nr.	PZN	Packungs-inhalt	VE Pack.*
Peha-soft® nitrile sterile powderfree, steril, paarweise ozongeschützt eingesiegelt	Small	942 211	09213772	50 Paar	4
	Medium	942 212	09213789	50 Paar	4
	Large	942 213	09213795	50 Paar	4

* Versand-Einheiten in Packungen

Peha-soft® nitrile fino powderfree



Der latexfreie, samtig weiche Untersuchungs- und Schutzhandschuh aus synthetischem Nitrilkautschuk

Charakteristik

Latexfreie Einmal-Untersuchungs- und Schutzhandschuhe aus besonders weichem, lila gefärbtem Nitrilkautschuk, puderfrei; durch chlorierte Innenbeschichtung leicht anzuziehen; texturierter Fingerbereich für optimale Griffbarkeit; hochelastisch und besonders reißfest; hervorragende Passform und ausgezeichnetes Tastempfinden; links und rechts zu tragen.

Anwendung

Als strapazierfähiger medizinischer Handschuh zum einmaligen Gebrauch in allen Bereichen, in denen das Personal durch Kontamination gefährdet ist. Insbesondere geeignet für Personen, die auf Handschuhpuder überempfindlich reagieren oder mit Allergien gegen Latexproteine (Typ-I-Allergie). Medizinprodukt nach EN 455 und Persönliche Schutzausrüstung nach EN 374, Kat. III, für den Einsatz im Labor und beim Umgang mit Chemikalien und Desinfektionsmitteln.

Zugelassen für den Kontakt mit Lebensmitteln.



**PSA Kat. III
EN 374**

Handelsformen	Artikel-Nr.	PZN	Packungs-inhalt	VE Pack.*
Peha-soft® nitrile fino powderfree, unsteril, in Faltschachteln	Small	942 220	11309189	10 Stück
	Medium	942 221	11309195	10 Stück
	Large	942 222	11309203	10 Stück
Peha-soft® nitrile fino powderfree, unsteril, in Spenderkartons	X-Small	942 195	03539343	150 Stück
	Small	942 196	03539455	150 Stück
	Medium	942 197	03539509	150 Stück
	Large	942 198	03539722	150 Stück
	X-Large	942 199	03539774	150 Stück

* Versand-Einheiten in Packungen



Peha-soft® nitrile white powderfree

Der latexfreie Untersuchungs- und Schutzhandschuh aus weißem, synthetischem Nitrilkautschuk



Charakteristik

Latexfreie Einmal-Untersuchungs- und Schutzhandschuhe aus weichem Nitrilkautschuk, puderfrei; durch chlorierte Innenbeschichtung leicht anzuziehen; texturierter Fingerbereich für optimale Griffbarkeit; hochelastisch und besonders reißfest; hervorragende Passform und ausgezeichnetes Tastempfinden; links und rechts zu tragen.

Anwendung

Als strapazierfähiger medizinischer Handschuh zum einmaligen Gebrauch in allen Bereichen, in denen das Personal durch Kontamination gefährdet ist. Insbesondere geeignet für Personen, die auf Handschuhpuder überempfindlich reagieren oder mit Allergien gegen Latexproteine (Typ-I-Allergie).



Medizinprodukt nach EN 455 und Persönliche Schutzausrüstung nach EN 374, Kat. III, für den Einsatz im Labor und beim Umgang mit Chemikalien und Desinfektionsmitteln.

Zugelassen für den Kontakt mit Lebensmitteln.



**PSA Kat. III
EN 374**

Handelsformen	Artikel-Nr.	PZN	Packungs-inhalt	VE Pack.*
Peha-soft® nitrile white powderfree, unsteril, in Spenderkartons	Small	942 216	09339013	100 Stück
	Medium	942 217	09339036	100 Stück
	Large	942 218	09339042	100 Stück
Peha-soft® nitrile white powderfree, Großpackungen; unsteril, in Spenderkartons	X-Small	942 205	09213714	200 Stück
	Small	942 206	09213720	200 Stück
	Medium	942 207	09213737	200 Stück
	Large	942 208	09213743	200 Stück
	X-Large	942 209	09213766	180 Stück

* Versand-Einheiten in Packungen

Peha-soft® nitrile powderfree



Der latexfreie Untersuchungs- und Schutzhandschuh aus synthetischem Nitrilkautschuk

Charakteristik

Latexfreie Einmal-Untersuchungs- und Schutzhandschuhe aus weichem, blau gefärbtem Nitrilkautschuk, puderfrei; durch chlorierte Innenbeschichtung leicht anzuziehen; texturierter Fingerbereich für optimale Griffigkeit; hochelastisch und besonders reißfest; hervorragende Passform und ausgezeichnetes Tastempfinden; links und rechts zu tragen.

Anwendung

Als strapazierfähiger medizinischer Handschuh zum einmaligen Gebrauch in allen Bereichen, in denen das Personal durch Kontamination gefährdet ist. Insbesondere geeignet für Personen, die auf Handschuhpuder überempfindlich reagieren oder mit Allergien gegen Latexproteine (Typ-I-Allergie). Medizinprodukt nach EN 455 und Persönliche Schutzausrüstung nach EN 374, Kat. III, für den Einsatz im Labor und beim Umgang mit Chemikalien und Desinfektionsmitteln.

Zugelassen für den Kontakt mit Lebensmitteln.



PSA Kat. III
EN 374



Handelsformen	Artikel-Nr.	PZN	Packungs-inhalt	VE Pack.*	
Peha-soft® nitrile powderfree, unsteril, in Spenderkartons	X-Small	942 189	03538042	100 Stück	10
	Small	942 190	03538059	100 Stück	10
	Medium	942 191	03538065	100 Stück	10
	Large	942 192	03538071	100 Stück	10
	X-Large	942 193	03538088	90 Stück	10

* Versand-Einheiten in Packungen

Peha-soft® syntex powderfree

Der puder- und latexfreie Untersuchungs- handschuh aus besonders elastischem Vinyl



Charakteristik

Latexfreie Einmal-Untersuchungs- handschuhe aus weichem Stretchvinyl, puderfrei; durch Polymer-Innenbeschichtung leicht anzuziehen; elastisch und reißfest; hervorragende Passform und ausgezeichnetes Tastempfinden; links und rechts zu tragen.

Anwendung

Als strapazierfähiger medizinischer Handschuh zum einmaligen Gebrauch in allen Bereichen, in denen das Personal durch Kontamination gefährdet ist. Insbesondere geeignet für Personen, die auf Handschuhpuder überempfindlich reagieren oder mit Allergien gegen Latexproteine (Typ-I-Allergie) oder Beschleunigern (Typ-IV-Allergie). Medizinprodukt nach EN 455.

Handelsformen	Artikel-Nr.	PZN	Packungs-inhalt	VE Pack.*	
Peha-soft® syntex powderfree, unsteril, in Spenderkartons	X-Small	942 164	03887972	100 Stück	10
	Small	942 165	03887989	100 Stück	10
	Medium	942 166	03888291	100 Stück	10
	Large	942 167	03890201	100 Stück	10
	X-Large	942 168	03890922	100 Stück	10

* Versand-Einheiten in Packungen

Peha-soft® vinyl powderfree



Der puder- und latexfreie Untersuchungshandschuh aus Vinyl

Charakteristik

Latexfreie Einmal-Untersuchungshandschuhe aus weichem Vinyl, puderfrei; durch Polymer-Innenbeschichtung leicht anzuziehen; reißfest, gute Passform und ausgezeichnetes Tastempfinden; links und rechts zu tragen.

Anwendung

Als strapazierfähiger medizinischer Handschuh zum einmaligen Gebrauch in allen Bereichen, in denen das Personal durch Kontamination gefährdet ist. Insbesondere geeignet für Personen, die auf Handschuhpuder überempfindlich reagieren oder mit Allergien gegen Latexproteine (Typ-I-Allergie) oder Beschleunigern (Typ-IV-Allergie). Medizinprodukt nach EN 455.



Handelsformen	Artikel-Nr.	PZN	Packungs-inhalt	VE Pack.*	
Peha-soft® vinyl powderfree, unsteril, in Spenderkartons	X-Small	942 169	06682414	100 Stück	10
	Small	942 170	08909477	100 Stück	10
	Medium	942 171	08909483	100 Stück	10
	Large	942 172	08909508	100 Stück	10
	X-Large	942 173	06682420	100 Stück	10

* Versand-Einheiten in Packungen

Peha-fol®

Der wirtschaftliche Folienhandschuh für unhygienische Arbeiten



Charakteristik

Einmal-Handschuhe aus dünner und weicher Polyethylenfolie, strapazierfähig und reißfest durch fest und glatt verschweißte Ränder; links und rechts zu tragen; in Damen- und Herrengröße.

Anwendung

Für einen wirtschaftlichen Einsatz bei einfachsten Tätigkeiten.

Handelsformen	Artikel-Nr.	PZN	Packungs-inhalt	VE Pack.*	
Peha-fol®, in Folienbeuteln	Nr. 1, Damen	999 532	03513993	10 Stück	200
	Nr. 1, Damen	999 522	03514372	100 Stück	20
	Nr. 2, Herren	999 531	03514389	10 Stück	200
	Nr. 2, Herren	999 521	03514395	100 Stück	20

* Versand-Einheiten in Packungen

Peha-tex®



Der textile Handschuh aus reiner Baumwolle

Charakteristik

Zwirnhandschuhe aus reiner Baumwolle, weich, hautfreundlich und luftdurchlässig; anatomische Passform mit eingearbeiteten Zwickeln zwischen den Fingern, strapazierfähig durch fest verarbeitete Nähte, waschbar.

Anwendung

Als hautfreundlicher Schutz der Hände, insbesondere im dermatologischen Bereich, z. B. bei stark eingefetteten Händen, oder als Unterzug bei Verwendung von Haushaltshandschuhen.



Handelsformen	Artikel-Nr.	PZN	Packungs-inhalt	VE Pack.*
Peha-tex®, in Folienbeuteln	Gr. 6,5	992 130	03514001	10 Paar
	Gr. 7	992 131	03514018	10 Paar
	Gr. 7,5	992 132	03514024	10 Paar
	Gr. 8	992 133	03514030	10 Paar
	Gr. 8,5	992 134	03514047	10 Paar
	Gr. 9	992 135	03514053	10 Paar
	Gr. 9,5	992 136	03514076	10 Paar
	Gr. 10	992 137	03514082	10 Paar

* Versand-Einheiten in Packungen

MediSet® PEG/SBK

Das sterile Pflegeset für den Verbandwechsel bei PEG und SBK

Charakteristik

Komplettssets für den Verbandwechsel bei PEG und SBK; die sterilen Inhaltsteile sind ohne Unterverpackung in einer praktischen Blisterschale in Reihenfolge der Behandlungsschritte angeordnet; Faltschachtel mit ablösbaren, farbigen Dokumentations-Etiketten.



Anwendung

Zur Pflege von Sondenaustrittsstellen bei perkutaner endoskopischer Gastrostomie bzw. Kathetereintrittsstellen bei suprapubischem Blasenkatheterismus.



Inhalt

2 Vlieskompressen 7,5x7,5 cm, zur Reinigung
 1 Schlitzkomresse 7,5x7,5 cm, als Hautschutz
 1 Vlieskomresse 7,5x7,5 cm, zur Abdeckung der Halteplatte
 1 Fixiervlies 12,5x12,5 cm

Handelsformen	Artikel-Nr.	PZN	Packungs-inhalt	VE Pack.*
MediSet® PEG/SBK Standard, steril	455 502	01585818	10 Sets	12

* Versand-Einheiten in Packungen

Peha® Katheter-Sets



Peha® Katheter-Set AS

Basis-Inhalt.

Peha® Katheter-Set A

Basis-Inhalt plus:

2 puderfreie Latexhandschuhe

Peha® Katheter-Set AC

Basis-Inhalt plus:

2 puderfreie Latexhandschuhe
Sepso® J 30 ml, Instillagel® 11 ml

Peha® Katheter-Set QS

Basis-Inhalt.

Peha® Katheter-Set Q

Basis-Inhalt plus:

2 puderfreie Latexhandschuhe

Peha® Katheter-Set QC

Basis-Inhalt plus:

2 puderfreie Latexhandschuhe
Sepso® J 30 ml, Instillagel® 11 ml

Peha® Katheter-Set DK

Basis-Inhalt plus:

2 puderfreie Latexhandschuhe
Aqua-dest.-Glycerin-Spritze 10 ml

Peha® Katheter-Set DK/F

Basis-Inhalt plus:

2 puderfreie Latexhandschuhe
Aqua-dest.-Glycerin-Spritze 10 ml
Sepso® J 30 ml

Peha® Katheter-Set DK/M

Basis-Inhalt plus:

2 puderfreie Latexhandschuhe
Aqua-dest.-Glycerin-Spritze 10 ml
Sepso® J 30 ml, Instillagel® 11 ml

Sepso® J = eWZ Hofmann & Sommer GmbH und Co. KG, Königsee
Instillagel® = eWZ Farco Pharma GmbH, Köln

Für systematisches, steriles Arbeiten beim Katheterisieren

Charakteristik

Drei verschiedene Katheter-Set Typen mit individuellen Ergänzungsteilen in den Set-Varianten für systematisches, steriles und bedarfsorientiertes Arbeiten.

Typ A – für den intermittierenden Einmalkatheterismus, mit Urinbeutel 2000 ccm.

Typ Q – für den intermittierenden Einmalkatheterismus, mit Urinschale 500 ccm.

Typ D – für den Dauerkatheterismus; DK/F bei Frauen, DK/M bei Männern.

Anwendung

Für den Katheterismus der Harnblase; zum Abwerfen gebrauchten Materials wird die Außenschale verwendet.

Basis-Inhalt:

- 1 Einschlagtuch 50x50 cm, als sterile Arbeitsunterlage;
- 1 Lochtuch 60x60 cm, geschlitzt, zur Abdeckung des Genitalbereichs;
- 2 ES-Kompressen 7,5x7,5 cm und
- 4 pflaumengroße Tupfer, für die Desinfektion der Genitalien;
- 2 Pinzetten, für die Desinfektion und zum Einführen des Katheters;
- 1 Urinauffangbehälter, ausgenommen Typ D.



Handelsformen	Artikel-Nr.	PZN	Packungs-inhalt	VE Pack.*
Peha® Katheter-Set AS, steril	455 262	02708163	1 Set	14
Peha® Katheter-Set A, steril	455 260	01903342	1 Set	14
Peha® Katheter-Set AC, steril	455 261	02708128	1 Set N1	10
Peha® Katheter-Set QS, steril	455 268	02708134	1 Set	10
Peha® Katheter-Set Q, steril	455 266	01903359	1 Set	10
Peha® Katheter-Set QC, steril	455 267	02708140	1 Set N1	12
Peha® Katheter-Set DK, steril	455 263	03692079	1 Set	30
Peha® Katheter-Set DK/F, steril	455 265	02779341	1 Set N1	10
Peha® Katheter-Set DK/M, steril	455 264	02708157	1 Set N1	10

* Versand-Einheiten in Packungen

Peha® Fadenzieh-Set

Das sterile Fadenzieh-Set mit dem praxisgerechten Inhalt



Charakteristik

Basis-Set mit bedarfsgerecht zusammengestellten Inhaltsteilen in funktioneller Verpackung für eine problemlose Handhabung unter sterilen Kautelen.

Anwendung

Zum Entfernen von Wundfäden unter Einbeziehung der Wundreinigung; zur Aufnahme von Desinfektionsmittellösung sowie zum Ablegen der gezogenen Fäden bzw. des gebrauchten Materials wird die Verpackungschale verwendet.

Inhalt

- 3 ES-Kompressen, 8fach, 5x5 cm
- 1 Pinzette
- 1 Fadenmesser mit rundgeformter Klinge, in Aluminiumfolie eingeseigelt

Handelsformen	Artikel-Nr.	PZN	Packungs-inhalt	VE Pack.*
Peha® Fadenzieh-Set, steril, in Kunststoffschalen	991 900	01903371	1 Set	120

* Versand-Einheiten in Packungen

Pagavit®



Das Wattestäbchen mit Lemon-Glycerin für eine wirkungsvolle Mundpflege

Charakteristik

Wattestäbchen für die Mundpflege; getränkt mit Glycerin und Zitronensäure; der lang anhaltende Apfel-Citrus-Geschmack wirkt erfrischend und belebend, die Speichelbildung wird angeregt.

Anwendung

Zur Pflege der Lippen und der Mundhöhle bei Patienten mit ungenügender Speichelbildung, insbesondere bei hohem Fieber oder nach großen Operationen.



Handelsformen	Artikel-Nr.	PZN	Packungs-inhalt	VE Pack.*
Pagavit®, eingesiegelt zu 3 Stück	999 581	02101254	25x3 Stück	8

* Versand-Einheiten in Packungen

HARTMANN Holzmundspatel



Das unentbehrliche Hilfsmittel im medizinischen Alltag

Charakteristik

Klassischer Holzmundspatel mit abgerundeten Kanten und glatter Oberfläche, ca. 15 cm lang, unsteril.

Anwendung

Für Untersuchungen, zum Auftragen von Salben usw.



Handelsformen	Artikel-Nr.	PZN	Packungs-inhalt	VE Pack.*
HARTMANN Holzmundspatel	968 900	00494700	100 Stück	50

* Versand-Einheiten in Packungen

Wattestäbchen

Für vielfältigen Einsatz im medizinischen Bereich

Charakteristik

In verschiedenen Ausführungen für die unterschiedlichsten Anforderungen; in steriler sowie unsteriler Aufmachung mit unterschiedlich großem Wattekopf, aus Holz oder Polypropylen, wobei die Stäbchen aus Polypropylen über eine gewisse Flexibilität verfügen.



Anwendung

Zur Wund- und Mundpflege, z. B. zum gezielten Auftragen von Salben oder flüssigen Substanzen, zur Reinigung usw. Nicht in den Atemtrakt einführen.

Handelsformen	Artikel-Nr.	PZN	Packungs-inhalt	VE Pack.*
Peha® Wattestäbchen, 14 cm steril, eingesiegelt zu 2 Stück, aus Polypropylen, 4 mm Ø, mit großem Wattekopf	967 950	01903388	100x2 Stück	1
Wattestäbchen, 15 cm aus Holz, 2 mm Ø, mit kleinem Wattekopf	967 936	01480700	100 Stück	200
Wattestäbchen aus Polypropylen, 14 cm, 4 mm Ø, mit großem Wattekopf	967 939	07275208	50 Stück	20

* Versand-Einheiten in Packungen



Peha® Wattestäbchen



Steril, eingesiegelt zu 2 Stück in Blisterpackung; insbesondere zur äußerlichen Wundreinigung und -pflege, aber auch für Arbeiten im Labor, wenn Sterilität erforderlich ist.

Wattestäbchen



Unsterile Wattestäbchen aus Holz mit kleinem Wattekopf oder aus Polypropylen mit großem Wattekopf.

Peha® Abwurfbeutel



Der praktische, strapazierfähige Papierbeutel

Charakteristik

Aus festem, strapazierfähigem Papier, das auch in feuchtem Zustand seinen Zusammenhalt behält.

Anwendung

Zum Abwerfen benutzter Verbandstoffe und Einmalartikel beim Verbandwechsel; für eine hygienische Entsorgung, um einer Keimverschleppung entgegenzuwirken.



Handelsformen	Artikel-Nr.	PZN	Packungs-inhalt	VE Pack.*
Peha® Abwurfbeutel	999 990	01903299	50 Stück	10

* Versand-Einheiten in Packungen

Peha® Fadenmesser

Für eine zuverlässig schnelle Entfernung von Wundfäden



Charakteristik

Aus gehärtetem Qualitätsstahl, mit rundgeformter, exakt geschliffener Klinge und handlichem, 6,5 cm langem Schaft; einzeln in stabiler und sicherer Aluminiumfolie eingesiegelt.

Anwendung

Zum Entfernen von Wundfäden; das Messer wird nach Gebrauch in die Folie zurückgeschoben, um Verletzungen vorzubeugen.

Handelsformen	Artikel-Nr.	PZN	Packungs-inhalt	VE Pack.*
Peha® Fadenmesser, steril, einzeln eingesiegelt	999 591	03835656	100 Stück	50

* Versand-Einheiten in Packungen

Menalind® professional clean



Hautreinigungsprodukte für die strapazierte, ältere Haut

Charakteristik

Mit milden, waschaktiven und rückfettenden Substanzen zur gründlichen und pflegenden Reinigung der strapazierten Haut älterer Menschen; zusätzlich zu dem umfassenden Angebot stehen spezielle Produkte für eine professionelle Reinigung bettlägeriger oder inkontinenter Patienten zur Verfügung; mit leichtem, frischem Duft, pH-hautneutral, dermatologisch getestet.

Anwendung

Alle Menalind professional Hautreinigungsprodukte haben einen pH-hautneutralen Wert, beinhalten milde Waschsubstanzen in einer reduzierten Konzentration und decken die Reinigung mit und ohne Wasser ab.

Handelsformen	Artikel-Nr.	PZN	Packungs-inhalt	VE Pack.*
Menalind® professional clean Waschlotion	995 040	08805051	250 ml	20
	995 014	08805068	500 ml	12
Menalind® professional clean Shampoo	995 017	08805097	500 ml	12
Menalind® professional clean Pflegebad	995 015	08805074	500 ml	12
Menalind® professional clean Reinigungsschaum	995 016	08805080	400 ml	12
Menalind® professional clean Feuchtpflegetücher	995 038	08805111	50 Stück	12
Menalind® professional clean Feuchte Waschhandschuhe zum Baden im Bett	995 056	06186997	8 Stück	24

* Versand-Einheiten in Packungen



Menalind® professional clean

Menalind® professional clean Waschlotion

Zur täglichen sanften Reinigung, mit feuchtigkeitsspendendem Panthenol und reichhaltigem Mandelöl, wirkt geruchsneutralisierend; mit praktischer Dosierpumpe.



Menalind® professional clean Reinigungsschaum

Intensiv reinigendes Schaumspray mit Kreatin zur Unterstützung des natürlichen Hautschutzmechanismus, wirkt geruchsneutralisierend; ohne Wasser anzuwenden, gut zu portionieren und gezielt aufzutragen; vereinfacht die Reinigung stark verschmutzter oder verkrusteter Hautpartien, z. B. bei Stuhlinkontinenz.



Menalind® professional clean Shampoo

Sanft und gründlich reinigendes Haarsampoo, das durch Panthenol und Mandelöl die trockene Kopfhaut zusätzlich pflegt; wirkt geruchsneutralisierend; mit praktischer Dosierpumpe.



Menalind® professional clean Feuchtpflegetücher

Sanft reinigende, alkoholfreie Feuchttücher zur schnellen und gezielten Reinigung verschmutzter Hautpartien, z. B. bei Inkontinenz, wirken geruchsneutralisierend; ohne Wasser anzuwenden; schützen vor Keimverschleppung durch einmalige Anwendung; extra große Tücher 20x30 cm, in wiederverschließbarer Verpackung.



Menalind® professional clean Pflegebad

Sanft reinigender Badezusatz mit feuchtigkeitsspendendem Panthenol und reichhaltigem Mandelöl; wirkt geruchsneutralisierend; mit Dosierkappe.



Menalind® professional clean Feuchte Waschhandschuhe zum Baden im Bett

Weiche, textilartige Waschhandschuhe, gebrauchsfertig zur sanften und gründlichen Ganzkörperwäsche im Bett; alkoholfrei, mit pflegendem Panthenol und Aloe Vera, ohne Wasser anzuwenden; die pflegende Flüssigkeit zieht schnell ein und hinterlässt ein angenehmes Gefühl auf der Haut, das Abtrocknen mit einem Handtuch ist überflüssig, eine Packung mit 8 Waschhandschuhen ersetzt ein herkömmliches Bad und ist für bettlägrige Personen eine Alternative und für die Pflegekraft zeitsparend; bei Bedarf können die Waschhandschuhe in der Mikrowelle erwärmt oder im Kühlschrank gekühlt werden; praktische Fäustlings-Form, 17,5x23,5 cm



Menalind® professional care



Hautpflegeprodukte für die strapazierte, ältere Haut

Charakteristik

Mit hochwertigen und wirkungsvollen Substanzen für eine umfassende, intensive Pflege der trockenen und strapazierten älteren Haut; ein vitalisierendes Hautfluidgel ergänzt das Programm; wirkt geruchsneutralisierend, mit leichtem, frischem Duft, dermatologisch getestet.

Anwendung

Die Spezial-Pflegeserie Menalind professional ist mit ihren Pflegeprodukten besonders auf die Bedürfnisse der strapazierten, älteren Haut abgestimmt, die durch die Abnahme der Fett- und Feuchtigkeitsproduktion meist ein extrem trockenes Hautbild aufweist. So werden in den Pflegeprodukten Menalind professional verstärkt wertvolle, pflegende Öle, wie z. B. Mandelöl, mit hochwertigen Substanzen eingesetzt, um diese extreme Trockenheit der Haut auszugleichen und den dadurch bedingten Juckreiz zu lindern. Selbst die durchblutungsfördernden Mittel mit Menthol und Kampfer verfügen über rückfettende, pflegende Inhaltsstoffe, um die Haut nicht auszutrocknen.

Handelsformen	Artikel-Nr.	PZN	Packungs-inhalt	VE Pack.*
Menalind® professional care Körperlotion	995 041	08805128	250 ml	20
Menalind® professional care Körperlotion	995 019	08805134	500 ml	12
Menalind® professional care Hautpflegeöl	995 021	08805192	500 ml	12
Menalind® professional care Hautfluidgel	995 018	08805157	200 ml	12
Menalind® professional care Handcreme	995 020	08805163	200 ml	12



* Versand-Einheiten in Packungen

Menalind® professional care


Menalind® professional care Körperlotion

Mit dem hochwertigen Nutriskin Protection Complex bestehend aus natürlichem reichhaltigem Mandelöl, feuchtigkeitsspendenden Aminosäuren, energielieferndem Kreatin und entzündungshemmenden essentiellen ungesättigten Fettsäuren für die intensive Pflege der strapazierten Altershaut; W/O-Emulsion; mit praktischer Dosierpumpe.



Menalind® professional care Hautpflegeöl

Mit intensiver Rückfettung durch wertvolle, pflegende Öle, mit Vitamin E; lässt sich leicht verteilen und zieht schnell ein.

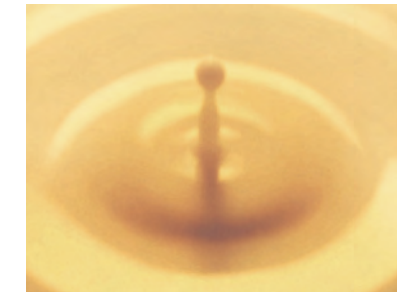

Menalind® professional care Hautfluidgel

Belebendes Gel durch Menthol und Kampfer, mit feuchtigkeitsspendendem Panthenol und reichhaltigem Mandelöl; für eine wohltuende Massage.



Menalind® professional care Handcreme

Feuchtigkeitsspendende Wasser-in-Öl-Emulsion mit Panthenol, reichhaltigem Mandelöl und Kreatin.



Menalind® professional protect



Hautschutzprodukte für zuverlässigen Schutz bei Inkontinenz

Charakteristik

Spezielle Produkte mit hochwertigen Inhaltsstoffen für den Schutz der Haut im Intimbereich vor aggressiven Substanzen bei Inkontinenz; abgestimmt auf die Bedürfnisse der Altershaut und speziell entwickelt, um die Saugleistung von Inkontinenzprodukten nicht einzuschränken; ein Öl-Hautschutzspray für besonders trockene Haut ergänzt das Programm; dermatologisch getestet.

Anwendung

Die speziellen Hautschutzprodukte der Pflegeserie Menalind professional sind auf die besonderen Bedürfnisse bettlägeriger oder inkontinenter Patienten abgestimmt. Das Öl-Hautschutzspray wird an extrem trockenen Hautpartien eingesetzt. An Stellen, die aggressiven Substanzen wie Urin und Stuhl ausgesetzt sind, wird die intensiv schützende und wirkungsvolle transparente Hautschutzcreme dünn aufgetragen. Den stärksten und dauerhaftesten Schutz bei Inkontinenz bietet das Schaumspray Menalind professional Haut-Protector. Der leichte Schaum bildet in der Hornschicht einen Schutzfilm, der dort bis zu 6 Stunden verbleibt. Während dieser Schutzzeit kann die Haut sogar gewaschen werden.

Handelsformen	Artikel-Nr.	PZN	Packungs-inhalt	VE Pack.*
Menalind® professional protect Hautprotector Schaumspray	995 024	08805246	100 ml	12
Menalind® professional protect Hautschutzcreme	995 022	08805200	200 ml	12
Menalind® professional protect Transparente Hautschutzcreme	995 026	08805217	200 ml	12
Menalind® professional protect Öl-Hautschutzspray	995 023	08805223	200 ml	12

* Versand-Einheiten in Packungen



Menalind® professional protect

Menalind® professional protect Hautprotector Schaumspray

Intensiv schützendes Schaumspray mit dem hochwertigen Nutriskin Protection Complex bestehend aus natürlichem reichhaltigem Mandelöl, feuchtigkeitsspendenden Aminosäuren, energielieferndem Kreatin und entzündungshemmenden essentiellen ungesättigten Fettsäuren sowie zusätzlichem Panthenol und Urea; der leichte Schaum bildet einen netzartigen Schutzfilm auf der Haut, der bis zu 6 Stunden anhält; speziell entwickelt für die Anwendung mit Inkontinenzprodukten, schränkt die Saugleistung nicht ein.



und entzündungshemmenden essentiellen ungesättigten Fettsäuren sowie zusätzlich Zinkoxid; bildet eine schützende Schicht auf der Haut und wirkt reizlindernd sowie geruchsneutralisierend; die Creme ist äußerst sparsam in der Anwendung, wird nur sehr dünn aufgetragen und nicht einmassiert.


Menalind® professional protect Transparente Hautschutzcreme

Die Creme mit dem hochwertigen Nutriskin Protection Complex bestehend aus natürlichem reichhaltigem Mandelöl, feuchtigkeitsspendenden Aminosäuren, energielieferndem Kreatin und entzündungshemmenden essentiellen ungesättigten Fettsäuren bildet einen transparenten Schutzfilm und zieht schnell ein; wirkt geruchsneutralisierend; ohne Zinkoxid, W/O/W-Emulsion; speziell entwickelt für die Anwendung mit Inkontinenzprodukten, schränkt die Saugleistung nicht ein.



Menalind® professional protect Hautschutzcreme

Die Creme beinhaltet den hochwertigen Nutriskin Protection Complex bestehend aus natürlichem reichhaltigem Mandelöl, feuchtigkeitsspendenden Aminosäuren, energielieferndem Kreatin

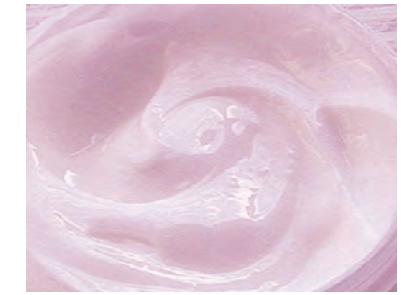

Menalind® professional protect Öl-Hautschutzspray

Schützt und pflegt extrem trockene Körperpartien, mit feuchtigkeitsspendendem Panthenol und reichhaltigem Mandelöl; wirkt geruchsneutralisierend; lässt sich gezielt aufsprühen und leicht verteilen, zieht schnell ein und bildet einen Schutzfilm auf der Haut.



Wie lässt sich mit OP-Einmal-Produkten das Infektionsrisiko reduzieren?

Unsere innovativen Einmalprodukte für den OP minimieren das Risiko von Kreuzkontaminationen.

Bei HARTMANN befassen wir uns mit einem Thema, das die gesamte Medizinbranche betrifft: Wie können mehr Operationen und Behandlungen mit dem vorhandenen Personalbestand durchgeführt werden, ohne Abstriche bei den klinischen Standards hinnehmen zu müssen? Wir arbeiten eng mit medizinischem Fachpersonal zusammen, um Möglichkeiten zu finden, die Patientensicherheit mit kosten- und zeitsparenden Lösungen zu verbessern.

Für das komplette OP-Programm
steht ein separater Band

„HARTMANN OP-Katalog“

zur Verfügung.

Peha-taft® latex: Veredelt und glatt, ohne rutschig zu sein.

Puderfreie Einmal-OP-Handschuhe aus dünnem und besonders weichem Latex, durch spezielle Polymer-Innenbeschichtung besonders leicht anzuziehen, mit spezieller mikrogerauter Oberfläche für optimale Griffigkeit, sehr gutes Tastempfinden, hochelastisch und reißfest, ermüdungsfreier Sitz durch vollanatomische Passform. Peha-taft latex ist ein Medizinprodukt nach EN 455 und Persönliche Schutzausrüstung nach EN 374. Geeignet für den Einsatz mit Zytostatika und Chemikalien. Empfohlen als Überziehhandschuh in Kombination mit Peha-underglove latex. Er erreicht ein AQL Niveau von 0,65.

Peha-taft® latex.

Geeignet für alle chirurgischen Eingriffe, auch bei Operationen mit hohem Perforationsrisiko (Orthopädie, Traumatologie, Unfallchirurgie) und bei Hochrisikopatienten als Überziehhandschuh beim Double Gloving.



OP-Handschuhe: Peha-taft latex über Peha-underglove latex

Foliodrape® Protect Abdecktücher



Die sterile Abdeckung für optimalen Keimschutz

Charakteristik

Aus leistungsstarkem Zweischichtmaterial; undurchlässig für Feuchtigkeit und Keime; abriebfest und äußerst fusselarm; gut drapierfähig; auch selbstklebend erhältlich.

Anwendung

Zur sterilen Abdeckung von Patienten und Inventar im OP, in der Ambulanz, auf der Station und in der Praxis.

Foliodrape® Protect Abdecktücher selbstklebend

Mit sicher haftendem Klebestreifen zur schnellen Fixierung und exakten Begrenzung des Inzisionsbereiches.




Handelsformen	Artikel-Nr.	PZN	Packungs-inhalt	VE Pack.*
Foliodrape® Protect Abdecktücher, steril, einzeln verpackt	45x75 cm	277 500	00798179	65 Stück
	75x90 cm	277 502	00798185	35 Stück
	90x150 cm	277 506	00798191	20 Stück
Foliodrape® Protect Abdecktücher, selbstklebend, steril, einzeln verpackt	45x75 cm	277 507	00798245	60 Stück
	75x90 cm	277 508	00798251	40 Stück

* Versand-Einheiten in Packungen

Foliodrape® Protect Lochtücher

Die sterile Abdeckung mit Lochausschnitt, auch 2-teilig für einen individuellen Lochdurchmesser

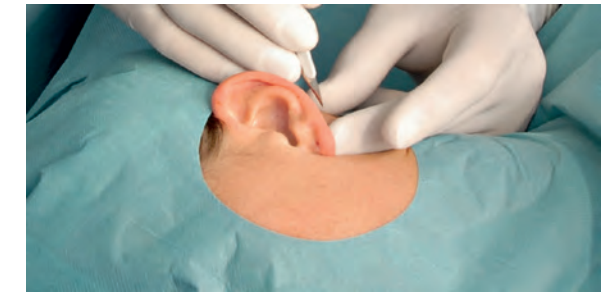

Charakteristik

Aus leistungsstarkem Zweischichtmaterial; mit Lochausschnitt; undurchlässig für Feuchtigkeit und Keime; abriebfest und äußerst fusselarm; gut drapierfähig; auch erhältlich als selbstklebendes, zweiteiliges Lochtuch.

Foliodrape® Protect Lochtücher selbstklebend 2-teilig

Durch Übereinanderführen der beiden selbstklebenden Tuchhälften kann der Lochdurchmesser individuell bestimmt werden.

Anwendung

Zur sterilen Abdeckung von Patienten im OP, in der Ambulanz, auf der Station und in der Praxis.

Handelsformen	Artikel-Nr.	PZN	Packungs-inhalt	VE Pack.*
Foliodrape® Protect Lochtücher, steril, einzeln verpackt	45x75 cm; Ø 7 cm	277 503	00798216	65 Stück
	75x90 cm; Ø 10 cm	277 511	00798222	40 Stück
Foliodrape® Protect Lochtücher, selbstklebend 2-teilig, steril, einzeln verpackt	45x75 cm; Ø variabel	277 509	00798268	65 Stück
	75x90 cm; Ø variabel	277 510	00798274	40 Stück

* Versand-Einheiten in Packungen

Foliodress® S



Der Schutzkittel für Personal und Besucher

Charakteristik

Einmal-Schutzkittel aus weichem Vliesstoff mit undurchlässiger Folieninnenseite; Einheitsgröße in großzügigem Zuschnitt mit breit überlappender Rückenpartie; mit Verschlussbändern am Hals, 2 m langem Bindeband und elastischem Ärmelabschluss.

Anwendung

Zum Schutz vor Partikelverschleppung, um den Patienten und sein Umfeld vor Kontamination mit Fremdpartikeln zu schützen; insbesondere auf Intensivstationen, in Infektionsabteilungen, aber auch in der Pädiatrie oder Altenpflege; insbesondere als Nässeschutz bei der Patientenpflege, z. B. beim Waschen oder Baden.



Handelsformen	Artikel-Nr.	PZN	Packungs-inhalt	VE Pack.*
Foliodress® S, 122 cm lang weiß	604 707	04796585	50 Stück	1

* Versand-Einheiten in Packungen

Foliodress® Cap Comfort Universal

Die funktionelle OP-Haube für zuverlässigen Schutz

Charakteristik

Universelle Baretthauben mit umlaufendem Gummizug; aus atmungsaktivem, hautsympathischem Viskose-Vliesstoff; hohe Luftdurchlässigkeit und gute Wärmeregulation; besonders leicht; in Grün und Weiß erhältlich.



Anwendung

Zur Einmalverwendung im OP-Bereich für eine sichere und funktionelle Abdeckung der Haare; auch als Kopfbedeckung für Patienten geeignet.

Handelsformen	Artikel-Nr.	PZN	Packungs-inhalt	VE Pack.*
Foliodress® Cap Comfort Universal, in Entnahmekartons grün	992 465	00840102	100 Stück	8
weiß	992 466	00840645	100 Stück	8

* Versand-Einheiten in Packungen

Foliodress® Mask Comfort



Foliodress® Mask Comfort Senso

In einer besonders weichen und leichten Materialkombination; mit ultraschallverschweißten Bändern; für sehr sensible Haut.



Foliodress® Mask Comfort Special

In einer weichen Materialkombination; mit weich gepolstertem Nasenbügel und genähten Bändern; für sensible Haut.



Foliodress® Mask Comfort Perfect

Mit ultraschallverschweißten Bändern; für normal empfindliche Haut.



Die OP-Masken mit optimaler Filterleistung und höchstem Tragekomfort

Charakteristik

OP-Masken nach DIN EN ISO 14683:2005 Typ II aus hypoallergenen besonders weichen und geschmeidigen Vliesstoffen, naturlatexfrei; mit speziellem Micro-Keimfilter für freies Atmen bei optimaler Filterleistung; mit langem, integriertem Nasenbügel; geruchsneutral und strapazierfähig; erhältlich in verschiedenen Materialkombinationen und Modellen für die unterschiedlichsten Anforderungen.

Anwendung

Für den Einmalgebrauch.

Foliodress® Mask Comfort Loop

Mit weichen, elastischen Gummibändern zur Fixierung hinter den Ohren.



Foliodress® Mask Comfort Anti fogging

Speziell für Brillenträger; ein spezielles Anti-Beschlagband über dem Nasenrücken schützt vor Beschlagen von Brillengläsern.



Handelsformen	Artikel-Nr.	PZN	Packungsinhalt	VE Pack.*
Foliodress® Mask Comfort Senso, in Entnahmekartons	992 138	02845865	50 Stück	6
Foliodress® Mask Comfort Special, in Entnahmekartons	992 142	02845842	50 Stück	6
Foliodress® Mask Comfort Perfect, in Entnahmekartons	992 143	02845552	50 Stück	6
Foliodress® Mask Comfort Loop, in Entnahmekartons	992 537	02855237	50 Stück	10
Foliodress® Mask Comfort Anti fogging, in Entnahmekartons	992 530	02847249	50 Stück	6

* Versand-Einheiten in Packungen

Foliodress® Eye Protect

Der sichere und komfortable Extraschutz für die Augen

Charakteristik

Wiederaufbereitbare Schutzbrille mit Panoramascheibe aus hartbeschichtetem Polycarbonat, mit Antibeschlagbeschichtung und integriertem Seitenschutz; sicherer Sitz durch anatomische Form und individuell einstellbare Bügel.

Anwendung

Persönliche Schutzausrüstung für den Anwender im Gesundheitswesen sowie in sämtlichen



OP-Bereichen; wiederaufbereiter Augenschutz; schützt gegen infektiöse Flüssigkeiten und lose Partikel; Einsatzgebiet auf Intensivstationen und in allen Bereichen, in denen ein hohes Infektionsrisiko besteht.

Handelsformen	Artikel-Nr.	PZN	Packungsinhalt	VE Pack.*
Foliodress® Eye Protect	992 524	09684508	5 Stück	12

* Versand-Einheiten in Packungen

Peha®-micron latex



Der Feinfühlige. Dünn und tast-sensibel, wie eine zweite Haut

Charakteristik

Puderfreie Einmal-OP-Handschuhe aus besonders dünnem und weichem Latex, insbesondere auch an den Fingerspitzen für ausgezeichnetes Tastempfinden, durch Polymer-Innenbeschichtung leicht anzuziehen, mit modifizierter mikrograuer Oberfläche für optimale Griffigkeit, hochelastisch und reißfest, ermüdungsfreier Sitz durch vollanatomische Passform, mit verstärkter Stulpe. Zur Vermeidung von Lichtreflexen ist er braun eingefärbt. Peha-micron latex ist ein Medizinprodukt nach EN 455 und Persönliche Schutzausrüstung nach EN 374. Geeignet für den Einsatz mit Zytostatika und Chemikalien. Er erreicht ein AQL Niveau von 0,65.

Anwendung

Geeignet für alle chirurgischen Eingriffe, insbesondere für Mikrochirurgie, Neurochirurgie, plastische Chirurgie, Ophthalmologie, HNO-Eingriffe und Herzchirurgie.



Handelsformen	Artikel-Nr.	PZN	Packungs-inhalt	VE Pack.*	
Peha®-micron latex, steril, paarweise ozongeschützt eingiesigelt	Gr. 5,5	942 570	10387081	50 Paar	4
	Gr. 6	942 571	10387098	50 Paar	4
	Gr. 6,5	942 572	10387106	50 Paar	4
	Gr. 7	942 573	10387112	50 Paar	4
	Gr. 7,5	942 574	10387129	50 Paar	4
	Gr. 8	942 575	10387135	50 Paar	4
	Gr. 8,5	942 576	10387141	50 Paar	4
	Gr. 9	942 577	10387158	50 Paar	4

* Versand-Einheiten in Packungen

Peha®-profile latex

Der griffige Allrounder. Mit dem besonderen Profil



Charakteristik

Puderfreie Einmal-OP-Handschuhe aus dünnem und besonders weichem Latex, durch Polymer-Innenbeschichtung leicht anzuziehen, mit spezieller, texturierter Oberfläche für ausgezeichnetes Tastempfinden und optimale Griffigkeit, hochelastisch und reißfest für besonderen Schutz, ermüdungsfreier Sitz durch vollanatomische Passform. Peha-profile latex ist ein Medizinprodukt nach EN 455 und Persönliche Schutzausrüstung nach EN 374. Geeignet für den Einsatz mit Zytostatika und Chemikalien. Empfohlen als Überziehhandschuh in Kombination mit Peha-underglove latex. Er erreicht ein AQL Niveau von 0,65.

Anwendung

Geeignet für alle chirurgischen Eingriffe, insbesondere bei Operationen mit hohem Perforationsrisiko (Orthopädie, Traumatologie, Unfallchirurgie) und bei Hochrisikopatienten als Überziehhandschuh beim Double Gloving.

Handelsformen	Artikel-Nr.	PZN	Packungs-inhalt	VE Pack.*	
Peha®-profile latex, steril, paarweise ozongeschützt eingiesigelt	Gr. 5,5	942 690	10387253	50 Paar	4
	Gr. 6	942 691	10387282	50 Paar	4
	Gr. 6,5	942 692	10387299	50 Paar	4
	Gr. 7	942 693	10387307	50 Paar	4
	Gr. 7,5	942 694	10387336	50 Paar	4
	Gr. 8	942 695	10387342	50 Paar	4
	Gr. 8,5	942 696	10387359	50 Paar	4
	Gr. 9	942 697	10387365	50 Paar	4

* Versand-Einheiten in Packungen

Peha-taft® latex



Der Anspruchsvolle. Veredelt und glatt, ohne rutschig zu sein

Charakteristik

Puderfreie Einmal-OP-Handschuhe aus dünnem und besonders weichem Latex, durch spezielle Polymer-Innenbeschichtung besonders leicht anzuziehen, mit spezieller mikrogerauter Oberfläche für optimale Griffigkeit, sehr gutes Tastempfinden, hochelastisch und reißfest, ermüdungsfreier Sitz durch vollanatomische Passform. Peha-taft latex ist ein Medizinprodukt nach EN 455 und Persönliche Schutzausrüstung nach EN 374. Geeignet für den Einsatz mit Zytostatika und Chemikalien. Empfohlen als Überziehhandschuh in Kombination mit Peha-underglove latex. Er erreicht ein AQL Niveau von 0,65.

Anwendung

Geeignet für alle chirurgischen Eingriffe, auch bei Operationen mit hohem Perforationsrisiko (Orthopädie, Traumatologie, Unfallchirurgie) und bei Hochrisikopatienten als Überziehhandschuh beim Double Gloving.



Handelsformen		Artikel-Nr.	PZN	Packungs-inhalt	VE Pack.*
Peha-taft® latex, steril, paarweise ozongeschützt eingesiegelt	Gr. 5,5	942 589	10387448	50 Paar	6
	Gr. 6	942 590	10387454	50 Paar	6
	Gr. 6,5	942 591	10387460	50 Paar	6
	Gr. 7	942 592	10387477	50 Paar	6
	Gr. 7,5	942 593	10387483	50 Paar	6
	Gr. 8	942 594	10387508	50 Paar	6
	Gr. 8,5	942 595	10387514	50 Paar	6
	Gr. 9	942 596	10387520	50 Paar	6

* Versand-Einheiten in Packungen

Peha®-underglove latex

Der latexhaltige Partner in Grün. Macht unsichtbare Gefahren sichtbar



Charakteristik

Puderfreie Einmal-OP-Handschuhe aus dünnem und besonders weichem Latex, spezielle Polymer-Innenbeschichtung und spezielle nicht texturierte Oberfläche für leichtes Anziehen, sehr gutes Tastempfinden, hochelastisch und reißfest, ermüdungsfreier Sitz durch vollanatomische Passform. Peha-underglove latex ist ein Medizinprodukt nach EN 455 und Persönliche Schutzausrüstung nach EN 374. Geeignet für den Einsatz mit Zytostatika und Chemikalien. Empfohlen als Unterziehhandschuh in Kombination mit Peha-profile latex, Peha-taft classic powderfree und Peha-taft latex. Er erreicht ein AQL Niveau von 0,65.

Anwendung

Geeignet für alle chirurgischen Eingriffe, insbesondere bei Operationen mit hohem Perforationsrisiko als Unterziehhandschuh beim Double Gloving (Orthopädie, Traumatologie, Unfallchirurgie) oder bei Hochrisikopatienten. Kann auch als einzelner Handschuh mit besonderem Tastempfinden verwendet werden.

Handelsformen		Artikel-Nr.	PZN	Packungs-inhalt	VE Pack.*
Peha®-underglove latex, steril, paarweise ozongeschützt eingesiegelt	Gr. 5,5	942 510	10387655	50 Paar	4
	Gr. 6	942 511	10387661	50 Paar	4
	Gr. 6,5	942 512	10387678	50 Paar	4
	Gr. 7	942 513	10387684	50 Paar	4
	Gr. 7,5	942 514	10387690	50 Paar	4
	Gr. 8	942 515	10387709	50 Paar	4
	Gr. 8,5	942 516	10387715	50 Paar	4
	Gr. 9	942 517	10387721	50 Paar	4

* Versand-Einheiten in Packungen

Peha®-isoprene latexfree



Der Latexähnliche. Alle Vorteile von Latex, nur ohne Latex

Charakteristik

Latex- und puderfreie Einmal-OP-Handschuhe aus besonders dünnem und weichem 100 % synthetischem Polyisopren, durch Polymer-Innenbeschichtung leicht anzuziehen, mikrogeraute Oberfläche, ausgezeichnetes Tastempfinden, hochelastisch und reißfest, ermüdungsfreier Sitz durch vollanatomische Passform. Geeignet für Latexallergiker. Peha-isoprene latexfree ist ein Medizinprodukt nach EN 455 und Persönliche Schutzausrüstung nach EN 374. Geeignet für den Einsatz mit Zytostatika und Chemikalien. Empfohlen als Überziehhandschuh in Kombination mit Peha-underglove latexfree. Er erreicht ein AQL Niveau von 0,65.

Anwendung

Geeignet für alle chirurgischen Eingriffe, auch bei Operationen mit hohem Perforationsrisiko und Hochrisikopatienten, als Überziehhandschuh beim Double Gloving.



Handelsformen		Artikel-Nr.	PZN	Packungs-inhalt	VE Pack.*
Peha®-isoprene latexfree, steril, paarweise ozongeschützt eingesiegelt	Gr. 5,5	942 717	10386986	50 Paar	4
	Gr. 6	942 718	10386992	50 Paar	4
	Gr. 6,5	942 719	10387000	50 Paar	4
	Gr. 7	942 720	10387017	50 Paar	4
	Gr. 7,5	942 721	10387046	50 Paar	4
	Gr. 8	942 722	10387052	50 Paar	4
	Gr. 8,5	942 723	10387069	50 Paar	4
	Gr. 9	942 724	10387075	50 Paar	4

* Versand-Einheiten in Packungen

Peha®-neon latexfree

Der Kompromisslose. Schutz und Tragekomfort – nicht nur für Allergiker



Charakteristik

Latex- und puderfreie Einmal-OP-Handschuhe aus synthetischem Polychloropren, durch Polymer-Innenbeschichtung leicht anzuziehen, mit spezieller texturierter Oberfläche für gute Griffigkeit, sehr gutes Tastempfinden, hochelastisch und reißfest, ermüdungsfreier Sitz durch vollanatomische Passform, braun eingefärbt zur Vermeidung von Lichtreflexen. Geeignet für Latexallergiker. Peha-neon latexfree ist ein Medizinprodukt nach EN 455 und Persönliche Schutzausrüstung nach EN 374. Geeignet für den Einsatz mit Zytostatika und Chemikalien. Limitierter Schutz gegen Knochenzement. Er erreicht ein AQL Niveau von 0,65.

Anwendung

Geeignet für alle chirurgischen Eingriffe, insbesondere in der Orthopädie.

Handelsformen		Artikel-Nr.	PZN	Packungs-inhalt	VE Pack.*
Peha®-neon latexfree, steril, paarweise ozongeschützt eingesiegelt	Gr. 5,5	942 544	10387170	50 Paar	4
	Gr. 6	942 545	10387187	50 Paar	4
	Gr. 6,5	942 546	10387193	50 Paar	4
	Gr. 7	942 547	10387201	50 Paar	4
	Gr. 7,5	942 548	10387218	50 Paar	4
	Gr. 8	942 549	10387224	50 Paar	4
	Gr. 8,5	942 550	10387230	50 Paar	4
	Gr. 9	942 551	10387247	50 Paar	4

* Versand-Einheiten in Packungen

Peha®-underglove latexfree



Der latexfreie Partner in Grün.
Macht unsichtbare Gefahren
sichtbar – auch für Allergiker

Charakteristik

Puderfreie OP-Handschuhe aus synthetischem Polyisopren, spezielle Polymer-Innenbeschichtung und nicht texturierte Oberfläche für leichtes Anziehen, sehr gutes Tastempfinden, hochelastisch und reißfest, ermüdungsfreier Sitz durch vollanatomische Passform. Geeignet für Latexallergiker. Peha-underglove latexfree ist ein Medizinprodukt nach EN 455 und Persönliche Schutzausrüstung nach EN 374. Geeignet für den Einsatz mit Zytostatika und Chemikalien. Empfohlen als Unterziehhandschuh in Kombination mit Peha-isoprene latexfree. Er erreicht ein AQL Niveau von 0,65.

Anwendung

Geeignet für alle chirurgischen Eingriffe, insbesondere bei Operationen mit hohem Perforationsrisiko als Unterziehhandschuh beim Double Gloving (Orthopädie, Traumatologie, Unfallchirurgie) oder bei Hochrisikopatienten. Kann auch als einzelner Handschuh mit besonderem Tastempfinden verwendet werden.



Handelsformen	Artikel-Nr.	PZN	Packungs- inhalt	VE Pack. *	
Peha®-underglove latexfree, steril, paarweise ozongeschützt eingesiegelt	Gr. 5,5	942 520	10387738	50 Paar	4
	Gr. 6	942 521	10387744	50 Paar	4
	Gr. 6,5	942 522	10387750	50 Paar	4
	Gr. 7	942 523	10387767	50 Paar	4
	Gr. 7,5	942 524	10387773	50 Paar	4
	Gr. 8	942 525	10387796	50 Paar	4
	Gr. 8,5	942 526	10387804	50 Paar	4
	Gr. 9	942 527	10387810	50 Paar	4

* Versand-Einheiten in Packungen

Wie können Hygienekonzepte nosokomiale Infektionen um ein Drittel verringern?

Mit der BODE CHEMIE, seit 2009 ein hundertprozentiges Tochterunternehmen der PAUL HARTMANN AG, bieten wir Wissen und Know-how zur Desinfektion und Hygiene für den privaten und professionellen Bereich.

Bei HARTMANN kennen wir die Bedeutung von Hygiene für die Verringerung von nosokomialen Infektionen. Wir bieten nicht nur ein umfangreiches Produktsortiment für Hände-, Haut-, Flächen- und Instrumentendesinfektion – wir liefern auch Informations- und Schulungsmaterial, das medizinisches Personal und Patienten über die Bedeutung dieser Maßnahmen aufklärt. Um darüber hinaus die regelmäßige Verwendung unserer Produkte zu fördern, legen wir großen Wert auf deren Wirksamkeit und Verträglichkeit.

Für das komplette Desinfektions- und Hygiene-Programm steht ein separater

„Sortimentskatalog“

zur Verfügung.



Sterillium®: Ausgezeichnet als Marke des Jahrhunderts.

Fundierte Expertise im Bereich Hygiene, Desinfektion und Infektionsprophylaxe hat HARTMANN insbesondere seit 2009 durch sein hundertprozentiges Tochterunternehmen BODE Chemie hinzugewonnen. Die BODE Chemie, 1924 als Bacillolfabrik Dr. Bode & Co. gegründet, blickt auf eine langjährige und bewegte Geschichte zurück.

Ein besonderer Meilenstein in der Historie des Chemie-Unternehmens stellt die Entwicklung von Sterillium dar – des weltweit ersten marktfähigen alkoholischen Hände-Desinfektionsmittels. Seine zu dieser Zeit einzigartige Rezeptur aus hohem Alkoholgehalt und rückfettenden Substanzen sorgte erstmals für umfassende Wirksamkeit gegen Keime bei gleichzeitig guter Hautverträglichkeit. Als 1965 die erste Sterillium-Charge das Werk in Hamburg-Stellingen verließ, ahnte jedoch noch niemand, welchen Siegeszug dieses Produkt innerhalb kürzester Zeit antreten sollte.

Passend zum 50. Geburtstag erhielt Sterillium ein ganz besonderes Geschenk: Zum runden Jubiläum zeichnete der Fachverlag Deutsche Standards das bekannte blaue Händedesinfektionsmittel als Marke des Jahrhunderts aus. Sterillium gehört damit zum exklusiven Kreis der stärksten Marken Deutschlands. Mit seiner bis dato nicht erreichten Hautverträglichkeit und seiner umfassend wie schnellen Wirksamkeit revolutionierte Sterillium die Hygiene und ist heute aus dem medizinischen Alltag und der Industrie kaum mehr weg zu denken. Jährlich desinfiziert Sterillium etwa drei Milliarden Hände und hilft damit wirksam, gefährliche Infektionen zu verhindern und Menschen zu schützen.

HARTMANN bietet das Komplettprogramm für gesunde Hände.

Eine effiziente Händehygiene setzt sich aus der Händedesinfektion, konsequentem Schutz und Pflege, einer schonenden Reinigung sowie dem Tragen der richtigen Schutzhandschuhe zusammen.

Das HARTMANN Hände Hygiene System bietet eine Komplettlösung aus hochwertigen Qualitätsprodukten. Das besondere Plus: Hände-Desinfektionsmittel, Hautschutz- und Hautpflegeprodukte, Waschlotionen sowie Schutzhandschuhe sind nicht nur einzeln begutachtet, sondern auch untereinander wissenschaftlich auf Kompatibilität geprüft.



Sterillium®



Der Klassiker der alkoholischen Händedesinfektion. Seit über 50 Jahren erfolgreich. Dank seiner verlässlichen antimikrobiellen Wirksamkeit und seiner hervorragenden Hautfreundlichkeit der Favorit von Millionen Nutzern rund um die Welt

Charakteristik

- umfassend wirksam gegen Bakterien, Hefepilze und behüllte Viren
- besonders hautverträglich und rückfettend
- erhöht die Hautfeuchtigkeit bei regelmäßiger Anwendung¹⁾
- ausgezeichnete Verträglichkeit auch bei Langzeitanwendung
- hervorragende Sofortwirkung

Anwendung

Sterillium eignet sich zur hygienischen und chirurgischen Händedesinfektion. Sterillium wird als gebrauchsfertiges alkoholisches Einreibepreparat – unabhängig von Wasser und Waschbecken – in allen hygiene relevanten Bereichen des Gesundheitswesens, der Industrie, bei der Heimdialyse und auf Reisen zur Vorbeugung von Infektionen eingesetzt. Sterillium ist ein Vorreiter im Bereich der alkoholischen chirurgischen Händedesinfektion und bietet eine hohe Sofortwirkung sowie eine zuverlässige Langzeitwirkung bis zu sechs Stunden. Dabei fühlt sich das Produkt nicht nur gut auf den Händen an, sondern erhöht sogar bei regelmäßiger Anwendung die Hautfeuchtigkeit.

¹⁾ Reece, B. RCTS (2014): Evaluating the Effect of a Hand Sanitizer Using an Exaggerated Handwash Method
Studie wurde mit Sterillium classic pure durchgeführt.



Handelsformen	Artikel-Nr.	PZN	Packungs-inhalt	VE Pack.*	
Sterillium®	Flasche	981 069	06127658	50 ml	20
Apotheken-aufmachung	Flasche	981 216	00970690	100 ml	20
Sterillium®	Flasche	106 610	—	100 ml	45
	Flasche	106 650	00970709	500 ml	20
	Flasche	106 600	01494079	1000 ml	10
	Kanister	006 690	02465200	5 Liter	1

* Versand-Einheiten in Packungen

Sterillium® classic pure

Die farbstoff- und parfümfreie Variante des Klassikers Sterillium. Mit bewährtem Sterillium Hautpflegekomplex. Besonders geeignet für die sensible Haut



Charakteristik

- umfassend wirksam gegen Bakterien, Hefepilze und behüllte Viren
- besonders hautverträglich und rückfettend
- erhöht die Hautfeuchtigkeit bei regelmäßiger Anwendung¹⁾
- ausgezeichnete Verträglichkeit auch bei Langzeitanwendung
- hervorragende Sofortwirkung
- farbstoff- und parfümfrei

Anwendung

Sterillium classic pure eignet sich zur hygienischen und chirurgischen Händedesinfektion. Sterillium classic pure ist farbstoff- und parfümfrei und eignet sich daher besonders gut für Anwender mit empfindlicher Haut. Sterillium classic pure bietet eine hohe Sofortwirkung sowie eine zuverlässige Langzeitwirkung bis zu sechs Stunden. Dabei fühlt sich das Produkt nicht nur gut auf den Händen an, sondern erhöht sogar bei regelmäßiger Anwendung die Hautfeuchtigkeit.

¹⁾ Reece, B. RCTS (2014): Evaluating the Effect of a Hand Sanitizer Using an Exaggerated Handwash Method

Handelsformen	Artikel-Nr.	PZN	Packungs-inhalt	VE Pack.*	
Sterillium® classic pure	Flasche	975 121	04817436	100 ml	45
	Flasche	975 122	04817465	500 ml	20
	Flasche	975 123	04818401	1000 ml	10
	Kanister	975 125	04818418	5 Liter	1

* Versand-Einheiten in Packungen

Sterillium® med



Das Hände-Desinfektionsmittel mit Norovirus-Wirksamkeit¹⁾ innerhalb der hygienischen Händedesinfektion. Mit dem bewährten Sterillium Hautpflegekomplex. Farbstoff- und parfümfrei

Charakteristik

- breites Wirkungsspektrum inklusive Norovirus-Wirksamkeit innerhalb der hygienischen Händedesinfektion
- sehr gute Hautverträglichkeit
- hervorragende Sofortwirkung
- farbstoff- und parfümfrei

Anwendung

Sterillium med eignet sich zur hygienischen und chirurgischen Händedesinfektion. Sterillium med ist farbstoff- und parfümfrei und eignet sich daher besonders gut für Anwender mit empfindlicher Haut.

Sterillium med bietet mit seiner hochwirksamen Formulierung mit 85 % Ethanol eine Wirksamkeit gegenüber Noroviren¹⁾ innerhalb der hygienischen Händedesinfektion und eignet sich somit ideal für die ganzjährige Infektionsprävention.

¹⁾ getestet am murinen Norovirus (MNV)



Handelsformen	Artikel-Nr.	PZN	Packungs-inhalt	VE Pack.*
Sterillium® med Flasche	981 112	06589241	100 ml	45
Flasche	981 113	06589258	500 ml	20
Flasche	981 114	06589264	1000 ml	10

* Versand-Einheiten in Packungen

Sterillium® Virugard

Das hochwirksame, viruzide Hände-Desinfektionsmittel für alle Risikobereiche. RKI-gelistet in den Wirkungsbereichen A und B. Die hautverträgliche Alternative zu chlor- und phosphorsäurehaltigen Produkten



Charakteristik

- besonders wirksam gegen behüllte und unbehüllte Viren
- Norovirus-Wirksamkeit¹⁾ innerhalb der hygienischen Händedesinfektion
- RKI-Empfehlung bei Noroviren
- farbstoff- und parfümfrei

Anwendung

Sterillium Virugard eignet sich zur hygienischen und chirurgischen Händedesinfektion. Speziell für alle Arbeitsbereiche mit erhöhter Infektionsgefährdung.

¹⁾ getestet am murinen Norovirus (MNV)

Handelsformen	Artikel-Nr.	PZN	Packungs-inhalt	VE Pack.*
Sterillium® Virugard, Flasche Apotheken-aufmachung	981 212	07243036	100 ml	20
Sterillium® Virugard Flasche	306 610	—	100 ml	45
Flasche	306 650	07243042	500 ml	20
Flasche	306 600	07243059	1000 ml	10

* Versand-Einheiten in Packungen

Sterillium® Tissue



Praktisches Hände-Desinfektionstuch für unterwegs. Universell und überall einsetzbar

Charakteristik

- wirkt zuverlässig gegen Bakterien, Hefepilze und behüllte Viren
- hautschonend durch rückfettende Substanzen und Hautschutzkomponenten
- praktisch für unterwegs

Anwendung

Sterillium Tissue ist universell und überall einsetzbar. Es schützt beim Kontakt mit Infektionsträgern und gibt Sicherheit am Arbeitsplatz, unterwegs und in sonstigen hygiene relevanten Situationen.

Das praktische Tuch findet Anwendung zur hygienischen Händedesinfektion sowie zur Hautdesinfektion vor Injektionen und Punktionen auf talgdrüsenarmer Haut sowohl im professionellen als auch im privaten Bereich.



Handelsformen	Artikel-Nr.	PZN	Packungs-inhalt	VE Pack.*
Sterillium® Tissue, einzeln eingeseigelt, 10 Stück in Faltschachteln	981 229	09545362	10 Tücher	10

* Versand-Einheiten in Packungen

Baktolan® protect

Die Wasser-in-Öl (W/O) Creme pflegt mit einer reichhaltigen Formel mit Urea und trägt zum Schutz der Hände vor wässrigen Lösungen bei



Charakteristik

- verstärkt die natürliche Schutzfunktion gesunder Haut
- schützt langanhaltend vor wasserlöslichen Schadstoffen
- wirksame Prophylaxe gegen rissige und spröde Haut
- für trockene, stark beanspruchte Haut
- gezielter Hautschutz durch Urea und Bienenwachs
- frei von Silikon- und Konservierungsmitteln
- langanhaltender Schutz
- ohne Parabene

Anwendung

Baktolan protect ist speziell für den prophylaktischen Schutz vor berufsbedingten Hautschäden entwickelt und wird vor Kontakt mit wasserlöslichen Stoffen, wie z. B. Lösemittel, Laugen oder Säuren als Ergänzung zu Schutzhandschuhen eingesetzt sowie vor Arbeitsbeginn, nach den Pausen und als intensive Pflege nach der Arbeit. Baktolan protect spendet trockener Haut langanhaltende Feuchtigkeit und macht die Haut spürbar geschmeidiger. Der natürliche Inhaltsstoff Urea sorgt nachgewiesen für eine spürbare Hautbefeuchtung.

Handelsformen	Artikel-Nr.	PZN	Packungs-inhalt	VE Pack.*
Baktolan® protect Tube	972 532	08529964	100 ml	25

* Versand-Einheiten in Packungen

Baktolan® protect+ pure



Innovative Wasser-in-Öl-in-Wasser (W/O/W)Lotion zum Schutz vor wässrigen Lösungen und gleichzeitiger regenerierender Pflege für rissige, stark beanspruchte Haut

Charakteristik

- innovative Rezeptur (W/O/W-Emulsion)
- schützt langanhaltend vor wasserlöslichen Schadstoffen
- unterstützt die Regeneration der Haut und stärkt die Hautbarriere
- sehr gute Hautverträglichkeit
- wirkt okklusionsbedingten Irritationen unter dem Handschuh entgegen
- deutliche Reduzierung von Hautirritationen
- parfüm- und farbstofffrei
- keine Beeinträchtigung der Genusstauglichkeit von Lebensmitteln (HACCP bewertet)
- frei von Silikon- und Konservierungsmitteln
- ohne Parabene

Anwendung

Baktolan protect+ pure ist eine parfümfreie Wasser-in-Öl-in-Wasser-Lotion, welche die schnell einziehenden Eigenschaften einer O/W-Formulierung mit den schützenden und besonders pflegenden Eigenschaften der W/O-Formulierung kombiniert. Baktolan protect+ pure unterstützt die Hautregeneration durch Bisabolol und stärkt die natürlichen Schutzfunktionen gesunder Haut. Baktolan protect+ pure lässt sich sehr gut verteilen, zieht schnell ein und hinterlässt keinen störenden Fettfilm.

Baktolan protect+ pure wirkt dreifach:

- fördert die Hautregeneration bei beanspruchter Haut
- hat eine hohe Schutzwirkung bei der Arbeit mit wässrigen Lösungen
- stärkt die Hautbarriere



Handelsformen	Artikel-Nr.	PZN	Packungs-inhalt	VE Pack.*
Baktolan® protect+ pure Tube	981 137	07592794	100 ml	25
Flasche	981 182	09219734	350 ml	20

* Versand-Einheiten in Packungen

Baktolan® Lotion

Feuchtigkeitsspendende, schnelleinziehende Öl-in-Wasser (O/W) Pflegelotion für normale Haut



Charakteristik

- pflegende Formel mit pflanzlichen Ölen und Vitamin E
- erhöht deutlich den Feuchtigkeitsgehalt der Haut
- zieht schnell und rückstandslos ein
- verleiht ein glattes und geschmeidiges Hautgefühl
- für die schnelle Hautpflege zwischendurch
- dezenter Geruch
- ohne Parabene

Anwendung

Baktolan lotion ist eine leichte auf den pH-Wert der Haut abgestimmte Öl-in-Wasser Pflegelotion. Bei der Formulierung wurde besonderer Wert auf die sehr gute Hautverträglichkeit und das schnelle Einziehen der Lotion gelegt. Die pflegende Formel mit pflanzlichen Ölen und Vitamin E glättet die Haut spürbar und verleiht ein geschmeidiges Hautgefühl.

Handelsformen	Artikel-Nr.	PZN	Packungs-inhalt	VE Pack.*
Baktolan® Lotion Flasche	973 023	08824143	350 ml	20

* Versand-Einheiten in Packungen

Baktolan® lotion pure



Feuchtigkeitsspendende, schnell-einziehende parfümfreie Öl-in-Wasser (O/W) Pflegelotion für normale Haut

Charakteristik

- parfümfrei
- pflegende Formel mit pflanzlichen Ölen und Vitamin E
- erhöht deutlich den Feuchtigkeitsgehalt der Haut
- zieht schnell und rückstandslos ein
- verleiht ein glattes und geschmeidiges Hautgefühl
- für die schnelle Hautpflege zwischendurch
- ohne Parabene

Anwendung

Baktolan lotion pure ist eine parfümfreie, leichte und auf den pH-Wert der Haut abgestimmte Öl-in-Wasser Pflegelotion. Bei der Formulierung wurde besonderer Wert auf die sehr gute Hautverträglichkeit und das schnelle Einziehen der Lotion gelegt. Die pflegende Formel mit pflanzlichen Ölen und Vitamin E glättet die Haut spürbar und verleiht ein geschmeidiges Hautgefühl.



Handelsformen	Artikel-Nr.	PZN	Packungs-inhalt	VE Pack.*
Baktolan® lotion pure Flasche	973 793	03706640	350 ml	20

* Versand-Einheiten in Packungen

Baktolan® balm

Intensiv pflegender Wasser-in-Öl (W/O) Balsam mit Vitamin E, Panthenol und Allantoin für die trockene und empfindliche Haut



Charakteristik

- Vitamin E, Allantoin und Panthenol spenden der Haut eine intensive Pflege
- glättet die Haut spürbar und hält sie geschmeidig
- fördert die Regenerationsfähigkeit
- erhält den Säureschutzmantel der Haut
- lindert Hautreizungen und Rötungen
- angenehmer Duft
- ohne Parabene

Anwendung

Baktolan balm ist ein Wasser-in-Öl-Balsam mit hochwertigen Pflegekomponenten, der auf den pH-Wert der Haut (5,5) abgestimmt wurde und damit den Säureschutzmantel der Haut stabilisiert. Die Inhaltsstoffe Vitamin E, Allantoin und Panthenol spenden der Haut eine intensive Pflege, bewirken eine Glättung, unterstützen die Zellregeneration und lindern Hautreizungen und Rötungen. Eine mehrmals täglich durchgeführte Hautpflege mit Baktolan balm kann das Risiko von Hautirritationen wesentlich verringern¹⁾.

¹⁾ Kampf G., Ennen J. Die Regelmäßige Anwendung einer Handcreme kann durch häufige Händewaschungen verursachte Hauttrockenheit und -Rauigkeit reduzieren. BMC Dermatology; 2006; 6:1

Handelsformen	Artikel-Nr.	PZN	Packungs-inhalt	VE Pack.*
Baktolan® balm Flasche	972 553	08529941	350 ml	20

* Versand-Einheiten in Packungen

Baktolan® balm pure



Intensiv pflegender parfümfreier Wasser-in-Öl (W/O) Balsam mit Vitamin E, Panthenol und Allantoin für die trockene und empfindliche Haut

Charakteristik

- parfümfrei
- Vitamin E, Allantoin und Panthenol spenden der Haut eine intensive Pflege
- glättet die Haut spürbar und hält sie geschmeidig
- fördert die Regenerationsfähigkeit
- erhält den Säureschutzmantel der Haut
- lindert Hautreizungen und Rötungen
- ohne Parabene

Anwendung

Baktolan balm pure ist ein parfümfreier Wasser-in-Öl-Balsam mit hochwertigen Pflegekomponenten, der auf den pH-Wert der Haut (5,5) abgestimmt wurde und damit den Säureschutzmantel der Haut stabilisiert. Die Inhaltsstoffe Vitamin E, Allantoin und Panthenol spenden der Haut eine intensive Pflege, bewirken eine Glättung, unterstützen die Zellregeneration und lindern Hautreizungen und Rötungen. Eine mehrmals täglich durchgeführte Hautpflege mit Baktolan balm pure kann das Risiko von Hautirritationen wesentlich verringern¹⁾.



¹⁾ Kampf G., Ennen J. Die Regelmäßige Anwendung einer Handcreme kann durch häufige Händewaschungen verursachte Hauttrockenheit und -Rauigkeit reduzieren. BMC Dermatology; 2006; 6:1

Handelsformen	Artikel-Nr.	PZN	Packungs-inhalt	VE Pack.*
Baktolan® balm pure Flasche	975 023	03706611	350 ml	20

* Versand-Einheiten in Packungen

Baktolin® sensitive

Milde und zugleich pflegende Waschlotion für eine sanfte Reinigung



Charakteristik

- reinigt mit einem zart cremigen Schaum
- milde, farbstofffreie Waschlotion mit hautneutralem pH-Wert von 5,5
- hat eine zart duftende Formel
- enthält rückfettende und pflegende Substanzen
- hervorragende Hautverträglichkeit
- enthält hautmilde Tenside
- ohne Duftstoff-Mix¹⁾-Bestandteile
- ohne Parabene

¹⁾ Gruppe von Duftstoffen, die dafür bekannt sind, häufiger Allergien auszulösen.

Anwendung

Baktolin sensitive eignet sich als milde und zugleich pflegende Waschlotion für eine sanfte Reinigung von Haut und Händen. Die pflegenden Bestandteile Allantoin und Weizenprotein halten die Haut auch bei intensiver und täglich wiederholter Anwendung glatt und geschmeidig. Der pH-Wert von 5,5 schon den empfindlichen Säureschutzmantel der Haut.

Handelsformen	Artikel-Nr.	PZN	Packungs-inhalt	VE Pack.*
Baktolin® sensitive Flasche	981 333	07259818	500 ml	20
Flasche	981 334	07259824	1000 ml	10
Kanister	981 335	07259830	5 Liter	1

* Versand-Einheiten in Packungen

Baktolin® pure



Milde, parfüm- und farbstofffreie Waschlotion mit guter Hautverträglichkeit für normale Haut

Charakteristik

- reinigt mit einer milden Formel
- hautneutraler pH-Wert
- enthält hautmilde Tenside
- geeignet auch für empfindliche Haut
- parfüm- und farbstofffrei
- ohne Parabene

Anwendung

Baktolin pure verfügt über einen hautneutralen pH-Wert, der zusammen mit den hautmilden Tensiden für schonende Reinigung und den Erhalt des natürlichen Säureschutzmantels der Haut sorgt.

Baktolin pure ist als parfüm- und farbstofffreie Waschlotion auch für die Anwendung empfindlicher Haut geeignet. Baktolin pure eignet sich durch die parfümfreie Formel auch für den Einsatz in lebensmittelverarbeitenden Bereichen.



Handelsformen	Artikel-Nr.	PZN	Packungs-inhalt	VE Pack.*	
Baktolin® pure	Flasche	981 328	08597598	500 ml	20
	Flasche	981 329	08597606	1000 ml	10
	Kanister	981 330	08598238	5 Liter	1

* Versand-Einheiten in Packungen

Cutasept® F

Farbloses Hautantiseptikum auf Propanol-basis. Für den Einsatz vor Injektionen, Punktionen und operativen Eingriffen mit schneller und umfassender Wirkung



Charakteristik

- farblos
- wirkt schnell und umfassend
- 24 Stunden Langzeitwirkung
- ausgezeichnete Hautverträglichkeit
- praktische Anwendung dank Überkopf-Sprühsystem

Anwendung

Cutasept F empfiehlt sich in folgenden Einsatzgebieten:

- vor Injektionen, Punktionen und operativen Eingriffen in Krankenhaus, Arztpraxis, stationärer und ambulanter Altenpflege und zur Heimdialyse
- für Diabetiker im Rahmen der Blutzuckermessung und Insulingabe
- HIV Postexpositionsprophylaxe

Handelsformen	Artikel-Nr.	PZN	Packungs-inhalt	VE Pack.*	
Cutasept® F, Apotheken-aufmachung	Flasche	981 248	03917265	50 ml	20
	Flasche	975 041	—	50 ml	50
Cutasept® F	Überkopf-sprühflasche	975 042	03917271	250 ml	20
	Überkopf-sprühflasche	981 044	05541404	500 ml	20
	Flasche	975 040	03917294	1000 ml	10
Kanister	976 808	03917302	5 Liter	1	

* Versand-Einheiten in Packungen

Cutasept® G



Gefärbtes Hautantiseptikum auf Propanolbasis. Für den Einsatz vor Injektionen, Punktionen und operativen Eingriffen mit schneller und umfassender Wirkung

Charakteristik

- gefärbt zur Markierung des Desinfektionsfeldes
- wirkt schnell und umfassend
- 24 Stunden Langzeitwirkung
- ausgezeichnete Hautverträglichkeit
- praktische Anwendung dank Überkopf-Sprühsystem

Anwendung

Cutasept G empfiehlt sich in folgenden Einsatzgebieten:

- präoperative Hautdesinfektion mit gleichzeitiger Markierung des Desinfektionsfeldes
- vor Injektionen, Punktionen und operativen Eingriffen in Krankenhaus, Arztpraxis, stationärer und ambulanter Altenpflege und zur Heimdialyse



Handelsformen		Artikel-Nr.	PZN	Packungs-inhalt	VE Pack.*
Cutasept® G	Überkopfsprühflasche	975 052	03577243	250 ml	20
	Flasche	975 050	03577266	1000 ml	10
	Kanister	976 818	03577272	5 Liter	1

* Versand-Einheiten in Packungen

Stellisept® med

Antimikrobielle Waschlotion für Körper, Haare und Hände. In 30 Sekunden umfassend wirksam gegen Bakterien inkl. MRSA/ORSA und VRE



Charakteristik

- milde antimikrobielle Waschlotion zum Abspülen
- wirkt innerhalb von 30 Sekunden umfassend gegenüber Bakterien inkl. MRSA/ORSA und VRE
- angenehmer Duft
- ohne Alkohol und Farbstoffe

Anwendung

Stellisept med eignet sich sowohl zur antimikrobiellen Körperwaschung und Sanierung bei MRSA-Kolonisation gemäß Empfehlung des Robert Koch-Instituts sowie zur hygienischen Händewaschung als schnell wirksame und hautfreundliche Alternative gegenüber herkömmlichen Dekontaminationspräparaten.

Handelsformen		Artikel-Nr.	PZN	Packungs-inhalt	VE Pack.*
Stellisept® med	Flasche	975 665	01234303	500 ml	20
	Flasche	975 660	01234326	1000 ml	10

* Versand-Einheiten in Packungen

Stellisept® med foam



Antimikrobieller Reinigungsschaum für Körper und Haare. Umfassend wirksam gegen Bakterien inkl. MRSA/ORSA und VRE

Charakteristik

- praktischer Reinigungsschaum zur antimikrobiellen Körperwaschung immobiler Patienten
- kein Nachspülen nach der Anwendung erforderlich („Leave-on“-Produkt)
- sehr gute Haut- und Schleimhautverträglichkeit
- umfassendes Wirkungsspektrum gegenüber Bakterien inkl. MRSA/ORSA und VRE
- ohne Farbstoffe und Parfüm

Anwendung

Stellisept med foam ist ein Reinigungsschaum zur antimikrobiellen Körperwaschung sowie zur Sanierung bei MRSA-Kolonisation gemäß Empfehlung des Robert Koch-Instituts. Aufgrund seiner hautfreundlichen Formulierung kann Stellisept med foam nach dem Auftragen auf der Haut verbleiben und ist daher eine praktische Lösung für die Waschung immobiler, bettlägeriger Patienten.



Handelsformen	Artikel-Nr.	PZN	Packungs-inhalt	VE Pack.*
Stellisept® med foam Pumpschäumer	981 018	05459482	200 ml	20
Flasche	981 019	05459499	500 ml	20
Flasche	981 020	05459507	1000 ml	10

* Versand-Einheiten in Packungen

Stellisept® med gloves

Gebrauchsfertige Waschhandschuhe zur antimikrobiellen Körperwaschung. Umfassend wirksam gegen Bakterien inkl. MRSA/ORSA und VRE



Charakteristik

- gebrauchsfertige Waschhandschuhe zur unkomplizierten antimikrobiellen Körperwaschung immobiler Patienten
- kein Nachspülen nach der Anwendung erforderlich („Leave-on“ Produkt)
- sehr gute Haut- und Schleimhautverträglichkeit
- umfassendes Wirkungsspektrum gegenüber Bakterien inkl. MRSA/ORSA und VRE
- ohne Farbstoffe und Parfüm
- Stellisept med gloves können für eine angenehmere Anwendung in der Mikrowelle erwärmt oder für eine erfrischende Behandlung gekühlt werden

Anwendung

Stellisept med gloves sind gebrauchsfertige Waschhandschuhe zur antimikrobiellen Körperwaschung sowie zur Sanierung bei MRSA-Kolonisation gemäß Empfehlung des Robert Koch-Instituts. Aufgrund der hautfreundlichen Formulierung der Stellisept med gloves Tränklösung ist ein Abspülen mit Wasser nach der Anwendung nicht erforderlich. Die Stellisept med gloves sind die ideale Lösung für eine unkomplizierte und gleichzeitig angenehme antiseptische Körperwaschung von immobilen, bettlägerigen Patienten.

Handelsformen	Artikel-Nr.	PZN	Packungs-inhalt	VE Pack.*
Stellisept® med gloves Flow-Pack	981 203	09219728	10 Handschuhe	12

* Versand-Einheiten in Packungen

Cutasept® feet



Erfrischendes Fußspray.
2-fach wirksam: Fußpflege
und Fußpilzprophylaxe

Charakteristik

- belebende Frische für beanspruchte Füße
- hilft Fußpilz zu vermeiden
- wirkt innerhalb von 30 Sekunden zuverlässig gegen Pilze, Pilzsporen und Bakterien
- hautverträglich, da parfüm- und farbstofffrei

Anwendung

Cutasept feet wirkt erfrischend und verleiht beanspruchten Füßen ein belebendes Gefühl. Gleichzeitig hilft das Fußspray Fußpilz zu vermeiden. Ein hohes Risiko, sich mit Fußpilz zu infizieren, besteht vor allem in Bereichen, in denen barfuß bzw. ohne Schuhe gelaufen wird, z. B. in

- Wasch- und Duschräumen
- Schwimmbädern
- Saunas
- Umkleidekabinen
- Fitnessstudios
- Solarien
- Hotelzimmern



Handelsformen		Artikel-Nr.	PZN	Packungs- inhalt	VE Pack.*
Cutasept® feet	Überkopfsprühflasche	974 370	01373192	250 ml	20
	Kanister	974 379	01373252	5 Liter	1

* Versand-Einheiten in Packungen

Baktolan® vital

Belebendes Hydro-Gel
zur Durchblutungs-
förderung und die
Bewahrung der Haut-
elastizität



Charakteristik

- durchblutungsfördernd
- wohltuend kühlend und belebend
- kann ein angenehmes Wärmegefühl hervorrufen¹⁾
- bewahrt die Elastizität der Haut
- signifikante Hautstraffung über mind. 1 Std.
- enthält Rosmarin, Arnika, Eukalyptus und Menthol
- ohne Farb- und Konservierungsstoffe
- ohne Parabene

¹⁾ Ein Wärmegefühl kann nach der Anwendung wahrgenommen werden. Die Hauttemperatur wird jedoch nicht beeinflusst.

Anwendung

Baktolan vital ist ein Hydro-Gel zur Förderung der Durchblutung der Haut und kann durch den Zusatz ausgewählter ätherischer Öle wie Rosmarin und Menthol Verspannungen lösen. Pflegende Substanzen wie Arnica Montana Flower water bewahren die Elastizität der Haut und helfen damit, Wundliegen zu vermeiden. Baktolan vital zieht vollständig ein und hinterlässt keinen klebenden Film auf der Haut.

Handelsformen		Artikel-Nr.	PZN	Packungs- inhalt	VE Pack.*
Baktolan® vital	Flasche	972 693	08413150	350 ml	20

* Versand-Einheiten in Packungen

Bacillo® AF



Alkoholisches Schnell-Desinfektionsmittel zur Desinfektion alkoholbeständiger Flächen mit umfassender Wirkung und rückstandsfreier Aufrocknung

Charakteristik

- gebrauchsfertige Desinfektionsmittellösung
- schnell und umfassend wirksam
- breite Materialverträglichkeit gegenüber alkoholbeständigen Oberflächen
- rückstandsfreie Aufrocknung
- aldehyd-, farbstoff- und parfümfrei
- gute Benetzung

Anwendung

Bacillo AF ist ein gebrauchsfertiges Schnell-Desinfektionsmittel mit umfassender Wirksamkeit für alkoholbeständige Flächen und Medizinprodukte. In Bereichen, in denen eine schnelle Einwirk- und Abtrocknungszeit und eine rückstandsfreie Aufrocknung gefragt ist.

Flächen-Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.



Handelsformen	Artikel-Nr.	PZN	Packungs-inhalt	VE Pack.*	
Bacillo® AF, Apotheken-aufmachung	Flasche	981 247	00628566	50 ml	20
Bacillo® AF	Flasche	973 381	—	50 ml	50
	Flasche	973 385	00182662	500 ml	20
	Flasche	973 380	00182679	1000 ml	10
	Kanister	973 389	00182685	5 Liter	1

* Versand-Einheiten in Packungen

Bacillo® 30 Foam

Materialschonendes Schnell-Desinfektionsmittel zur Desinfektion von empfindlichen Oberflächen



Charakteristik

- Anwendung als Sprühschaum
- gebrauchsfertige Desinfektionsmittellösung
- schnell wirksam
- besonders materialschonend, auch geeignet für empfindliche Materialien, wie: Makrolon®, Plexiglas® und Polysulfon
- aldehyd-, farbstoff und parfümfrei
- hervorragende Benetzung

Anwendung

Bacillo 30 Foam ist mit seiner speziellen Formulierung optimal zur Schnell-Desinfektion sensibler

alkoholempfindlicher Oberflächen, wie z. B. Patientenliegen aus Kunstleder, Monitore, Displays, Tastaturen und Bedienfelder von mobilen und stationären Geräten sowie für die schonende Desinfektion sensibler Medizinprodukte geeignet. Auch als Sprühschaum applizierbar.

Flächen-Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.

Handelsformen	Artikel-Nr.	PZN	Packungs-inhalt	VE Pack.*	
Bacillo® 30 Foam	Flasche mit Sprühkopf	981 307	03542902	750 ml	8
	Kanister	981 127	03542925	5 Liter	1

* Versand-Einheiten in Packungen

Bacillo® Tissues



Alkoholische Schnell-Desinfektionstücher in praktischer Spenderdose

Charakteristik

- gebrauchsfertige Desinfektionstücher
- schnell und umfassend wirksam
- breite Materialverträglichkeit gegenüber alkoholbeständigen Oberflächen
- aldehyd-, farbstoff- und parfümfrei
- einfache Entnahme aus praktischer Spenderdose
- nachfüllbar
- Tuchgröße 139x225 mm

Anwendung

Bei den Bacillo Tissues handelt es sich um gebrauchsfertige Desinfektionstücher zur schnellen und bequemen Desinfektion alkoholbeständiger Flächen und Medizinprodukte. In Bereichen, in denen eine umfassende Wirksamkeit innerhalb kürzester Zeit erforderlich ist.

Flächen-Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.



Handelsformen	Artikel-Nr.	PZN	Packungs-inhalt	VE Pack.*	
Bacillo® Tissues	Spenderdose	975 670	00916851	100 Tücher	12
	Nachfüllbeutel	975 673	00916868	100 Tücher	12

* Versand-Einheiten in Packungen

Bacillo® Wipes

Alkoholische Schnell-Desinfektionstücher für den Einsatz im Bacillo Wipes-Spender



Charakteristik

- gebrauchsfertige Desinfektionstücher für das Bacillo Wipes Spendersystem
- schnell und umfassend wirksam
- breite Materialverträglichkeit gegenüber alkoholbeständigen Oberflächen
- Tücher 4 Wochen nach dem Öffnen verwendbar
- aldehyd-, farbstoff- und parfümfrei
- Tuchgröße 200x380 mm

Anwendung

Die Bacillo Wipes sind im passenden Spender anwendbar zur schnellen Desinfektion alkoholbeständiger Flächen und Medizin-

produkte. Besonders vorteilhaft ist ihre Anwendung in einem Arbeitsumfeld, in dem aus Brandschutz- oder Arbeitsschutzgründen ein Umfüllen von alkoholhaltigen Desinfektionsmitteln nicht erlaubt ist. Der einmalige Gebrauch stellt sowohl eine besonders hygienische Arbeitsweise als auch einen ökonomischen Arbeitsaufwand sicher.

Flächen-Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.

Handelsformen	Artikel-Nr.	PZN	Packungs-inhalt	VE Pack.*	
Bacillo® Wipes	Standbodenbeutel	976 350	05380177	90 Tücher	4
	Tuchspender	981 374	10339372	1 Stück	4

* Versand-Einheiten in Packungen

Bacillo® AF Tissues



Alkoholische Schnell-Desinfektionstücher mit umfassender Wirksamkeit im handlichen Flowpack

Charakteristik

- mit Bacillo AF getränkte gebrauchsfertige Desinfektionstücher
- schnell und umfassend wirksam
- aldehyd-, farbstoff- und parfümfrei
- breite Materialverträglichkeit gegenüber alkoholbeständigen Oberflächen
- gute Benetzung und schnelle Aufdrossung
- sichere und einfache Entnahme einzelner Tissues aus wiederverschließbarer Flowpack-Verpackung dank praktischem Tuchfaltsystem
- hochwertiges reißfestes Vlies
- Tuchgröße 180x200 mm

Anwendung

Alkoholische Schnell-Desinfektionstücher mit umfassender Wirksamkeit im handlichen Flowpack.

Flächen-Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.



Handelsformen	Artikel-Nr.	PZN	Packungs-inhalt	VE Pack.*
Bacillo® AF Tissues Flow-Pack	981 311	02416199	80 Tücher	6

* Versand-Einheiten in Packungen

Bacillo® 30 Tissues

Materialschonende Schnell-Desinfektionstücher zur Desinfektion sensibler Oberflächen im handlichen Flowpack



Charakteristik

- mit Bacillo 30 Foam getränkte gebrauchsfertige Desinfektionstücher
- schnell wirksam
- aldehyd-, farbstoff- und parfümfrei
- besonders materialschonend, auch geeignet für empfindliche Kunststoffmaterialien wie: Makrolon®, Plexiglas® und Polysulfon
- sichere und einfache Entnahme einzelner Tissues aus wiederverschließbarer Flowpack-Verpackung dank praktischem Tuchfaltsystem
- hochwertiges, reißfestes Vlies
- Tuchgröße 180x200 mm

Anwendung

Materialschonende Schnell-Desinfektionstücher zur Desinfektion sensibler Oberflächen im handlichen Flowpack.

Flächen-Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.

Handelsformen	Artikel-Nr.	PZN	Packungs-inhalt	VE Pack.*
Bacillo® 30 Tissues Flow-Pack	981 312	02416621	80 Tücher	6

* Versand-Einheiten in Packungen

Mikrobac® Tissues



Alkoholfreie Desinfektionstücher zur reinigenden Desinfektion von alkohol-empfindlichen Flächen und sensiblen Medizinprodukten im handlichen Flowpack

Charakteristik

- gebrauchsfertige Desinfektionstücher
- einfache und sichere Entnahme einzelner Tücher aus wiederverschließbarer Flowpack-Verpackung
- alkohol-, aldehyd-, farbstoff- und parfümfrei
- patentierte Systemlösung: optimale Wirkstoffabgabe bei der Desinfektion
- auch für alkoholempfindliche Materialien geeignet
- problemlose Wechselanwendung mit Produkten anderer Wirkstoffbasis (z. B. Aldehyde oder Amine) möglich
- in zwei Tuchgrößen erhältlich: 180x200 mm und als XXL 250x380 mm

Anwendung

Mikrobac Tissues eignen sich zur unkomplizierten reinigenden Desinfektion von empfindlichen Oberflächen sowie von sensiblen Medizinprodukten.

Flächen-Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.



Handelsformen	Artikel-Nr.	PZN	Packungs-inhalt	VE Pack.*
Mikrobac® Tissues Flow-Pack	981 387	06968725	80 Tücher	6
Mikrobac® Tissues XXL Flow-Pack	981 339	10031390	40 Tücher	6

* Versand-Einheiten in Packungen

Kohrsolin® FF Tissues

Aldehydhaltige Desinfektionstücher für die prophylaktische Flächendesinfektion



Charakteristik

- gebrauchsfertige Desinfektionstücher
- wirksam gegen murine Noroviren (MNV)
- patentierte Systemlösung: optimale Wirkstoffabgabe bei der Desinfektion
- gute Materialverträglichkeit
- sichere und einfache Entnahme einzelner Tücher aus wiederverschließbarer Verpackung dank praktischem Tuchfaltsystem
- Tuchgröße 180x200 mm

Anwendung

Kohrsolin FF Tissues eignen sich zur unkomplizierten desinfizierenden Reinigung abwaschbarer Oberflächen.

Flächen-Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.

Handelsformen	Artikel-Nr.	PZN	Packungs-inhalt	VE Pack.*
Kohrsolin® FF Tissues Flow-Pack	981 201	09422487	80 Tücher	6

* Versand-Einheiten in Packungen

Kohrsolin® extra Tissues



Aldehydhaltige Desinfektionstücher mit viruzider Wirksamkeit für die prophylaktische Desinfektion

Charakteristik

- gebrauchsfertige Desinfektionstücher
- viruzide Wirksamkeit
- wirksam gegen Clostridium difficile-Sporen
- patentierte Systemlösung: optimale Wirkstoffabgabe bei der Desinfektion
- sichere und einfache Entnahme einzelner Tücher aus wiederverschließbarer Verpackung dank praktischem Tuchfaltsystem
- Tuchgröße 180x200 mm

Anwendung

Kohrsolin extra Tissues eignen sich zur unkomplizierten desinfizierenden Reinigung abwaschbarer Oberflächen wie auch zur gezielten Desinfektion, wenn ein erweitertes Wirkspektrum erforderlich ist.

Flächen-Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.



Handelsformen	Artikel-Nr.	PZN	Packungs-inhalt	VE Pack.*
Kohrsolin® extra Tissues	981 202	09422464	80 Tücher	6

* Versand-Einheiten in Packungen

Dismozon® plus

Sauerstoffaktiver Flächen-Desinfektions-reiniger. Das Granulat speziell für empfindliche Flächen und zur Schluss-desinfektion



Charakteristik

- umfassendes Wirkungsspektrum inklusive Viruzidie und Bakterien-sporen
- rückstandsarm
- außergewöhnlich breite Material-verträglichkeit
- RKI-gelistet (Bereich A/B)
- praktische Anwendung im Dosierbeutel

Anwendung

Dismozon plus eignet sich für die desinfizierende Reinigung abwaschbarer Oberflächen in medizinischen Bereichen und der Industrie. Auf Grund seiner mikrobiologischen Leistungsfähigkeit und des speziellen Wirkstoffs (MMPP – ein Sauerstoffabspalter), empfiehlt sich der routinemäßige Einsatz besonders in sensiblen und patientennahen Bereichen sowie zur schonenden und zuverlässigen Desinfektion von hochsensiblen Medizinprodukten.

Flächen-Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.

Handelsformen	Artikel-Nr.	PZN	Packungs-inhalt	VE Pack.*	
Dismozon® plus	Dosierbeutel à 16 g	981 257	09613388	50 Beutel	1
	Dosierbeutel à 16 g	981 187	09423506	100 Beutel	1

* Versand-Einheiten in Packungen

Mikrobac® forte



Aldehydfreier Flächen-Desinfektions-reiniger mit materialschonendem Schutzfaktor

Charakteristik

- breites Wirkspektrum
- aldehydfrei
- gute Reinigungsleistung
- geruchsarme Formulierung
- auch im Großküchen- und Lebensmittelbereich anwendbar

Anwendung

Mikrobac forte eignet sich zur täglichen desinfizierenden Unterhaltsreinigung aller wasserbeständigen Oberflächen in Bereichen, in denen eine geruchsarme Desinfektion bevorzugt wird.

Flächen-Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.



Handelsformen	Artikel-Nr.	PZN	Packungs-inhalt	VE Pack.*	
Mikrobac® forte	Dosierbeutel à 20 ml	975 392	07438030	250 Beutel	1
	Kanister	975 395	04764467	5 Liter	1

* Versand-Einheiten in Packungen

Kohrsolin® FF

Formaldehydfreier Flächen-Desinfektions-reiniger mit guten Gebrauchseigenschaften und umfassender Wirksamkeit



Charakteristik

- breites Wirkungsspektrum inkl. Viruzidie
- wirksam gegen Clostridium difficile-Sporen
- gute Reinigungsleistung
- gute Materialverträglichkeit

Anwendung

Kohrsolin FF eignet sich zur prophylaktischen, reinigenden Wischdesinfektion aller Oberflächen in hygiene relevanten Bereichen. Ebenfalls einsetzbar für gezielte Desinfektionsmaßnahmen, die ein erweitertes Wirkungsspektrum (z. B. Viruzidie) erfordern.

Flächen-Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.

Handelsformen	Artikel-Nr.	PZN	Packungs-inhalt	VE Pack.*	
Kohrsolin® FF	Dosierbeutel à 40 ml	975 382	07438099	125 Beutel	1
	Kanister	975 386	04764450	5 Liter	1

* Versand-Einheiten in Packungen

Kohrsolin® extra



Aldehydhaltiger Flächen-Desinfektionsreiniger mit breitem Wirkungsspektrum für die tägliche prophylaktische Desinfektion und zur Schlussdesinfektion

Charakteristik

- breites Wirkungsspektrum inklusive Viruzidie und Bakteriensporen
- RKI-gelistet (Bereich A/B)
- gutes Reinigungsvermögen
- hohe Materialverträglichkeit

Anwendung

Kohrsolin extra wird zur täglichen reinigenden Wischdesinfektion aller wasserbeständigen Oberflächen, wie auch zur gezielten Schlussdesinfektion eingesetzt. Für alle Bereiche im Gesundheitswesen und in der Industrie mit Anspruch auf eine hohe Hygienesicherheit und für gezielte Desinfektionsmaßnahmen, die ein erweitertes Wirkungsspektrum (z. B. Viruzidie, Sporizidie) erfordern.

Flächen-Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.



Handelsformen	Artikel-Nr.	PZN	Packungs-inhalt	VE Pack.*	
Kohrsolin® extra	Dosierbeutel à 20 ml	973 620	05126243	250 Beutel	1
	Kanister	973 623	05126266	5 Liter	1

* Versand-Einheiten in Packungen

BODE X-Wipes

Universell einsetzbares Vliestuchspendersystem für alle flüssigen HARTMANN Flächen-Desinfektionsmittel¹⁾ und ausgewählte Produkte aus dem Instrumentenbereich



Charakteristik

- stabiler Spender mit Tragegriff
- farbiges Entnahmesystem für besseren Produktunterscheidung
- patentierte Systemlösung: Optimale Wirkstoffabgabe bei der Desinfektion
- kombinierbar mit allen flüssigen BODE-Flächen-Desinfektionsmitteln¹⁾
- im Instrumentenbereich kombinierbar mit Bodedex forte, Bomix plus und Korsolex extra
- hochwertiges reißfestes PET-Vlies
- unterschiedliche Rollengrößen für jeden Bedarf
- keine routinemäßige Aufbereitung bei Einsatz der Vliesrolle im Folienbeutel
- Standzeit der Gebrauchslösung im Spender beträgt 28 Tage

Anwendung

Das BODE X-Wipes Spendersystem besteht aus einem praktischen Vliestuchspender und speziell ausgewählten Vliestüchern, die mit allen flüssigen HARTMANN Flächen-Desinfektionsmitteln sowie ausgewählten Produkten aus dem Instrumentenbereich kombiniert werden können. Mit den BODE X-Wipes bieten sich dem Anwender universelle Einsatzmöglichkeiten und viele Vorteile: Der Einmalgebrauch der Tücher reduziert die Arbeitsvorbereitungszeit und stellt einen hohen hygienischen Standard sicher. Gleichzeitig sorgen die eingesetzten Materialqualitäten für einen geringen Vliestuch- und Desinfektionsmittelverbrauch.

Das Entnahmesystem ist in verschiedenen Farben lieferbar und ermöglicht eine einfache und schnelle Unterscheidung der eingesetzten Anwendungslösung, z. B. nach Desinfektionsmitteltyp.

¹⁾ nicht mit Dismozon plus und Dismozon pur steril einsetzbar

Handelsformen	Artikel-Nr.	PZN	Packungs-inhalt	VE Pack.*	
BODE X-Wipes Tuchspender, für alle Tuch-Varianten	blau	981 370	10273940	1 Stück	4
	grün	981 372	10273963	1 Stück	4
	rot	981 371	10273957	1 Stück	4
BODE X-Wipes Vliesrolle, im Folienbeutel, mit Entnahme-Rund und Deckel	Rolle à 90 Tücher	981 373	10273986	1 Rolle	6
BODE X-Wipes Vliesrolle	Rolle à 90 Tücher	976 690	03538510	1 Rolle	6
	Rolle à 40 Tücher	976 695	03538473	1 Rolle	12
BODE X-Wipes basic Vliesrolle	Rolle à 90 Tücher	975 790	03538527	1 Rolle	6

* Versand-Einheiten in Packungen

BODE X-Wipes Safety Pack



Einmal-Vliestuchspender zur einfachen und sicheren Anwendung bei der Flächendesinfektion in hygiene relevanten Bereichen

Charakteristik

- X-Wipes Vliesrolle im Safety Pack mit integrierter Befüll-/Entnahmeöffnung
- gewohnte Flexibilität des X-Wipes Systems, in Kombination mit einem Höchstmaß an hygienischer Sicherheit, da die Aufbereitung entfällt
- gezielter Einsatz in Hochrisikobereichen
- gute Standfestigkeit
- hochwertiges PET-Vlies garantiert optimale Wirkstoffabgabe
- Lösung 28 Tage verwendbar

Anwendung

BODE X-Wipes Safety Pack empfehlen sich zur desinfizierenden Flächenreinigung in allen hygiene relevanten Bereichen von Krankenhäusern, Pflegeheimen, Labors und in Bereichen, in denen ein Höchstmaß an Hygiene, Wirtschaftlichkeit und Anwendernutzen gewünscht wird.

Die X-Wipes Safety Packs sind für alle flüssigen Flächen-Desinfektionsmittel von HARTMANN geeignet. Das System wird mit 2,5 Litern Gebrauchslösung des Desinfektionsmittels befüllt.




Handelsformen	Artikel-Nr.	PZN	Packungs-inhalt	VE Pack.*
BODE X-Wipes Safety Pack	981 416	11549781	1 Stück	4

* Versand-Einheiten in Packungen

Dismofix® G

Glanzreiniger für alle wasserfesten Oberflächen

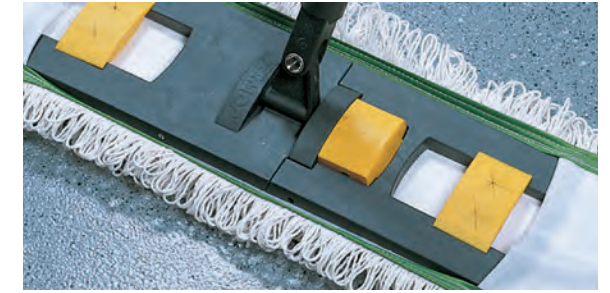

Charakteristik

- trocknet streifenfrei auf
- schaumarm, daher manuell und maschinell einsetzbar
- hohe Reinigungskraft

Anwendung

Dismofix G ist ein Glanzreiniger zur Unterhaltsreinigung aller abwaschbaren Oberflächen und beschichteten Böden und zur streifenfreien Reinigung empfindlicher Oberflächen wie Glas, Kunststoff und Keramik. Zur maschinellen Reinigung aller eingepflegten Böden mit Reinigungsautomaten und zur Reinigung ableitfähiger Böden.

Handelsformen	Artikel-Nr.	PZN	Packungs-inhalt	VE Pack.*	
Dismofix® G	Flasche	973 300	00450660	1000 ml	12
	Kanister	973 309	00450677	5 Liter	1

* Versand-Einheiten in Packungen

Bodedex® forte



Tensid-Reiniger für thermolabile und -stabile Instrumente zur Vorreinigung von Endoskopen. Mit patentiertem Reinigungssystem zur selbsttätigen, schonenden Ablösung von Röntgenkontrastmittel und Biofilm

Charakteristik

- selbsttätige starke Reinigungsleistung auch bei hartnäckigen Verschmutzungen
- löst Reste von Röntgenkontrastmitteln
- löst Biofilme
- im Ultraschallbad einsetzbar
- schaumarm
- parfüm- und farbstofffrei

Anwendung

Bodedex forte eignet sich hervorragend für die leistungsstarke und gleichzeitig materialschonende Reinigung von thermolabilen und thermostabilen Instrumenten (inkl. flexible Endoskope) sowie Laborgeräten. Mit der innovativen selbsttätigen Formulierung können selbst hartnäckige Reste von Blut, Eiweiß, Sekreten, Fett, Biofilmen und Röntgenkontrastmitteln zuverlässig entfernt werden.



Handelsformen	Artikel-Nr.	PZN	Packungs-inhalt	VE Pack.*	
Bodedex® forte	Flasche	973 762	00946415	2 Liter	4
	Kanister	973 769	00946421	5 Liter	1

* Versand-Einheiten in Packungen

Bodedex® zyme

Enzymatischer Reiniger für thermolabile und -stabile Instrumente zur selbsttätigen, schonenden Ablösung hartnäckiger Kontaminationen, insbesondere von Sekret



Charakteristik

- selbsttätige starke Reinigungsleistung auch bei hartnäckigen Verschmutzungen
- hervorragendes Ablöseverhalten von Sekret, insbesondere Sekret der oberen Atemwege
- löst Fibrinrückstände komplett und selbsttätig
- rückstandsfrei abzuspülen
- schaumreduziert
- parfüm- und farbstofffrei

Anwendung

Bodedex zyme ist hervorragend zur Reinigung von medizinischen thermolabilen und thermostabilen Instrumenten sowie Laborgeräten geeignet.

Handelsformen	Artikel-Nr.	PZN	Packungs-inhalt	VE Pack.*	
Bodedex® zyme	Flasche	981 362	10100257	2 Liter	4
	Kanister	981 363	10100263	5 Liter	1

* Versand-Einheiten in Packungen

Bomix® plus



Aldehydfreies Instrumenten-Desinfektionsmittel mit ausgezeichneten Reinigungseigenschaften

Charakteristik

- hervorragende Reinigungseigenschaft
- kompatibel mit Präparaten auf anderer Wirkstoffbasis
- hohe Materialverträglichkeit
- angenehmer Geruch
- wirtschaftlich mittels niedriger Einsatzkonzentrationen

Anwendung

Bomix plus eignet sich zur Aufbereitung von thermolabilem und thermostabilem Instrumentarium im manuellen Tauchbadverfahren sowie für die Grob- und Bürstenreinigung von Endoskopen. Ein Pluspunkt dieses Produktes ist die hervorragende Reinigungsleistung bei gleichzeitiger Desinfektionswirkung. Selbst stark eiweiß-verschmutzte flexible Endoskope können mit Bomix plus aufbereitet werden.



Handelsformen	Artikel-Nr.	PZN	Packungs-inhalt	VE Pack.*	
Bomix® plus	Flasche	974 602	03540234	2 Liter	4
	Kanister	974 609	09154785	5 Liter	1

* Versand-Einheiten in Packungen

Korsolex® plus

Aldehydfreies Desinfektionsmittel für thermostabile und thermolabile Instrumente



Charakteristik

- stark schmutzlösend
- hohe Materialverträglichkeit
- im Ultraschallbad einsetzbar

Anwendung


Korsolex plus eignet sich zur aldehydfreien manuellen Aufbereitung von thermolabilen und thermostabilen Instrumenten. Ein Pluspunkt dieses Produktes ist die hohe Reinigungsleistung bei gleichzeitiger Desinfektions-

wirkung. Somit bedarf es – selbst bei hoher Verschmutzung – keinerlei Zusatz eines Reinigungsverstärkers. Korsolex plus ist einsetzbar im Tauchbadverfahren sowie in allen Ultraschallbädern.

Handelsformen	Artikel-Nr.	PZN	Packungs-inhalt	VE Pack.*	
Korsolex® plus	Flasche	973 892	01267691	2 Liter	4
	Kanister	973 899	01267716	5 Liter	1

* Versand-Einheiten in Packungen

Korsolex® med AF

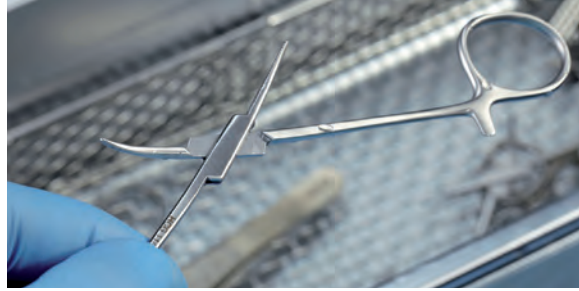

Aldehydfreies Desinfektionsmittel für thermostabile und thermolabile Instrumente mit stark schmutz-lösender Wirkung. Wirtschaftliche Einsatzkonzentrationen

Charakteristik

- stark schmutzlösend
- aldehyd-, QAV-, phenol- und chlorfrei
- breites Wirkspektrum
- im Ultraschallbad einsetzbar
- besonders angenehmer Geruch

Anwendung

Korsolex med AF eignet sich zur Desinfektion von thermolabilen und thermostabilen Instrumenten sowie starren Endoskopen. Das auf Aminen basierende Instrumenten-Desinfektionsmittel verfügt über eine hohe Reinigungswirkung, eine hohe Eiweißbelastbarkeit und einen angenehmen Geruch. Der Zusatz eines Reinigungsverstärkers ist nicht erforderlich. Korsolex med AF ist einsetzbar im Tauchbadverfahren sowie in allen Ultraschallbädern.



Handelsformen	Artikel-Nr.	PZN	Packungs-inhalt	VE Pack.*	
Korsolex® med AF	Flasche	975 493	06704966	2 Liter	4
	Kanister	975 495	06704972	5 Liter	1

* Versand-Einheiten in Packungen

Korsolex® extra

Aldehydisches Desinfektionsmittel für thermo-labile und -stabile Instrumente mit viru-zider Wirksamkeit. Wirtschaftliche Einsatzkonzentration, hervor-ragende Materialver-träglichkeit



Charakteristik

- breites Wirkungsspektrum inkl. Viruzidie
- hervorragende Materialverträglichkeit
- angenehmer Geruch


Anwendung

Korsolex extra eignet sich zur Aufbereitung von thermolabilem und thermostabilem Instrumentarium im manuellen Tauchbadverfahren (inkl. flexible Endoskope) sowie für Zirkulationsverfahren im Kaltverfahren.

Handelsformen	Artikel-Nr.	PZN	Packungs-inhalt	VE Pack.*	
Korsolex® extra	Flasche	973 802	00963678	2 Liter	4
	Kanister	973 809	00963684	5 Liter	1

* Versand-Einheiten in Packungen

Korsolex® basic

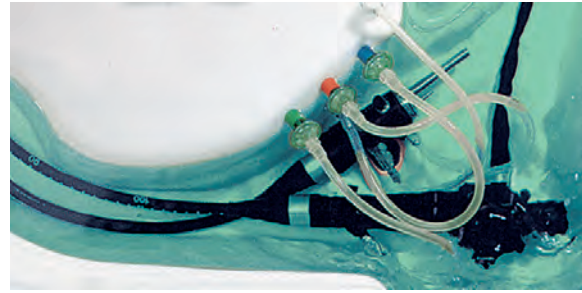

Aldehydisches Desinfektionsmittel für thermolabile und -stabile Instrumente mit viruzider Wirksamkeit

Charakteristik

- viruzid
- sporizid
- RKI-gelistet (A/B)
- hohe Materialverträglichkeit

Anwendung

Korsolex basic eignet sich zur Aufbereitung von thermolabilem und thermostabilem Instrumentarium (inkl. flexible Endoskope) im manuellen Tauchbadverfahren sowie für Zirkulationsverfahren im Kaltverfahren.




Handelsformen	Artikel-Nr.	PZN	Packungs-inhalt	VE Pack.*	
Korsolex® basic	Flasche	972 672	07699871	2 Liter	4
	Kanister	972 679	07699888	5 Liter	1

* Versand-Einheiten in Packungen

Korsolex® FF

Formaldehydfreies Desinfektionsmittel für thermolabile und -stabile Instrumente. Hervorragende Materialverträglichkeit

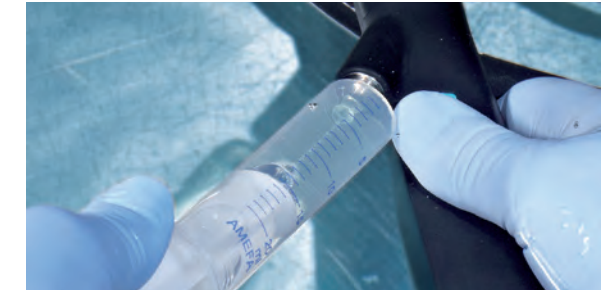

Charakteristik

- formaldehydfrei
- hervorragende Materialverträglichkeit
- Wirkungsspektrum inkl. Viruzidie
- angenehmer Geruch

Anwendung

Korsolex FF eignet sich zur manuellen Aufbereitung von thermolabilem und thermostabilem Instrumentarium (inkl. flexible Endoskope).

Handelsformen	Artikel-Nr.	PZN	Packungs-inhalt	VE Pack.*	
Korsolex® FF	Flasche	973 882	01267679	2 Liter	4
	Kanister	973 889	01267685	5 Liter	1

* Versand-Einheiten in Packungen

Korsolex® Endo-Cleaner



Reiniger für die chemo-thermische Endoskopaufbereitung

Charakteristik

- exzellente Reinigungswirksamkeit für Öl, Schmutz, Blut und Biofilm
- hohe Materialverträglichkeit für Maschinen und Endoskope
- schaumarm
- phosphatfrei
- kompatibel mit Korsolex Endo-Disinfektant

Anwendung

Korsolex Endo-Cleaner ist ein Reiniger für die maschinelle Aufbereitung von flexiblen und starren Endoskopen. Das Produkt kann ebenfalls für die manuelle Reinigung von Endoskopen eingesetzt werden.



Handelsformen	Artikel-Nr.	PZN	Packungs-inhalt	VE Pack.*	
Korsolex® Endo-Cleaner	Kanister	972 020	07233598	5 Liter	1

* Versand-Einheiten in Packungen

Korsolex® Endo-Disinfektant

Desinfektionsmittel für die chemo-thermische Endoskopaufbereitung

Charakteristik

- hohe Materialverträglichkeit für Maschinen und Endoskope
- kompatibel mit unterschiedlichen Wasserqualitäten
- viruzid
- formaldehydfrei
- kompatibel mit Korsolex Endo-Cleaner



Anwendung

Korsolex Endo-Disinfektant wird für die maschinelle chemo-thermische Desinfektion von flexiblen und starren Endoskopen eingesetzt.



Handelsformen	Artikel-Nr.	PZN	Packungs-inhalt	VE Pack.*	
Korsolex® Endo-Disinfektant	Kanister	972 030	07233606	5 Liter	1

* Versand-Einheiten in Packungen

BODE Eurospender 2000



Anwendungsfreundlicher, geschlossener Armhebelspender aus hochwertigem Kunststoff

Charakteristik

- aus stabilem, belastbarem Kunststoff
- einfache und schnelle Befüllung
- einfache Bedienung und Reinigung
- 3 Dosiermengen von 0,5–1,5 ml je Hub einstellbar
- austauschbare Pumpe
- Lieferung inklusive Befestigungsmaterial und Montage-/Bedienungsanleitung

Anwendung

Zur Applikation von Hände-Desinfektionsmittel, Wasch- und Pflegelotion.



Handelsformen	Artikel-Nr.	PZN	Packungs-inhalt	VE Pack. *	
BODE Eurospender 2000, für 350/500 ml-Flaschen	974 680	07506240	1 Stück	1	
BODE Eurospender 2000, für 1000 ml-Flaschen	974 700	07506257	1 Stück	1	
Ersatzpumpe	350/500 ml	974 690	00788206	1 Stück	100
	1000 ml	974 710	00788198	1 Stück	100

* Versand-Einheiten in Packungen

BODE Eurospender 3000

Praktische Halterung aus belastbarem Kunststoff mit spezieller Dosierpumpe



Charakteristik

- aus stabilem, belastbarem Kunststoff
- einfache und schnelle Befüllung mit 350/500 ml BODE-Flaschen
- einfache Bedienung und Reinigung
- Dosiermenge ca. 1,5 bis 2,0 ml je Hub
- Lieferung inklusive spezieller Dosierpumpe, Befestigungsmaterial und Montage-/Bedienungsanleitung
- ohne Flasche

Anwendung

Zur Applikation von Hände-Desinfektionsmittel, Wasch- und Pflegelotion.



Handelsformen	Artikel-Nr.	PZN	Packungs-inhalt	VE Pack. *
BODE Eurospender 3000, für 350/500 ml-Flaschen	975 310	07346380	1 Stück	120

* Versand-Einheiten in Packungen

BODE Eurospender Vario



Armhebelspender aus hochwertigem Kunststoff

Charakteristik

- flexibel einsetzbarer, anwenderfreundlicher Dosierspender aus Kunststoff
- geeignet für 500 ml- oder 1 l-Flaschen
- einfacher Pumpenwechsel durch Frontentnahme
- leichte Montage
- einfacher und schneller Flaschenwechsel
- einfache Bedienung und Reinigung, Dosiermengen einstellbar auf ca. 1 bis 3 ml je Hub

Anwendung

Zur hygienischen Entnahme von Produkten zur Händedesinfektion, -reinigung und -pflege.



Handelsformen	Artikel-Nr.	PZN	Packungs-inhalt	VE Pack.*	
BODE Eurospender Vario, für 350/500 ml-Flaschen	981 287	03386916	1 Stück	1	
BODE Eurospender Vario, für 1000 ml-Flaschen	981 288	03386922	1 Stück	1	
Ersatzpumpe	350/500 ml	981 289	07068917	1 Stück	1
	1000 ml	981 290	07069006	1 Stück	1

* Versand-Einheiten in Packungen

BODE Eurospender 1 plus

Robuster Metallspender, der selbst stärkeren Belastungen standhält und hohen Hygieneanforderungen gerecht wird



Charakteristik

- einfacher Pumpenwechsel durch Frontentnahme
- zuverlässiger, robuster Metallspender
- mit langem Armhebel
- viele abnehmbare Teile komplett autoklavierbar
- alle marktüblichen Flaschen einsetzbar
- einfache Bedienung und Reinigung
- Dosiermengen einstellbar auf ca. 0,75 ml bis 1,5 ml je Hub
- Lieferung inklusive Befestigungsmaterial und Montage-/Bedienungsanleitung

Anwendung

Zur Applikation von Händedesinfektionsmittel, Wasch- und Pflegelotion.

Handelsformen	Artikel-Nr.	PZN	Packungs-inhalt	VE Pack.*	
BODE Eurospender 1 plus, für 350/500 ml-Flaschen	975 570	01669656	1 Stück	1	
BODE Eurospender 1 plus, für 1000 ml-Flaschen	975 572	01670211	1 Stück	1	
Ersatzpumpe	350/500 ml	975 575	01670228	1 Stück	2
	1000 ml	975 576	01796691	1 Stück	2
Einmalkunststoffpumpe	500 ml	981 385	10764135	1 Stück	2
	1000 ml	981 384	10763874	1 Stück	2

* Versand-Einheiten in Packungen

BODE X-Wipes Wandhalter



Wandhalter für BODE X-Wipes und Bacillol Wipes Spender

Charakteristik

- aus stabilem, belastbarem Edelstahl
- einfache Anbringung und Reinigung
- Lieferung inklusive Befestigungsmaterial und Montage-/Bedienungsanleitung
- Lieferung ohne Flasche und Dosierpumpe
- an glatten Oberflächen auch für die Befestigung mit Powerstrips geeignet

Anwendung

Zur Befestigung des BODE X-Wipes und Bacillol Wipes Spender-Systems.



Handelsformen	Artikel-Nr.	PZN	Packungs-inhalt	VE Pack.*
Wandhalter für BODE X-Wipes und für Bacillol Wipes Spender	977 110	03539219	1 Stück	1

* Versand-Einheiten in Packungen

Dosier- und Applikationshilfen

Dosier- und Applikationshilfen für Desinfektionsmittel, Reinigungs- und Hautpflegemittel

Charakteristik

- erleichtern die Entnahme von Produkten
- ermöglichen das Be- und Umfüllen aus größeren Gebinden
- erlauben eine hygienische Produktentnahme
- ermöglichen die Erstellung von Gebrauchslösungen
- Vermeidung von Unter- und Überdosierung
- erleichtern die Benetzung schwer zugänglicher Flächen

Anwendung

Eine exakte Entnahme und Dosierung von Desinfektions-, Reinigungs- und Hautpflegemitteln wird erst mit dem Einsatz von Applikationshilfen erzielt. Die Dosier- und Applikationshilfen leisten damit einen wesentlichen Beitrag zum Hygieneerfolg sowie zur Anwendungssicherheit und Wirtschaftlichkeit von Produkten.



Handelsformen	Artikel-Nr.	PZN	Packungs-inhalt	VE Pack.*
Messbecher 250 ml	672 700	03650951	1 Stück	1
Universalsprühkopf für 500 ml und für 1 l BODE Flasche	815 870	02423584	1 Stück	1
Dosierpumpe mit Rückschlagventil für 350/500 ml BODE Flasche	975 330	02071961	1 Stück	200
Dosierpumpe mit Rückschlagventil für 1 l BODE Flasche	975 340	02072073	1 Stück	180

* Versand-Einheiten in Packungen

Desinfektionswannen



Anwenderfreundliche Desinfektionswannen als Zubehör für die manuelle Instrumentenaufbereitung

Charakteristik

- in verschiedenen Größen erhältlich
- eingearbeitete Griffmulden für eine sichere Handhabung
- praktischer Siebeinsatz

Anwendung

Die anwenderfreundlichen und hochwertigen Desinfektionswannen eignen sich für das sichere Ansetzen von Desinfektions- und Reinigungslösungen in der manuellen Instrumentenaufbereitung.

Technische Daten

3 Liter-Wanne (Deckel mit Schlitz)	(L x B x H)	300 x 200 x 110 mm
5 Liter-Wanne	(L x B x H)	550 x 200 x 120 mm
10 Liter-Wanne	(L x B x H)	390 x 290 x 170 mm
30 Liter-Wanne (inkl. Ablaufhahn)	(L x B x H)	615 x 400 x 220 mm



Handelsformen	Artikel-Nr.	PZN	Packungs-inhalt	VE Pack.*
Desinfektionswannen	3-Liter-Wanne	882 960	03083647	1 Stück
	5-Liter-Wanne	882 860	02423578	1 Stück
	10-Liter-Wanne	882 940	03655345	1 Stück
	30-Liter-Wanne	882 970	03655351	1 Stück

* Versand-Einheiten in Packungen

BODE Dip Slides Combi

Nährmedien zum einfachen Nachweis von aeroben Bakterien, Pilzen und Hefen



Charakteristik

- zur hausinternen Überprüfung des Hygienestatus
- 2-Kammer-System für den getrennten Nachweis von aeroben Bakterien sowie Pilzen und Hefen
- einfache Handhabung

Anwendung

Zur Bestimmung der Gesamtkeimzahl in flüssigen Medien und auf Flächen.



Handelsformen	Artikel-Nr.	PZN	Packungs-inhalt	VE Pack.*
BODE Dip Slides Combi	900 130	03930811	2x10 Röhren	1

* Versand-Einheiten in Packungen

Pflichttexte für Arzneimittel gemäß Heilmittelwerbegesetz (HWG)

Cutasept F: **Wirkstoff:** Propan-2-ol. **Zusammensetzung:** 100 g Lösung enthalten: **Wirkstoff:** Propan-2-ol 63,0 g, entspricht 72 Vol. %. **Sonstige Bestandteile:** Benzalkoniumchlorid, Gereinigtes Wasser. **Anwendungsgebiete:** Hautdesinfektion vor Punktionen, Injektionen und operativen Eingriffen. Chirurgische und hygienische Händedesinfektion. **Gegenanzeigen:** Nicht in unmittelbarer Nähe der Augen anwenden. Unverträglichkeit gegenüber Inhaltsstoffen. Bei sachgemäßem Gebrauch kann Cutasept F während der Schwangerschaft und Stillzeit verwendet werden. **Nebenwirkungen:** Leichte, diffuse Hautreizungen sind häufig. Kontaktallergische Reaktionen können auftreten. **Warnhinweise:** Für die Behandlung von Säuglingen und Kleinkindern liegen keine ausreichenden Erfahrungen vor. Die Anwendung darf in diesen Fällen nur nach besonders strenger Indikationsstellung und unter ärztlicher Aufsicht erfolgen. Benzalkoniumchlorid kann Hautreizungen hervorrufen. Keine Hautbenetzung unter Blutleeremanschetten. Bei Inzisionsfolien vollständige Auftrocknung abwarten. Erst nach Auftrocknung elektrische Geräte benutzen. Ansammlungen auf Patientenliegefläche vermeiden. Nicht in Kontakt mit offenen Flammen bringen. Von Zündquellen fernhalten. Bei bestimmungsgemäßer Verwendung des Präparates ist mit Brand- und Explosionsgefahren nicht zu rechnen. Bei Kontakt der Lösung mit den Augen sollten die geöffneten Augen für einige Minuten mit fließendem Wasser gewaschen werden. Nach Verschütten des Desinfektionsmittels sind folgende Maßnahmen zu treffen: Sofortiges Aufnehmen der Flüssigkeit, Verdünnen mit viel Wasser, Lüften des Raumes sowie das Beseitigen von Zündquellen. Flammpunkt nach DIN 51755: 21 °C. Entzündlich. Ein etwaiges Umfüllen darf nur unter aseptischen Bedingungen (Sterilbank) erfolgen.

Cutasept G: **Wirkstoff:** Propan-2-ol. **Zusammensetzung:** 100 g Lösung enthalten: **Wirkstoff:** Propan-2-ol 63,0 g, entspricht 72 Vol. %. **Sonstige Bestandteile:** Benzalkoniumchlorid, Gereinigtes Wasser, Gelborange S (E 110), Chinolingelb (E 104), Brillantschwarz (E 151). **Anwendungsgebiete:** Hautdesinfektion vor Punktionen, Injektionen und operativen Eingriffen. **Gegenanzeigen:** Nicht in unmittelbarer Nähe der Augen anwenden. Unverträglichkeit gegenüber Inhaltsstoffen. Bei sachgemäßem Gebrauch kann Cutasept G während der Schwangerschaft und Stillzeit verwendet werden. **Nebenwirkungen:** Leichte, diffuse Hautreizungen sind selten. Kontaktallergische Reaktionen können auftreten. **Warnhinweise:** Für die Behandlung von Säuglingen und Kleinkindern liegen keine ausreichenden Erfahrungen vor. Die Anwendung darf in diesen Fällen nur nach besonders strenger Indikationsstellung und unter ärztlicher Aufsicht erfolgen. Benzalkoniumchlorid kann Hautreizungen hervorrufen. Keine Hautbenetzung unter Blutleeremanschetten. Bei Inzisionsfolien vollständige Auftrocknung abwarten. Erst nach Auftrocknung elektrische Geräte benutzen. Ansammlungen auf Patientenliegefläche vermeiden. Nicht in Kontakt mit offenen Flammen bringen. Von Zündquellen fernhalten. Bei bestimmungsgemäßer Verwendung des Präparates ist mit Brand- und Explosionsgefahren nicht zu rechnen. Nach Verschütten des Desinfektionsmittels sind folgende Maßnahmen zu treffen: Sofortiges Aufnehmen der Flüssigkeit, Verdünnen mit viel Wasser, Lüften des Raumes sowie das Beseitigen von Zündquellen. Flammpunkt nach DIN 51755: 21,5 °C. Entzündlich. Ein etwaiges Umfüllen darf nur unter aseptischen Bedingungen (Sterilbank) erfolgen.

Sterillium: **Wirkstoffe:** Propan-2-ol, Propan-1-ol, Mecetroniumetilsulfat. **Zusammensetzung:** 100 g Lösung enthalten: **Wirkstoffe:** Propan-2-ol 45,0 g, Propan-1-ol 30,0 g, Mecetroniumetilsulfat 0,2 g. **Sonstige Bestandteile:** Glycerol 85 %, Tetradecan-1-ol, Duftstoffe, Patentblau V 85 %, Gereinigtes Wasser. **Anwendungsgebiete:** Zur hygienischen und chirurgischen Händedesinfektion. Zur Hautdesinfektion vor Injektionen und Punktionen.

Gegenanzeigen: Für die Desinfektion von Schleimhäuten nicht geeignet. Nicht in unmittelbarer Nähe der Augen oder offener Wunden anwenden. Überempfindlichkeit (Allergie) gegen einen der Inhaltsstoffe. **Nebenwirkungen:** Gelegentlich kann eine leichte Trockenheit oder Reizung der Haut auftreten. In solchen Fällen wird empfohlen, die allgemeine Hautpflege zu intensivieren. **Warnhinweise:** Sterillium soll nicht bei Neu- und Frühgeborenen angewendet werden. Erst nach Auftrocknung elektrische Geräte benutzen. Nicht in Kontakt mit offenen Flammen bringen. Auch nicht in der Nähe von Zündquellen verwenden. Flammpunkt 23 °C, entzündlich. Bei bestimmungsgemäßer Verwendung des Präparates ist mit Brand- und Explosionsgefahren nicht zu rechnen. Nach Verschütten des Desinfektionsmittels sind folgende Maßnahmen zu treffen: sofortiges Aufnehmen der Flüssigkeit, Verdünnen mit viel Wasser, Lüften des Raumes sowie das Beseitigen von Zündquellen. Nicht rauchen. Im Brandfall mit Wasser, Löschpulver, Schaum oder CO₂ löschen. Ein etwaiges Umfüllen darf nur unter aseptischen Bedingungen (Sterilbank) erfolgen.

Sterillium classic pure: **Wirkstoffe:** Propan-2-ol, Propan-1-ol, Mecetroniumetilsulfat. **Zusammensetzung:** 100 g Lösung enthalten: **Wirkstoffe:** Propan-2-ol 45,0 g, Propan-1-ol 30,0 g, Mecetroniumetilsulfat 0,2 g. **Sonstige Bestandteile:** Glycerol 85 %, Tetradecan-1-ol, Gereinigtes Wasser. **Anwendungsgebiete:** Zur hygienischen und chirurgischen Händedesinfektion. Zur Hautdesinfektion vor Injektionen und Punktionen. **Gegenanzeigen:** Für die Desinfektion von Schleimhäuten nicht geeignet. Nicht in unmittelbarer Nähe der Augen oder offener Wunden anwenden. Überempfindlichkeit (Allergie) gegen einen der Wirkstoffe oder der sonstigen Bestandteile. **Nebenwirkungen:** Gelegentlich kann eine leichte Trockenheit oder Reizung der Haut auftreten. In solchen Fällen wird empfohlen, die allgemeine Hautpflege zu intensivieren. **Warnhinweise:** Die Händedesinfektion dient der gezielten Vermeidung einer Infektionsübertragung z. B. in der Krankenpflege. Sterillium classic pure soll nicht bei Neu- und Frühgeborenen angewendet werden. Die Anwendung bei Säuglingen und Kleinkindern soll erst nach ärztlicher Rücksprache erfolgen. Ein Kontakt der Lösung mit den Augen muss vermieden werden. Wenn die Augen mit der Lösung in Berührung gekommen sind, sind sie bei geöffnetem Lidspalt mehrere Minuten mit fließendem Wasser zu spülen. Ein Umfüllen von einem Behältnis in ein anderes soll vermieden werden um eine Kontamination der Lösung zu vermeiden. Wenn Umfüllen unvermeidbar ist, darf es nur unter aseptischen Bedingungen (z. B. Benutzung von sterilen Behältnissen unter Laminar Air Flow) erfolgen. Erst nach Auftrocknung elektrische Geräte benutzen. Nicht in Kontakt mit offenen Flammen bringen. Auch nicht in der Nähe von Zündquellen verwenden. Flammpunkt 23 °C, entzündlich. Bei bestimmungsgemäßer Verwendung des Präparates ist mit Brand- und Explosionsgefahren nicht zu rechnen. Nach Verschütten des Desinfektionsmittels sind folgende Maßnahmen zu treffen: sofortiges Aufnehmen der Flüssigkeit, Verdünnen mit viel Wasser, Lüften des Raumes sowie das Beseitigen von Zündquellen. Nicht rauchen. Im Brandfall mit Wasser, Löschpulver, Schaum oder CO₂ löschen.

Sterillium med: **Wirkstoff:** Ethanol. **Zusammensetzung:** 100 g Lösung enthalten: **Wirkstoff:** Ethanol 99 % 85,0 g. **Sonstige Bestandteile:** Butan-2-on, 1-Propanol (Ph. Eur.), Tetradecan-1-ol, Glycerol 85 %, Gereinigtes Wasser. **Anwendungsgebiete:** Zur hygienischen und chirurgischen Händedesinfektion. **Gegenanzeigen:** Nicht in unmittelbarer Nähe der Augen oder offener Wunden anwenden. Hinweis: Bei Kontakt der Lösung mit den Augen sollten die geöffneten Augen für einige Minuten mit fließendem Wasser gewaschen werden. Nicht bei Überempfindlichkeit (Allergie) gegen den Wirkstoff oder einen der sonstigen

Bestandteile anwenden. **Nebenwirkungen:** Gelegentlich kann eine leichte Trockenheit oder Reizung der Haut auftreten. In solchen Fällen wird empfohlen, die allgemeine Hautpflege zu intensivieren. Allergische Reaktionen sind selten. **Warnhinweise:** Nur äußerlich anwenden. Aufgrund des Gehaltes an Alkohol kann häufige Anwendung des Arzneimittels auf der Haut Reizungen oder Entzündungen verursachen. Nicht in Kontakt mit offenen Flammen bringen. Von Zündquellen fernhalten – nicht rauchen. Flammpunkt nach DIN 51755: ca. 16 °C, leichtentzündlich. Bei bestimmungsgemäßer Verwendung des Präparates ist mit Brand- und Explosionsgefahren nicht zu rechnen. Nach Verschütten des Desinfektionsmittels sind folgende Maßnahmen zu treffen: sofortiges Aufnehmen der Flüssigkeit, Verdünnen mit viel Wasser, Lüften des Raumes sowie das Beseitigen von Zündquellen. Im Brandfall mit Wasser, Löschpulver, Schaum oder CO₂ löschen. Ein etwaiges Umfüllen darf nur unter aseptischen Bedingungen (Sterilbank) erfolgen.

Sterillium Tissue: **Wirkstoffe:** 2-Propanol (Ph. Eur.), 1-Propanol (Ph. Eur.), Mecetroniumetilsulfat. **Zusammensetzung:** 1 Feuchttuch aus Vlies enthält: **Wirkstoffe:** Propan-2-ol 1.341 mg, Propan-1-ol 894 mg, Mecetroniumetilsulfat 5,96 mg. **Sonstige Bestandteile:** Tetradecan-1-ol, Glycerol 85 %, Duftstoffe, Gereinigtes Wasser. **Anwendungsgebiete:** Zur hygienischen Händedesinfektion, zur Hautdesinfektion vor Injektionen und Punktionen auf talgdrüsenarmer Haut. **Gegenanzeigen:** Sterillium Tissue darf nicht angewendet werden, wenn eine Überempfindlichkeit (Allergie) gegen 2-Propanol (Ph. Eur.), 1-Propanol (Ph. Eur.), Mecetroniumetilsulfat oder einen der sonstigen Bestandteile besteht, in der unmittelbaren Nähe der Augen oder offener Wunden, bei Früh- und Neugeborenen, zur Desinfektion von Schleimhäuten. **Nebenwirkungen:** Gelegentlich kann eine leichte Trockenheit oder Reizung der Haut auftreten. In solchen Fällen wird empfohlen, die allgemeine Hautpflege zu intensivieren. Allergische Reaktionen sind selten. **Warnhinweise:** Anwendung bei Säuglingen und Kleinkindern erst nach ärztlicher Rücksprache. Berührung mit den Augen vermeiden. Bei Berührung mit den Augen sofort bei geöffnetem Lidspalt mehrere Minuten mit fließendem Wasser spülen. Elektrische Geräte erst verwenden, wenn das Mittel getrocknet ist. Von offenen Flammen fernhalten. Nicht in der Nähe von Zündquellen verwenden. Flammpunkt 23,5 °C, entzündlich. Im Brandfall mit Wasser, Feuerlöscher, Schaum oder CO₂ löschen.

Sterillium Virugard: **Wirkstoff:** Ethanol. **Zusammensetzung:** 100 g Lösung enthalten: **Wirkstoff:** Ethanol 99 % 95,0 g. **Sonstige Bestandteile:** Butan-2-on, Glycerol, Tetradecan-1-ol, Benzin. **Anwendungsgebiete:** Hygienische und chirurgische Händedesinfektion. **Gegenanzeigen:** Nicht auf Schleimhäuten anwenden. Nicht in unmittelbarer Nähe der Augen oder offener Wunden anwenden. Überempfindlichkeit gegen Inhaltsstoffe. **Nebenwirkungen:** Selten treten leichte, diffuse Hautirritationen oder allergische Reaktionen auf. In solchen Fällen wird empfohlen, die allgemeine Hautpflege zu intensivieren. **Warnhinweise:** Nicht in Kontakt mit offenen Flammen bringen. Nicht in der Nähe von Zündquellen verwenden. Flasche nach Gebrauch verschließen. Flammpunkt nach DIN 51755: 0 °C. Leicht entzündlich. Elektrostatische Aufladung vermeiden. Mit alkoholnassen Händen nichts berühren. Nach Verschütten des Desinfektionsmittels sind folgende Maßnahmen zu treffen: Sofortiges Aufnehmen der Flüssigkeit, Verdünnen mit viel Wasser, Lüften des Raumes sowie das Beseitigen von Zündquellen. Nicht rauchen. Ein etwaiges Umfüllen darf nur unter aseptischen Bedingungen (Sterilbank) erfolgen.

BODE Chemie GmbH
Melanchthonstraße 27, 22525 Hamburg
Telefon 040/54006-0, Telefax 040/54006-200
www.bode-chemie.de, info@bode-chemie.de

A

Abdecklaken	147
Abdecktücher	176, 177
Alginate-Kompressen	17
Abwurfbeutel	164
Alkohol-Tupfer	61
Antimikrobielle Körperwaschung	208-211
Anplikationshilfen für BODE-Gebinde	245
Atrauman®	23
Atrauman® Ag	23
Atrauman® Silicone	22
Augenkompressen	40

B

Bacillo® 30 Foam	215
Bacillo® 30 Tissues	219
Bacillo® AF	214
Bacillo® AF Tissues	218
Bacillo® Tissues	216
Bacillo® Wipes	217
Baktolan® balm	203
Baktolan® balm pure	204
Baktolan® lotion	201
Baktolan® lotion pure	202
Baktolan® protect	199
Baktolan® protect+ pure	200
Baktolan® vital	213
Baktolin® pure	206
Baktolin® sensitive	205
Baumwollhandschuhe	158
Bettscutzeinlagen	141-143
Binden	50-55, 70-82, 90, 91
Blasenpflaster	92, 93
Blutdruckmessgeräte	106-112
Bodedex® forte	230
Bodedex® zyme	231
BODE Dip Slides Combi	247
BODE Eurospender 1 plus	243
BODE Eurospender 2000	240
BODE Eurospender 3000	241
BODE Eurospender Vario	242
BODE X-Wipes	227
BODE X-Wipes Safety Pack	228
BODE X-Wipes Wandhalter	244
Bomix® plus	232
Branolind®	26
Brandwundenpflaster	90-93
Brillen	181

C

Celluron®	67
Cosmopor® Advance	29
Cosmopor® Antibacterial	30
Cosmopor® I.V.	46
Cosmopor® Steril	31
Cosmopor® Strip	32
Cosmopor® Waterproof	34
Coverflex®	59
Coverflex®	59
Cutasept® feet	212
Cutasept® F	207
Cutasept® G	208

D

Dauerelastische Binden	74-76, 78, 79
Dental-Watterollen	67
DermaPlast® Erste-Hilfe-Sets	96
DermaPlast® MEDICAL	90, 91
DermaPlast® ProtectSpray®	95
DermaPlast® Wundpflaster	33, 94
DermaPlast® Wundpflaster Hydro	92, 93
Desinfektion Flächen	214-229
Desinfektion Haut	194-198
Desinfektion Instrumente	230-239
Desinfektionswannen	246
Digital-Blutdruckmessgeräte	106-112
Digital-Fieberthermometer	113-117
Dismofix® G	229
Dismozon® plus	223
Dosiergeräte und Zubehör BODE	240-247
Durchblutungsfördernde Mittel	168, 169, 213

E

Einmal-Handschuhe	90, 91, 149-157, 182-188
Einmal-Krankenunterlagen	141, 142
Einmal-Lätzchen	145
Einmal-Mund- und Nasenmasken	180
Einmal-OP-Abdecktücher	176, 177
Einmal-OP-Bekleidung	178-181
Einmal-OP-Handschuhe	182-188
Einmal-OP-Hauben	179
Einmal-OP-Lochtücher	177
Einmal-OP-Masken	180
Einmal-Schürzen	146, 178
Einmal-Schutzlaken	147
Einmal-Servietten	145
Einmal-Untersuchungs-Handschuhe	149-157
Einmal-Waschhandschuhe	144, 211
Einziehdecken	146
Elastische Binden	50-52, 54, 55, 70-79, 90, 91
Electronic-Fieberthermometer	113-117
Erste-Hilfe-Artikel	90-96
Erste-Hilfe-Verbandtaschen	96
ES-Kompressen	37
Eycopad®	40

F

Fadenmesser	165
Fadenzieh-Sets	161
Feuchtpflegetücher	166, 167
Fieberblasen-Pflaster	92, 93
Fieberthermometer	113-117
Fil-Zellin®	41
Fingerpflaster	94
Fixierbinden und -verbände	43-60, 90, 91
Fixierfolien	36, 44, 90, 91
Fixierhöschen	131
Fixierpflaster	43-49, 90, 91
Fixiervlies	43, 90, 91
Flächendesinfektion und -reinigung	214-229
Folienhandschuhe	157
Foliodrape® Protect Abdecktücher	176
Foliodrape® Protect Lochtücher	177
Foliodress® Cap Comfort Universal	179
Foliodress® Eye Protect	181
Foliodress® Mask Comfort	180
Foliodress® S	178
Fußpflege	212

G

Gehörgangtupfer	63
Geräte und Applikationshilfen BODE	240-247
Grassolind®	25

H

Haarshampoo	166, 167
Händedesinfektion	194-198
Handcreme	168, 169, 199-204
Handschuhe	90, 91, 149-158, 182-188
Handtuch-Wandbehälter	144
Handtücher	144
HARTMANN Holzmundspatel	162
HARTMANN Idealbinden	77
HARTMANN Tamponadebinden	65
HARTMANN Verbandklammern	83
HARTMANN Verbandmull ZZ	41
HARTMANN Verbandwatte	68
HARTMANN Watte	68
Hautantiseptik	207, 208
Hautcreme	168-171, 199-204
Hautdesinfektion	207, 208
Hautfluidgel	168, 169, 213
Hautöl	168-171
Hautpflegeprodukte	166-171, 194-206, 209-213
Hautprotector	170, 171
Hautreinigungsprodukte	166, 167, 205-211
Hautreinigungstücher	166, 198
Hautschutzprodukte	170, 171, 199-204
Heftpflaster	48
Höschenwindeln	132-137
Holzmundspatel	162
Hühneraugenpflaster	92, 93
Hydroaktive Pflaster	90-93
Hydroaktive Wundauflagen	14-19, 24
Hydroaktives Gel	19
HydroClean® plus	14
Hydrocoll®	16
Hydrofilm®	36
Hydrofilm® Plus	35
Hydrofilm® I.V.	45
Hydrofilm® roll	44
Hydrogel-Pflaster	90-93
Hydrogel-Wundverband	15, 18, 19
Hydrokolloid-Pflaster	90-93
Hydrokolloid-Wundverband	16, 24
Hydrosorb®	18
Hydrosorb® Gel	19
HydroTac®	15
Hydrotüll®	24

I

Idealast®	78
Idealast®-haft	75
Idealast®-haft Color	76
Idealbinden	75-79
Idealflex®	79
Infrarot-Thermometer	113, 114
Injektionspflaster	33
Inkontinenzeinlagen und -vorlagen	122-130
Inkontinenzslips	132-140
Inkontinenzunterlagen	141-143
Instrumentendesinfektion und -reinigung	230-239

K

Kanülenfixierverbände	45, 46
Katheter-Sets	160
Kinderpflaster	94
Kochsalzlösung	90, 91
Körperpflege-Artikel	166-171, 194-206, 209-213
Kohäsive Binden	50, 51, 70, 73, 75, 76, 90, 91
Kohrsolin® extra	226
Kohrsolin® extra Tissues	222
Kohrsolin® FF	225
Kohrsolin® FF Tissues	221
Kompressionsbinden	70-74
Kopfkissen	146
Korsolex® basic	236
Korsolex® Endo-Cleaner	238
Korsolex® Endo-Disinfectant	239
Korsolex® extra	235
Korsolex® FF	237
Korsolex® med AF	234
Korsolex® plus	233
Krankenunterlagen	141-143
Kurzzugbinden	71-73, 75-79

L

Lätzchen	145
Langzugbinden	74
Lastodur®	74
Lastogrip®	58
Latex-Handschuhe	149, 182-186
Lochtücher	177

M

Medicomp®	38
Medicomp® drain	39
Menalind® professional care	168
Menalind® professional clean	166
Menalind® professional protect	170
MediSet® PEG/SBK	159
Mikrobac® forte	224
Mikrobac® Tissues	220
MoliCare Mobile®	140
MoliCare Premium Elastic	132
MoliCare Premium Slip	134
MoliCare Slip	136
MoliCare Slip maxi	137
MoliForm® Comfort	129
MoliForm® Premium soft	128
MoliForm® Premium soft for men	130
MoliMed® Comfort	123
MoliMed® for men	126
MoliMed® Premium	122
MoliMed® Premium pants active	138
MoliMed® Premium pants for men	139
MoliMed® SPORTIVE	124
MoliMed® Thin	125
MoliNea® pads	127
MoliNea® plus D Saugkissen	127
MoliPants®	131
MoliNea® Krankenunterlagen	141
Molinea® textile	143
Mull	41, 42
Mullbinden	53, 54
Mullkompressen	37, 39, 90, 91
Mullro®	42
Mulltupfer	62-64
Mund- und Nasenmasken	180
Mundpflegestäbchen	162
Mundspatel	162

N

Nährbodenträger	247
Netzhöschen	131
Netz- und Schlauchverbände	56-59
Nitril-Handschuhe	90, 91, 150-154

O

Omni Spulenpflaster	48
Omnifix® elastic	43
Omnistrip®	47
Omnitape®	49
OP-Abdecktücher	176, 177
OP-Bekleidung	178-181
OP-Handschuhe	182-188
OP-Hauben	179
OP-Masken	180

P

Pagalong®	63
Pagasling®	62
Pagavit®	162
Peha® Abwurfbeutel	164
Peha® crepp®	52
Peha® Fadenmesser	165
Peha® Fadenzieh-Set	161
Peha® fol®	157
Peha® fresh	148
Peha® haft® Color latexfrei	51
Peha® haft® latexfrei	50
Peha®-isoprene latexfrei	186
Peha® Katheter-Sets	160
Peha® last®	54
Peha®-Lastotel®	55
Peha®-micron latex	182
Peha®-Mullbinden	53
Peha®-neon latexfrei	187
Peha®-profile latex	183
Peha® Schlitzkompressen	39
Peha-soft® nitrile guard powderfree	150
Peha-soft® nitrile sterile powderfree	151
Peha-soft® nitrile fino powderfree	152
Peha-soft® nitrile white powderfree	153
Peha-soft® nitrile powderfree	154
Peha-soft® powderfree	149
Peha-soft® syntax powderfree	155
Peha-soft® vinyl powderfree	156
Peha®-underglove latex	185
Peha®-underglove latexfrei	188
Peha-tex®	158
Peha-taft® latex	184
Pehazell®	69
PermaFoam®	20
Pflaster	29-36, 43-49, 90-95
Pflasterband	49
Pflasterspray	95
Pflege-Sets PEG/SBK	159
Polsterbinden	82
Post-OP-Stützverbände	60
Post-OP-Verbände	29-36
Präpariertupfer	64
PütterFlex	72
Pütter-haft	73
PütterPro 2	70
Pütter-Verband®	71
Pur-Zellin®	61

R

Raumspray	148
Rolta® soft	82
Röntgenkontrast-Tupfer	64

S

Salbenkompressen	23-26, 90, 91
Salbentamponaden	65
Samu-med®	66
Saugeinlagen und -vorlagen	122-130
Schaumstoffkompressen	15, 20, 21
Schlauchverbände	56-59
Schlinggazetupfer	62
Schlitzkompressen	39
Schürfwundenpflaster	90-93
Schürzen	146, 178
Schutzbrillen	181
Schutzhauben	179
Schutzkittel	146, 178
Schutzlätzchen	145
Schutzlaken	147
Schutzmasken	180
Schutzunterlagen	141-143, 147
Selbsttest Allergie-Erkennung	98
Selbsttest Cholesterin	103
Selbsttest Darm-Vorsorge	105
Selbsttest Eisenmangel	100
Selbsttest Gluten-Intoleranz	97
Selbsttest Harnwegsentzündung	99
Selbsttest Magen-Vorsorge	104
Selbsttest Schwangerschaft	101
Selbsttest Zeugungsfähigkeit	102
Servietten	145
SicSac®	148
Silberkompressen	23, 90, 91
Silikon-Wundauflagen	22
Soft-Zellin®	61
Sorbalgon®	17
Speichelrollen	67
Spitztupfer	63
Sprühpflaster	95
Spuckbeutel	148
Stellisept® med	209
Stellisept® med foam	210
Stellisept® med gloves	211
Sterile Fixierfolien	36
Sterile Handschuhe	151, 182-188
Sterile Mullkompressen	37, 39, 90, 91
Sterile OP-Abdecktücher	176, 177
Sterile Tamponaden	17, 65, 66
Sterile Tampons	66
Sterile Tupfer	61, 62
Sterile Wattestäbchen	163
Sterile Wundnahtstreifen	47, 90, 91
Sterile Wundpflaster	29-32, 34-36, 90-93
Sterillium®	194
Sterillium® classic pure	195
Sterillium® med	196
Sterillium® Tissue	198
Sterillium® Virugard	197
Stülpa®	56
Stülpa®-fix	57
Stülpverbände	56-59
Stützkissen	146
Synthetik-Wattebinden	82
Syspur-derm®	21

T

Tampograss®	65
Tamponadebinden	65
Tamponaden	17, 65-67
Tapeverbände	49
Telaprep®	64
Tensoval® comfort	108
Tensoval® comfort classic	111
Tensoval® comfort Zubehör	109
Tensoval® duo control	106
Tensoval® duo control Zubehör	107
Tensoval® mobil	112
Tensoval® mobil classic	112
Tensoval® Netzadapter	110
Therموال® baby	113
Therموال® duo scan	114
Therموال® kids	115
Therموال® kids flex	115
Therموال® rapid	116
Therموال® standard	117
Tupfer	61-64

U

Universalbinden	75-79
Untersuchungshandschuhe	149-158

V

Vala®Clean	144
Vala®Comfort	146
Vala®Fit	145
Vala®Protect	147
Varolast®	80
Varolast® Plus	81
Verba®	60
Verbandklammern	83
Verbandmull	41, 42
Verbandwatte	68
Verbandzellstoff	69
Veroval® Allergie-Erkennung	98
Veroval® Cholesterin	103
Veroval® Darm-Vorsorge	105
Veroval® Eisenmangel	100
Veroval® Gluten-Intoleranz	97
Veroval® Harnwegsentzündung	99
Veroval® Magen-Vorsorge	104
Veroval® Schwangerschaft	101
Veroval® Zeugungsfähigkeit	102
Vinylhandschuhe	155, 156
Vliesstoffkompressen	38, 39
Vliestuch-Spendersystem X-Wipes	227, 228

W

Waschhandschuhe	144
Waschhandschuhe antimikrobiell	211
Waschlotion	166, 167, 205, 206
Watte	68
Wattestäbchen	162, 163
Wattetampons	66
Weichschaumkompressen	15, 20, 21
Wöchnerinnenvorlagen	122, 123
Wundkontaktschicht	22-26, 90, 91
Wundnahtstreifen	47, 90, 91
Wundpflaster	29-36, 90-95
Wundreinigungslösung	90, 91

Z

Zahnwatterollen	67
Zellstoff	69
Zellstofftupfer	61
Zetuvit®	28
Zetuvit® Plus	27
Zinkleimbinden	80, 81
Zungenspatel	162
Zwirnhandschuhe	158



Gesundheit ist
unser Antrieb

PAUL HARTMANN AG
Paul-Hartmann-Straße 12
89522 Heidenheim
Postfach 14 20
89504 Heidenheim
Deutschland
Tel. + 49 (0) 7321-36-0
Fax + 49 (0) 7321-36-3636
E-Mail: info@hartmann.info

Besuchen Sie uns im Internet unter www.hartmann.de

Auf der HARTMANN-Website finden Sie neben dem aktuellen Sortiment und nützlichen Informationen auch ein umfassendes Serviceangebot.

Für Fragen zu unseren Produkten und weitere Informationen steht Ihnen unser Customer Care Center gerne zur Verfügung:

Tel. + 49 (0) 800-2-843647*
E-Mail: info@hartmann.info

In unserem Online-Shop können Sie rund um die Uhr bequem bestellen unter www.hartmann.de/shop

* kostenlos aus dem gesamten deutschen
Fest- und Mobilfunknetz.
Mo-Fr. 8.00-16.30 Uhr